




## **Como cargar la Lente Intraocular Liocan en el sistema de inyección suministrado**

1. Abra el cartucho y coloque viscoelástico tanto en la punta del cartucho como en la cámara de carga donde se alojará la LIO.

2. Con unas pinzas, agarre la LIO por la parte circular del portador en la que está sujeta, como se indica en la imagen de la derecha.



3. Coloque la LIO en la cámara de carga, sin girarla, tal y como se indica debajo. Tiene unas muescas (marcadas en rojo) como guía.

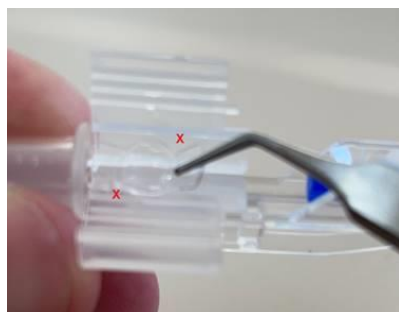

4. Con unas pinzas de puntas alargadas cerradas, presione suavemente sobre la LIO colocándola plana entre los raíles del cartucho, tal y como se indica en la imagen de debajo. Acto seguido, puede retirar las pinzas.



5. Cierre el cartucho y añada un poco más de viscoelástico en la parte posterior del cartucho.
6. Inyecte suavemente, sin parar, manteniendo las alas del cartucho cerrado hacia arriba. No gire el inyector durante la inyección.

Para información adicional, consulte el video en nuestro sitio web, cortesía de John S. Sapienza, Diplomado ACVO, Long Island Veterinary Specialists, Nueva York.

<http://www.ajlvvet.com/liocan-es>

*Esto es un anexo a las Instrucciones de Uso proporcionadas con la Lente Intraocular Liocan. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto. En su defecto, puede resultar en complicaciones con el paciente.*