

# PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DELL'IMPIANTO ROOTT C: dall'apertura della confezione all'inserimento dell'impianto


1 Prendi la confezione



2 Apri la scatola: spingi e tira per aprire




3 Estrai il blister

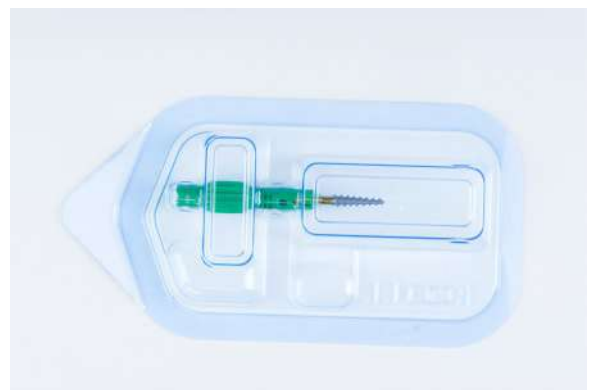

4 Apri il blister con attenzione



5 Estral l'impianto, tenendo solo la parte verde

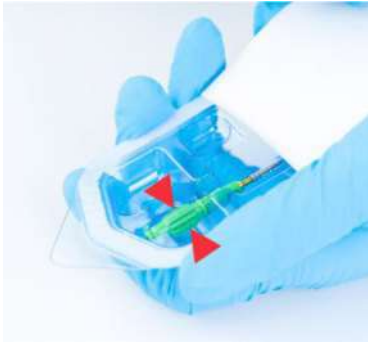


6 Tenendo il supporto verde, inserisci l' impianto all' interno del foro preparato in senso orario



Il supporto verde, progettato in due pezzi, non è concepito per essere utilizzato come driver per impianto

7 Rimuovere il supporto verde, muovendolo lentamente da un lato e dall' altro e, sollevare



- 8 Inserisci gli impianti con driver implantari  ITES/ITE/ITEL/ITEXL per cricchetto, TW50 con torques fino a 50 Ncm



Oppure driver da impianto ITEH/ITEHL per manipolo, utilizzando il contrangolo



Oppure driver per impianto ITEAO per connessione AO, utilizzando il manico ETAO



Torque di inserimento consigliato :

- dal diametro 3,0 mm non superare mai i 117 Ncm
- dal diametro 3,5 mm non superare mai i 133 Ncm
- dal diametro 4,5-5,0 mm non superare mai i 238 Ncm
- dal diametro 5,5 mm non superare ai i 298 Ncm


9 a) Inserimento dell' impianto in posizione crestale



b) Inserimento dell' impianto in posizione sottocrestale




10 Gli impianti ROOTT C possono essere piegati fino a 15° con un driver per abutment **C** Spingere in alto e piegare (evitare le forze verticali)

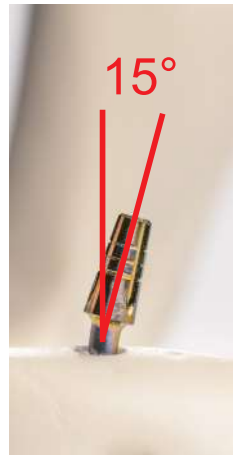

Solo i ROOTT C possono essere piegati.

Si raccomanda di piegare l' impianto ROOTT C su un osso di adeguata consistenza.

# 5 anni di eccellenti risultati clinici con gli impianti ROOTT

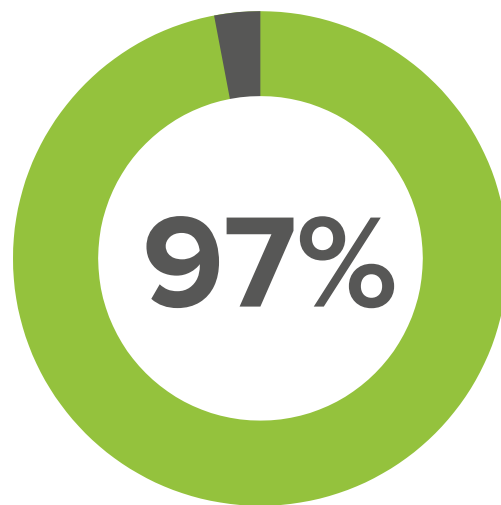

## Tasso medio di sopravvivenza

Lo studio di follow-up clinico post commercializzazione ha mostrato un tasso di sopravvivenza medio, dei sistemi implantari ROOTT, significativamente elevato, pari al 97,86%

Report del 24-05-2021

### **Elevati standard di qualità e sicurezza**

I dispositivi medici presenti in questo catalogo sono conformi alla vigente normativa UE.