

PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DELL'IMPIANTO ROOTT M/P: dall'apertura della confezione all'inserimento dell'impianto

1 Prendi la confezione



2 Apri la scatola: spingi e tira per aprire



3 Estrai il blister




4 Apri il blister con attenzione



5 Estrai l'impianto, tenendo solo la parte verde




6 Tenendo il supporto verde, inserisci l' impianto all' interno del foro preparato in senso orario

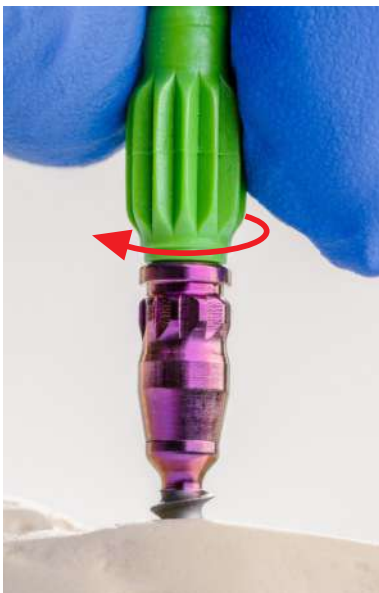

Il supporto verde, progettato in due parti, non è concepito per essere utilizzato come driver per impianto

7 Rimuovere il supporto verde, muovendolo lentamente da un lato e dall' altro e, sollevare

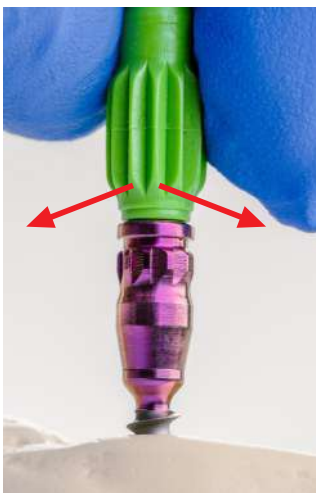

8 inserisci l'impianto tramite HFCM con driver per impianto HE **M P**

Utilizza il driver per impianto ITHES/ITHE/ITHEL/ITHEXL per cricchetto TW50 con torque fino a 50 Ncm



Oppure driver per impianto ITEAO per connessione AO, utilizzando il manico ETAO



Inserimento dell'impianto tramite parte portante HFCM : non superare mai i 93 Ncm

9 Svitare la vite SHFCM con cacciavite per driver impianto HE **M P** o con un cacciavite universale


Utilizzare il cacciavite per driver per impianto ITHES/ITHE/ITHEL/ITHEXL e rimuovere HFCM (con vite all'interno)




Oppure cacciavite SDH/
SDHL/SDHXL per manipolo
utilizzando il contrangolo



Oppure cacciavite SDAO
per connessione AO,
utilizzando il manico ETAO

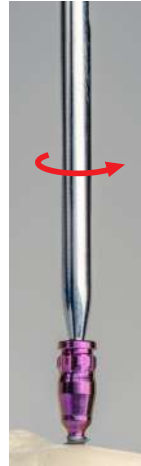

Rimuovi la vite e il supporto dell'impianto

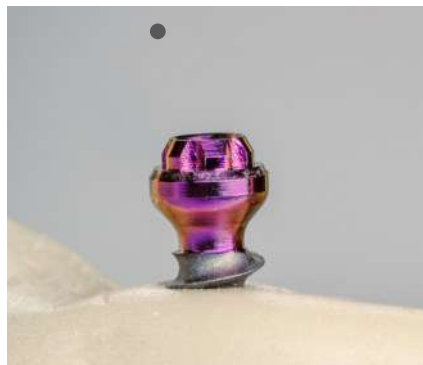

- 10 Inserire l'impianto tramite carico immediato con driver per impianto **MP**
ITM0/ITM10/ITM/ITML/ITMXL per cricchetto TW50 con torque fino
a 50 Ncm



L'inserimento dell'impianto tramite
carico immediato non deve mai
superare i 133 Ncm

11 Inserimento dell' impianto in posizione crestale

