

Primeros pasos con las toallitas para superficies Evaclean y las tabletas de limpieza/desinfección PurOne

▶ PASA 1

Llene 32 oz. botella con agua tibia hasta la línea de llenado, o justo debajo del cuello de la botella.

▶ PASA 2

Agregue una tableta de 13,1 g para crear una concentración de solución de 4306 ppm. Deje que se disuelva por completo.

▶ PASA 3

Vierta la solución sobre las toallitas secas en el recipiente.

▶ PASA 4

Vuelva a colocar la tapa y espere 5 minutos para que la solución sature completamente las toallitas.



Use tabletas PurOne de 13,1 g para preparar una solución de 1076 ppm.



x1

TOTAL = 32oz.



4306PPM



Wear gloves when handling tablets.
Use guantes al manipular las tabletas.