

UROGEN WELL D-ONE®




M. hominis

M. spp.

U. urealyticum / parvum

Growth Control

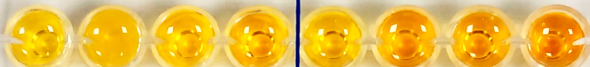

LEV
1

JOS
2

MFX
0,25


DOX
4

LEV
2

JOS
2

MFX
2

DOX
4

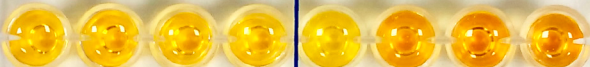

LEV
2

JOS
8

MFX
0,5


DOX
8

LEV
4

JOS
8

MFX
4

DOX
8

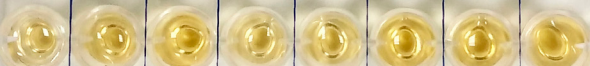

ID

ID

ID

ID

ID

CAN

Gv

Tv

Neisseria spp.

S. aureus

E. coli

Strepto B

Enterococci

¿Qué es el UROGEN WELL D-ONE?

Es un sistema de diagnóstico rápido diseñado para identificar una amplia variedad de microorganismos que causan infecciones del tracto urinario y uretritis.

¿Con cuáles muestras se utiliza?

- Exudado endocervical • Exudado vaginal
- Líquido seminal • Orina • Exudado uretral

¿Cómo funciona?

- **Cultivo selectivo:** Utiliza medios de cultivo especiales que favorecen el crecimiento de los microorganismos de interés y de difícil aislamiento.
- **Reacciones colorimétricas:** Los cambios de color en los pozos indican la presencia de un microorganismo específico o su resistencia a un antibiótico.
- **Facilidad de uso:** No requiere una preparación compleja de las muestras y los resultados se obtienen de manera relativamente rápida (18-48 horas).

¿Qué microorganismos detecta?

- **Bacterias:** - *Mycoplasma spp.* - *Ureaplasma urealyticum*
- *Neisseria spp.* - *Streptococcus grupo B* - *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus spp.* - *Escherichia coli* - *Gardnerella vaginalis*
 - **Hongos:** *Candida spp.*
- **Parásitos:** *Trichomonas vaginalis*

