



**ResMed**

Nuestra  
mascarilla  
más suave

Para obtener más  
información, diríjase a  
[ResMed.com/AirTouch](https://www.resmed.com/AirTouch)



**AirTouch™** F20



# Cuidado de la almohadilla AirTouch™ F20

Con la almohadilla de espuma con memoria UltraSoft™ de ResMed, usted experimentará una suavidad increíble con el mismo alto rendimiento que la silicona. Pero a diferencia de la silicona, mantener la espuma con memoria fresca requiere un cuidado totalmente diferente. Entonces, piense en su almohadilla de espuma con memoria como si fuera un cepillo de dientes. Reemplácela cuando comience a desgastarse o a deteriorarse.



Tírela cuando haya señales de deterioro.



Reemplácela cuando haya señales de deterioro.



Límpiala solo con toallitas sin alcohol.



Manténgala seca y alejada de los líquidos.



No la exponga a la luz solar directa.



No use productos o dispositivos de limpieza domésticos.



No use toallitas con alcohol.



No la sumerja en líquidos.



Para obtener información acerca de sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirTouch y UltraSoft son marcas y/o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio web ResMed.com/ip. La disponibilidad del producto varía en diferentes regiones. © 2018 ResMed. 10110074/2 2018-02.