


# Vorbereitung des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kits zur Selbstanwendung

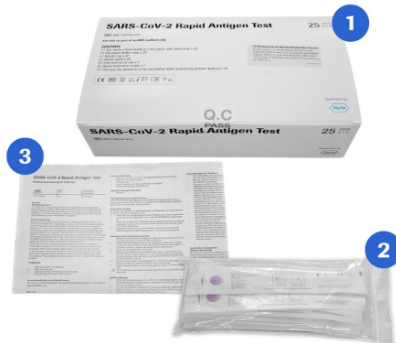

## 1. Überprüfen der Materialien

Stellen Sie sicher, dass Ihnen folgende Materialien vorliegen:

- ◆ (1) Eine Packung mit 25 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und dazugehörigen Verbrauchsmaterialien (Mat.-Nr. 09 327 592 190)
- ◆ (2) Eine Tüte mit 25 Nasen-Abstrichtupfern (Nasal Swabs), separat beiliegend
- ◆ (3) Eine Gebrauchsanweisung SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Gebrauchsanweisung für Patienten) (Mat.-Nr. 09 422 919 001), separat beiliegend

**Bitte überprüfen Sie, ob Ihnen diese Komponenten vorliegen.** Falls nicht, kontaktieren Sie bitte Ihre Apotheke/Ihren Lieferanten des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.




## 2. Öffnen der Packung und Entsorgen der folgenden Materialien

Öffnen Sie die Packung des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und entsorgen Sie

- ◆ (1) die Kurzanleitung (09 341 242 001),
- ◆ (2) die Gebrauchsanweisung (09 327 789 001) und
- ◆ (3) die beiliegenden Abstrichtupfer zum Nasen-Rachen-Abstrich\* zum SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.

\* diese können blau oder weiß/grau verpackt sein

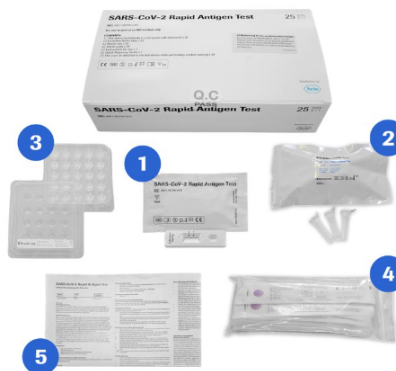

## 3. Aufnahme Nasen-Abstrichtupfer und Gebrauchsanweisung für Patienten in die Testpackung

Legen Sie nun die separat erhaltenen (4) Nasen-Abstrichtupfer (Nasal Swabs) sowie die separat erhaltene (5) Gebrauchsanweisung für Patienten (Mat.-Nr. 09 422 919 001) der Test-Packung bei.

### Die Testpackung enthält nun folgende Materialien:

- ◆ (1) Einzeln in Folienbeutel verpackte Teststreifen
- ◆ (2) Bereits vorgefüllte Röhrchen mit Extraktionspuffer
- ◆ (3) Spenderkappen
- ◆ (4) Tüte mit 25 Nasen-Abstrichtupfern (Nasal Swabs)
- ◆ (5) SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Gebrauchsanweisung für Patienten (Mat.-Nr. 09 422 919 001)

Sie können nun mit der Testvorbereitung beginnen. **Bitte lesen Sie hierzu sorgfältig die Gebrauchsanweisung für Patienten durch.**