


VIVUS CF4

Handleiding

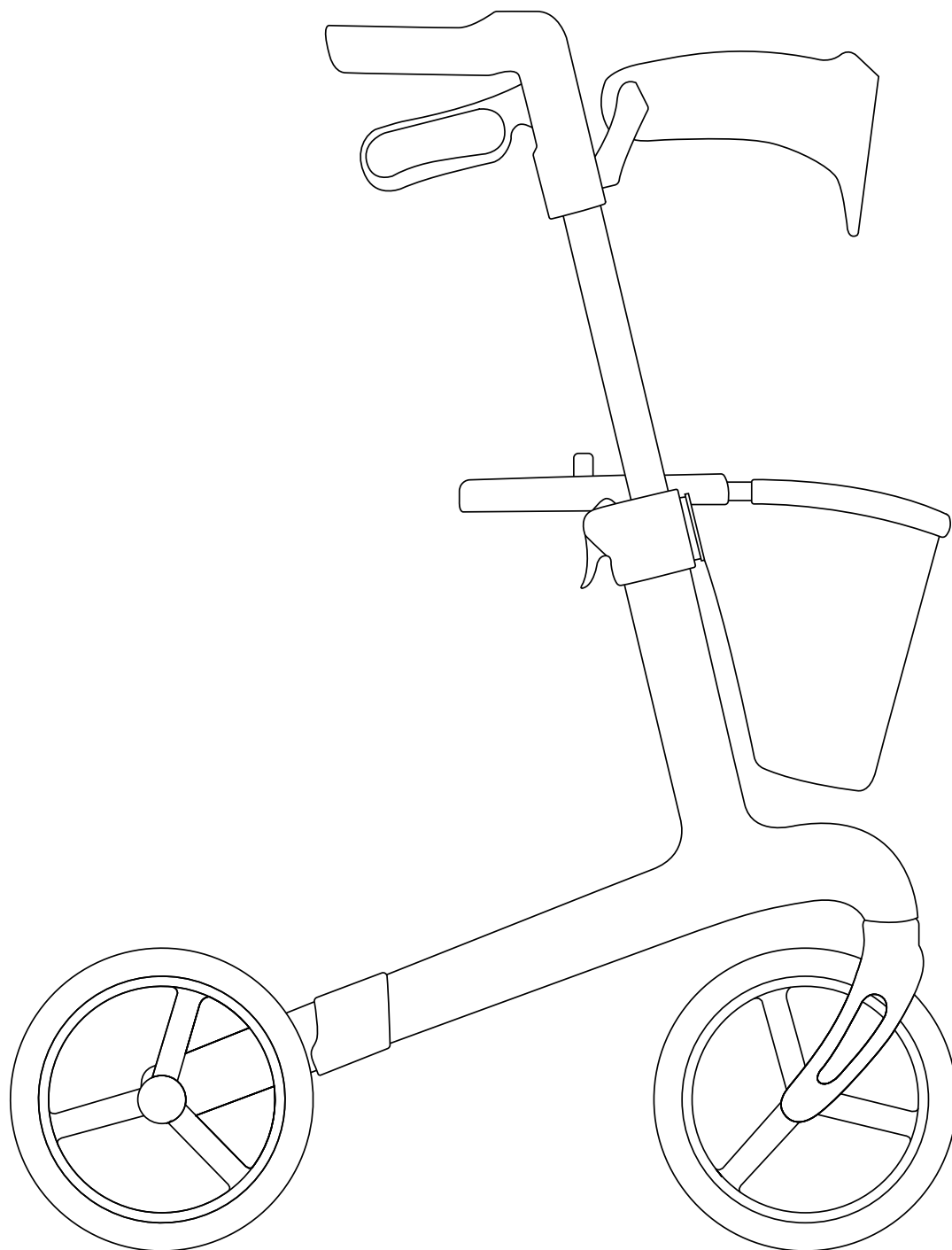

Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Vivus CF4 Rollator.


Uw nieuwe hulpmiddel is ontworpen voor vervoer binnens- en buitenshuis voor een persoon wiens vermogen om te lopen is beperkt, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het hulpmiddel veilig te bedienen.

We zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele en kwalitatief hoogwaardige producten en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen, we hopen van harte dat we dat bereiken en dat u plezier heeft van uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat heeft gekocht.

2. Uw rollator leren kennen

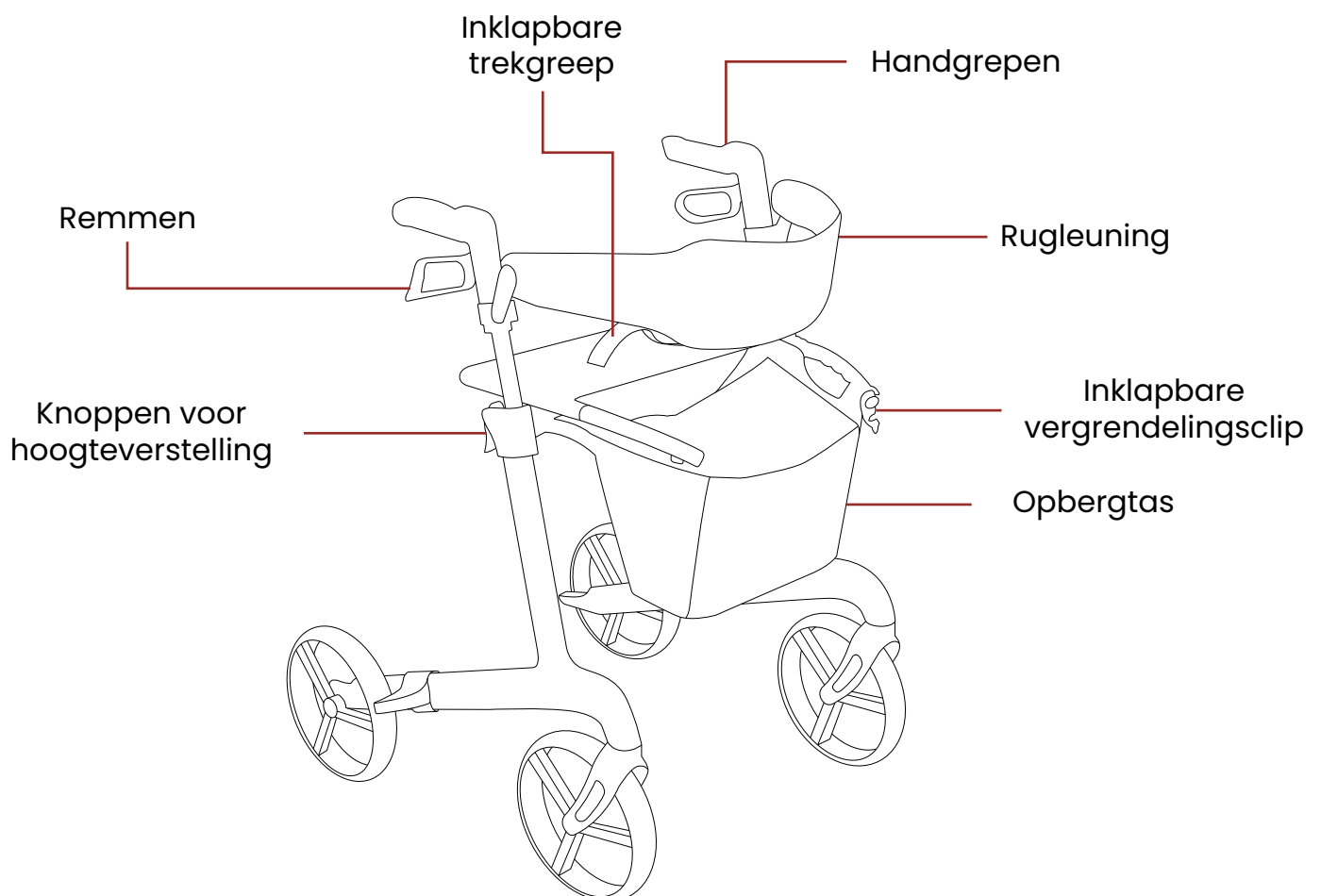

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het bedienen van elk ander apparaat, dient u zich alleen met volledige alertheid voort te bewegen om de veiligheid te garanderen. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel door onjuist gebruik van het apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, omdat dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichtstraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.
- We raden u ten zeerste af om sigaretten te roken wanneer u uw apparaat gebruikt. Als u besluit sigaretten te roken terwijl u uw apparaat gebruikt, moet u de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht nemen: laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van de stoelbekleding. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat je ze weggooit.
- Houd er rekening mee dat het wassen van gestoffeerde items de brandwerendheid van de stof kan verminderen.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Pas het apparaat niet aan. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door de toevoeging van accessoires aan uw apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Vergrendel de remmen op hellingen of afdalingen om te voorkomen dat het apparaat uit zichzelf ongecontroleerd gaat rollen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen verstrikt raken in de wielen.

4. Veilig monteren en demonteren

Zorg er altijd voor dat de remmen vergrendeld zijn om het apparaat veilig te kunnen monteren en demonteren. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt. Plaats het apparaat zo ver mogelijk naar achteren op de zitting, dit verkleint het risico dat je de zitting mist of valt.

De volledig juiste transfermethode varieert afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een transfer.

We raden je ook aan om je door iemand te laten helpen totdat je zeker weet dat je zelf veilig kunt overstappen.

5. Veilig verplaatsen

- Houd u altijd aan alle plaatselijke voetgangers- en verkeersregels. Wacht tot uw pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is raadzaam.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe het apparaat aanvoelt voordat je het bedient.
- Leer de gebieden kennen waar u van plan bent het apparaat te gebruiken. Kijk uit naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.

Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.

Let bij het bedienen van het apparaat altijd op het volgende:

Deuropeningen

Gebruik nooit de zijkanten van een deuropening om jezelf er doorheen te trekken. De veiligste manier is om loodrecht op de deur te staan met beide handen op de randen, zorg ervoor dat je aan beide kanten voldoende ruimte hebt en ga dan verder.

Leunen

Leun niet over de zijkant van je toestel. Wees altijd voorzichtig als je naar achteren leunt en zorg ervoor dat je volledige controle hebt als je je toestel ooit naar achteren kantelt.

Hellingen

Draai nooit op een helling om kantelen te voorkomen. Vermijd stoppen op een helling. Overschrijd de maximale veilige helling van het apparaat niet.

Stoepranden

Vraag waar mogelijk hulp van een begeleider bij het monteren van stoepranden. Vermijd harde stoten bij het afdalen van stoepranden.

Trappen

Gebruik altijd twee of meer assistenten. Kantel het apparaat naar het evenwichtspunt. Eén assistent (van achteren) houdt het apparaat tegen de eerste trede en tilt het veilig omhoog. De tweede assistent (vooraan) tilt vanaf een vast deel van het frame tot boven de traphoogte en houdt het vast terwijl de eerste assistent een trede omhoog gaat. Herhaal dit telkens één trede tot beide assistenten veilig de top van de trap bereiken.

6. Veilig transport

Let bij het vervoeren van uw apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik uw apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat altijd vast als het wordt vervoerd.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheidsdrempel overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Vouwen en ontvouwen

Inklappen

1. Ga achter het apparaat staan.
2. Til de rode hendel in het midden van de zitting omhoog.
3. Duw de twee hendels samen naar het midden.
4. Vergrendel het apparaat met de rode clip aan de voorkant van het apparaat.

Uitvouwen

1. Ontgrendel de rode clip aan de voorkant van het apparaat.
2. Trek de twee handgrepen uit elkaar.
3. Duw tegen de zijkanten van het zitje totdat het apparaat vastzit.

8. Aanpassing

De hoogte van de handgrepen aanpassen:

1. Schakel de remmen van het apparaat in.
2. Trek aan de verstelknop en houd deze ingedrukt.
3. Pas de hoogte van de handgrepen aan door omhoog en omlaag te gaan.
4. Laat de verstelknop los.
5. Duw de handgrepen omlaag om te controleren of ze vergrendeld zijn.
6. Stel de andere handgreep in op dezelfde hoogte.
7. Controleer of beide handgrepen even hoog zijn.

9. Veiligheidsgordel monteren en afstellen

Dit apparaat is niet uitgerust met een veiligheidsgordel.

10. Dagelijkse controles

Controleer de volgende punten voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Wielen

- Controleer of de banden van je apparaat geen scheuren of vervormingen vertonen.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit uw toestel komen

Stoel

- Controleer of er geen ongewone bewegingen zijn
- Controleer of de bekleding niet overmatig versleten is

Remmen

- Controleer of de remmen de rolstoel stoppen wanneer deze vergrendeld is
- Controleer of de remhendels ongehinderd kunnen bewegen en remmen wanneer eraan getrokken wordt.

11. Reiniging, onderhoud en afvoer

Reinigen

Gebruik een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Gebruik geen slang, straal of spatwater direct op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken

Onderhoud

Zorg ervoor dat uw apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om het apparaat weg te gooien bij een erkend bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht.

12. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die u ontvangt of om een claim in te dienen kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u het product heeft gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Intco Medical (HK) Co., Ltd

Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong, China



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

13. Specificaties

Totaal gewicht	6.6 kg
Maximaal gewicht	130 kg
Breedte Zitting	41.5 cm
Zithoogte	55 / 64 cm
Wielen	23 cm

Motion

www.motionhealthcare.nl

085-2129445