


eLite

Handleiding

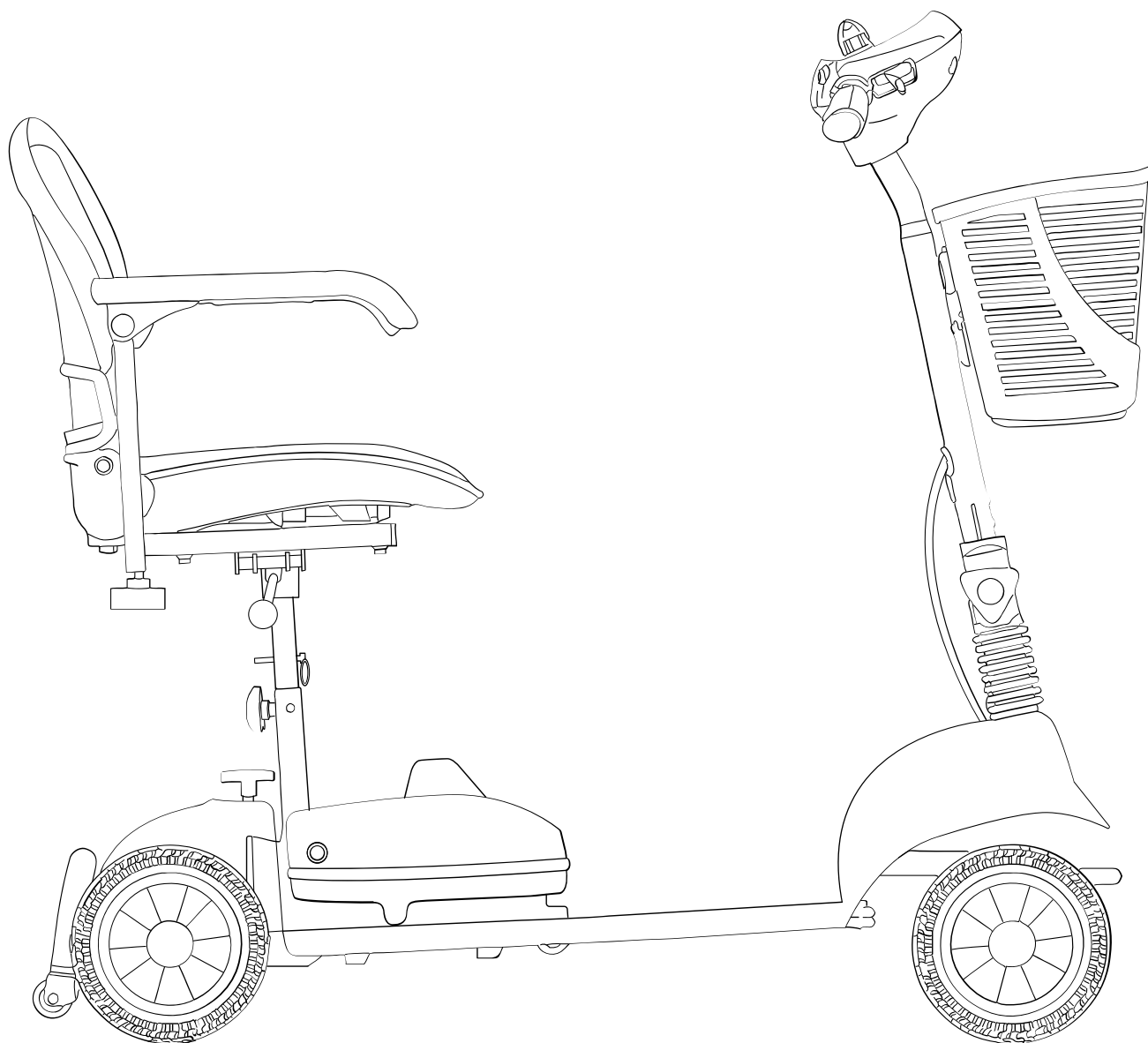

Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare eLite Klasse 2 scootmobiel.


Uw nieuwe apparaat is ontworpen om binnen en buiten vervoer te bieden aan personen met een beperkte loopvaardigheid, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen.


Wij zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele en hoogwaardige producten en ons doel is om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent. Wij hopen van harte dat wij daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare-apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat gebruikt en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

2. Kennismaken met uw scooter

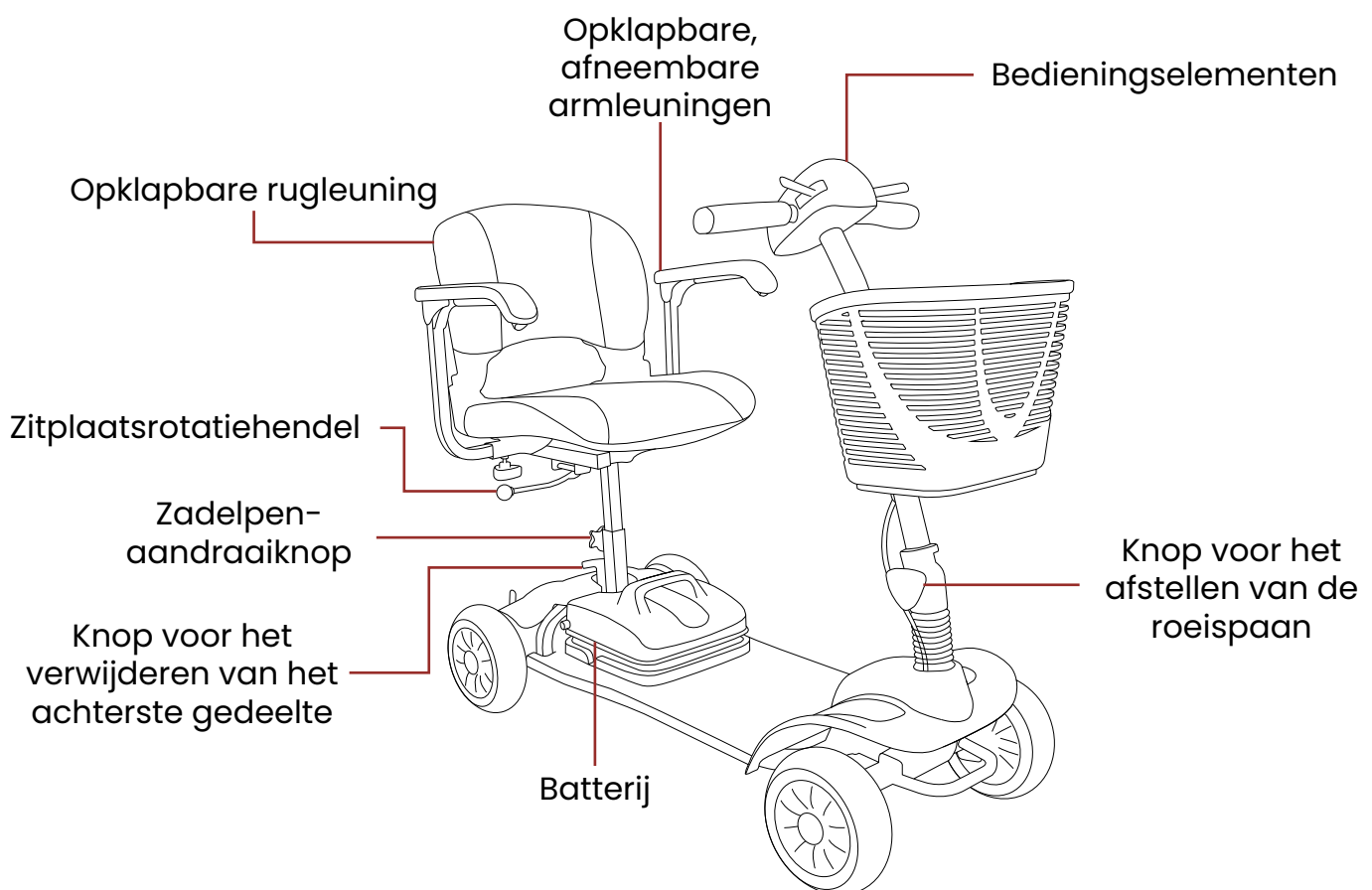

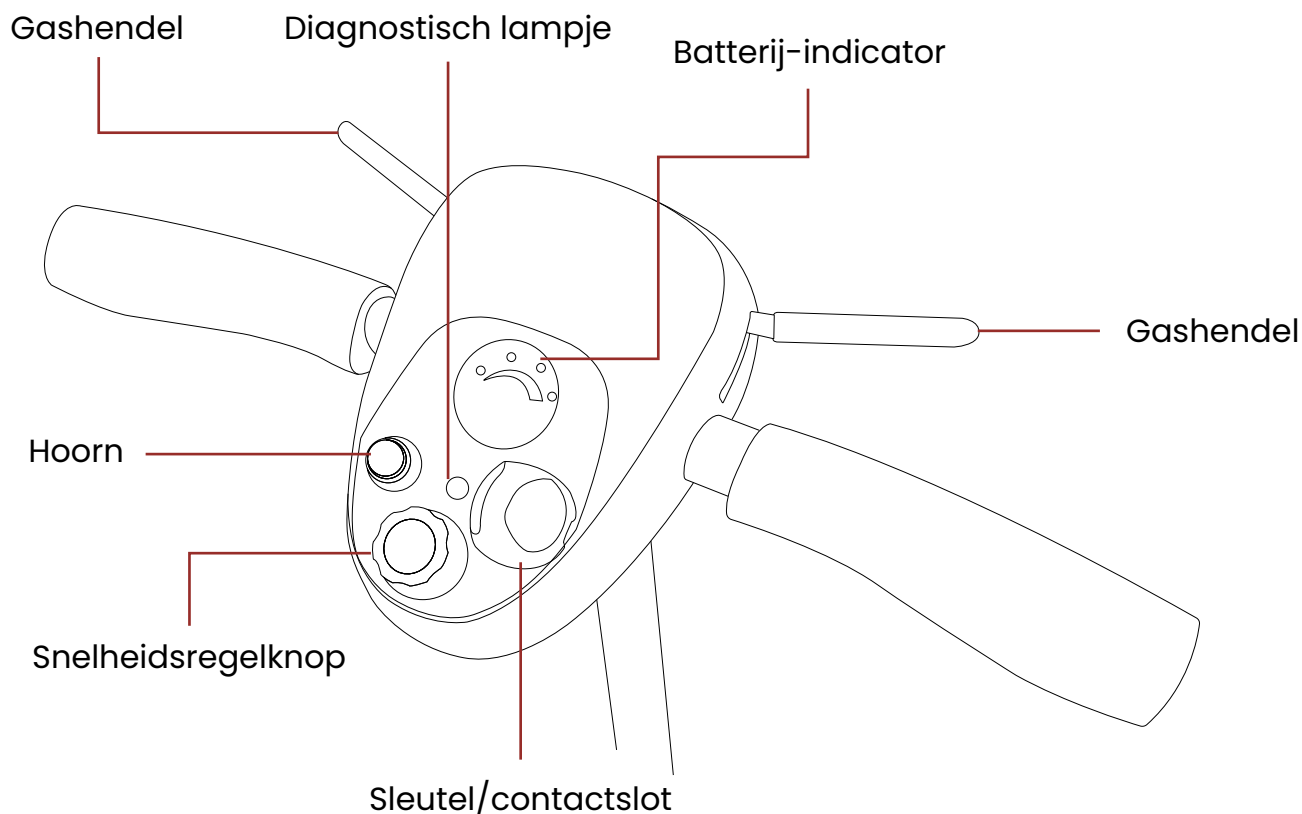

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees voordat u uw apparaat in gebruik neemt alle informatie voor uw veiligheid door en zorg dat u deze begrijpt. Net als bij het besturen van een voertuig, dient u alleen met volledige aandacht te rijden om de veiligheid te waarborgen. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Raadpleeg uw arts als u voorgeschreven of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of aantasten.
- Gebruik uw apparaat niet wanneer u onder invloed bent van alcohol, aangezien dit uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Vermijd elk gebruik, zoals krachttraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of trekken van voorwerpen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor gebruik door één persoon. Neem geen passagiers mee.

- Wij raden u ten zeerste aan om niet te roken terwijl u op uw apparaat zit. Als u toch besluit om te roken terwijl u op uw apparaat zit, dient u zich aan de volgende veiligheidsrichtlijnen te houden: Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn gedoofd voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op brandbaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen te allen tijde schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem bij constatering hiervan contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht om deze zo snel mogelijk te laten vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan uw apparaat aan. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door accessoires aan uw apparaat toe te voegen, kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de afmetingen en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige van deze veranderingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de nabijheid van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over het veilige gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat u uw apparaat niet meer goed kunt bedienen.
- Zet het apparaat niet in de modus 'vrijloop' terwijl het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus 'vrijloop' in- of uitschakelt.
- Als u verwacht dat u langere tijd in een vaste houding zult zitten, schakel dan het apparaat uit. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om andere apparaten dan uw apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd gaat rollen, mag u de scooter nooit in de vrijloopstand zetten op een helling of afdaling.
- Mogelijk verstikkingsgevaar! Houd er rekening mee dat kleding, lanyards, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of bij u heeft terwijl u op uw apparaat zit of het bedient, verstrikt kunnen raken in de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren, om onbedoelde of ongecontroleerde bewegingen van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, uw kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Zorg ervoor dat er tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen in de wielen verstrikt raken.
- Wanneer uw apparaat wordt gebruikt met een takel/lift, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "vrijloopmodus" staat en ga NIET op uw apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Neem contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht als de zekering beschadigd lijkt.

- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk kantelen te voorkomen, mag u nooit iets dragen of de tas/mand vullen met inhoud die meer dan 15 lbs (6,8 kg) weegt.
- Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om gewicht op te laten rusten, omdat dit ertoe kan leiden dat het apparaat kantelt.

4. Veilig monteren en demonteren

Om uw apparaat veilig te bevestigen en te verwijderen, moet u er altijd voor zorgen dat het eerst is uitgeschakeld. Als u dit niet doet, kunt u per ongeluk de gashendel aanraken en ervoor zorgen dat uw apparaat onverwachts beweegt. Zorg ervoor dat de motorvergrendelingen zijn ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl u erop stapt of ervan afstapt. Breng uw apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar u vanaf stapt en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel zitten. Dit vermindert het risico dat u de stoel mist of valt.

De juiste manier om te verplaatsen hangt af van je persoonlijke situatie, dus overleg met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf kunt ondersteunen tijdens het verplaatsen.

We raden u ook aan om iemand te vragen u te helpen totdat u zeker weet dat u zelf veilig kunt overstappen.

5. Veilig rijden

Houd bij het besturen van uw apparaat altijd rekening met het volgende:

- Houd u altijd aan alle lokale voetgangers- en verkeersregels. Het kan voor anderen moeilijk zijn om u te zien wanneer u op uw apparaat zit. Wacht tot het pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, verlichting en veiligheidsvlaggen wordt aanbevolen.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om het apparaat te leren kennen voordat u gaat rijden.
- Maak uzelf vertrouwd met de gebieden waar u het apparaat wilt gebruiken. Zoek naar gevaren en leer hoe u deze kunt vermijden.
- Gebruik uw apparaat nooit om trappen of roltrappen te nemen.
- Om kantelen te voorkomen, moet u uw snelheid verminderen bij het draaien en geen scherpe bochten maken. Houd tijdens het draaien altijd een stabiel zwaartepunt aan en vermijd het verplaatsen van uw gewicht in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd bij het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd contact maken met de helling/lage stoeprand. Om de kans op vallen te verkleinen, mag u niet schuin rijden; laat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat op de helling/lage stoeprand komen. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het nemen van een helling of stoeprand.
- Rijd niet op potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer het apparaat in beweging te houden wanneer u een helling oprijdt. Als u moet stoppen, start dan langzaam opnieuw en versnel vervolgens voorzichtig.

- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als u sneller afdaalt dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de snelheid van uw afdaling te regelen.
- De maximaal aanbevolen hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van uw apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waaronder u de helling nadert.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop regelmatig en controleer of de weg vrij is van obstakels. Om kantelen te voorkomen, mag u niet achteruit een helling of oprit afrijden.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.
- Houd er rekening mee dat een verlaagde stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling de voorwielen kan blokkeren en ervoor kan zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig transport

Houd bij het vervoeren van uw apparaat altijd rekening met het volgende:

- Gebruik uw apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast als je het vervoert. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met brandbare of ontvlambare spullen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig, omdat het kan verschuiven en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op uw apparaat zitten terwijl het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep uw apparaat niet met een auto. Bij het slepen kan de maximale snelheidsgrens worden overschreden, wat kan leiden tot schade aan cruciale onderdelen van het apparaat.

7. Vliegereizen

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door niet-lekkende zuur- of alkalibatterijen. Raadpleeg onze opmerkingen in **VETGEDRUKTE LETTERS** voor hulp bij uw apparaat:

Voorafgaand aan de reis moeten passagiers de exploitant informeren over het type batterijen dat in het mobiliteitshulpmiddel is geplaatst en hoe het apparaat kan worden beveiligd tegen onbedoeld gebruik. – **De batterijen in uw apparaat zijn verzegelde loodzuurbatterijen. Om onbedoeld gebruik te voorkomen, moet u de scooter uitschakelen, de sleutel uit het contact verwijderen en ervoor zorgen dat de scooter niet in vrijloop staat (zie paragraaf 13 voor meer instructies).**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren of:

- De batterij moet worden verwijderd en in een stevige, harde verpakking worden vervoerd en in het bagageruim worden opgeborgen.
- De accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijvoorbeeld door blootliggende polen af te plakken met tape). – **Er zijn geen blootliggende polen op het accupakket van uw scooter.**

- De batterij moet worden beschermd tegen beschadiging (bijvoorbeeld door elke batterij in een beschermhoesje te plaatsen).
- Het verwijderen van de batterij uit het mobiliteitshulpmiddel moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of eigenaar van het apparaat. – **De batterij kan eenvoudig van de eLite-vloerplaat worden getild (zie paragraaf 9 voor meer instructies).**
- De batterij mag niet meer dan 300 Wh bedragen – **de 10 Ah-batterij is 252 Wh (25,2 V x 10 Ah = 252 Wh).**
- Er mag maximaal één reservebatterij van maximaal 300 Wh of twee reservebatterijen van maximaal 160 Wh per stuk worden meegenomen.

Het wordt aanbevolen dat passagiers ten minste 48 uur voor vertrek afspraken maken met hun luchtvaartmaatschappij.

8. Opladen en onderhoud van de batterij

Nieuwe batterijen moeten volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) voordat ze voor het eerst worden gebruikt, om de batterijen volledig te activeren. Als dit niet gebeurt, kan de levensduur van de batterijen worden verkort.

De levensduur van de batterij kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de omstandigheden waarin de batterij wordt bewaard en het oplaadregime dat wordt gebruikt.

Als algemene regel geldt dat u uw batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Plan het opladen wanneer u verwacht uw apparaat niet te gebruiken. Zorg ervoor dat de batterijen ten minste elke 4-6 weken volledig worden opgeladen wanneer u uw apparaat niet gebruikt. Als u de batterijen niet oplaadt, raken ze permanent beschadigd.

Zorg er altijd voor dat uw batterijen worden bewaard in een droge, goed geventileerde omgeving en niet gedurende langere tijd in koude omstandigheden (3 °C en lager) worden achtergelaten, aangezien dit ertoe leidt dat de batterij niet meer kan worden opgeladen en permanente schade oploopt.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er zijn explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uur (Ah) capaciteiten.
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de accupolen. Contact met gereedschap kan een elektrische schok veroorzaken.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Stel ze niet bloot aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met brandbare of ontvlambare voorwerpen.
- Neem voor het afvoeren of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u ze hebt gekocht.
- Gebruik geen ander type oplader dan de meegeleverde oplader.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te gebruiken.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.

- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een reis begint, om te voorkomen dat u strandt.
- Probeer de batterijen niet uit hun behuizing te verwijderen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Hoe u uw batterijen oplaadt

- Draai de sleutel naar de stand 'Uit'.
- Steek de stekker van de batterijlader in het stopcontact in de muur.
- Steek de oplader in de oplaadaansluiting van de accu.
- Het LED-lampje op de batterijlader wordt rood om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de batterijlader wordt groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.

9. Demontage en montage

Ontmanteling

1. Til de hendel voor het draaien van de stoel op en til de stoel omhoog om deze te verwijderen.
2. Til het accupakket op om het te verwijderen. Houd er rekening mee dat de accu met klittenband vastzit. Als u moeite heeft om deze te verwijderen, druk dan op de zadelpen om het verwijderen te vergemakkelijken.
3. Klap de stuurstang naar beneden door eerst de stuurstang-instelknop los te draaien en vervolgens de stuurstang langzaam naar de vloerplaat te duwen. Zodra de stuurstang op de vloerplaat rust, draait u de stuurstang-instelknop vast om deze op zijn plaats te houden.
4. Vergrendel de stuurhendel met behulp van de stuurhendelvergrendeling door de vergrendeling in te drukken en 90 graden met de klok mee te draaien.
5. Til de verwijderingshendel van het achterste gedeelte met één hand op en trek het achterste gedeelte met de hendel naar beneden om het voorste en achterste gedeelte van elkaar te scheiden. Til het voorste gedeelte op en haal het weg.

Montage

1. Trek met één hand het achterste gedeelte naar beneden met behulp van de hendel en til het voorste gedeelte op met behulp van de zadelpen of de knop voor het verwijderen van het achterste gedeelte. Laat het voorste gedeelte in het achterste gedeelte vallen en druk het naar beneden totdat u een klik hoort. Controleer altijd of de gedeeltes correct zijn verbonden voordat u verdergaat met de volgende stap.
2. Ontgrendel de stuurhendel door de vergrendeling in te drukken en deze 90 graden tegen de klok in te draaien.
3. Til de stuurhendel op door eerst de stuurhendel-instelknop los te draaien en vervolgens de stuurhendel langzaam van de vloerplaat omhoog te tillen. Zodra de stuurhendel rechtop staat, draait u de stuurhendel-instelknop vast om deze op zijn plaats te houden.
4. Plaats het accupakket in de vloerplaat. Druk het naar beneden om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.
5. Til de hendel voor het draaien van de zitting op en plaats de zitting op de zadelpen.

10. Bedieningselementen

In- en uitschakelen

Om uw apparaat in te schakelen, steekt u de sleutel in het contactslot totdat de lampjes op het batterij-indicatiedisplay gaan branden.

Om uw apparaat uit te schakelen, verwijdert u de sleutel uit het contact totdat de lampjes op het batterij-indicatiedisplay niet meer branden.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van uw apparaat aan te passen, moet u altijd stil staan en aan de snelheidsregelaar draaien. Om de snelheid te verhogen, draait u de knop met de klok mee (richting de haas) en om de snelheid te verlagen, draait u deze tegen de klok in (richting de schildpad).

Vooruit en achteruit rijden

Om langzaam vooruit te rijden, trekt u de rechter gashendel (gemarkeerd met F) langzaam naar de stuurhendel toe. Hoe meer u de hendel intrekt, hoe sneller u rijdt. U kunt ook met uw hand de linker gashendel (gemarkeerd met R) van de stuurhendel af duwen. Om te stoppen, laat u de hendel los.

Om achteruit te rijden, trekt u de linker gashendel (gemarkeerd met R) langzaam naar de stuurhendel toe. Hoe meer u aan de hendel trekt, hoe sneller u rijdt. U kunt ook met uw hand de rechter gashendel (gemarkeerd met F) van de stuurhendel af duwen. Om te stoppen, laat u de hendel los.

De hoorn laten klinken

Om te claxonneren, druk je op de knop op de stuurhendel.

11. Bevestiging en afstelling van veiligheidsgordels

Dit model is niet uitgerust met een veiligheidsgordel.

12. Afstelling van de roeispaan

Om de hefboom af te stellen, houdt u de hefboom in één hand vast en draait u met de andere hand de afstelknop van de hefboom tegen de klok in totdat de tandwielen loskomen en de hefboom vrij op en neer kan bewegen.

Wanneer de stuurhendel zich in de gewenste positie bevindt, draait u de stuurhendel-instelknop met de klok mee totdat deze zo strak mogelijk zit.

13. Vrijloophodus

De vrijloophendels bevinden zich aan de achterkant van de scooter, vlakbij het achterwiel. De hendel heeft twee standen:

Voorwaarts – Neutrale modus (het apparaat kan met de hand worden geduwd of getrokken)

Achteruit – Rijmodus (het apparaat beweegt alleen met behulp van de bedieningselementen)

14. Dagelijkse controles

Controleer de volgende punten voordat u uw apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals constateert of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor verder advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Tiller Stabiliteit

- Zorg ervoor dat het niet te los zit.
- Zorg ervoor dat het soepel volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Bedieningselementen

- Controleer bij uitgeschakeld apparaat of de bedieningselementen hun volledige bewegingsbereik hebben.
- Zorg ervoor dat uw apparaat zich naar behoren beweegt wanneer u aan de bedieningshendels trekt.

Snelheidsaanpassing

- Zorg ervoor dat de knop/knoppen volledig kunnen bewegen wanneer uw apparaat is uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat wanneer de bedieningselementen worden aangepast, de snelheid van uw apparaten verandert zoals het hoort.

Batterijmeter

- Controleer wanneer uw apparaat is ingeschakeld of de batterij-indicator het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Hoorn

- Controleer of de claxon naar behoren werkt wanneer u op de claxonknop drukt.

Sleutel

- Zorg ervoor dat de sleutel gemakkelijk in en uit het contactslot kan worden gestoken.
- Zorg ervoor dat de sleutel goed vastzit in het contactslot.
- Zorg ervoor dat uw apparaat wordt in- en uitgeschakeld wanneer de sleutel in het slot wordt gestoken en eruit wordt gehaald.

Motor, transaxle en elektromagnetische rem

- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke geluiden uit uw apparaat komen.
- Zorg ervoor dat er geen ongewone geuren uit uw apparaat komen.

Wielen

- Zorg ervoor dat er geen scheuren of vervormingen op de banden van uw apparaat zitten.
- Zorg ervoor dat de wielen zonder te wiebelen draaien.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de banden zitten.
- Zorg ervoor dat het loopvlak van de band niet overmatig of ongelijkmatig versleten is.
- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke geluiden uit uw apparaat komen.

Batterijhouder

- Zorg ervoor dat de batterijhouder geen scheuren of vervormingen vertoont.
- Zorg ervoor dat de batterijhouder goed kan worden geplaatst en verwijderd.

Zitting

- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke bewegingen optreden wanneer de stoel in de juiste positie is vergrendeld.
- Zorg ervoor dat de stoel naar behoren beweegt.

Vrijloophendel

- Zorg ervoor dat de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) naar behoren in- en uitschakelt.

15. Reiniging, onderhoud en verwijdering

Schoonmaken

Gebruik een zachte borstel om vuil en stof van uw apparaat te verwijderen en veeg alle oppervlakken schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Laat uw apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld wanneer het wordt gereinigd.
- Zorg ervoor dat u tijdens het schoonmaken geen elektrische aansluitingen maakt.
- Gebruik geen waterslang, hogedrukreiniger of spuit water rechtstreeks op uw apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het reinigen.

Onderhoud

Zorg ervoor dat uw apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Naast reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen om al het onderhoud te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om uw apparaat minstens om de 12 maanden te laten onderhouden.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat door een erkend bedrijf te laten afvoeren. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het als gevaarlijk afval beschouwd en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

16. Elektromagnetische compatibiliteit

Dit gedeelte van de inhoud biedt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie). Er kunnen beschermende maatregelen worden genomen om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren. In dit gedeelte worden ook enkele omstandigheden beschreven die onverwachte of onregelmatige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is erg belangrijk dat u deze informatie over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat leest.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiostations, tv-stations, amateurradiozenders (HAM), portofoons en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat uw apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt.

Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de storende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Uw apparaat is bestand tegen EMI tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om een immuuniteitsniveau van ten minste 20 V/m te bereiken, wat een goede bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat heeft in de staat waarin het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, een immuuniteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn duidelijk en gemakkelijk te vermijden, andere zijn dat niet en blootstelling is onvermijdelijk. Wij zijn echter van mening dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI tot een minimum wordt beperkt. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg in drie soorten worden ingedeeld:

1. Draagbare handzenders (zenders-ontvangers met de antenne direct op de zendeenheid gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: citizens band (CB) of draagbare radio's, (beveiligings-, brandweer- en politie-zenders), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparatuur. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor middellange afstanden, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben meestal een antenne die aan de buitenkant van het voertuig is gemonteerd.
3. Langeafstandszenders en -ontvangers, zoals commerciële omroepzenders (radio- en tv-zendmasten) en amateurradio's (HAM).

Andere soorten draagbare apparaten, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken voor uw elektrische scooter.


Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate u dichterbij een zendantenne (bron) bent. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk dat u tijdens het gebruik van deze apparaten onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat brengt. Dit kan de bewegingen en het remmen van uw apparaten beïnvloeden. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van uw apparaat te voorkomen.

1. Gebruik geen draagbare zendontvangers, zoals CB-radio's, en schakel geen persoonlijke communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, in terwijl uw apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer niet te dicht in de buurt ervan te komen.
3. Als er onbedoelde bewegingen of het loslaten van de rem optreden, schakel het apparaat dan uit zodra dit veilig is.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het apparaat gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle incidenten van onbedoelde bewegingen of het loslaten van de rem aan de fabrikant en noteer of er bronnen van EMI in de buurt waren.

17. Probleemoplossing

Als er een storing optreedt met uw scooter, kijk dan naar het lampje op uw bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. In de onderstaande tabel staan alle storingen die de scooter kan melden, met een mogelijke oplossing.

Diagnostisch lampje

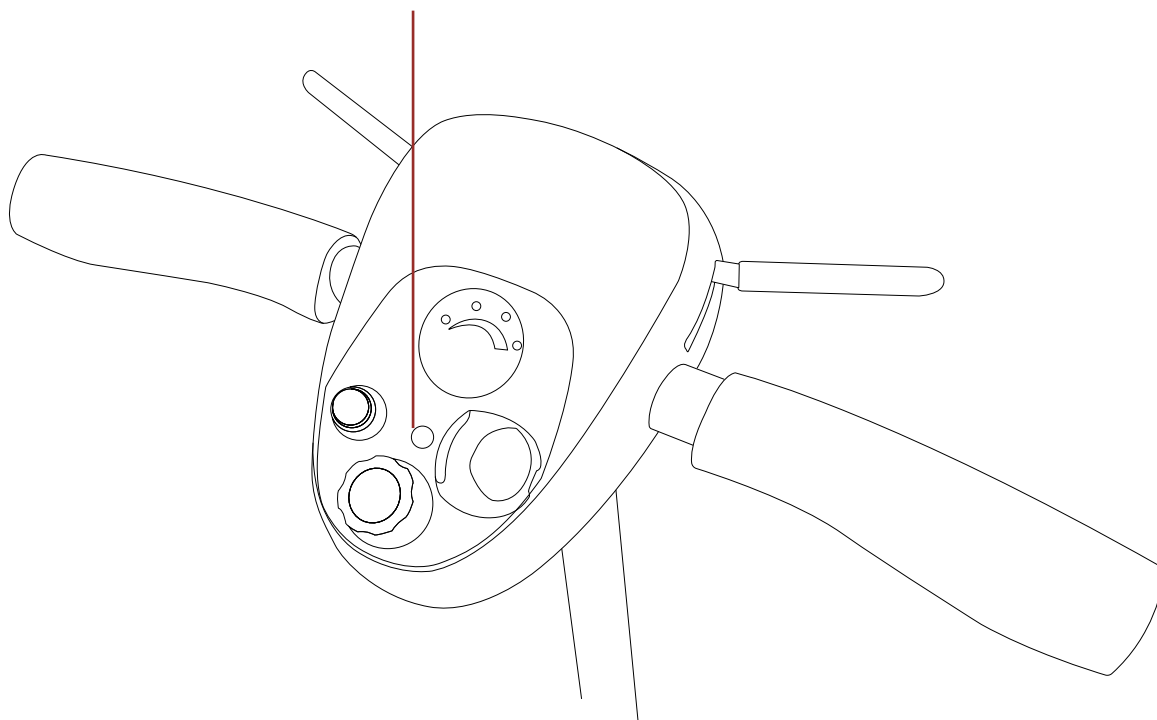

Flash Code	Possible Issue	Possible Solution(s)
1	The battery has no power or is not connected correctly.	Check the battery pack is seated correctly on the floorpan.
2		Check the battery connection pins on the floorpan.
3		Check the connection in the bottom of the battery pack. Try fully charging the battery. Contact an approved company to repair.
4	Motor Current Fault	Contact an approved company to repair.
5	Electromagnetic Brake fault.	Contact an approved company to repair.
6	The controller is being inhibited from driving.	Ensure the battery charger is not plugged in
7	Throttle control lever fault.	Ensure the throttle lever is not pulled in when turning on the scooter.
8	Motor Voltage Fault	Contact an approved company to repair.
9	Other Error	Contact an approved company to repair.

18. Garantie

Alle producten van Motion Healthcare worden met garantie aan onze partners verkocht, die op hun beurt het product met garantie aan u verkopen. Dit zijn twee afzonderlijke overeenkomsten.

Neem contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht voor specifieke informatie over de garantie of om een claim in te dienen.



Motion Healthcare

Units 6 & 7, Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



LERADO ZHONGSHAN PEACEFUL COVE BUSINESS TRADING CO.,LTD

No. 26, GUANGFU ROAD
XIAOLAN TOWN ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, CHINA



Y. Sung Handelsvertretung

24 Duesselthaler Street
40211 Dusseldorf
Germany



UK APLAN Corporation Ltd

Wandle House Associates
47 Wandle House
Wandle Road
Croydon, Surrey
CR10 1DF

19. Specificaties

Lengte	102 cm
Breedte	49 cm
Hoogte	92 cm
Voorwielmaat	19 cm
Achterwielmaat	19 cm
Totaalgewicht	30,5 kg
Zwaarste onderdeel	10 kg
Gewicht accu	2,5 kg
Accucapaciteit	25,2V 10ah Lithium
Accuvermogen	252 wh
Actieradius (maximaal)	12 km
Snelheid	6 km/u
Maximaal gebruikersgewicht	133 kg
Zitbreedte	43 cm
Motorgrootte	270w DC24V Borstelmotor
Maximale helling	6°
Bodemvrijheid	5 cm
Draaicirkel	125 cm



www.motionhealthcare.nl

085-2129445