


phot@n Handleiding

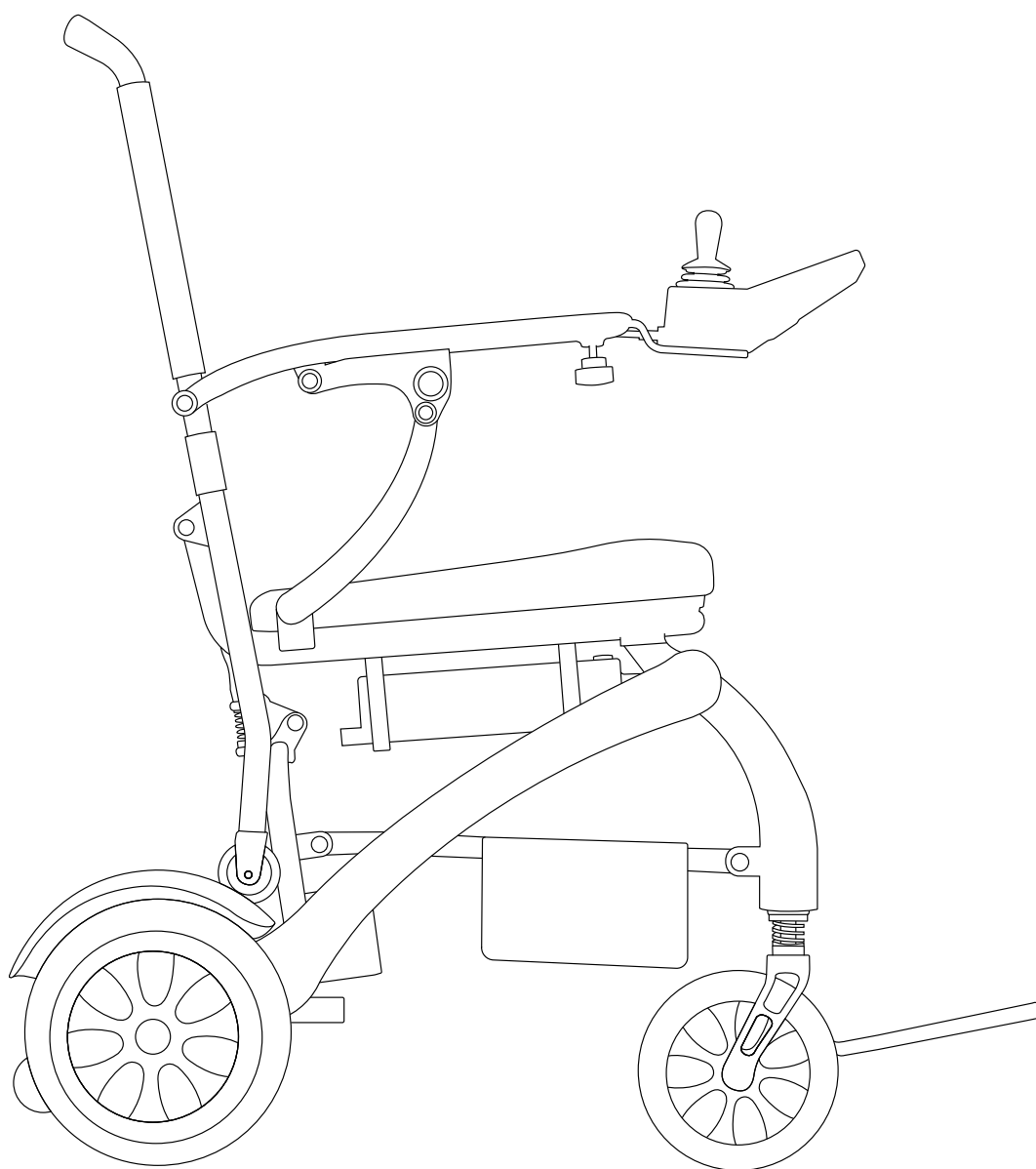

Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Dank u wel en gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Motion Healthcare Photon rolstoel.


Uw nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer te bieden, zowel binnenshuis als buitenshuis, voor een persoon met een verminderd loopvermogen, maar die in staat is om het apparaat veilig te bedienen wat betreft gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden.


Wij streven ernaar veilige, comfortabele en hoogwaardige producten te leveren en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen. Wij hopen van harte dat u tevreden bent met uw Motion Healthcare-apparaat en dat u ervan geniet.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat gebruikt, en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

2. Uw elektrische rolstoel leren kennen

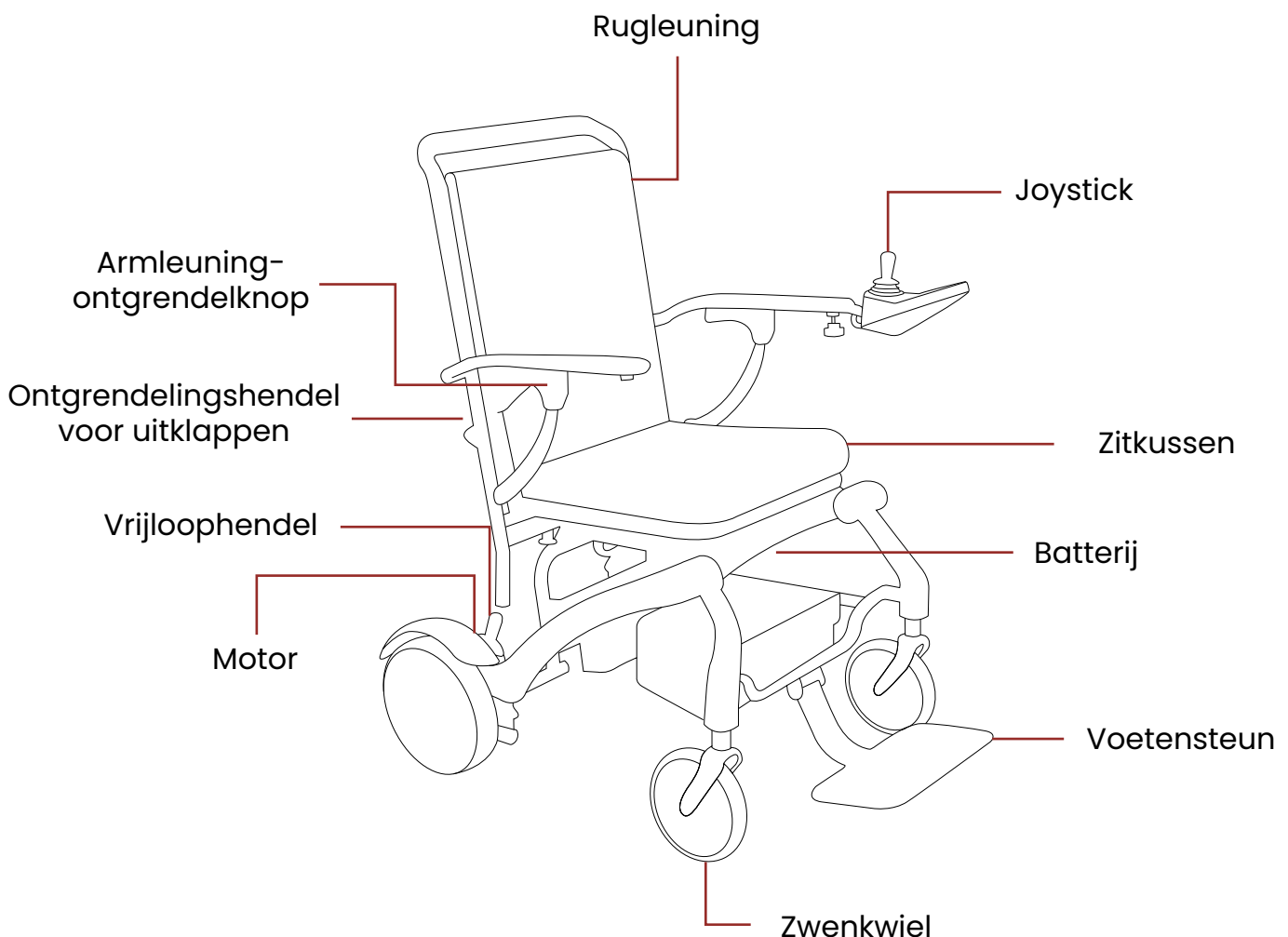

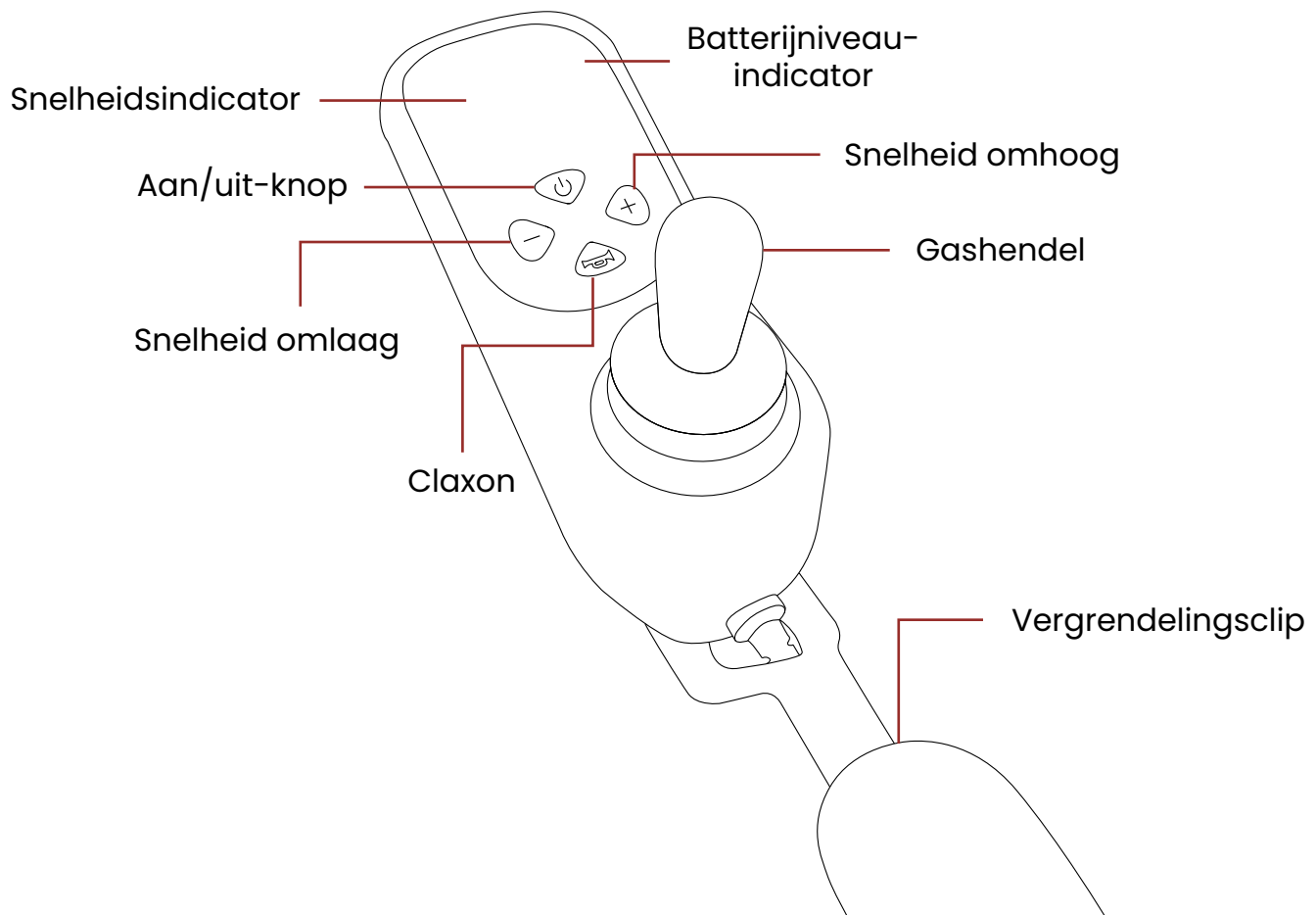

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Voordat u uw apparaat gebruikt, dient u alle informatie die voor uw veiligheid is verstrekt te lezen en te begrijpen. Zoals bij het besturen van elk voertuig, rijdt u alleen met volledige alertheid om de veiligheid te garanderen. Let op de onderstaande waarschuwingen om schade of letsel als gevolg van oneigenlijk gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of productbeschadiging als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om te verzekeren dat er geen gezondheids- of fysieke aandoeningen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Raadpleeg uw arts als u recept- of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om uw apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Bedien uw apparaat niet als u onder invloed bent van alcohol, aangezien dit uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kan belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet anders dan voor het oorspronkelijke doel. Vermijd gebruik, zoals gewichtstraining, sporten, atletiek, sjouwen, verplaatsen of slepen van objecten, die kunnen leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor slechts één persoon. Neem geen passagiers mee.
- We raden ten zeerste af om sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Als u ervoor kiest om te roken terwijl u op uw apparaat zit, moet u zich aan de volgende veiligheidsrichtlijnen houden: Laat geen brandende sigaretten onbeheerd.

Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.

- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op brandbaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtige bronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer regelmatig de elektrische componenten op tekenen van corrosie en neem contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht als u corrosie ontdekt, zodat ze deze zo snel mogelijk kunnen vervangen.
- Pas uw apparaat niet aan. Voor accessoires, neem contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Het toevoegen van accessoires aan uw apparaat kan bepaalde specificaties wijzigen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd rekening met hoe sommige wijzigingen schade kunnen veroorzaken aan objecten om u heen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over het veilig gebruik van zuurstof.
- Verander de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat er veranderingen zijn in uw vermogen om uw apparaat te besturen.
- Plaats het apparaat niet in de "vrijloop"-modus terwijl het is ingeschakeld. Zet het apparaat altijd uit voordat u de "vrijloop"-modus inschakelt of uitschakelt.
- Als u van plan bent langere tijd in een zittende positie te blijven, zet dan het apparaat uit. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen enkel apparaat aan op het elektrische systeem van het apparaat of gebruik de batterijen niet om iets anders dan uw apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd gaat rollen, plaats de rolstoel nooit in de "vrijloop"-modus op een helling of afdaling.
- Mogelijk verstikkingsgevaar! Wees ervan bewust dat kleding, keycords, kettingen, andere sieraden, tassen en andere accessoires die u draagt terwijl u op het apparaat zit of ermee rijdt, verstrikt kunnen raken in de armleuningen of gashevel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de bediening van de besturing kunnen hinderen om onbedoelde of ongecontroleerde bewegingen van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, uw kleding en alle andere objecten uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat geen objecten achter het apparaat slepen tijdens het rijden. Loszittende kleding of andere objecten kunnen in de wielen vast komen te zitten.
- Wanneer uw apparaat wordt gebruikt met een soort hijs/lift, zet dan altijd het apparaat uit, zorg ervoor dat het niet in de "vrijloop"-modus staat en ga niet op uw apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht.
- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk kantelen te voorkomen, draag nooit iets of vul de tas/mand met inhoud van meer dan 15lbs (6,8kg).
- Gebruik de armleuningen (indien gemonteerd) niet voor het dragen van gewicht, omdat dit het apparaat kan doen kantelen.

4. Veilig op- en afstappen

Om veilig op en af te stappen, zorg er altijd voor dat het apparaat eerst is uitgeschakeld. Als u dit niet doet, kunt u per ongeluk de gashendel aanraken en uw apparaat onverwacht in beweging brengen. Zorg ervoor dat de motorvergrendelingen zijn ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl u opstapt of afstapt. Zet uw apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar u vandaan komt en ga zo ver mogelijk naar achteren op het zitvlak zitten bij het overstappen; dit vermindert het risico dat u de stoel mist of valt.

De volledige juiste overplaatsingsmethode verschilt afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met uw zorgverlener om te leren hoe u uw lichaam moet positioneren en hoe u uzelf kunt ondersteunen tijdens een overplaatsing.

We raden ook aan dat u iemand vraagt om u te helpen totdat u zeker weet dat u veilig zelf kunt overstappen.

5. Veilig rijden

Houd bij het rijden met uw apparaat altijd rekening met het volgende:

- Volg altijd alle lokale regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om u te zien wanneer u op uw apparaat zit. Wacht tot de weg vrij is van verkeer en ga dan met uiterste voorzichtigheid verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen wordt aanbevolen.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om het gevoel van dit apparaat te leren kennen voordat u gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar u van plan bent uw apparaat te gebruiken. Kijk naar gevaren en leer hoe u ze kunt vermijden.
- Gebruik uw apparaat nooit op trappen of roltrappen.
- Om kantelen te voorkomen, verminder uw snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten. Houd altijd een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd het verplaatsen van uw gewicht in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Bij het rijden op hellingen of lage stoepranden, rijd recht vooruit met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijk de helling/stoeprand raken. Om de kans op vallen te verkleinen, rijd niet onder een hoek; zet geen enkel wiel of kant van het apparaat als eerste op de helling/stoeprand. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het rijden op een helling of stoeprand.
- Rijd niet op of af potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden bedekt met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Bij het beklimmen van een helling, probeer het apparaat in beweging te houden. Als stoppen nodig is, begin dan langzaam weer te rijden en versnel daarna voorzichtig.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan gewenst, laat de gasregeling los om het apparaat te stoppen. Druk daarna voorzichtig op de gasregeling om de snelheid van uw afdaling te beheersen.
- De maximaal aanbevolen hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van uw apparaat om hellingen te beklimmen wordt beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waaronder u de helling benadert, naast andere factoren.

- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Wanneer u achteruit rijdt, bestuur uw apparaat dan met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop regelmatig en controleer of het pad vrij is van obstakels. Om kantelen te voorkomen, rijd niet achteruit van een helling of oprijlaan.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.
- Wees u ervan bewust dat een verlaagde stoeprand of een kleine hobbel aan de onderkant van een helling de voorwielen kan tegenhouden en ervoor kan zorgen dat het apparaat voorover kantelt.

6. Veilige transportatie

Wanneer u uw apparaat vervoert, houd dan altijd rekening met het volgende:

- Gebruik uw apparaat niet als stoel in een motorvoertuig.
- Bevestig altijd het apparaat en de batterijen wanneer het wordt vervoerd. Vervoer het apparaat of de batterijen niet met brandbare of ontvlambare items.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig, omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op uw apparaat zitten terwijl het in een bewegend voertuig is.
- Sleep uw apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximale snelheidsdrempel overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke componenten van het apparaat.

7. Luchtvervoer

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door lithium-ionbatterijen. Zie onze opmerkingen in **VET** gedrukt om u te helpen met uw apparaat:

Voor de reis moeten passagiers de luchtvaartmaatschappij informeren over het type batterijen dat op het mobiliteitshulpmiddel is gemonteerd en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoelde werking. – **De batterijen in uw apparaat zijn lithium-ion. Om onbedoelde werking te voorkomen, moet u de rolstoel uitschakelen en ervoor zorgen dat deze niet in vrijloop is (zie sectie 13 voor meer instructies).**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij bevestigen dat:

- de batterij moet worden verwijderd en in de passagierscabine worden meegenomen;
- de batterijpolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijvoorbeeld door tape over blootliggende polen te plakken); – Er zijn geen blootliggende polen op de accu van uw rolstoel.
- de batterij moet worden beschermd tegen schade (bijvoorbeeld door elke batterij in een beschermende hoes te plaatsen);
- het verwijderen van de batterij uit het mobiliteitshulpmiddel moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat. – De batterijpack kan eenvoudig losgemaakt en uit de basis onder de stoel geschoven worden (zie sectie 8 voor meer instructies).
- de batterij mag niet meer dan 300 Wh bevatten – de 12ah-batterij is 288 Wh.
- maximaal één reservebatterij van niet meer dan 300 Wh of twee reservebatterijen van niet meer dan 160 Wh elk mogen worden meegenomen.

8. Opladen en onderhoud van de batterij

Nieuwe batterijen moeten volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) voorafgaand aan het eerste gebruik om de batterijen volledig te activeren; als dit niet gebeurt, kan de levensduur van de batterij worden verminderd.

De levensduur van de batterij kan worden beïnvloed door temperatuur, gebruikersgewicht, de conditie waarin de batterij wordt bewaard, evenals het gebruikte oplaadschema.

In het algemeen moet u uw batterijen zo vaak mogelijk opladen om de langst mogelijke levensduur te garanderen en de vereiste oplaadtijd te minimaliseren. Plan om ze op te laden wanneer u niet van plan bent uw apparaat te gebruiken. Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen minstens elke 4-6 weken als u het apparaat niet gebruikt. Als ze niet worden opgeladen, zullen ze permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat uw batterijen worden bewaard in een droge, goed geventileerde omgeving en niet worden achtergelaten in koude omstandigheden (3° en lager) voor langere tijd, omdat dit ertoe kan leiden dat de batterij geen lading meer ontvangt en permanente schade veroorzaakt.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten corrosieve chemicaliën.
- Er bestaan explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uur (ah)-capaciteiten.
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen weg van de batterijpolen. Contact met gereedschap kan leiden tot een elektrische schok.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Stel ze niet bloot aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet met brandbare of ontvlambare items.
- Om uw batterijen te verwijderen of te recyclen, neem contact op met het erkende bedrijf waar u het product van heeft gekocht.
- Gebruik geen ander type oplader dan die welke is meegeleverd.
- Probeer de batterijen niet op te laden en het apparaat tegelijkertijd te gebruiken.
- Probeer de batterijen niet op te laden door kabels direct aan de batterijpolen of klemmen te bevestigen.
- Controleer altijd uw batterijniveau voordat u een reis begint om te voorkomen dat u stranden.
- Probeer niet de batterijen uit hun behuizingen te verwijderen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Hoe u uw batterijen moet opladen

- Zet de rolstoel uit.
- Steek de batterijlader in het stopcontact in de muur.
- Steek de lader in de oplaadpoort van de batterij of joystick.
- Het LED-lampje op de batterijlader wordt rood om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de batterijlader wordt groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.


Verwijderen van batterijen



Om de batterij te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop en schuift u de batterij naar u toe.

9. In- en uitklappen

Inklappen

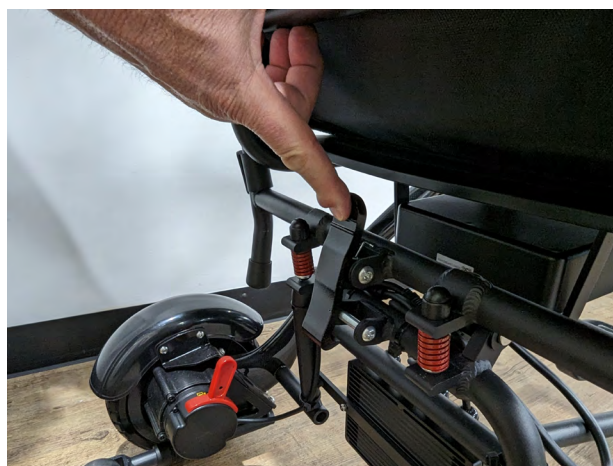


Duw de zwarte ontgrendelingshendel die zich aan de achterkant van de stoel bevindt.



Duw de rugleuning omlaag tot deze in de ingeklapte positie staat.

Uitklappen

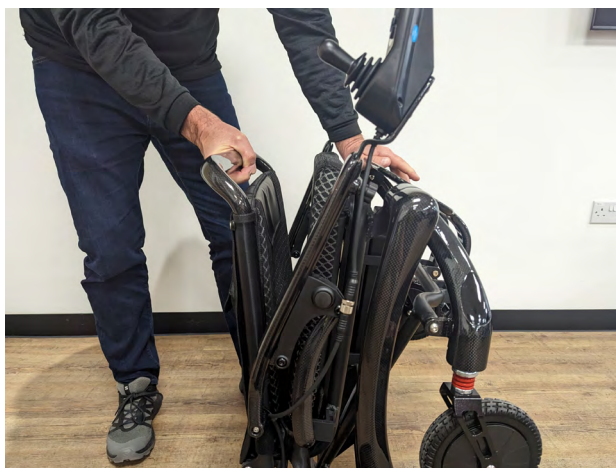

Zet de stoel rechtop, houd de achterste rugleuning vast en duw de basis van de stoel weg.



Duw tot u een klik hoort, waarna de stoel in zijn open positie staat.

10. Bediening

Aan- en uitschakelen

Om uw apparaat aan te zetten, drukt u op de aan-/uitknop totdat het LED-display oplicht.

Om uw apparaat uit te zetten, drukt u op de aan-/uitknop totdat het display uit is.

Snelheid aanpassen

Om de snelheid van uw apparaat aan te passen, zorg ervoor dat u stil staat en gebruik de knoppen voor verhogen en verlagen.

Vooruit en achteruit rijden

Om vooruit te rijden, duwt u de gashendel langzaam naar voren. Hoe verder u duwt, hoe sneller u gaat. Om te stoppen, laat u de gashendel los.

Om achteruit te rijden, trekt u de gashendel langzaam naar achteren. Hoe verder u trekt, hoe sneller u gaat. Om te stoppen, laat u de gashendel los.

Om te draaien, beweegt u de gashendel in de richting waarin u wilt bewegen. Om te stoppen, laat u de gashendel los.

De toeter gebruiken

Om te toeteren, drukt u op de toeterknop die zich op de joystick bevindt.

11. Veiligheidsgordel vastmaken en aanpassen

Draag altijd uw veiligheidsgordel wanneer u in uw rolstoel zit om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen.



Open de veiligheidsgordel door de twee knoppen aan weerszijden in te drukken.

Sluit de veiligheidsgordel door het deel met de drie pinnen in het omhulsel te duwen tot u een klik hoort.

U kunt de lengte van de riem aanpassen met behulp van de gesp.

12. Vrijloophodus

De vrijloophendels bevinden zich aan de achterkant van de elektrische rolstoel, bij elk achterwiel. De hendels hebben twee standen en elk betreft alleen het wiel dat het dichtstbij staat:

Vooruit – Neutrale modus (de rolstoel kan met de hand worden geduwd of getrokken)

Achteruit – Rijmodus (de rolstoel beweegt alleen via de bedieningselementen)

13. Dagelijkse controles

Controleer de volgende punten voordat u uw apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product van heeft gekocht voor verder advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de joystick

- Zorg ervoor dat deze niet buitensporig los zit.

Bedieningselementen

- Zorg ervoor dat de bedieningselementen, wanneer het apparaat is uitgeschakeld, de volledige bewegingsvrijheid hebben.
- Zorg ervoor dat wanneer de bedieningselementen worden getrokken/geduwd, uw apparaat beweegt zoals het hoort.

Snelheidsaanpassing

- Zorg ervoor dat, wanneer het apparaat is uitgeschakeld, de knop/knoppen de volledige bewegingsvrijheid hebben.
- Zorg ervoor dat wanneer de bedieningselementen worden aangepast, de snelheid van uw apparaat verandert zoals het hoort.

Batterijmeter

- Zorg ervoor dat wanneer uw apparaat is ingeschakeld, de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen knipperende lichten zijn.

Toeter

- Zorg ervoor dat wanneer de toeterknop wordt ingedrukt, de toeter klinkt zoals het hoort.

Motor, aandrijfas en elektromagnetische rem

- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke geluiden uit uw apparaat komen.
- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke geuren uit uw apparaat komen.

Wielen

- Zorg ervoor dat er geen scheuren of vervormingen zijn op de banden van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het profiel van de band zitten.
- Zorg ervoor dat er geen overmatige of ongelijke slijtage is aan het bandprofiel.
- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke geluiden uit uw apparaat komen.

Batterijbehuizing

- Zorg ervoor dat de batterijbehuizing(en) geen scheuren of vervormingen hebben.
- Zorg ervoor dat de batterijbehuizing wordt geplaatst en verwijderd zoals het hoort.

Stoel

- Zorg ervoor dat er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel in de vergrendelde positie staat.
- Zorg ervoor dat de stoel beweegt zoals het hoort.
- Zorg ervoor dat de bekleding niet buitensporig versleten is.

Vrijloophendel

- Zorg ervoor dat de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort.

Anti-kantelwielen

- Zorg ervoor dat de anti-kantelwielen op hun plaats zitten, werken en niet beschadigd zijn.

14. Reiniging, onderhoud en verwijdering

Reiniging

Om uw apparaat schoon te maken, gebruikt u een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat uw apparaat natuurlijk drogen.

- Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken.
- Vermijd alle elektrische verbindingen bij het schoonmaken.
- Gebruik geen tuinslang, hogedrukreiniger of spuit geen water rechtstreeks op uw apparaat.
- Gebruik geen schurende of schrapende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken.

Onderhoud

Zorg ervoor dat de dagelijkse controles worden uitgevoerd op uw apparaat. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een goedgekeurd bedrijf. Het wordt aanbevolen om uw apparaat minstens elke 12 maanden te laten onderhouden.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat te laten verwijderen door een goedgekeurd bedrijf. Vanwege de lithiumbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u het product van heeft gekocht.

15. Elektromagnetische Compatibiliteit

In dit gedeelte van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of om de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of onregelmatige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is erg belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is interfererende elektromagnetische energie (EM) uitgezonden van bronnen zoals radiostations, tv-stations, amateurradio (HAM)-zenders, walkietalkies, en mobiele telefoons. De interferentie (van radio-golfbronnen) kan ervoor zorgen dat uw apparaat zijn remmen loslaat, vanzelf beweegt, of in ongewenste richtingen beweegt. Het kan ook permanent het besturingssysteem van het apparaat beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Uw apparaat kan EMI tot een bepaald intensiteitsniveau weerstaan. Hoe hoger het immuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuniteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat nuttige bescherming zou bieden tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuniteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense elektromagnetische straling (EM) in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn duidelijk en gemakkelijk te vermijden, andere niet, waardoor blootstelling onvermijdelijk kan zijn. We geloven echter dat uw risico op EMI tot een minimum wordt beperkt door het volgen van de onderstaande waarschuwingen. De bronnen van uitgezonden EMI kunnen grofweg in drie typen worden geclassificeerd:

1. Handheld draagbare transceivers (zender-ontvangers met de antenne direct op het zendende apparaat gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: burgerband (CB) of handheld radio's, (beveiliging, brandweer en politie transceivers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Middelgrote mobiele transceivers, zoals die in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben meestal de antenne aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Langeafstands-zenders en transceivers, zoals commerciële omroepzenders (radio- en tv-uitzendantenne torens) en amateurradio's (HAM).

Andere soorten handheld-apparaten, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers, en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen voor uw elektrische rolstoel veroorzaken.

Elektromagnetische Interferentie (EMI)

EM-energie neemt snel toe naarmate u dichterbij een zendende antenne (bron) komt. De EM-velden van handheld radiofrequentiebronnen (transceivers) zijn van bijzonder belang. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie heel dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen bij het gebruik hiervan. Dit kan de beweging en remwerking van uw apparaat beïnvloeden.


Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van uw apparaat te voorkomen.

1. Bediening van handheld transceivers-ontvangers, zoals citizenband (CB) radio's, of het AANzetten van persoonlijke communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, terwijl uw apparaat is ingeschakeld, wordt afgeraden.
2. Wees u bewust van nabijgelegen zenders, zoals radio- of tv-stations, en probeer deze te vermijden.
3. Als er onbedoelde beweging of remontgrendeling optreedt, zet het apparaat dan zo snel mogelijk uit zodra dit veilig is.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of componenten, of het wijzigen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle incidenten van onbedoelde beweging of remontgrendeling aan de fabrikant, en noteer of er bronnen van EMI in de buurt waren.

16. Problemen oplossen

In het geval van een fout met uw elektrische rolstoel, kunt u naar de lampjes op uw joystickcontrole kijken om het probleem te diagnosticeren. Op de volgende pagina toont de tabel alle problemen die de elektrische rolstoel kan melden en leidt u naar een mogelijke oplossing.

Foutcode wordt hier
weergegeven

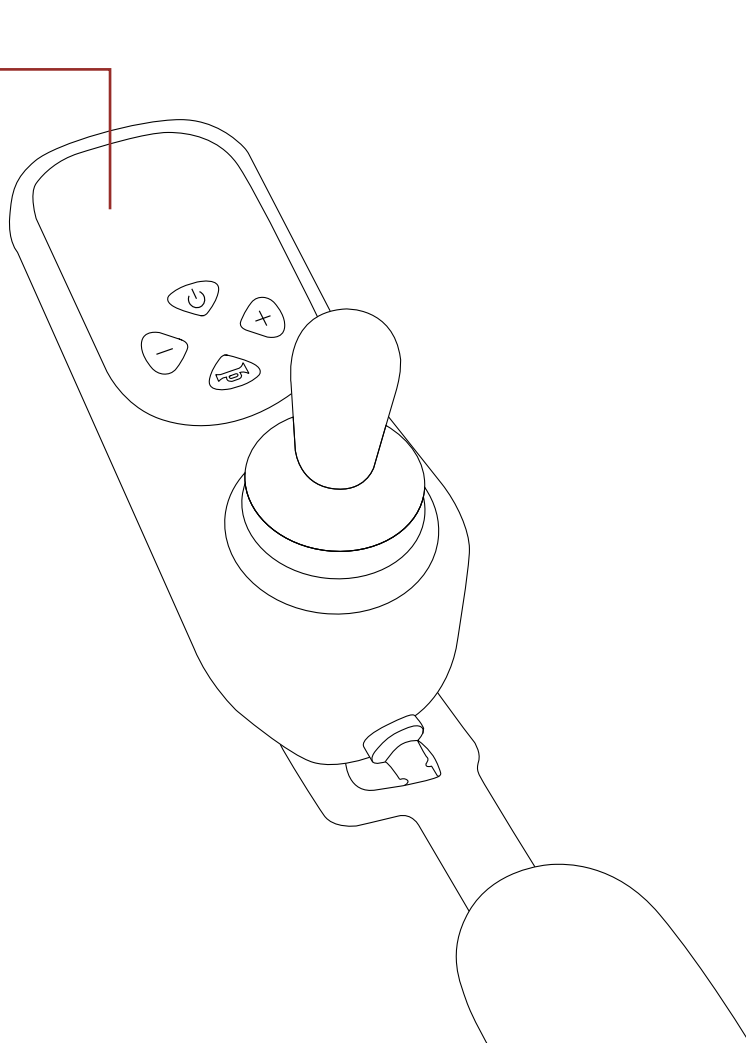

Code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
C1	Communicatiefout	Controleer de verbinding van de joystick naar de hoofdcontroller
C2	Stuurstangfout	Laat de joystick los en start opnieuw
C4	Verkeerde modus	Zet de hendel bij de achterwielen in de rijstand
C4 + Schildpad/konijn	Schildpad: de linker rem is niet ingeschakeld Konijn: de rechter rem is niet ingeschakeld	Controleer de schakelaars en verbindingen van de betreffende rem. Als het probleem aanhoudt, kan het een probleem met de controller zijn.
C5	Overbelasting	Zet het systeem uit en zorg ervoor dat de motor niet vastzit
C6	Mislukking van stroomaansluiting	Systeem opnieuw opstarten
C7	Overspanning	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie
C8	Onderspanning	Controleer of de batterij is opgeladen. Als het probleem aanhoudt, kan het een controllerprobleem zijn.
CE	Storing systeemparameters	Systeem herstarten
LC	Zelfvergrendelingsmodus	Houd de claxonknop 5 seconden ingedrukt
L1/R1	L1: Overstroom linker motor R1: Overstroom rechter motor	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie
L2/R2	L1: Overstroom linker motor R1: Overstroom rechter motor	Systeem opnieuw opstarten. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie als het probleem aanhoudt.
L3/R3	Oververhitting circuit	Schakel het systeem voor langere tijd uit voordat u opnieuw opstart
L6/R6	L6: Storing linker encoder R6: Storing rechter-encoder	Remverbindingen controleren
L7/R7	L7: Storing linker rem R7: Storing rechterrem	Remverbindingen controleren. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie als het probleem aanhoudt.
L8/R8	L8: Storing linker motor R8: Fout rechter motor	Controleer de motorboom. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie als het probleem aanhoudt.

17. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die u ontvangt of om een claim in te dienen kunt u contact opnemen met het bedrijf waar u het product heeft gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd

Rili Middle Rd
Yin Zhou Qu, Ning Bo Shi
Zhe Jiang Sheng, China



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24
1076DE Amsterdam
Netherlands



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

18. Specificaties

Bereik (tot)	19 km
Zwaarste onderdeel	15.8 kg
Topsnelheid	6 km/h
Seat Breedte	47 cm
Wielen	16.5 / 22cm
Wattuur batterij	288 Wh
Totaal gewicht (zonder batterij)	17 kg
Gewicht batterij	2 kg
Maximaal gewicht	150 kg
Batterij	24v 12ah Lithium
Motor	250w Borstelloos
Bodemvrijheid	10 cm
Maximale helling	13°
Draaicirkel	60 cm

Motion

www.motionhealthcare.nl

085-2129445