


XCELERATE

Handleiding

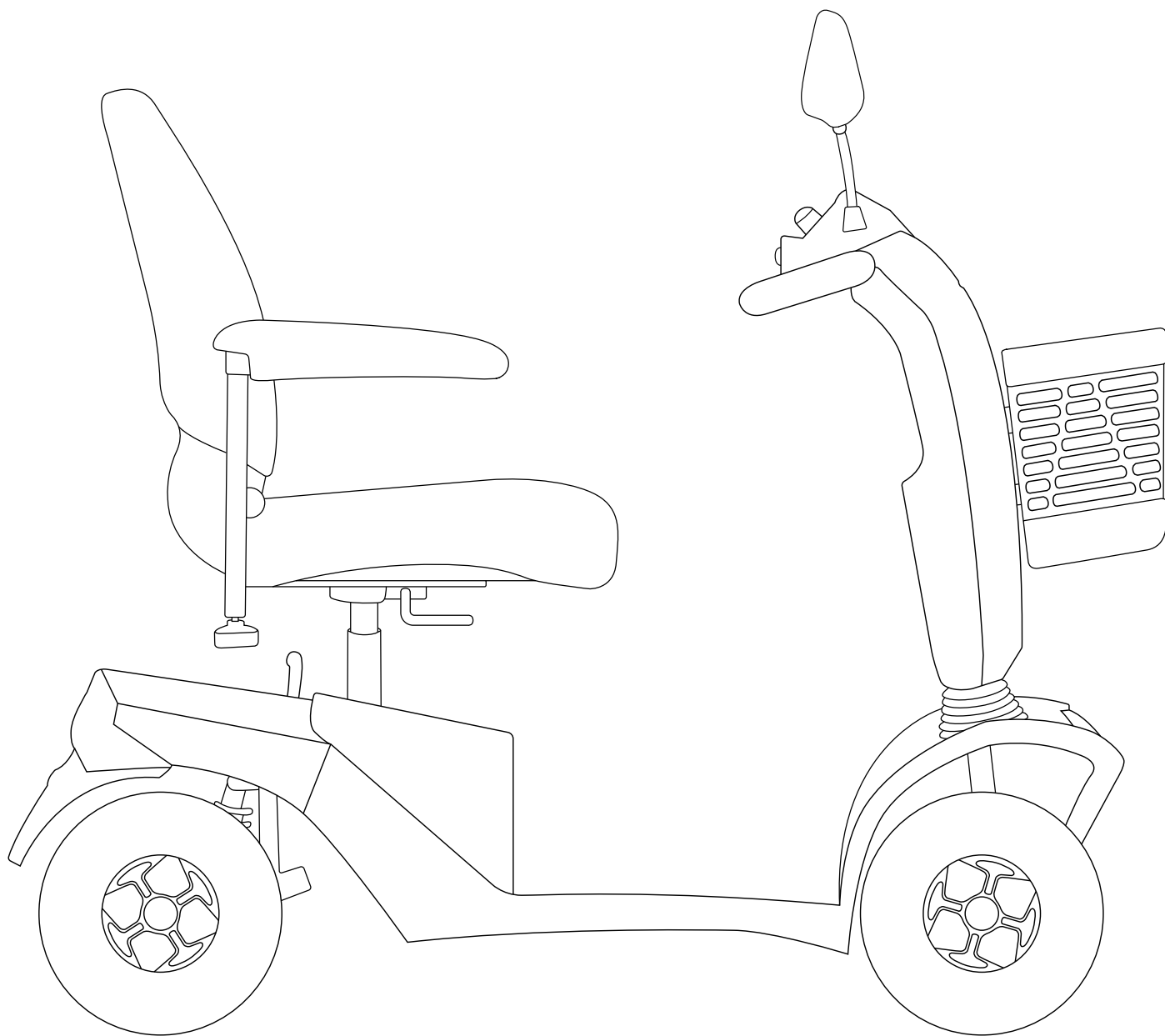

Motion

CE UK
CA

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees voordat u uw apparaat in gebruik neemt alle verstrekte informatie aandachtig door en zorg dat u deze begrijpt, dit is in uw eigen belang. Net als bij het besturen van elk ander voertuig dient u alleen te rijden als u volledig bij uw volle verstand bent, om de veiligheid te waarborgen. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of schade aan het product als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheidsproblemen of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Raadpleeg uw arts als u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen gebruikt, om na te gaan of eventuele bijwerkingen uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Gebruik uw apparaat niet als u onder invloed bent van alcohol, aangezien dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel. Vermijd elk gebruik – zoals krachttraining, sport, atletiek, het vervoeren, verplaatsen of slepen van voorwerpen – dat tot veiligheidsrisico's of overmatige belasting van het apparaat kan leiden.
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon. Neem geen passagiers mee.
- Wij raden u ten zeerste af om te roken terwijl u op uw apparaat zit. Als u toch besluit te roken terwijl u op uw apparaat zit, dient u zich aan de volgende veiligheidsrichtlijnen te houden: Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op brand te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen te allen tijde schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, indien u deze aantreft, contact op met de leverancier om ze zo snel mogelijk te laten vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan uw apparaat aan. Neem voor de installatie van accessoires contact op met een erkend bedrijf.
- Het toevoegen van accessoires aan uw apparaat kan bepaalde specificaties beïnvloeden, zoals het totale gewicht, de afmetingen en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige van deze veranderingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de nabijheid van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat u uw apparaat niet meer goed kunt bedienen.
- Zet het apparaat niet in de „vrijloopmodus“ terwijl het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de „vrijloopmodus“ in- of uitschakelt.
- Als u verwacht dat u langere tijd in een stilstaande positie zult blijven zitten, schakel dan het apparaat uit. Zo voorkomt u onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om andere apparaten dan uw eigen apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat uit zichzelf ongecontroleerd gaat rollen, mag u de step nooit in de „vrijloopstand“ zetten op een helling of afdaling.
- Gevaar voor wurging! Houd er rekening mee dat kleding, sleutelkoorden, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of bij u heeft terwijl u op uw apparaat zit of het bedient, verstrikt kunnen raken in de armleuningen of de gashendel.
- Gebruik geen accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren, om onbedoelde of ongecontroleerde bewegingen van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, uw kleding en alle andere voorwerpen tijdens het rijden uit de buurt van de wielen. Zorg ervoor dat er tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat aan slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen in de wielen verstrikt raken.
- Verwijder geen zekeringen uit de accu of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met de verkoper.
- Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om gewicht op te dragen, aangezien het apparaat hierdoor kan kantelen.
- Lees vóór gebruik zorgvuldig alle belangrijke waarschuwingen en instructies op het apparaat door.
- Vermijd waar mogelijk blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, strooizout of stilstaand water.
- Zorg ervoor dat het product schoon en droog blijft en bewaar het op een schone en droge plaats.

Inhoud

Inleiding	4
Veiligheidsinformatie	6
Aan de slag	8
Batterij en opladen	10
Demontage en montage	12
Gebruik van de scooter	14
Extra instellingen	17
Reiniging, onderhoud en afvalverwerking	18
Inspectieplan	20
Elektromagnetische compatibiliteit	21
Problemen oplossen	23
Garantie	25
Technische gegevens	26
Opmerkingen	27



WAARSCHUWING Wijst op mogelijke gevaren voor de gebruiker en/of het product.



SUGGESTIE/TIP Algemene suggesties en tips voor het gebruik van dit product.

Inleiding



Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Xcelerate Scootmobiel.

Uw nieuwe hulpmiddel is ontworpen om personen die minder goed ter been zijn, zowel binnenshuis als buitenshuis te vervoeren, mits zij qua gezichtsvermogen, motorische vaardigheden en cognitieve vermogens in staat zijn het hulpmiddel veilig te bedienen.

Wij zijn er trots op dat wij veilige, comfortabele en hoogwaardige producten leveren, en ons doel is om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent. Wij hopen van harte dat wij daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare-apparaat.

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding aandachtig door en volg ze op voordat u de verschillende functies van uw apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

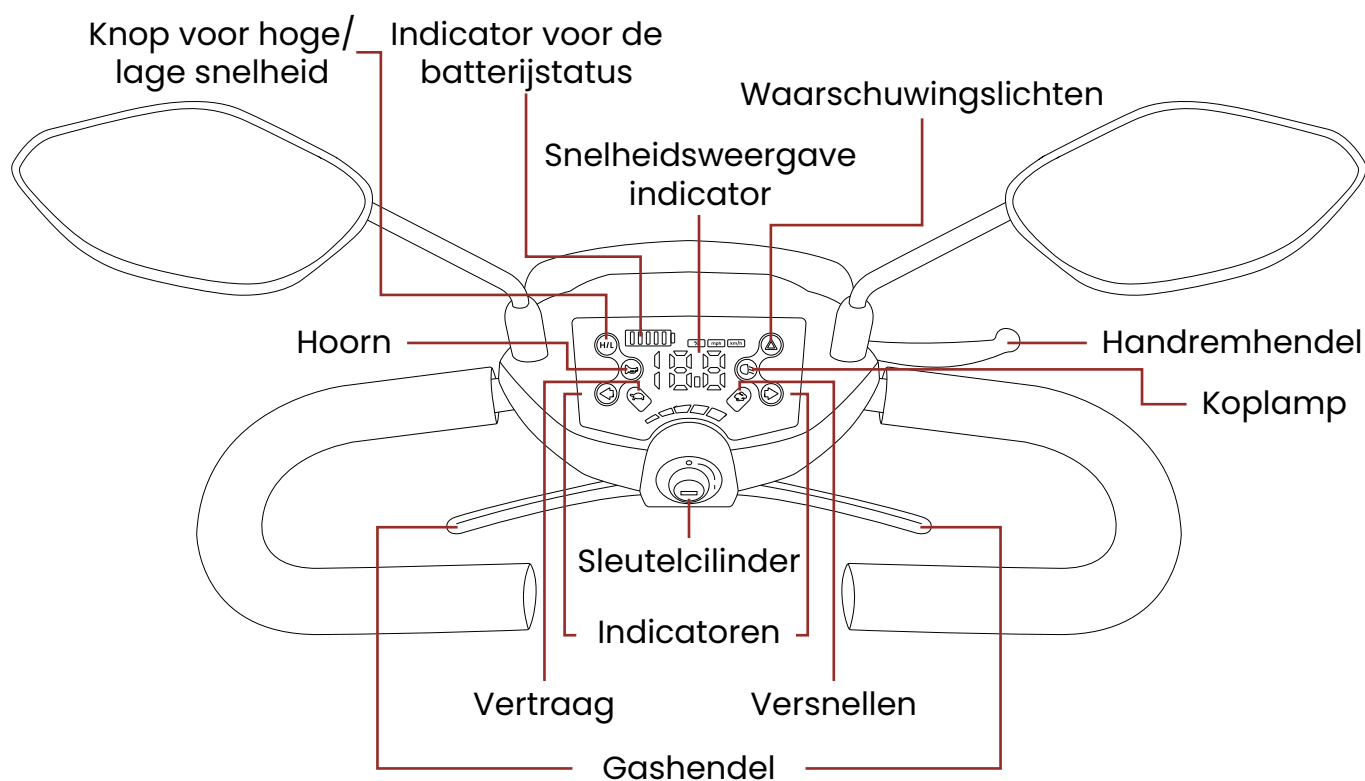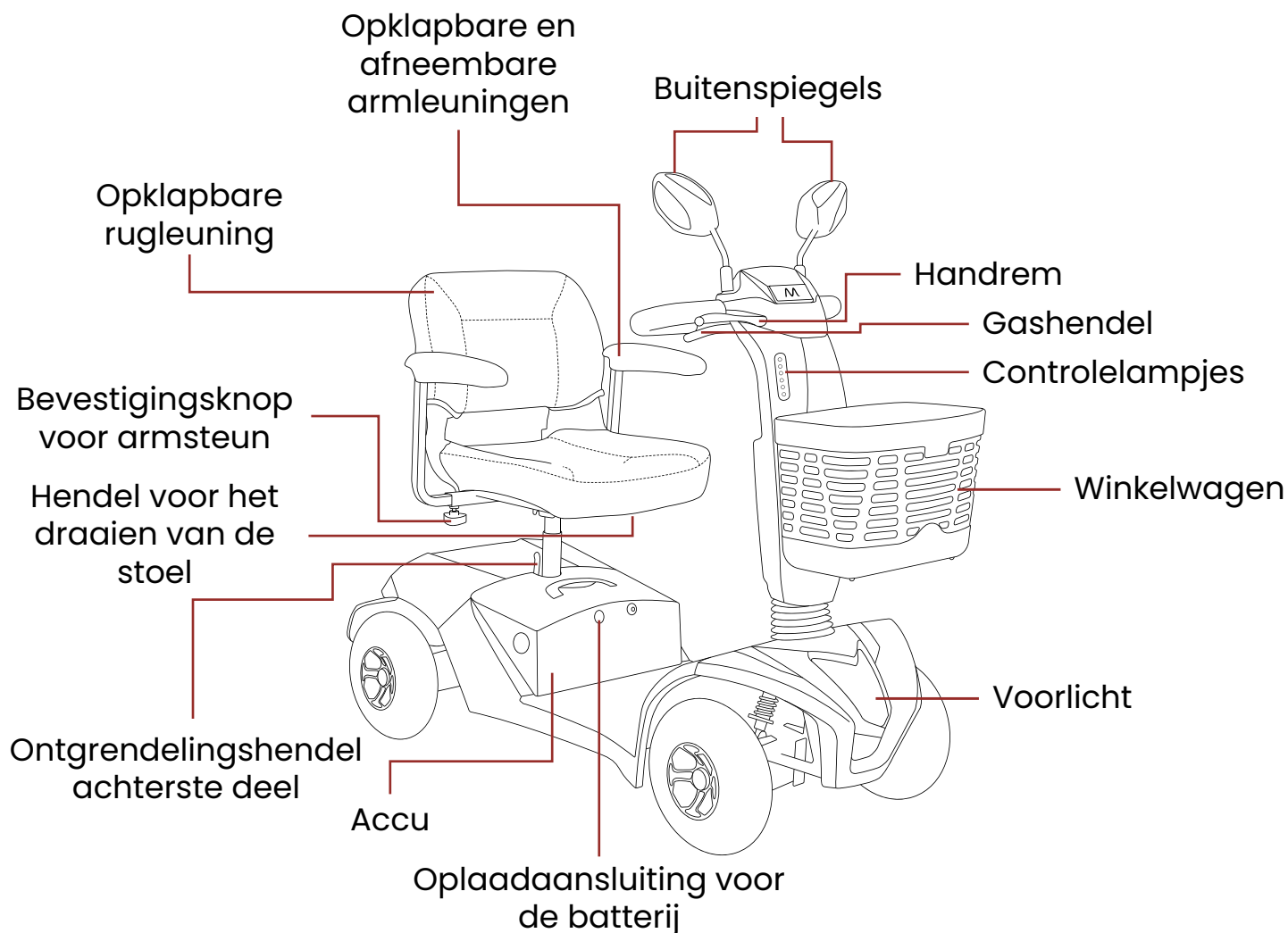

Veiligheidsinformatie

Op- en afstappen

Zet uw hulpmiddel zo dicht mogelijk bij de stoel waaruit u wilt overstappen en schuif zo ver mogelijk naar achteren op het zitvlak; zo verkleint u het risico dat u de stoel mist of valt. De juiste manier van overstappen hangt af van uw persoonlijke situatie, dus overleg met uw zorgverlener om te leren hoe u uw lichaam moet positioneren en hoe u zichzelf tijdens het overstappen kunt ondersteunen.

We raden u ook aan om iemand om hulp te vragen totdat u zeker weet dat u zelfstandig en veilig kunt overstappen.



WAARSCHUWING : Zorg er voor het veilig bevestigen of losmaken altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Als u dit niet doet, kan het apparaat onbedoeld gaan bewegen.

Veilig rijden

Houd tijdens het rijden met uw voertuig altijd rekening met het volgende:

- Houd je altijd aan alle lokale verkeersregels voor voetgangers. Het kan voor anderen moeilijk zijn om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot de weg vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, verlichting en veiligheidsvlaggen wordt aanbevolen.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om het apparaat goed te leren kennen voordat u gaat rijden.
- Verken de omgeving waar u het apparaat wilt gebruiken. Let op mogelijke gevaren en leer hoe u deze kunt vermijden.
- Gebruik je apparaat nooit op trappen of roltrappen.
- Om kantelen te voorkomen, moet u uw snelheid verminderen bij het draaien en geen scherpe bochten maken. Zorg ervoor dat uw zwaartepunt tijdens het draaien stabiel blijft en vermijd het verschuiven van uw gewicht in de tegenovergestelde richting van de bocht.
- Rijd bij het oprijden van hellingen of lage stoepranden recht vooruit, met de wielen loodrecht op de helling en/of stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd contact maken met de helling of stoeprand. Om het risico op vallen te verminderen, mag u niet schuin oprijden; zorg ervoor dat niet één wiel of één kant van het hulpmiddel als eerste de helling of stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het oprijden van een helling of stoeprand.
- Rijd niet over mogelijk gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, zoals bijvoorbeeld gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer het apparaat in beweging te houden wanneer u een helling oprijdt. Als u moet stoppen, rijd dan langzaam weer weg en versnel vervolgens voorzichtig.
- Rijd bij het afdalen van een helling zo langzaam mogelijk. Als u sneller naar beneden gaat dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat tot stilstand te brengen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de snelheid tijdens het afdalen te regelen.

- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van uw apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waaronder u de helling oprijdt.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd bij het achteruitrijden met een lagere en constante snelheid. Stop regelmatig en controleer of de weg vrij is van obstakels. Om kantelen te voorkomen, mag u niet achteruit een helling of oprit afrijden.
- Vermijd elke verandering van houding of beweging die uw zwaartepunt kan verschuiven terwijl het apparaat in beweging is.
- Houd er rekening mee dat een verlaagde stoeprand of een kleine oneffenheid onderaan een helling de voorwielen kan blokkeren, waardoor het apparaat naar voren kan kantelen.

Vervoer


Houd bij het vervoeren van uw apparaat altijd rekening met het volgende:

- Gebruik uw apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zorg ervoor dat het apparaat en de batterijen tijdens het vervoer goed zijn vastgezet. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met brandbare of ontvlambare voorwerpen.
- Plaats het apparaat nooit op de voorstoel van een auto, aangezien het kan verschuiven en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op je apparaat zitten terwijl je in een rijdend voertuig zit.
- Sleep uw apparaat niet achter een auto aan. Hierdoor kan de maximale snelheid worden overschreden, wat kan leiden tot schade aan cruciale onderdelen van het apparaat.

Aan de slag

De accu voorbereiden

- Verwijder vóór gebruik de borgmoer en druk op de knop van de stroomonderbreker om de accu in te schakelen. (A)
- Volg de instructies op het etiket van de batterij (afb. 1).

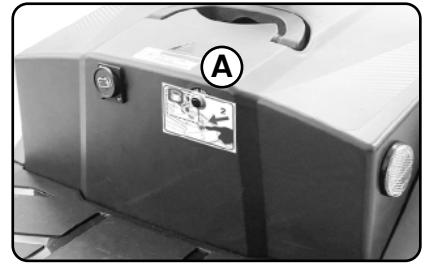

Afb. 1

Hoofdschakelaar

- Om het apparaat in te schakelen: draai de sleutel met de klok mee (afb. 2).
- Om uit te schakelen – Draai de sleutel tegen de klok in (afb. 2).
- Na het inschakelen brandt het led-paneel 2 seconden lang volledig voordat het in de bedrijfsmodus gaat (afb. 3).




Afb. 2


Afb. 3

Handleiding voor LED-paneelindicatoren

- Druk op de knop [H/L] om de modus voor lage snelheid in te schakelen; het lampje naast de knop gaat branden.
- Druk op de knoppen [↔] om de richtingaanwijzers in te schakelen; het lampje naast de knop gaat branden en de richtingaanwijzers gaan knipperen.
- Druk op de knop [⏏] om over te schakelen naar de koplampstand; het lampje naast de knop gaat branden (afb. 4).
- Druk op de knop [▲] om de alarmlichten in te schakelen; de lampjes naast de knoppen voor de linker- en rechterraichtingaanwijzer gaan knipperen en alle richtingaanwijzerlampjes gaan knipperen.

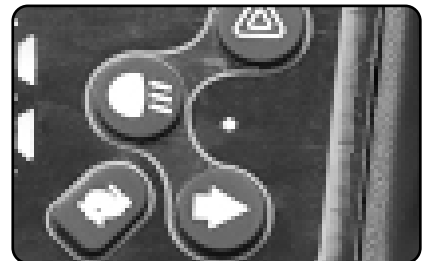

Afb. 4

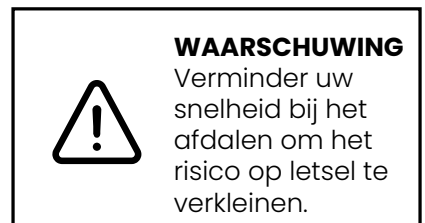

De snelheid aanpassen

- Om de snelheid te verhogen, drukt u op de haasknop [⚡] (afb. 5).
- Om de snelheid te verlagen, druk je op de schildpadknop [🐢].



Afb. 5

Instelling snelheidsschakelaar ([H/L]-knop)

- Modus voor lage snelheid: Druk op de knop [H/L]. Het lampje boven de knop gaat branden en de snelheid wordt teruggebracht tot de helft van de oorspronkelijke snelheid (afb. 6).
- Snelheidsmodus: Druk nogmaals op de knop [H/L]. Het lampje gaat uit en het apparaat keert terug naar de oorspronkelijke snelheid.



Afb. 6

Bedrijfsmodus

- Als de scooter rijdt, geeft het ledlampje de snelheid weer (afb. 7.1).
- Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, schakelt het LED-display over naar de weergave van het batterijniveau (afb. 7.2).



Afb. 7.1



Afb. 7.2

Slaapstand

- Als de step 15 minuten lang niet wordt gebruikt, schakelt hij over naar de slaapstand. Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld en de step kan niet meer worden gebruikt. Bij het overschakelen naar de slaapstand laat de step een lange pieptoon horen.
- Om het apparaat weer op te starten: schakel de hoofdstroom uit en weer in met de schakelaar.

Gebruiksaanwijzing voor de indicator

- Druk op een van de [↔]-knoppen om de richtingaanwijzers in te schakelen; er klinkt een waarschuwingssignaal, het indicatielampje gaat branden en de betreffende richtingaanwijzer gaat knipperen. Druk op de knop om ze uit te schakelen.

Opmerking: Na 30 seconden gaan de indicatoren automatisch uit.

- Druk op de knop [▲] om de alarmlichten in te schakelen; er klinkt een waarschuwingssignaal, beide indicator-leds gaan branden en beide richtingaanwijzers gaan knipperen. Druk op de knop om ze uit te schakelen.

Opmerking: Wanneer de hoofdstroom wordt uitgeschakeld of de scooter in de slaapstand gaat, blijven de alarmlichten knipperen, terwijl de overige functies worden uitgeschakeld.

Statusweergave					
Capaciteit (%)	80-100	60-80	40-60	20-40	<20

Batterij-indicator

- Raadpleeg de volgende tabel op basis van het werkelijke vermogensniveau;

Waarschuwing voor lage batterijspanning

Zodra het batterijniveau onder de 20% komt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Laad de step zo snel mogelijk op.



OPMERKING: Het bereik wordt beïnvloed door de ontladingsnelheid van de accu. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de temperatuur, de rij- en wegomstandigheden, de bandenspanning en het gewicht van de gebruiker.

Batterij en opladen





TIP: Nieuwe batterijen moeten vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om ze volledig te activeren.

Batterijen opladen

Bij het opladen van de accu's zijn er twee oplaadpoorten beschikbaar. Volg de instructies voor het opladen.

1. Open de laadaansluiting (die zich op de stuurstang **(B)** of de accu bevindt **(C)**) en steek de stekker van de lader erin; steek vervolgens de stekker aan de netzijde in een stopcontact.

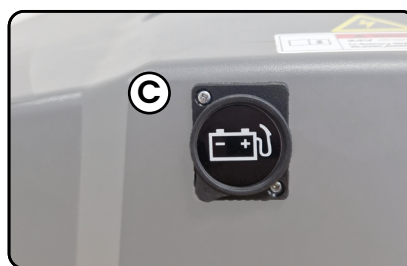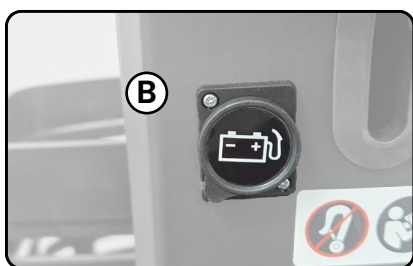

2. Controleer of het stroomlampje **(D)** op de oplader blauw gaat branden, samen met het statuslampje **(E)**



3. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact zodra deze volledig is opgeladen.

Status van de opladerindicator

Geen licht	Geen verbinding
Oranje stabiel	Opladen
Oranje knipperlicht	Fout
Groen	In rekening gebracht



TIP: Laad de accu's minstens één keer per maand volledig op, of vaker als je de step regelmatig gebruikt. Laad de accu's op na elke lange rit (van meer dan ~3 km).

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het stroomlampje brandt niet	Controleer of de verbinding goed is
De oplaadindicator brandt niet	Controleer of de verbinding goed is Neem contact op met een erkende partner
Het oranje lampje blijft branden en springt niet op groen	De batterij is mogelijk defect. Neem contact op met een erkende Motion-partner
Een continu oranje licht springt onmiddellijk op groen	De batterij is mogelijk volledig opgeladen; neem anders contact op met een erkende Motion-partner

De levensduur van de batterij kan worden beïnvloed door de temperatuur, het lichaamsgewicht van de gebruiker, de omstandigheden waarin de batterij wordt bewaard en de manier waarop deze wordt opgeladen.

Als algemene regel geldt dat u uw batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd tot een minimum te beperken. Probeer ze op te laden wanneer u uw apparaat niet verwacht te gebruiken. Zorg ervoor dat de batterijen ten minste om de 4 tot 6 weken volledig zijn opgeladen wanneer u uw apparaat niet gebruikt. Als u de batterijen niet oplaadt, zullen ze onherstelbaar beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat u uw accu's in een droge, goed geventileerde ruimte bewaart en ze niet voor langere tijd in koude omstandigheden (3 °C of lager) laat liggen, aangezien de accu dan niet meer kan worden opgeladen en dit tot blijvende schade leidt.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er is sprake van explosiegevaar.
- Gebruik geen accu's met een verschillend ampère-uurvermogen (Ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de accupolen. Contact met gereedschap kan een elektrische schok veroorzaken.
- Batterijen bevatten brandbaar materiaal. Stel ze niet bloot aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met brandbare of ontvlambare voorwerpen.
- Neem voor het afvoeren of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u ze hebt gekocht.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet de accu's op te laden terwijl het apparaat in gebruik is.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of -klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een rit begint, om te voorkomen dat u met een lege accu komt te staan.
- Probeer de batterijen niet uit de behuizing te halen. Dit mag alleen door een erkende partner worden gedaan.
- Bedek de oplader of de batterijen tijdens het opladen niet met voorwerpen.

Demontage en montage


Opbergmand

Demontage

- Til de voorste mand omhoog. (Afb. 8)

Montage

- Duw de voorste mand naar beneden.

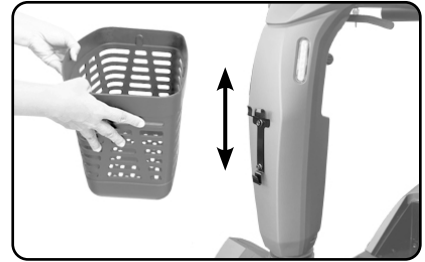

Afb. 8


Zitting

De zitting verwijderen

- Trek de hendel voor het draaien van de stoel omhoog (afb. 9) en til de stoel omhoog (afb. 10).

De stoel installeren

- Trek de draaihendel van de zadel omhoog (afb. 9) en plaats het zadel in de zadelpen; laat de draaihendel los zodra het zadel volledig is vastgeklit.

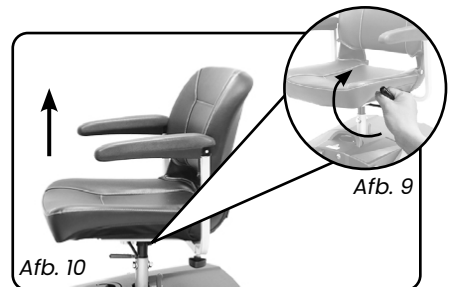

Afb. 10

Afb. 9


Batterij

De accubak verwijderen

- Til de handgreep (F) op en til de accubak op om deze te verwijderen (afb. 11).



TIP Til de accubak schuin omhoog zoals afgebeeld, zodat u deze gemakkelijk kunt verwijderen.

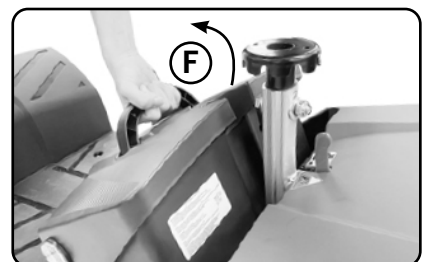

Afb. 11

De accubak monteren

- Laat de accubak met behulp van het handvat voorzichtig in de gleuf zakken. Zodra deze op zijn plaats zit, drukt u het handvat naar beneden totdat u een klik hoort. (F)


Voor en achter

Het scheiden van het voorste en achterste gedeelte

- Houd de zadelpen en de ontgrendelingshendel van het achterframe vast en til ze vervolgens omhoog (afb. 12). (G)

De voor- en achterkant weer in elkaar zetten

- Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om het geheel weer in elkaar te zetten.
- Zorg ervoor dat het voorste en achterste deel goed zijn uitgelijnd en stevig aan elkaar zijn bevestigd. Haak de N-vormige haak aan het voorste deel stevig vast aan de achterste framebalk (afb. 13).

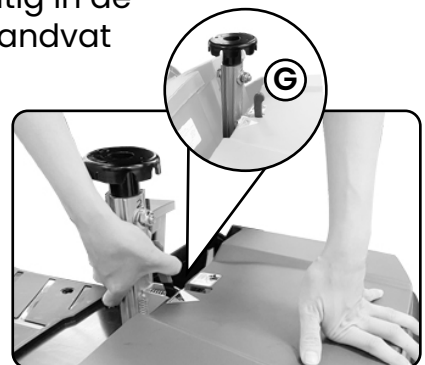

Afb. 12



Afb. 13



Afb. 13.1



Afb. 13.2



TIP Gebruik bij het demonteren, monteren of vervoeren van de step de handgrepen aan de onderkant van de achterste spatborden en aan de onderkant van de stuurpen.

Stuurknuppel


De helmstok inklappen

- Houd de hendel voor het verstellen van de duwstang vast en druk deze naar beneden (afb. 14), en kantel de duwstang vervolgens langzaam naar de ingeklapte stand (afb. 15).

De helmstok uitklappen



Afb. 14

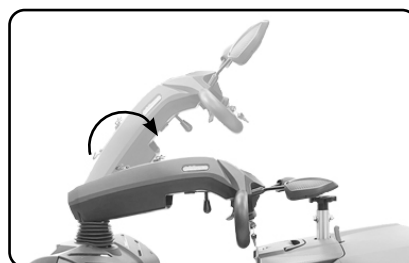

Afb. 15

- Om het weer uit te vouwen, herhaal je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.


Zadelpen (optioneel)

Demontage

- Trek de vergrendeling van de zadelpen naar buiten (afb. 16.1).
- Verwijder de zadelpenpen (afb. 16.2).
- Nadat de zadelpenpen is verwijderd, kan de zadelpen omhoog of omlaag worden versteld (er zijn drie hoogtestanden beschikbaar) of worden verwijderd (afb. 16.3).



Afb. 16.1

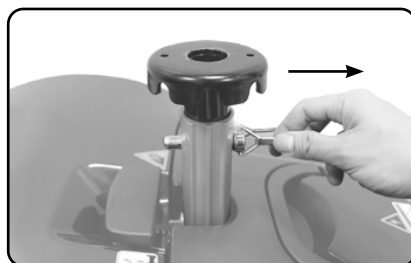

Afb. 16.2



Afb. 16.3

Montage

- Volg bij het weer in elkaar zetten de stappen in omgekeerde volgorde.



WAARSCHUWING Zorg er altijd voor dat de zadelpenpen goed vastzit voordat u het product gebruikt.




WAARSCHUWING Wees voorzichtig bij het verstellen van de zadelpen om te voorkomen dat u uw vingers beknelt.

Gebruik van de scooter

Gasklep

- Trek aan de 'gashendel' om vooruit te rijden (afb. 17). **(H)**
- Trek de 'gashendel' naar achteren om achteruit te rijden (afb. 17). **(I)**

Wanneer de gashendel volledig wordt losgelaten, remt de scooter af tot hij tot stilstand komt en gaan de remlichten branden.

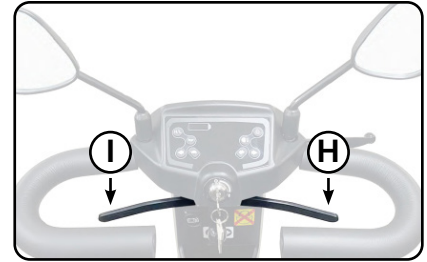

Afb. 17

Noodhandrem


- Zodra u het gashendel loslaat, remt de scooter af. De 'noodhandrem' **(J)** kan indien nodig worden gebruikt om de snelheid nog verder te verminderen (afb. 18).



Afb. 18

Afstelling van de stuurhoek

- Trek de hendel voor het afstellen van de stuurstang naar de gewenste hoek en laat los om deze vast te zetten (afb. 19).

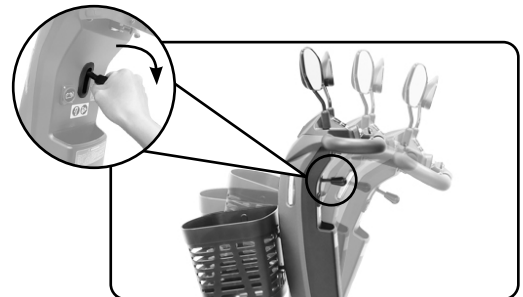

Afb. 19

WAARSCHUWING



- Leun niet tegen de gashendel en hang er geen voorwerpen aan.
- Trek niet met beide handen tegelijk aan de gashendel.
- Let tijdens het achteruitrijden goed op uw omgeving om ongelukken te voorkomen.
- Pas de stuurhoek niet aan tijdens het rijden om ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u stevig op het zadel zit terwijl de scooter rijdt.
- Ga niet op de treeplank staan.

Hoekverstelling van de armsteun

- Trek de armleuning recht omhoog om deze verticaal te zetten (afb. 20).
- Draai aan de schroef **(K)** onder de armleuning om de kantelhoek aan te passen (afb. 21).
- De armsteun kan verticaal worden gezet bij het op- of afstappen van de scooter, zodat u gemakkelijker kunt overstappen.




Afb. 20



Afb. 21

Afstelling van de stoelrotatie

- Trek de verstelhendel aan de linkerkant van de stoel omhoog (afb. 22) en draai de stoel naar links of rechts tot de gewenste hoek.
- De stoel vergrendelt zich om de 45°. Trek aan de hendel om de draaihoek van de stoel verder aan te passen, indien gewenst.

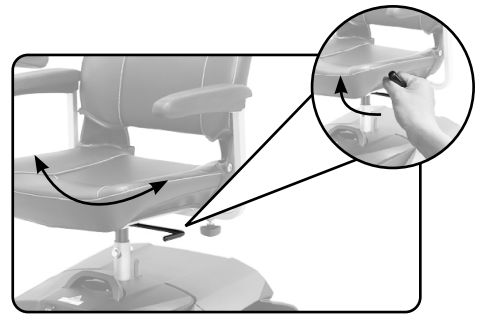


Afb. 22



WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de stoel naar voren is gedraaid voordat u de scooter gebruikt.

Verstelling van de armsteun van de stoel

- Draai de driehoekige schroeven los (L) (afb. 23) waarmee de armleuningen aan de achterkant van de stoel zijn bevestigd; vervolgens kunnen de armleuningen worden versteld of verwijderd (afb. 23). (M)
- De verstelbaarheid van de armleuning is beperkt. Volg de instructies op het etiket en zorg ervoor dat de armleuning stabiel blijft door de breedte niet verder te verstellen dan de 'MAX'-lijn (afb. 24).

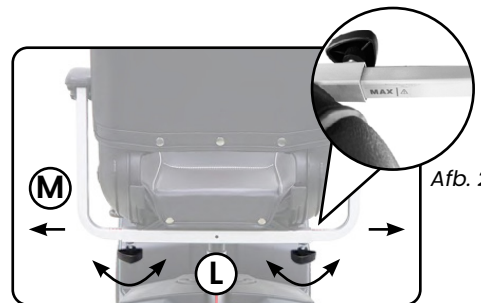


Afb. 23

Afb. 24

Verstelling van de zithoogte


- Verwijder het zadel en haal vervolgens de zadelpennen (N) uit de zadelpen (afb. 25).
- Stel de zadelpen (O) af op een van de drie gewenste hoogtes, steek de zadelpennen (N) erin om hem vast te zetten en plaats het zadel weer terug.
- Zie pagina 13 voor meer gedetailleerde stappen

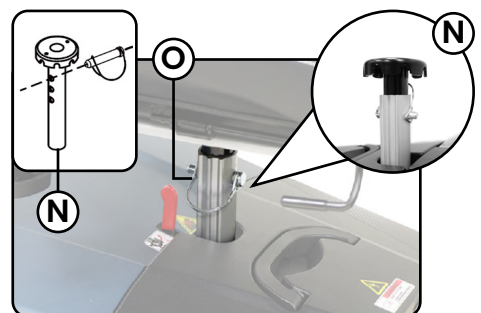

Afb. 25

Verstelling van de stoel naar voren/naar achteren

- Til de hendel voor het verstellen naar voren/naar achteren aan de rechterkant van de stoel op om de stoel naar voren of naar achteren te schuiven (afb. 26).

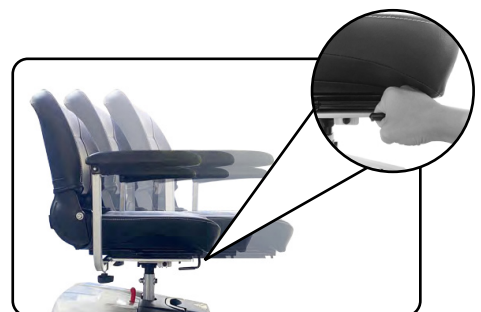

Afb. 26



WAARSCHUWING Ga tijdens het afstellen niet op de stoel zitten om instabiliteit en mogelijk letsel te voorkomen.

Vrijloop (N-D-hendel)

- Als de hendel in de stand Drive (D) staat, kan de scooter worden bestuurd (afb. 20).



De stand Drive (D) wordt gebruikt tijdens het rijden op de scooter. Zorg ervoor dat de vrijloophendel in de stand Drive (D) staat voordat u de scooter start.

- Als de hendel in de stand Neutraal (N) staat, kan de scooter zonder motorvermogen handmatig worden verplaatst (afb. 21).



TIP: De stand 'Neutraal' (N) wordt gebruikt wanneer je de step handmatig voortduwt.



WAARSCHUWING

- Stel de stoel niet af tijdens het rijden.
- Vrijlopen wordt alleen aanbevolen op vlakke oppervlakken. Laat de step nooit op een helling staan met de motor uitgeschakeld.
- Ga niet op de scooter zitten wanneer u de versnellingspook in de neutraalstand (N) zet.
- Zet de scooter in de stand 'Neutral' (N) en schakel vervolgens over naar 'Drive' (D). Zorg ervoor dat de scooter is uitgeschakeld.

Systeem voor veiligheidssnelheidsregeling

Wanneer u de scooter voortduwt (in de stand Neutraal (N)), wordt het veiligheidssysteem voor snelheidsregeling geactiveerd en zal de scooter automatisch vaart minderen als de snelheid te hoog is.

Vertraag bij het duwen en houd meer ruimte over om te draaien.


Extra instellingen

Schakel 'km/h' om naar 'mph'

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Houd de knoppen [**H/L**] en [] tegelijkertijd ingedrukt en draai vervolgens de sleutel om het apparaat in te schakelen.
3. Na 2 seconden begint het instellingslampje te knipperen. Laat de knoppen [**H/L**] en [] binnen 10 seconden los om de instellingsmodus te openen.
4. Druk op de knop [] of [] om de modus 'km/h' of 'mph' te selecteren.
5. Houd de knoppen [**H/L**] en [] 2 seconden ingedrukt of wacht 10 seconden zonder op een knop te drukken om de instellingsmodus te verlaten en terug te keren naar de gebruiksmodus.

Instellingen voor waarschuwingsgeluiden

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Houd beide indicatorknoppen [] tegelijkertijd ingedrukt en draai vervolgens de sleutel om het apparaat in te schakelen.
3. Na 2 seconden begint het instellingslampje te knipperen. Laat beide knoppen [] binnen 10 seconden los om de instellingsmodus te openen (afb. 22.1).
4. Selecteer de functie die u wilt aanpassen en druk vervolgens op de bijbehorende volumeknop om de instellingsmodus te openen (afb. 22.2). Op het LED-schermd wordt het ingestelde volumeniveau weergegeven en wordt het geselecteerde volumegeluid afgespeeld. Gebruik de pijlknoppen naar links en naar rechts [] om het gewenste volume in te stellen.

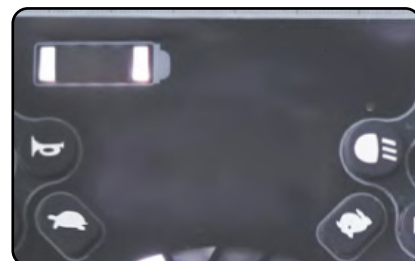

Afb. 22.1



Afb. 22.2

Opmerking: Druk op [] om het volume te verlagen en op [] om het volume te verhogen.

5. Houd beide knoppen [] 2 seconden ingedrukt of laat het apparaat 10 seconden inactief zonder op een knop te drukken om de instellingsmodus te verlaten en terug te keren naar de gebruiksmodus.

Functie	Volume-instelling	Standaardwaarde	Instructies voor het regelen van het volume
Waarschuwingsgeluid bij achteruitrijden		4	5 > Luid 4 > Gemiddeld 3 > Laag 2 > Zeer laag 1 > Uit
Waarschuwingsgeluid bij lage batterijspanning	H/L	1	
Waarschuwingsgeluid richtingaanwijzer		4	
Waarschuwingsgeluid parkeerlicht		4	

Reiniging, onderhoud en afvalverwerking

Schoonmaken

Bekleding van de stoelen:

- Gebruik alleen een vochtige doek en een kleine hoeveelheid zeep om de zitting af te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze het materiaal van de zitting kunnen beschadigen.

Frame/steunbeugels:

- Het frame en de bekabeling kunnen voorzichtig met een vochtige doek worden afgeveegd. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze de coating beschadigen.
- Autopoetsmiddel kan worden gebruikt om de lak van het frame en de kuip in perfecte staat te houden.



WAARSCHUWING

- Gebruik geen tuinslang, hogedrukreiniger of spetterend water om je scooter rechtstreeks nat te maken.
- Gebruik bij het schoonmaken geen schurende of schuurmiddelen of vloeistoffen.

Laat uw apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken.
- Zorg ervoor dat u tijdens het schoonmaken geen elektrische aansluitingen raakt.

Onderhoud

- Zorg ervoor dat uw apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Naast het schoonmaken en de regelmatige controles wordt aangeraden om al het onderhoud door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Het wordt aangeraden om uw apparaat ten minste om de 12 maanden te laten onderhouden.



WAARSCHUWING Schakel altijd de stroom uit en zorg ervoor dat de vrijloophendel in de stand Drive (D) staat voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Afvoer

- Het wordt aanbevolen om uw apparaat via een erkend bedrijf af te voeren. Vanwege de lithiumbatterij in uw apparaat wordt het beschouwd als gevaarlijk afval en moet het op de juiste wijze worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

Stalling voor scooters

- Bewaar de step altijd op een droge plek.
- Als het apparaat langer dan een week wordt opgeborgen, moet u de batterij loskoppelen.
- Bewaar de scooter niet op een plek waar hij wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, vocht, olie, zuren of basen.
- Aanbevolen opslagtemperatuur: -30 °C tot +50 °C
- Aanbevolen luchtvochtigheid bij opslag: 25% tot 85%

Batterijopslag

- Opslagtemperatuur: -30 °C tot +50 °C (onbeperkt)
- Bij opslag gedurende;
 - langer dan 3 maanden: -20 °C tot +20 °C
 - minder dan 3 maanden: -20 °C tot +40 °C
 - minder dan 1 maand: -20 °C tot +50 °C
- De transporttemperatuur mag niet hoger zijn dan +60 °C



WAARSCHUWING

- Rijd niet op gras, zand of oneffen ondergrond. Regelmatig onderhoud is vereist.
- Gebruik geen water, olie of andere chemicaliën om de step schoon te maken, om de elektronische onderdelen te beschermen. Gebruik een zachte, droge of vochtige doek.
- Was het apparaat niet onder een directe waterstraal, aangezien dit storingen in het elektrische circuit kan veroorzaken.
- Gebruik geen benzine of vluchtige oplosmiddelen, aangezien deze de afdekkingen kunnen vervormen of beschadigen.
- Laat de scooter onderhouden door uw erkende Motion-partner. Onjuiste afstellingen of onderhoud door een niet-erkende dealer kunnen de werking van de scooter aantasten en de garantie ongeldig maken.
- Veeg de banden alleen schoon met water. Gebruik geen reinigingsmiddelen, aangezien deze de banden kunnen beschadigen of de grip kunnen verminderen.
- Schakel bij het onderhoud of de controle van de scooter de stroom uit en zorg ervoor dat de vrijloophendel in de stand Drive (D) staat om wegrollen te voorkomen.
- Als u scheuren, beschadigingen of een te lage bandenspanning of te weinig profiel in de banden opmerkt, ga dan naar de erkende partner waar u de scooter hebt gekocht voor vervanging of reparatie.

Inspectieplan

Controleer je scooter altijd voor elke rit.

Onderhoudswerkzaamheden	Inspectie	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks	Wat te doen als de keuring niet wordt goedgekeurd
Vrijloophendel	Controleer of het goed werkt	✓			• Neem contact op met een erkende partner
Hoorn	Controleer of het goed werkt	✓			• Neem contact op met een erkende partner
Gaskleppen	Trek aan de hendel om de beweging van de step te testen	✓			• Neem contact op met een erkende partner
Elektromechanische rem en noodrem	Trek aan de wimpelhendel en laat los om te controleren of de rem werkt. Trek aan de noodremhendel om te controleren of deze werkt	✓			• Neem contact op met een erkende partner
Batterij-indicator	Controleer of de batterij-indicator wordt weergegeven en of deze aangeeft dat de batterij bijna leeg is	✓			• Neem contact op met een erkende partner als de accu-indicator niet werkt • Laad de batterij op als deze bijna leeg is
Achteruitkijkspiegels	Controleer of de onderdelen schoon zijn, goed vastzitten en niet speling vertonen	✓			• Verwijder vuil met een vochtige doek • Draai de schroef of de klemstang waarmee de spiegels vastzitten vast
Verlichting	Controleer of alle lichten goed werken: koplampen, richtingaanwijzers, alarmlichten en achterlichten	✓			• Neem contact op met een erkende partner
Sneltoetsen	Controleer of het goed werkt		✓		• Neem contact op met een erkende partner
Armsteunen	Controleer of de onderdelen schoon en goed vastgedraaid zijn en niet speling vertonen		✓		• Neem contact op met een erkende partner
Wielen/banden	Pomp de banden op tot de juiste spanning en controleer deze; • de wielen draaien zonder te slingeren • het profiel van de band is minimaal 0,5 mm • geen vreemde voorwerpen in de banden		✓		• Neem contact op met een erkende partner
Motor	Controleer of het goed werkt		✓		• Let goed op tijdens het rijden • Neem contact op met een erkende partner
Acculader	Controleer of de oplader goed werkt en of de batterijen opgeladen zijn		✓		• Neem contact op met een erkende partner
Zitting	Controleer op beweging en slijtage			✓	• Neem contact op met een erkende partner
Elektronica	Controleer of alle accukabels en -connectoren goed vastzitten			✓	• Neem contact op met een erkende partner

Elektromagnetische compatibiliteit

In dit gedeelte vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie). Er zijn beschermende maatregelen die u kunt nemen om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling tot een minimum te beperken. Daarnaast worden in dit gedeelte enkele situaties beschreven die kunnen ontstaan door onverwachte of onregelmatige bewegingen. Het is van groot belang dat u deze informatie over de mogelijke gevolgen van elektromagnetische interferentie voor uw apparaat doorneemt.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dat wil zeggen storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, amateurradiozenders (HAM), portofoons en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat uw apparaat de remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de storende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Uw apparaat is bestand tegen EMI tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuuniteitsniveau, hoe beter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om een immuuniteitsniveau van ten minste 20 V/m te bereiken, wat een goede bescherming zou bieden tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat heeft, zoals verkocht, zonder verdere aanpassingen, een immuuniteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn in onze dagelijkse omgeving een aantal bronnen van relatief intense elektromagnetische straling. Sommige van deze bronnen zijn duidelijk herkenbaar en gemakkelijk te vermijden, andere niet, waardoor blootstelling onvermijdelijk is. Wij zijn echter van mening dat u het risico op elektromagnetische interferentie tot een minimum kunt beperken door de onderstaande waarschuwingen in acht te nemen. De bronnen van uitgestraalde elektromagnetische interferentie kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld:

1. Draagbare zendontvangers (zendontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: CB-radio's of draagbare radio's, (beveiligings-, brandweer- en politiezendontvangers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze zijn ingeschakeld, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor de middellange afstand, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Zenders en zendontvangers met een groot bereik, zoals commerciële omroepzenders (radio- en tv-zendmasten) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten draagbare apparaten, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine huishoudelijke apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken bij uw elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) De elektromagnetische energie neemt snel toe naarmate je dichterbij een zendantenne (bron) komt. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn een bijzonder punt van zorg. Het is mogelijk dat u tijdens het gebruik onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat brengt. Dit kan de beweging en het remmen van uw apparaat beïnvloeden. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van uw apparaat te voorkomen.

1. Gebruik geen draagbare zendontvangers, zoals CB-radio's, en schakel geen persoonlijke communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, in terwijl uw apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer niet te dicht in de buurt daarvan te komen.
3. Als het apparaat onbedoeld in beweging komt of de rem loslaat, schakel het dan uit zodra het veilig is.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, ervoor kan zorgen dat het gevoeliger wordt voor elektromagnetische interferentie.
5. Meld alle gevallen van onbedoelde beweging of het losraken van de rem aan de fabrikant en noteer of er in de buurt bronnen van elektromagnetische interferentie waren.

Problemen oplossen

Mocht er een storing optreden aan uw scooter, raadpleeg dan de knippercodes op uw bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. De code geeft aan wat de storing is. Op de volgende pagina vindt u een tabel met alle storingen die het apparaat kan melden, evenals aanwijzingen voor een mogelijke oplossing.

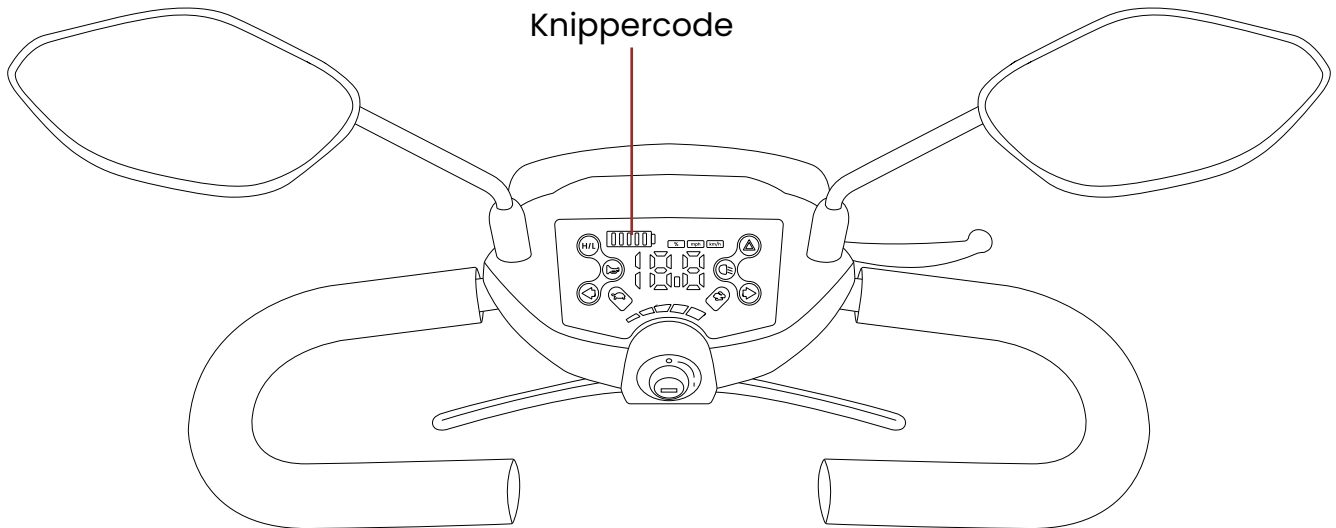

- Als het diagnose-waarschuwingsslampje 1, 2, 4 of 5 keer knippert, raadpleeg dan de oplossingen op de volgende pagina (schakel het apparaat uit en start het opnieuw op, of laad de batterij op). Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, neem dan contact op met een erkende partner.
- Als het diagnosewaarschuwingsslampje 3, 6, 7, 8 of 9 keer knippert, neem dan direct contact op met een erkende partner.

Knippercode	Beschrijving	Eerste controlepunten
1	Batterij bijna leeg	De batterijen raken leeg. Laad de batterijen op
2	Foutmelding: batterij bijna leeg	De batterijen zijn leeg. - Laad de batterijen op - Controleer de accu en de bijbehorende aansluitingen en bedrading
3	Fout: batterij bijna leeg	De accuspanning is te hoog. Dit kan gebeuren bij overladen en/of bij het afdalen van een lange helling. Als u een helling afrijdt, verminder dan uw snelheid om de hoeveelheid teruggewonnen energie tot een minimum te beperken.
4	Time-out stroomlimiet of oververhitting van de regelaar	De motor overschrijdt al te lang zijn maximale stroomsterkte. - De step is mogelijk vastgelopen. Schakel de controller uit, wacht een paar minuten en schakel hem vervolgens weer in. - De motor is mogelijk defect. Controleer de motor en de bijbehorende aansluitingen en bedrading.
5	Handrem	Ofwel is de ontgrendelingsschakelaar van de parkeerrem geactiveerd, ofwel is de parkeerrem defect. - Controleer de parkeerrem en de bijbehorende aansluitingen en bedrading. - Zorg ervoor dat alle bijbehorende schakelaars in de juiste stand staan. Als dit geen effect heeft, neem dan contact op met een erkende partner.
6	Rijblokkering	Er is een stopfunctie actief, de lader is geblokkeerd of er is een OONAPU-situatie opgetreden. - De stopvoorwaarde opheffen (stoel omhoog, enz.) - Koppel de acculader los - Zorg ervoor dat de gashendel in de neutrale stand staat wanneer u de controller inschakelt - Het is mogelijk dat het gaspedaal opnieuw moet worden gekalibreerd
7	Speed Pot	De gasklep, de potentiometer voor de snelheidsbegrenzing, de SRW of de bijbehorende bedrading kunnen defect zijn. Controleer de gasklep, de snelheidsregelaar en de bijbehorende aansluitingen en ring
8	Motorspanning	De motor of de bijbehorende bedrading is defect. Controleer de motor en de bijbehorende aansluitingen en bedrading
9	Andere fout	De controller heeft mogelijk een interne storing. Controleer alle aansluitingen en bedrading

Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, neem dan contact op met een erkende partner. Zorg ervoor dat u uw serienummer bij de hand hebt om aan de erkende partner door te geven.

Garantie

Alle producten van Motion Healthcare worden met garantie aan onze partners verkocht; zij verkopen het product op hun beurt met garantie aan u. Dit zijn twee afzonderlijke overeenkomsten.

Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over de garantievoorwaarden of om een claim in te dienen.



Motion Healthcare B.V.

Woningen 6 en 7 Concord Farm
Schoolstraat
Rayne, CM77 6SP



Chien Ti Enterprise Co. Ltd.

Nr. 13, steeg 227, Fuying Road, district Xinzhuang
New Taipei City, 242054
Taiwan



MedNet EC-REP GmbH

Borkstraat 10
48163 Münster
Duitsland



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

Technische gegevens

Lengte	125 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	113 cm
Afmetingen voorwiel	26 cm
Afmetingen achterwiel	26 cm
Totaalgewicht	61,3 kg
Zwaarste onderdeel	19,9 kg
Gewicht accu	8,9 kg
Capaciteit accu	25,2v 60ah Lithium
Wattuurcapaciteit accu	1512 Wh
Actieradius (tot)	40 km
Snelheid	13 km/u
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Zittingbreedte	45,5 cm
Motorvermogen	700w
Maximale hellingshoek	8°
Bodemvrijheid	3,5 cm
Draaicirkel	146 cm

Opmerkingen



www.motionhealthcare.nl

085-2129445