


# nitron

Handleiding

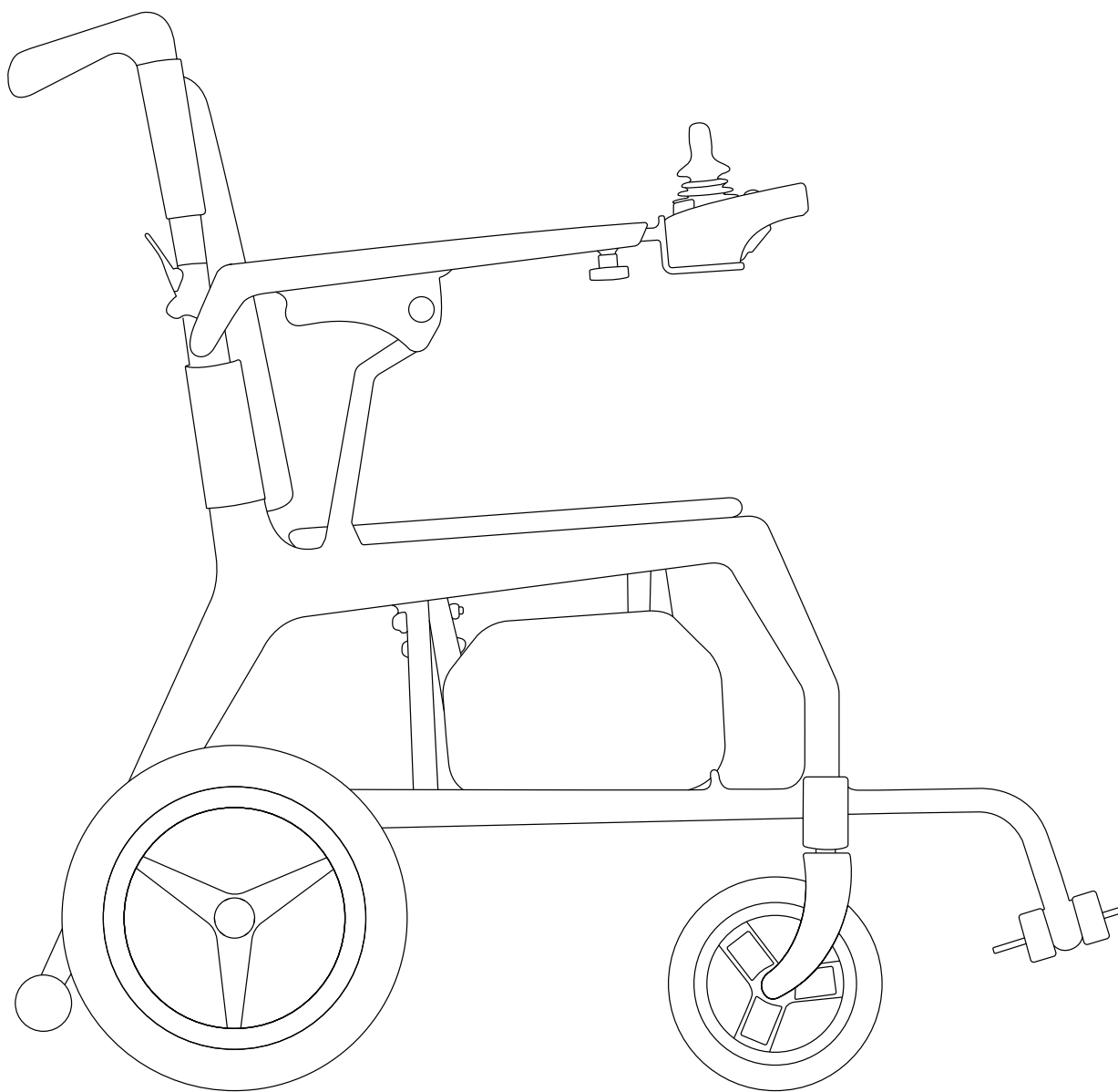

Motion

CE UK  
CA

## 1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Nitron Elektrische rolstoel.


Je nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer binnen en buiten mogelijk te maken voor een persoon wiens vermogen om te lopen is beperkt, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


We zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele producten van hoge kwaliteit en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen. We hopen van harte dat we daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het bedrijf waar je hebt gekocht.

## 2. Uw elektrische rolstoel leren kennen

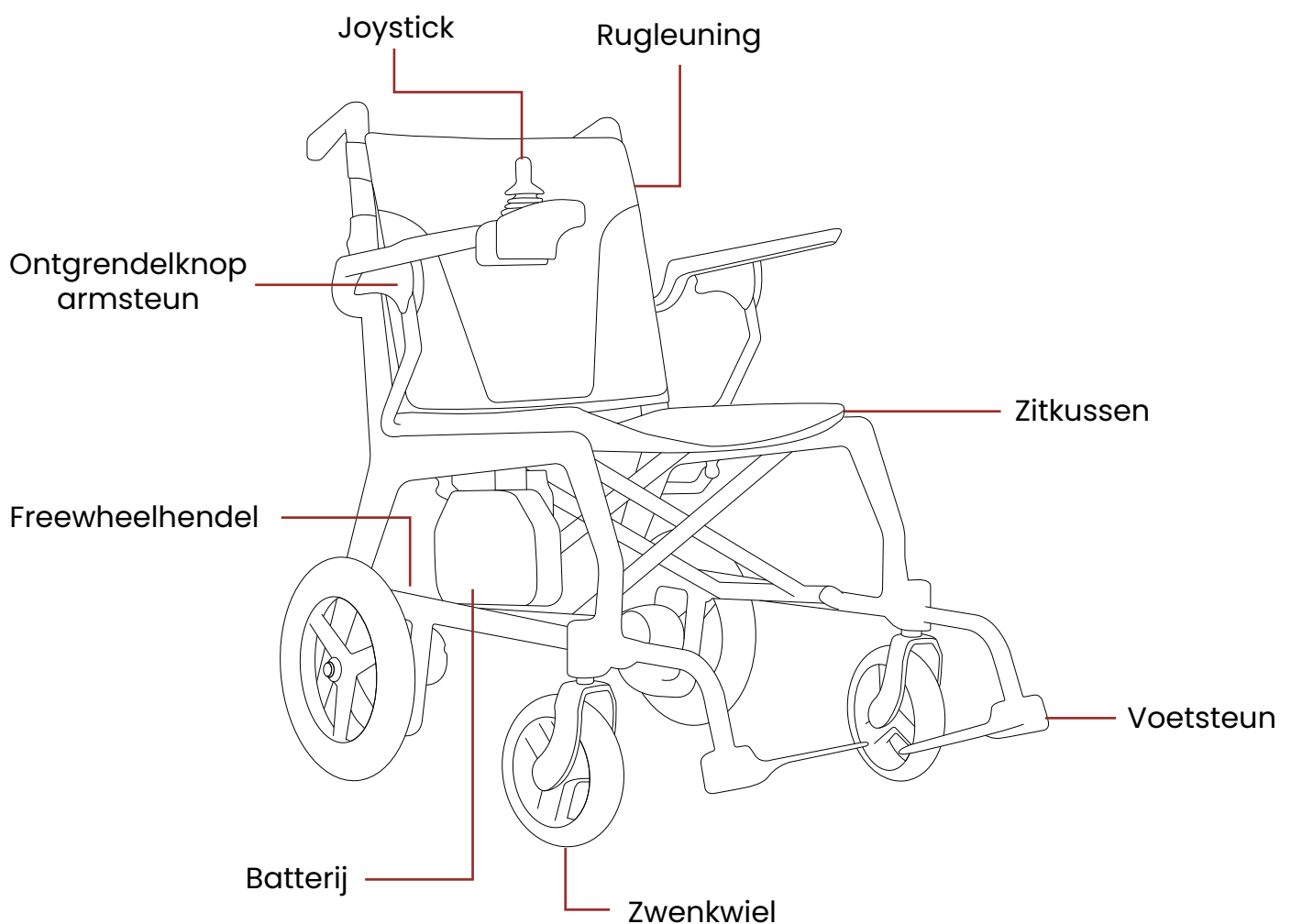

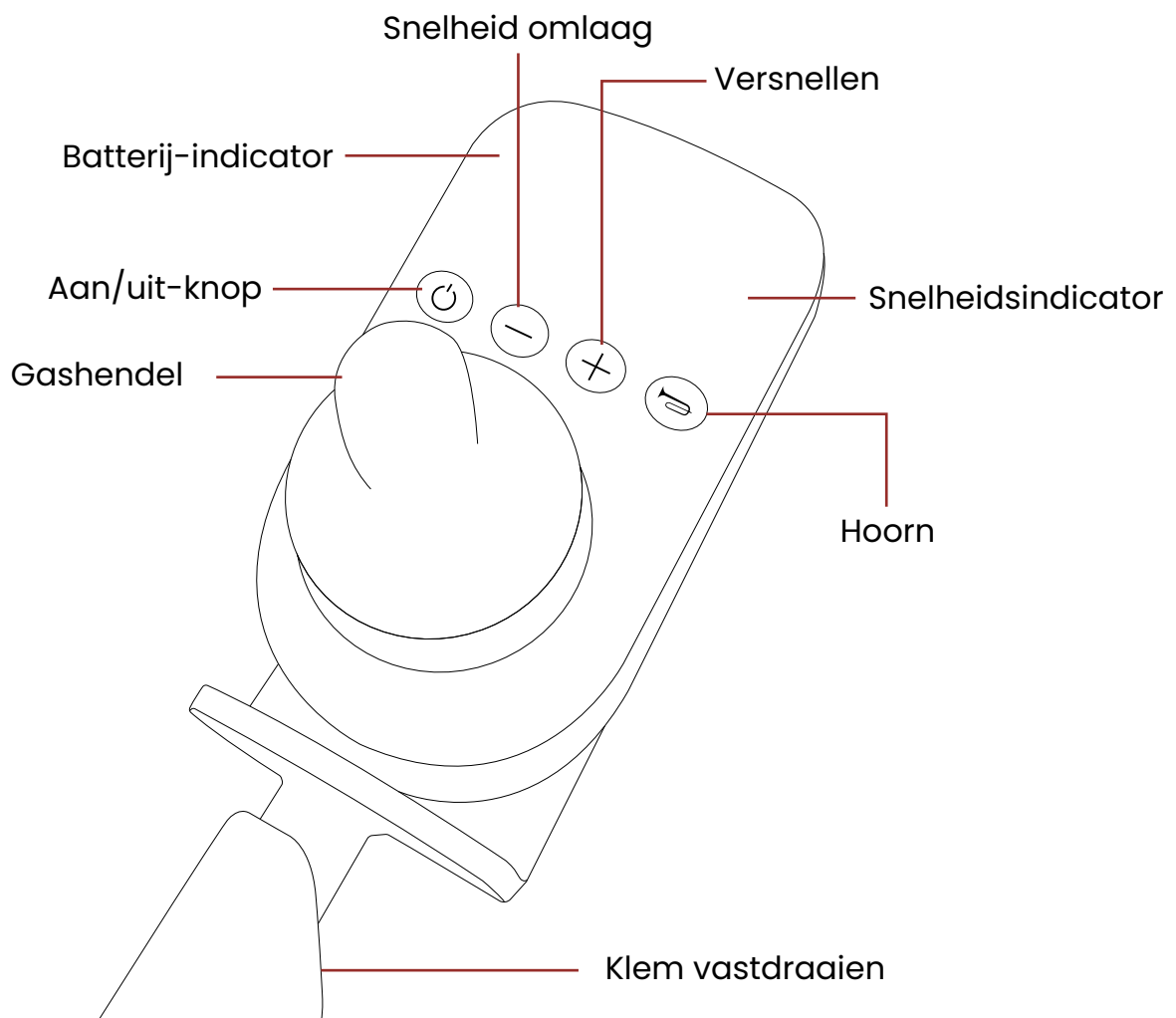

### 3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig opletten tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheidsproblemen of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of verminderen.
- Bedien het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, want dit kan uw vermogen om het veilig te bedienen aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichthtraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.

- We raden u ten eerste af sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, als deze worden aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je ze hebt gekocht om ze zo snel mogelijk te vervangen.
- Pas het apparaat niet aan. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door het toevoegen van accessoires aan je apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in je omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat u het apparaat niet langer kunt bedienen.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus "vrijloop" inschakelt of uitschakelt.
- Als u verwacht langere tijd stil te zitten, schakel dan de stroom naar het apparaat uit. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan uw apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat uit zichzelf ongecontroleerd gaat rollen, mag u de elektrische rolstoel nooit in de "vrijloop"-modus plaatsen op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koorden, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het bedient, vast kunnen komen te zitten rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen vast komen te zitten.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "freewheel" modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neemt u contact op met het bedrijf waar u de zekering hebt gekocht.

- Gebruik de armsteunen (indien aanwezig) niet om gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

#### **4. Veilig monteren en demonteren**

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwacht in beweging komt. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel staan, dit verkleint het risico dat je de stoel mist of valt.

De volledig juiste overdrachtsmethode varieert op basis van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een overdracht.

We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je zelf veilig kunt overstappen.

#### **5. Veilig rijden**

Let bij het besturen van je apparaat altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle plaatselijke regels voor voetgangers en verkeer. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe dit apparaat aanvoelt voordat je ermee gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je het apparaat gaat gebruiken. Zoek naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je apparaat nooit om trappen of roltrappen te nemen.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid tijdens het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u over een helling of stoeprand rijdt.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan je wilt, laat je de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.

- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van je toestel om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door je gewicht, snelheid en de hoek waarin je de helling nadert.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die je zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat beweegt.
- Let op: een vallende stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling kan de voorwielen tegenhouden en ervoor zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

## 6. Veilig vervoer

Let bij het vervoeren van je apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik het apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast tijdens transport. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheidsdrempel overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

## 7. Vlieg reizen

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door lithium-ionbatterijen. Zie onze opmerkingen in **het VET** om je te helpen met je apparaat:

Vóór de reis moeten passagiers de operator informeren over het type accu's dat in het mobiliteitshulpmiddel is geplaatst en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoeld gebruik. - **De accu's in uw apparaat zijn Lithium-Ion. Om te beschermen tegen onbedoeld gebruik, moet u de elektrische rolstoel uitschakelen en ervoor zorgen dat de elektrische rolstoel niet in vrijloop staat (zie sectie 13 voor meer instructies)**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren of de:

- moet de accu worden verwijderd en in de passagierscabine worden vervoerd;
- de accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijv. door blootliggende polen af te plakken); - **er zijn geen blootliggende polen op de accu van uw elektrische rolstoel.**
- de batterij moet worden beschermd tegen beschadiging (bijvoorbeeld door elke batterij in een beschermend zakje te doen);
- Het verwijderen van de batterij uit het mobiliteitshulpmiddel moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat - **De batterij komt eenvoudig los en schuift van de zijkant van het apparaat af**
- de accu mag niet groter zijn dan 300 Wh - **de 10ah-batterij is 240W**
- er mag maximaal één reservebatterij van maximaal 300 Wh of twee reservebatterijen van elk maximaal 160 Wh worden meegenomen.

## **8. Batterij opladen en onderhoud**

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.

De levensduur van een batterij kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op wanneer je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat uw batterijen worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde omgeving en niet gedurende langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) worden bewaard, aangezien dit ertoe zal leiden dat de batterij niet kan worden opgeladen en blijvende schade zal veroorzaken.

### **Waarschuwingen**

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er zijn explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- De batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Transporteer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem contact op met het erkende bedrijf waar u uw batterijen hebt gekocht om ze weg te gooien of te recyclen
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het niveau van je accu voordat je aan een reis begint om te voorkomen dat je gestrand raakt.
- Probeer batterijen niet uit hun doosjes te halen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

### **Je batterijen opladen**

- Zet de elektrische rolstoel uit.
- Steek de batterijlader in het stopcontact in de muur.
- Sluit de oplader aan op de oplaadaansluiting of joystick.
- Het LED-lampje op de acculader wordt rood om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen wanneer de accu's volledig zijn opgeladen.

## **10. Besturingselementen**

### **In- en uitschakelen**

Om je apparaat aan te zetten, druk je op de aan/uit-knop totdat het LED-scherm oplicht.

Om je apparaat uit te schakelen, druk je op de aan/uit-knop totdat het scherm uit is.

### **De snelheid aanpassen**

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en de knoppen omhoog en omlaag gebruiken.

### **Vooruit & achteruit rijden**

Om vooruit te rijden duw je de gashendel langzaam naar voren. Hoe meer je duwt, hoe sneller je rijdt. Laat de gashendel los om te stoppen.

Om achteruit te rijden trek je de gashendel langzaam naar achteren. Hoe meer je duwt, hoe sneller je rijdt. Laat de gashendel los om te stoppen.

Om te draaien beweeg je de gashendel in de richting waarin je wilt bewegen. Laat de gashendel los om te stoppen.

### **De hoorn blazen**

Houd de claxonknop op de joystick ingedrukt om de claxon te laten klinken.

## **11. Veiligheidsgordel**

Dit apparaat is niet uitgerust met een veiligheidsgordel.

## **12. Vrijloophodus**

De vrijloophendels bevinden zich aan de achterkant van de elektrische rolstoel bij elk achterwiel. De hendels hebben twee posities en hebben elk alleen betrekking op het wiel dat het dichtst bij is:

Vooruit - rijmodus (de elektrische rolstoel beweegt alleen met de bedieningselementen)

Achteruit - vrijloophodus (de elektrische rolstoel kan met de hand worden geduwd of getrokken)

## **13. Dagelijkse controles**

Controleer de volgende items voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

### **Stabiliteit joystick**

- Zorg ervoor dat het niet te los zit.



## **Besturingselementen**

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen
- Controleer of het apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de knoppen trekt/duwt.

## **Snelheidsaanpassing**

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat verandert zoals het zou moeten.

## **Batterijmeter**

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

## **Hoorn**

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

## **Motor, transmissie en elektromagnetische rem**

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit je apparaat komen.

## **Wielen**

- Controleer of er geen scheuren of vervormingen op de banden van je apparaat zitten.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit je apparaat komen.

## **Batterijhouder**

- Controleer of de batterijhouder(s) geen barsten of vervormingen vertoont (vertonen).
- Controleer of de batterijhouder(S) op de juiste manier wordt (worden) geplaatst en verwijderd.

## **Stoel**

- Controleer of er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel vergrendeld is.
- Controleer of de stoel beweegt zoals het hoort.
- Zorg ervoor dat de bekleding niet overmatig versleten is.

## **Vrijloophendel**

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort.

## **Anti-tip wielen**

- Controleer of de anti-kantelwielen op hun plaats zitten, werken en onbeschadigd zijn.

## **14. Reiniging, onderhoud en afvoer**

### **Schoonmaken**

Om je apparaat schoon te maken, gebruik je een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik je een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het reinigen.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of sproei geen water rechtstreeks op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken.

### **Onderhoud**

Zorg ervoor dat je apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om je apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

### **Verwijdering**

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de lithiumbatterij in uw apparaat, wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht.

## **15. Elektromagnetische compatibiliteit**

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, amateurradiozenders (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van bronnen met radiogolven) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuïteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuïteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuïteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie typen:

1. Draagbare handontvangers (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: CB (Citizens Band) of draagbare radio's (beveiligings-, brandweer- en politietransceivers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor middellange afstand, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Langeafstandszenders en -ontvangers, zoals commerciële zenders (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparaten, zoals draadloze telefoons, laptopcomputers, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken voor uw elektrische rolstoel.



Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolffbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals CB-radio's (citizen band), en schakel geen persoonlijke communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in terwijl het apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-stations, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als het onbedoeld beweegt of de rem loslaat.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle incidenten met onbedoelde bewegingen of het loslaten van remmen aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

## 16. Problemen oplossen

In het geval van een fout met uw elektrische rolstoel, verwijzen wij u naar de lampjes op uw joystickbediening om het probleem te diagnosticeren. Op de volgende pagina toont de tabel alle problemen die de elektrische rolstoel kan melden en leidt u naar een mogelijke oplossing.

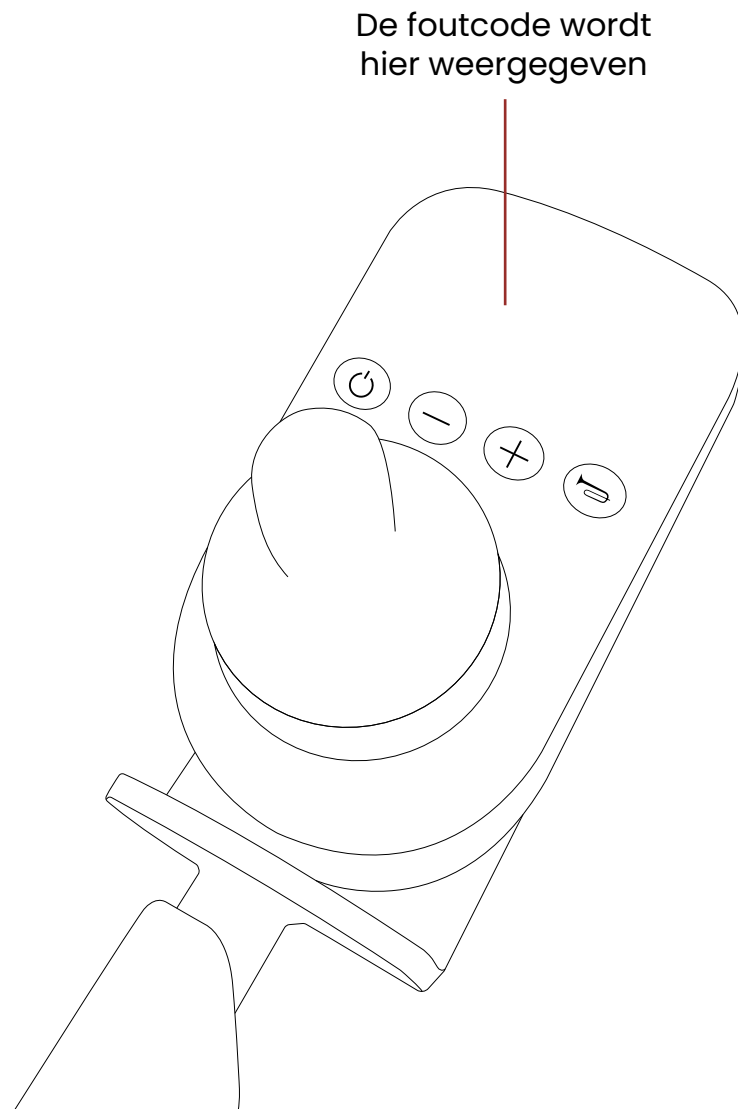
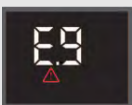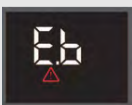
| Flash-code                                                                          | Mogelijk probleem                                           | Mogelijke oplossing(en)                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lage accuspanning                                           | Laad de batterij op.                                                                                                                              |
|    | Ontkoppeling linkermotordraad of storing linkermotor        | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|    | Losse remkabel links of defecte rem links                   | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|    | Losraken rechtermotordraad of storing rechtermotor          | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|   | Losgeraakte remkabel rechts of defecte rem rechts           | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Communicatiefout tussen bovenste en onderste besturing      | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Interne controllerstoring                                   | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Linker hall draad fout                                      | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Storing rechter hall draad                                  | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Geen uitgangsspanning van de rem of kortsluiting in de rem  | Neem contact op met een Erkend Partner voor reparatie.                                                                                            |
|  | Joystick niet in de middelste positie tijdens het opstarten | Zet de joystick terug in de middelste stand bij het starten. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een Erkend Partner voor reparatie. |

## 17. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die je krijgt of om een claim in te dienen, kun je contact opnemen met het bedrijf waar je hebt gekocht.



### **Motion Healthcare Ltd**

Units 6 & 7, Concord Farm  
School Road  
Rayne, CM77 6SP



### **Suzhou Sweetrich voertuig industrie technologie co, Ltd.**

Gebouw B, nr. 7 Chao Qian Road  
Industriepark Suzhou, Suzhou  
Provincie Jiangsu, China, 215000



### **MedPath GmbH**

Mies-van-der-Rohe-Straße 8  
80807, München  
Duitsland



### **MedPath Beperkt**

27 Old Gloucester Street, Londen  
WC1N 3AX  
Verenigd Koninkrijk

## 18. Specificaties

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lengte                           | 97 cm            |
| Breedte                          | 61,5 cm          |
| Hoogte                           | 89 cm            |
| Opgevouwen lengte                | 75 cm            |
| Opgevouwen breedte               | 27 cm            |
| Opgevouwen hoogte                | 72,5 cm          |
| Wielmaat voor                    | 17,8 cm          |
| Wielmaat achter                  | 30,5 cm          |
| Totaal gewicht (zonder batterij) | 12,8 kg          |
| Gewicht batterij                 | 1,4 kg           |
| Capaciteit batterij              | 24v 10ah Lithium |
| Wattuur batterij                 | 240 wh           |
| Bereik (tot)                     | 12 km            |
| Snelheid                         | 6 km/u           |
| Maximaal gebruikersgewicht       | 120 kg           |
| Zitbreedte                       | 45 cm            |
| Motorgrootte                     | 150w             |
| Maximale helling                 | 6°               |
| Bodemvrijheid                    | 14,5 cm          |
| Draaicirkel                      | 105 cm           |



[www.motionhealthcare.nl](http://www.motionhealthcare.nl)

085-2129445