


eTravel

Handbuch

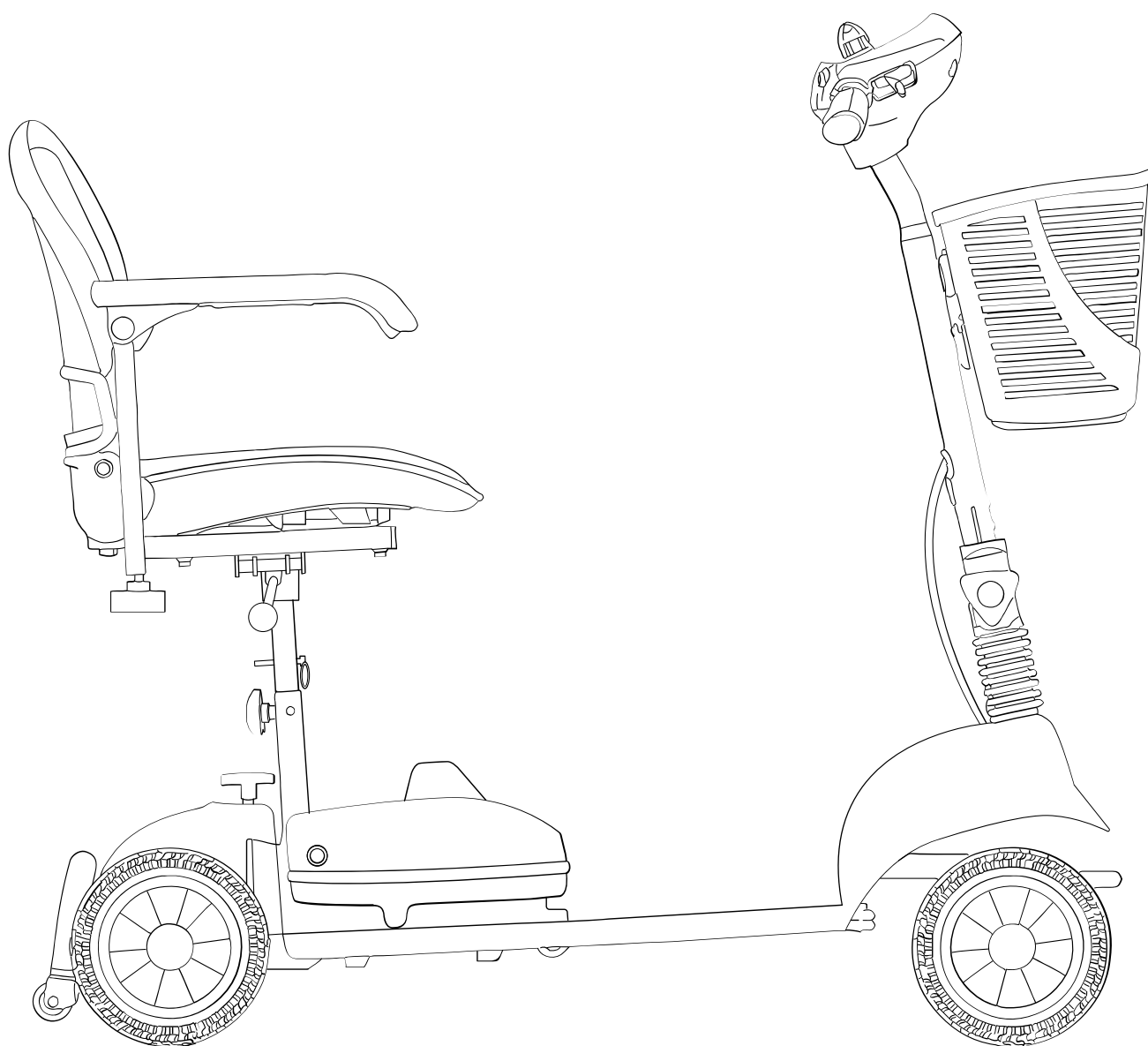

Motion

CE UK
CA

1. Einleitung

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Motion Healthcare eTravel Mobility Scooters.


Ihr neues Gerät wurde entwickelt, um Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit, deren Sehvermögen, Geschicklichkeit und kognitive Fähigkeiten es ihnen ermöglichen, das Gerät sicher zu bedienen, in Gebäuden und im Freien zu transportieren.


Wir sind stolz darauf, sichere, komfortable und qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können, und unser Ziel ist es, Ihre volle Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir hoffen aufrichtig, dass uns dies gelingt und dass Sie mit Ihrem Motion Healthcare-Gerät viel Freude haben.

Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die verschiedenen Funktionen Ihres Geräts bedienen, und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

2. Kennenlernen Ihres Rollers

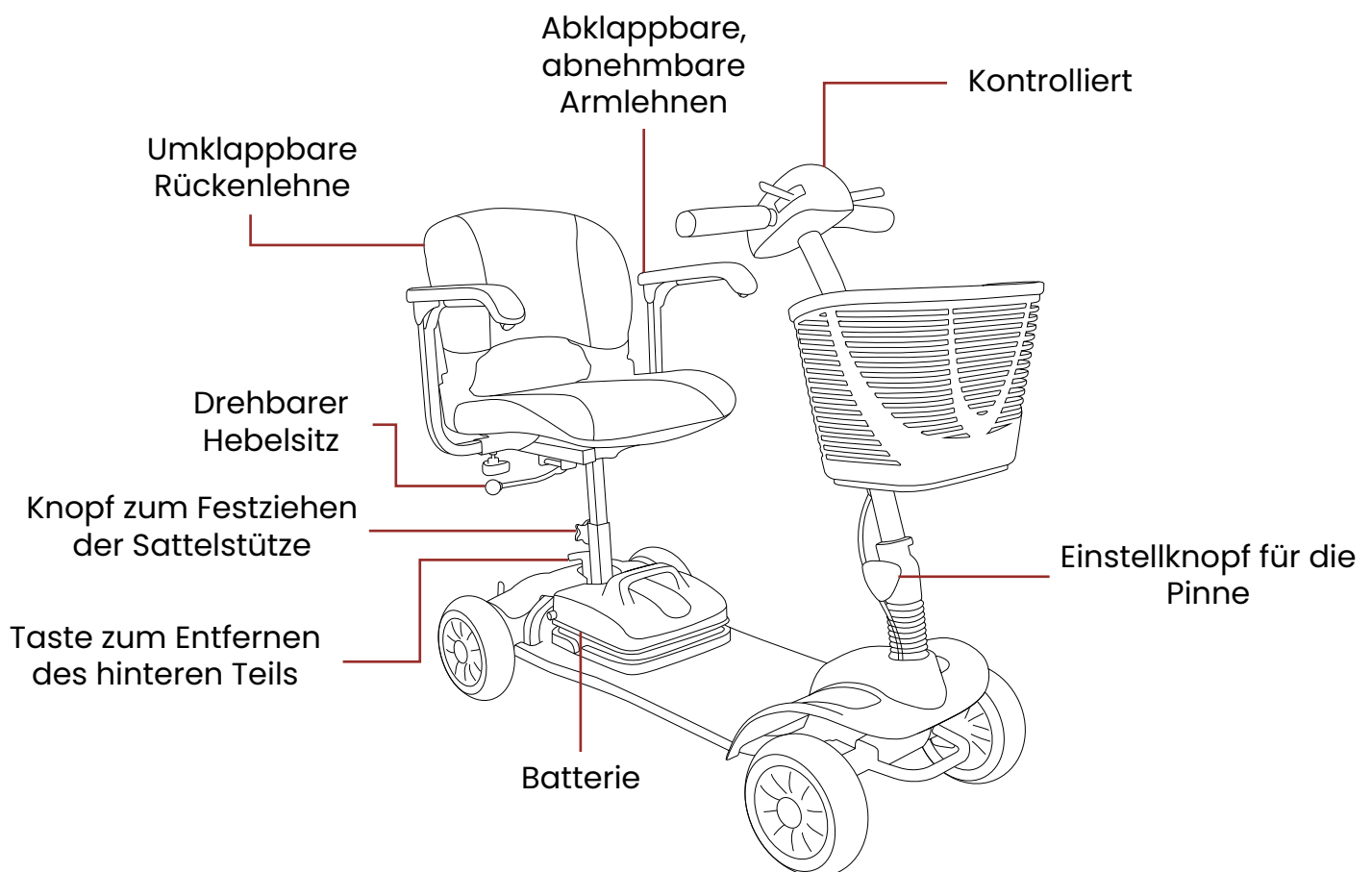

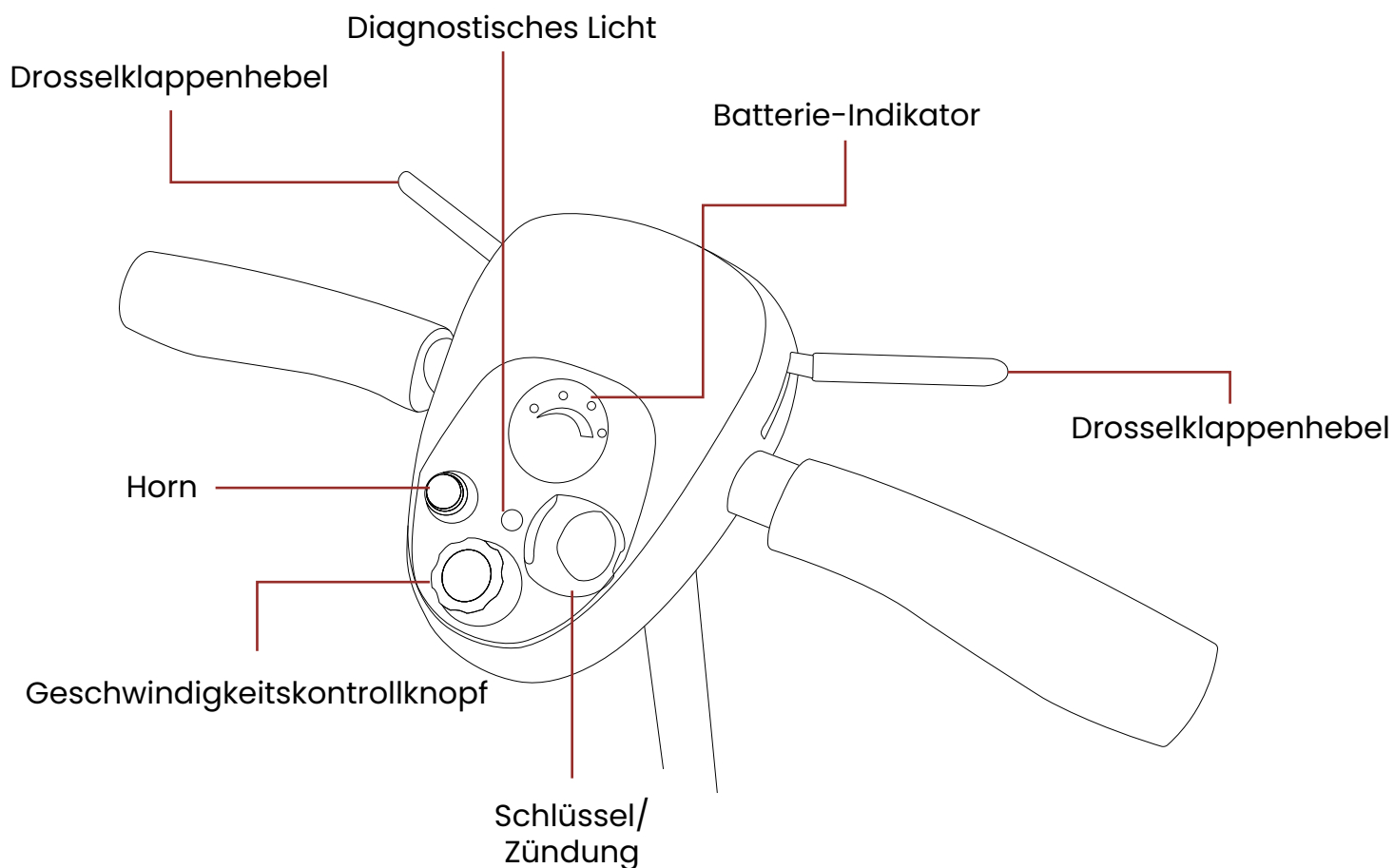

3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat in gebruik neemt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig opletten tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheids- of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, omdat dit uw vermogen om het veilig te bedienen kan aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichtstraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.

- We raden u ten zeerste af om sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer de elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, indien aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht om deze zo snel mogelijk te vervangen.
- Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door de toevoeging van accessoires aan uw apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in uw omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u zuurstof gebruikt in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de regelaar niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat uw vermogen om het apparaat te bedienen verandert.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus "vrijloop" inschakelt of uitschakelt.
- Schakel het apparaat uit als u verwacht langere tijd stil te zitten. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan het apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, zet de step nooit in de "freewheel" modus op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koordjes, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het apparaat bedient, verstrikt kunnen raken rond de armleuningen of de gashendel.
- Vermijd het gebruik van accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat geen voorwerpen achter het apparaat slepen tijdens het rijden. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen komen.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "freewheel" modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.

- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.
- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk omvallen te voorkomen, mag u nooit iets vervoeren of de tas/mand vullen met een inhoud van meer dan 6,8 kg.
- Gebruik de armleuningen (indien aanwezig) niet om gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwachts gaat bewegen. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel staan, dit verkleint het risico dat je de stoel mist of valt.

De volledig juiste overdrachtsmethode varieert op basis van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een overdracht.

We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je de transfer veilig zelf kunt doen.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je toestel altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle lokale voetgangers- en verkeersregels. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien wanneer je op je toestel zit. Wacht tot je weg vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe het apparaat aanvoelt voordat je gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je van plan bent het apparaat te gebruiken. Kijk uit naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je toestel nooit om over trappen of roltrappen te rijden.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid bij het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en vermijd gewichtsverplaatsing in de tegenovergestelde richting van een bocht.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het nemen van een helling of stoeprand.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden bedekt met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.

- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.
- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan u wilt, laat u de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van het apparaat om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door uw gewicht, snelheid en de hoek waarin u de helling nadert.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die uw zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat in beweging is.
- Houd er rekening mee dat een gevallen stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling de voorwielen kan tegenhouden en ervoor kan zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig transport

- Houd bij het vervoeren van uw apparaat altijd rekening met het volgende:
- Gebruik uw apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast als het wordt vervoerd. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheid overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Vliegreizen

Hieronder vind je de richtlijnen van de Civil Aviation Authority voor rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die worden aangedreven door niet-verspreidbare zure of alkalibatterijen. Zie onze opmerkingen in het **VET** om u te helpen met uw hulpmiddel:

Vóór de reis moeten passagiers de vervoerder op de hoogte stellen van het type batterijen dat in het mobiliteitshulpmiddel is geplaatst en hoe het apparaat kan worden beschermd tegen onbedoeld gebruik. – **De batterijen in uw apparaat zijn verzegelde loodzuur-batterijen. Om te beschermen tegen onbedoeld gebruik moet u de scootmobiel uitzetten, de sleutel uit het contact halen en ervoor zorgen dat de scootmobiel niet in vrijloop staat (zie hoofdstuk 13 voor meer instructies).**

Op de luchthaven moet de luchtvaartmaatschappij controleren of de:

- de accu moet worden verwijderd en vervoerd in een sterke, stevige verpakking en opgeborgen in de vrachtruimte.
- de accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijv. door blootliggende polen af te plakken); – **de accu van uw scooter mag geen blootliggende polen bevatten.**
- de accu moet worden beschermd tegen beschadiging (bijv. door elke accu in een beschermende zak te plaatsen).
- Verwijder de accu van het scootmobiel volgens de instructies van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat. – **De accu kan eenvoudig omhoog worden getild en van de eTravel bodemplaat worden verwijderd (zie hoofdstuk 9 voor meer instructies).**
- de accu mag niet groter zijn dan 300 Wh – **de 12ah accu is 288Wh (24v x 12ah = 288 Wh)**
- er mag maximaal één reservebatterij van maximaal 300 Wh of twee reservebatterijen van elk maximaal 160 Wh worden vervoerd.

Passagiers wordt aangeraden ten minste 48 uur van tevoren regelingen te treffen met hun luchtvaartmaatschappij.

8. Opladen en onderhoud van batterijen

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.

De levensduur van batterijen kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het gebruikte oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op als je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat je de batterijen in een droge, goed geventileerde omgeving bewaart en ze niet voor langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) laat liggen.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er bestaan explosieve omstandigheden.
- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- De batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Vervoer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem voor het weggooien of recyclen van uw batterijen contact op met het erkende bedrijf waar u de batterijen hebt gekocht.
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.

- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het batterijniveau voordat u aan een reis begint om te voorkomen dat u strandt.
- Probeer de batterijen niet uit hun doosje te halen. Dit mag alleen door een erkend bedrijf worden gedaan.

Uw accu's opladen

- Zet de sleutel in de uit-stand.
- Steek de stekker van de acculader in het stopcontact in de muur.
- Steek de stekker van de oplader in het oplaadcontact.
- Het LED-lampje op de acculader wordt rood om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen wanneer de accu's volledig zijn opgeladen.

9. Demontage en montage

Demontage

1. Til de stoeldraaihendel op en til de stoel omhoog om deze te verwijderen.
2. Til de accu omhoog om deze te verwijderen. Let op: de accu zit vast met klittenband, dus als je moeite hebt om de accu te verwijderen, druk je de zadelpen omlaag om het verwijderen te vergemakkelijken.
3. Klap de helmstok omlaag door eerst de knop voor de aanpassing van de helmstok los te draaien en de helmstok dan langzaam omlaag te duwen in de richting van de bodemplaat. Zodra de helmstok op de vloerplaat rust, draai je de knop voor de aanpassing van de helmstok vast om hem op zijn plaats te houden.
4. Vergrendel de disselboom op zijn plaats met behulp van de disselboomvergrendeling door de vergrendeling in te drukken en 90 graden rechtsom te draaien.
5. Til de verwijderingshendel van het achterste gedeelte met één hand op en trek het achterste gedeelte met de hendel naar beneden om het voorste en achterste gedeelte van elkaar te scheiden. Til het voorste gedeelte omhoog en verwijder het.

Monteren

1. Gebruik één hand om het achterste deel met de handgreep naar beneden te trekken en til het voorste deel op met behulp van de knop voor het verwijderen van de zadelpen of het achterste deel. Laat het voorste deel in het achterste deel vallen en druk het omlaag tot je een klik hoort. Controleer altijd of de delen correct zijn aangesloten voordat je verder gaat met de volgende stap.
2. Ontgrendel de dissel door de vergrendeling in te drukken en 90 graden linksom te draaien.

3. Til de dissel op door eerst de knop voor de disselafstelling los te draaien en de dissel dan langzaam van de bodemplaat op te tillen. Als de helmstok eenmaal rechtop staat, draai je de afstelknop voor de helmstok vast om hem op zijn plaats te houden.
4. Plaats de accu in de bodemplaat. Duw naar beneden om te zorgen dat hij goed vastzit.
5. Til de stoeldraaihendel op en plaats het zadel op de zadelpen.

10. Bedieningselementen

In- en uitschakelen

Om uw apparaat aan te zetten steekt u de sleutel in het contact totdat de lampjes op de batterij-indicator branden.

Om je navigatiesysteem uit te schakelen haal je de sleutel uit het contact totdat de lampjes op de batterij-indicator niet meer branden.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en aan de knop voor het aanpassen van de snelheid draaien. Om de snelheid te verhogen, draai je de knop met de klok mee (in de richting van de haas) en om de snelheid te verlagen, draai je de knop tegen de klok in (in de richting van de schildpad).

Vooruit en achteruit rijden

Om vooruit te rijden, trek je langzaam aan de rechter gashendel (aangeduid met F) in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer u aan de hendel trekt, hoe sneller u rijdt. Je kunt ook met je hand de linker gashendel (gemarkeerd met R) van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

Om achteruit te rijden, trekt u langzaam aan de linker gashendel (gemarkeerd met R) in de richting van de stuurhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de rechter gashendel (aangeduid met F) van de stuurhendel wegduwen. Laat de hendel los om te stoppen met bewegen.

De hoorn laten klinken

Druk op de knop op de helmstok om de claxon te laten klinken.

11. Veiligheidsgordel monteren en afstellen

Dit model heeft geen veiligheidsgordel.

12. Afstelling helmstok

Om de helmstok af te stellen, houdt u de helmstok in de ene hand en draait u met de andere hand de knop voor aanpassing van de helmstok tegen de klok in totdat de tanden loskomen en de helmstok vrij op en neer kan bewegen.

Als de helmstok in de gewenste stand staat, draait u de knop voor de disselafstelling rechtsom totdat deze zo strak mogelijk zit.

13. Freewheel-modus

De Freewheel hendels bevinden zich aan de achterkant van de step bij het achterwiel. De hendel heeft twee standen:

Naar voren – Neutrale stand (het apparaat kan met de hand worden geduwd of getrokken)

Achteruit – Drive Mode (het apparaat beweegt alleen met behulp van de bedieningsknoppen)

14. Dagelijkse controles

Controleer de volgende punten voordat je het apparaat gebruikt. Als je iets abnormaals vindt of iets waar je niet zeker van bent, neem dan contact op met het bedrijf waar je het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat je het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de molen

- Controleer of hij niet te los zit.
- Controleer of het soepel en volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Bedieningselementen

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de bedieningselementen volledig kunnen worden bewogen.
- Controleer of het apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de bedieningselementen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig vrij kunnen bewegen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat naar wens verandert als aan de knoppen wordt getrokken.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Claxon

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Sleutel

- Controleer of de sleutel gemakkelijk in en uit het contactslot kan worden geschoven.
- Zorg ervoor dat de sleutel stevig in het contactslot zit.
- Controleer of het apparaat in- en uitschakelt wanneer de sleutel in de cilinder wordt gestoken en eruit wordt gehaald.

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen.
- Controleer of er geen ongewone geuren uit het apparaat komen.

Wielen

- Controleer of de banden van je toestel geen scheuren of vervormingen vertonen.
- Controleer of de wielen draaien zonder te wiebelen.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten.
- Controleer of er geen overmatige of ongelijkmatige slijtage van het bandenprofiel is.
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen.

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont.
- Controleer of de batterijhouder correct geplaatst en verwijderd kan worden.

Zitting

- Controleer of er geen ongewone bewegingen zijn wanneer het zitje is vergrendeld.
- Controleer of het zadel beweegt zoals het hoort.

Vrijloophendel

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) naar behoren in- en uitschakelt.

15. Reiniging, onderhoud en afvoer

Reinigen

Gebruik een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het reinigen.
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het schoonmaken.
- Gebruik geen slang, straal of spatwater direct op het apparaat.
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het schoonmaken.

Onderhoud

Zorg ervoor dat het apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om uw apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

16. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, zenders van radioamateurs (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van bronnen met radiogolven) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuïteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuïteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuïteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden ingedeeld in drie typen:

1. Draagbare handzenders (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: citizen band (CB) of draagbare radio's, (veiligheids-, brandweer- en politiezendontvangers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers met middelgroot bereik, zoals die gebruikt worden in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Zenders en zendontvangers met groot bereik, zoals commerciële zendontvangers (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).

Andere soorten handapparatuur, zoals draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken op je elektrische scooter.


Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolfbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals CB-radio's (citizen band), en schakel geen persoonlijke communicatiemiddelen in, zoals mobiele telefoons, terwijl je apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-zenders, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als er een onbedoelde beweging wordt gemaakt of de rem wordt losgelaten.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Rapporteer alle incidenten van onbedoelde beweging of loslaten van de rem aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

17. Problemen oplossen

In het geval van een fout met je step, raadpleeg het lampje op je bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. De tabel op de volgende pagina toont alle problemen die de step kan melden en leidt je naar een mogelijke oplossing.

Diagnostisch lampje

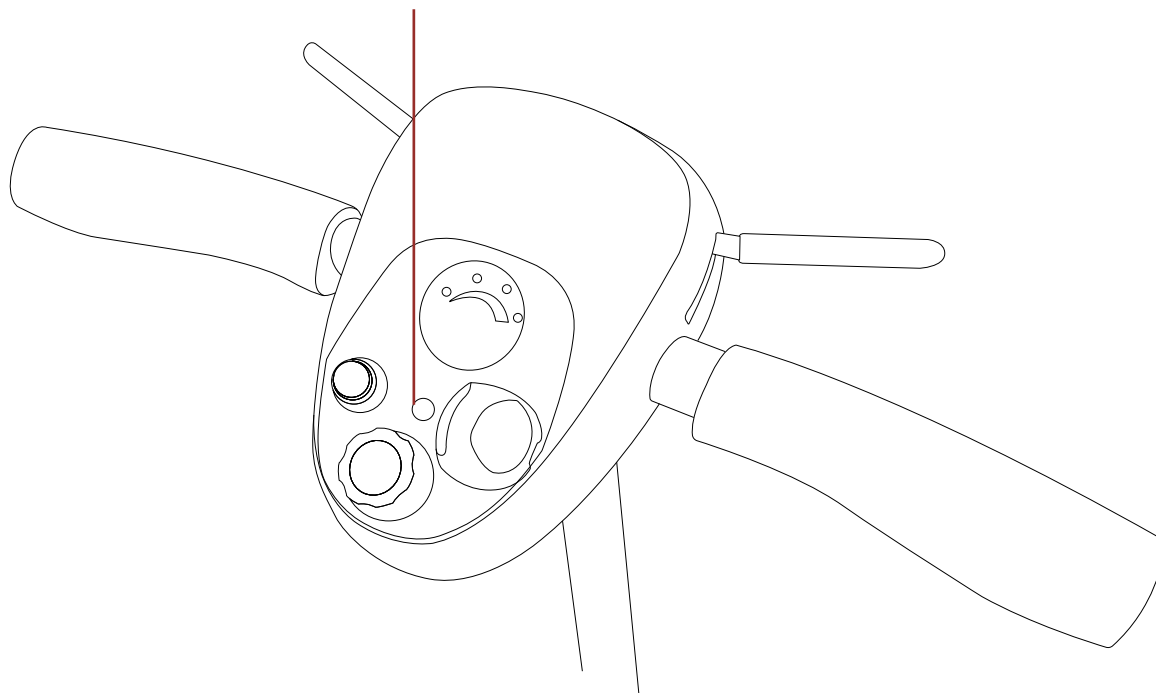

Flash Code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
1	De batterij heeft geen stroom of is niet goed aangesloten.	Controleer of de batterijpack correct op de vloerplaat zit. Controleer de batterijverbindingspennen op de vloerplaat. Controleer de aansluiting aan de onderkant van de batterijpack. Probeer de batterij volledig op te laden. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
2		
3		
4	Motorstroomstoring	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
5	Elektromagnetische remstoring	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
6	De controller wordt tegengehouden om te rijden	Zorg ervoor dat de batterijlader niet is aangesloten.
7	Gashevelstoring	Zorg ervoor dat de gashevel niet wordt ingedrukt bij het inschakelen van de scooter.
8	Motorvoltagestoring	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
9	Andere fout	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.

18. Garantie

Alle Motion Healthcare-producten worden aan onze partners verkocht met een garantie, waarna zij het product met een garantie aan u verkopen. Dit zijn twee afzonderlijke overeenkomsten.

Neem contact op met het bedrijf waar u het product hebt gekocht om specifieke details over de garantie die u ontvangt te achterhalen of om een claim in te dienen.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



LERADO ZHONGSHAN PEACEFUL COVE BUSINESS TRADING CO.,LTD

No. 26, GUANGFU ROAD
XIAOLAN TOWN ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, CHINA



Y. Sung Handelsvertretung

24 Duesselthaler Street
40211 Dusseldorf
Germany



FM Hulpmiddelen BV

Argonweg 127
1362AD Almere
Nederland

19. Specificaties

Lengte	102 cm
Breedte	49 cm
Hoogte	92 cm
Maat Voorwiel	19 cm
Maat Achterwiel	19 cm
Totaal Gewicht	42.12 kg
Zwaarste Deel	15 kg
Gewicht Batterij	8.5 kg
Batterijcapaciteit	2x 12v 12ah SLA
Batterij Wattuur	288 wh
Bereik	12 km
Snelheid	6 km/h
Maximaal Gebruikersgewicht	133 kg
Zitbreedte	43 cm
Motorgrootte	270w DC24v Borstelmotor
Maximale Helling	6 graden
Bodemvrijheid	5 cm
Draaicirkel	12.5 cm

Motion

www.motionhealthcare.nl

085-2129445