

Zirface How to use & Precautions

Italian	English
Come usare 1. Lo zirface può essere utilizzato appena prima della sinterizzazione dopo la colorazione e l'essiccazione dell'impiallacciatura o della corona in zirconia. 2. Agitare sufficientemente il contenitore Zirface in modo che possa essere completamente miscelato. 3. Utilizzare solo la quantità di Zirface necessaria con il contagocce. 4. Applicare Zirface senza lasciare spazio solo una volta sulla superficie interna della corona o dell'impiallacciatura come se si stesse premendo con il pennello esclusivo. 5. È possibile eseguire la sinterizzazione senza processo di asciugatura. Precauzioni 1. Agitare accuratamente prima dell'uso. 2. Usa il contagocce per toglierlo quanto ti serve. 3. L'uso del pennello esclusivo è efficace per un'applicazione uniforme di Zirface. 4. Come sostanza naturale, è innocuo per il corpo umano perché non ci sono componenti acidi. 5. Indossare guanti o indumenti protettivi (abiti, grembiuli, ecc.) Poiché Zirface non può essere rimosso facilmente una volta che si è messo sui vestiti o sulle mani. 6. Assicurarsi di utilizzare Zirface prima della sinterizzazione. 7. Non rimuovere il boccale all'interno del contenitore. 8. Non mangiare. 9. Conservare a temperatura ambiente. 10. Non riporre lo Zirface rimanente dopo l'uso nel contenitore. 11. Non regolare la concentrazione in modo arbitrario con acqua o altri diluenti.	How to use 1. Zirface can be used just before sintering after coloring and drying of zirconia veneer or crown. 2. Shake the Zirface container sufficiently so that it can be fully mixed. 3. Use only the amount of Zirface you need with the eyedropper. 4. Apply Zirface without gap only once to the inner surface of the crown or veneer as if pressing with the exclusive brush. 5. You can do sintering without drying process. Precautions 1. Shake it thoroughly just before use. 2. Use the eyedropper to take it off as much as you need. 3. Using the exclusive brush is effective for uniform application of Zirface. 4. As a natural substance, it is harmless to human body because there is no acid components. 5. Wear gloves or protective gear (gowns, aprons, etc.) as Zirface will not be easily removed once it gets on your clothes or hands. 6. Be sure to use Zirface before sintering. 7. Do not remove the mixing bowl inside the container. 8. Do not eat. 9. Store at room temperature. 10. Do not put the remaining Zirface after use in the container again. 11. Do not adjust the concentration arbitrarily with water or other diluents.