



FOREVERSOFT

Aparatología

Equipo para depilación SHR Modelo Escalable Básico



Equipo modelo SHR Escalable básica

La última tecnología en depilación con luz está aquí, su éxito internacional está causando gran revuelo tanto por su efectividad, ya que permite eliminar prácticamente todo tipo de vello, aun los que se consideraban imposibles, así como por la seguridad y comodidad de tratamiento sin precedentes, aunado a su gran velocidad por que puede trabajar en movimiento continuo, simplemente sesiones más rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.

Descripción General del Equipo:

El equipo SHR Escalable Básica tiene incorporado en su interior, desde que es fabricado, la tecnología IPL, lo anterior se refiere a que estos son equipos que combinan tres tecnologías, SHR (depilación a alta velocidad), luz pulsada y el Enfriamiento Directo al Contacto para tratamientos de foto – depilación, foto – rejuvenecimiento y foto – descomposición. Estos versátiles equipos funcionan con tecnologías reconocidas a nivel mundial que han sido extensamente documentadas por organismos tales como la Comunidad Europea, el Santé/Health de Canadá y la Food and Drug Administration de los EUA quienes la han reconocido por su efectividad y seguridad.

Teoría del Tratamiento:

La luz de alta intensidad emitida por una lámpara de xenón en combinación con filtros de zafiro que modifican la luz en diferentes longitudes de onda y en complemento con parámetros específicos tales como: número de pulsos emitidos, tiempo e intensidades de cada pulso, tiempo de las pausas entre pulsos y modulación de la potencia del pulso, permiten manipular la luz de tal forma que se emulen “láseres” de diferentes longitudes de onda los cuales son absorbidos de manera selectiva por diferentes tejidos de la piel para así ser capaces de dar diferentes tratamientos, de forma segura, efectiva y prácticamente indolora. Por lo cual estos equipos ofrecen una gran versatilidad de tratamientos para cualquier clínica o consultorio.

Rango de tratamiento:

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores.

En resumen, hace lo que un equipo IPL pero mucho mejor, la liberación de pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada es completamente indoloro y muy seguro.

Simplemente sesiones rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.

¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR?

| Características | IPL Tradicional | SHR | Ventajas |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| Modo de Trabajo | Pulsos múltiples | Pulso sencillo | El pulso sencillo es mucho más estable que los pulsos múltiples debido a que los picos de energía pueden llegar a quemar la piel. |
| Longitud de Onda | 640nm – 1,200nm | 640nm – 950nm | El SHR filtra tanto las ondas de luz infrarrojas como las ultravioletas que puede ser absorbida por el agua de los tejidos circundantes, por lo que es completamente inocua con estos. |
| Manerales Identificados | No disponibles | Disponible | Con manerales específicos para depilación se evitan los errores humanos que pueden resultar en quemaduras. |
| Tecnología DEC | No disponibles | Disponible | Asegura que la energía del pulso sea uniforme todas las veces y de acuerdo al valor seleccionado. |
| Frecuencia | 0.3 – 1Hz | 1 – 10Hz | Lo cual acelera el tiempo de operación y acorta mucho el tiempo de tratamiento. |
| Tecnología de Operación | Tecnología estacionaria | Tecnología estacionaria y movimiento continuo | El movimiento continuo reduce tiempos de operación además de evitar “huecos” que no reciben tratamiento. |

En resumen, hace lo que un equipo IPL puede hacer, pero mucho mejor, la liberación de pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada es completamente indoloro y muy seguro.

El equipo ideal para quien inicia en el negocio de la depilación.

| Tecnologías SHR e IPL (en este modelo requiere accesorios adicionales) | Modelo SHR Escalable Básica |
|--|--|
| Características |  |
| Fuente de luz (lámpara del maneral) | Lámpara de Xenón (3 ATM) |
| Sistema de Control (computadora) | Pantalla táctil a color de 10.4" |
| 1 pieza de mano SHR | SHR con filtro fijo / Con enfriamiento por semiconductores y agua |
| Spot de Disparo | 8 × 40mm en maneral de filtro fijo (SHR) |
| Densidad de Energía SHR (ajustable) | 1 a 36 J/cm ² |
| Frecuencia de Pulsos (ajustable) | 1 a 10 Hz |
| Tiempo de Pulso Continuo (ajustable) | 1 a 30 seg. |
| Intervalo de Pulso | Pulso Sencillo de Ráfaga |
| Enfriamiento de maneral | -4 °C a 0 °C |
| Sistema de Enfriamiento | Sistema hidráulico enfriado por aire y electrónico por semiconductores |
| Potencia (nominal en picos) | 2,500 W |
| Requerimientos Eléctricos (corriente alterna) | 110 VAC a 60Hz |
| Dimensiones | 45 × 35 × 45 cm |
| Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque) | 41 kg |
| Peso Neto (equipo) | 37 kg |

¿Por qué se llama Escalable?

Lo hemos llamado así ya que tiene la capacidad de crecer en tratamientos, quiere decir que, si inviertes en algunos aditamentos adicionales podrás dar más tratamientos con el mismo equipo. Sí, leíste bien, no es necesario que compres otro equipo, solo agrega los accesorios y tendrás todos los tratamientos SHR y los tratamientos de la tecnología e Light

¿Qué tratamientos puedo ganar con más accesorios?

Con los accesorios adicionales podrás tener los tratamientos de la luz pulsada intensa y los de la radio frecuencia, algunos de estos tratamientos a continuación:

- * Tratamientos anti edad como la reducción y eliminación de arrugas
- * Trata estrías
- * Cicatrices
- * Acné
- * Telangiectasias
- * Manchas en la piel
- * Sirve para el tratamiento de algunas afecciones de la piel, estos son tratamientos muy socorridos entre nuestros clientes del gremio médico.

La diferencia entre eliminación o reducción proviene del estado de tu paciente y la profundidad de las estrías, cicatrices, pigmentos, etc.

¿Si agrego los accesorios cuál será el rango de tratamientos?

El rango de tratamiento con todos los accesorios para este equipo es:

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores.

Foto – rejuvenecimiento (en este modelo requiere accesorios adicionales) suaviza la piel, desvanece arrugas y líneas de expresión, contrae poros, desaparece puntos negros, desvanece estrías, disminuye cicatrices, elimina acné, tonifica la piel, etc.

Foto – descomposición (en este modelo requiere accesorios adicionales) elimina manchas de edad, pecas, paño y otras pigmentaciones de la piel, elimina venas telangiectasias (telarañas), cuperosis, etc.

Proceso de Compra

1. El cliente envía por medio electrónico o físico su solicitud de compra incluyendo los datos con los que registraremos el equipo, estos datos servirán para llenar los documentos que amparan la garantía del equipo, certificados de capacitación, orden de compra, comprobantes de pago, etc.
2. Al recibir esta información por parte del cliente, este recibirá un correo electrónico con el título "Detalle de operación" en el que se presentarán las características del (los) equipo(s) que adquiere, así como, las características comerciales de la transacción.
3. El cliente recibirá un correo electrónico con el título "Cuentas para depósito", en este correo se presenta la información necesaria para que el cliente efectúe el pago del enganche correspondiente a su compra. Con el pago del enganche se da inicio a su operación de compra, con este se garantizan las condiciones comerciales, precio, garantías, capacitación (si aplica), etc.
4. A partir del pago del enganche inicia el tiempo promedio de entrega, en equipos de oferta este tiempo será de 5 semanas.
5. El cliente recibirá la orden de compra y comprobante de pago del enganche, los comprobantes incluirán los datos proporcionados por el cliente para estos fines.
6. El cliente recibirá las recomendaciones sobre redes eléctricas, así como, los datos de contacto del área de entregas con quienes dará seguimiento a la entrega de su(s) equipo(s) y capacitación.
7. El cliente recibirá la guía con la que viajará (n) su(s) equipo(s), para que esta sea liberada, el cliente liquidará el monto remanente de la operación.
8. El cliente recibe la documentación que acompaña al (los) equipo(s)
9. Una vez que el cliente recibe su(s) equipo(s) se llevará a cabo la capacitación por video conferencia.
10. Concluida la capacitación el cliente recibirá los certificados de capacitación correspondientes.

Oficina:

Lateral Sur Recta Cholula No. 7915 Local 108
Col. Santa Cruz Buenavista, C.P. 72150
Puebla, Puebla, México

Página web: www.foreversoft.com.mx
Correo de atención a clientes: atencionaclientes@foreversoft.com.mx
Teléfono: 222 589 8335

CARACTERÍSTICAS COMERCIALES

- Todos los precios se expresan en Moneda Nacional.
- La compra del equipo requiere 50% de anticipo y 50% a la entrega.
- Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de cheques de la empresa.
- El tiempo promedio de entrega es de 20 días hábiles a partir del pago del enganche.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fábrica, entrega, instalación y capacitación incluidas.
- Contamos con planes de financiamiento sujeto a aprobación.
- Los precios y características de los equipos pueden cambiar sin previo aviso.
- Los precios publicados no incluyen I.V.A.

Oficina:

Lateral Sur Recta Cholula No. 7915 Local 108
Col. Santa Cruz Buenavista, C.P. 72150
Puebla, Puebla, México

Página web: www.foreversoft.com.mx
Correo de atención a clientes: atencionclientes@foreversoft.com.mx
Teléfono: 222 589 8335