



PROCEDURE D'ADMINISTRATION DE LA SOLUTION VERROU

TauroLock™ 3 ml

1. Rincer le Dispositif Veineux Central avec 10 ml de sérum physiologique
2. Prélever le volume nécessaire de solution TauroLock™ à l'aide d'une seringue
3. **Instiller lentement (en 5 à 8 secondes) la solution TauroLock™** dans le Dispositif Veineux Central, en quantité suffisante, pour le remplir complètement*
4. Fermer le Dispositif Veineux Central avec un bouchon luer-lock
5. **Réaspiration** : avant toute nouvelle utilisation du Dispositif Veineux Central, aspirer** la solution TauroLock™ et la jeter conformément à la procédure d'élimination des déchets de l'établissement présentant un risque biologique.

** Consulter les instructions du fabricant du Dispositif Veineux Central pour connaître le volume interne spécifique et/ou le compte rendu opératoire de pose.*

*** Toutefois, si l'aspiration de la solution TauroLock™ n'était pas possible ou pas souhaitée, l'écoulement lent partiel ou total dans la voie systémique ne causerait aucun effet secondaire indésirable.*



SOLUTION VERROU

*TauroLock*TM 3 ml



- ❖ Marquage CE 0123 délivré par le TÜV, DM, classe IIa
- ❖ Fabricant : TauroPharm GmbH (Allemagne)
- ❖ Distributeur : Théradiol SAS (France)
- ❖ Ampoule en verre sécable stérile apyrogène 3 ml
- ❖ Conditionnement : boîte de 5 ampoules
- ❖ Péréemption : 3 ans
- ❖ Conservation : température ambiante entre 15° et 30°C