



**Pathonex**

Şerifali Mahallesi, Barbaros Caddesi

No:69 A/1 Ümraniye/İstanbul

info@pathonex.com


www.pathonex.com

# COVID-19 Hızlı Antijen Testi

Ocak, 2021

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, insan nazofarenksinde bulunan SARS-CoV-2 antijenlerinin kalitatif olarak saptanmasına yönelik güvenilir ve hızlı bir kaset testtir.

Bu test COVID-19'a yakalandığından şüphelenilen bireylerde SARS-CoV-2 virüsü antijeninin saptanmasında yardımcı olarak kullanılır. Ayrıca, SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi cihaz gerektirmeyen bir test olup altyapının yetersiz olduğu bölgelerde test yapılmasına imkan tanır.

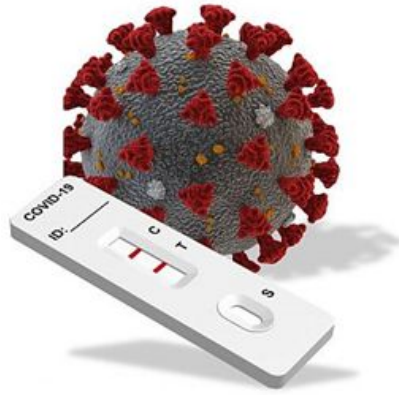

COVID-19 Hızlı Antijen Testinin uygulanması kolaydır ve nazofaringeal sürüntü yöntemini kullanarak sonuçları hızlı bir şekilde verir. Örnek toplandıktan sonra, swab, özel sıvı içeren bir tüpe yerleştirilir. Bu sıvı daha sonra bir test kasetine dağıtılır ve 15 dakika içinde pozitif veya negatif bir sonuç açıkça belirtilir.


Hızlı antijen testlerinin kullanımı kolaydır ve düşük maliyetle hızlı sonuçlar sunar.

Hızlı antijen testleri, SARS-CoV-2'nin tespiti için PZR testlerine kıyasla çok sayıda fayda sunar. Hem laboratuvar tabanlı testler hem de hastaya yakın kullanım için geliştirilmiştir ve sonuçlar analizin başlamasından 10 ila 15 dakika sonra belli olur.

## COVID-19 Antijen Testi Kullanım Kılavuzu



## Sonuç Yorumlanması

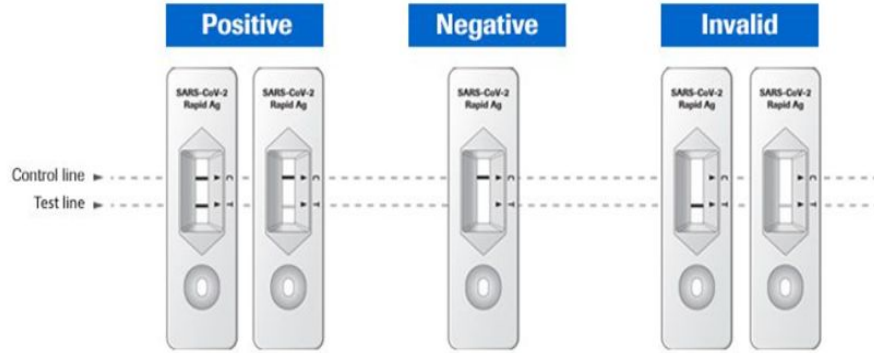

İlk 5 dakika da C (kontrol) çizgisi görünmeye başlar. 10. Dakika da net sonuç gözlenir.

C çizgisi her testte çıkmak zorundadır.

T De çizgi çıkarsa, kişi Covid-19 hastasıdır.

15'inci dakika dan sonraki sonuç dikkate alınmaz.