

**Pathonex**

Şerifali Mahallesi, Barbaros Caddesi

No:69 A/1 Ümraniye/İstanbul

info@pathonex.com

www.pathonex.com

Pathonex Covid-19 Antikor Testi

COVID-19 IgG/IgM Hızlı Test Kaseti (Tam Kan) Nedir?

Covid-19 IgM-IgG Hızlı Test, insan tam kanında, serumunda veya plazmasında SARS-COV-2 virüsüne karşı IgG ve IgM antikorlarını kalitatif olarak tespit etmek için kullanılan bir lateral akış immünolojik testidir.

Ürün Özellikleri Nelerdir?

Özel ekipman gerekmez, görsel olarak yorumlama yapılır. İsteddiğiniz zaman istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz.

Hızlıdır, parmak ucundan alınan kanla hızlı örnekleme, 10 dakikada sonuç elde edilir.

Doğruluk oranı % 98.86'dır, elde edilen sonuçlar, PCR ve elisa yöntemleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Semptomları olan, hafif semptomları olan ve hatta semptomları olmayan şüpheli hastalar için, ayrıca enfekte hastalar ve karantina kontrolü altındaki kişilerle yakın teması olan kişileri test etmek için uygulanabilir.

Testin İçeriği Nelerdir?

- Steril Tek Kullanımlık Parmak Delme İğnesi
- Test kaseti
- Transfer Pipeti (Kan örneğinin transferi için)
- Alkollü bez
- Tampon Çözeltilinin bulunduğu damlalıklı şişe

COVID-19 IgG/IgM Hızlı Test Kaseti (Tam Kan) Nasıl Çalışır?




1. COVID-19 IgG/IgM Hızlı Test Kasetinin içinden çıkan steril tek kullanımlık parmak delme iğnesi ile parmağın delinerek tam kan örneğinin hazırlanması.

2. Parmaktan alınan tam kan örneğinin pipet ile test kasetine eklenmesi.

3. Tampon çözeltisinin kan örneğinin üzerine eklenmesi.

4. 10 dakika beklenerek test kasetinin üzerindeki çizgilerin renklenerek belirginleşmesi.

Sonuçlar Nasıl Yorumlanır?

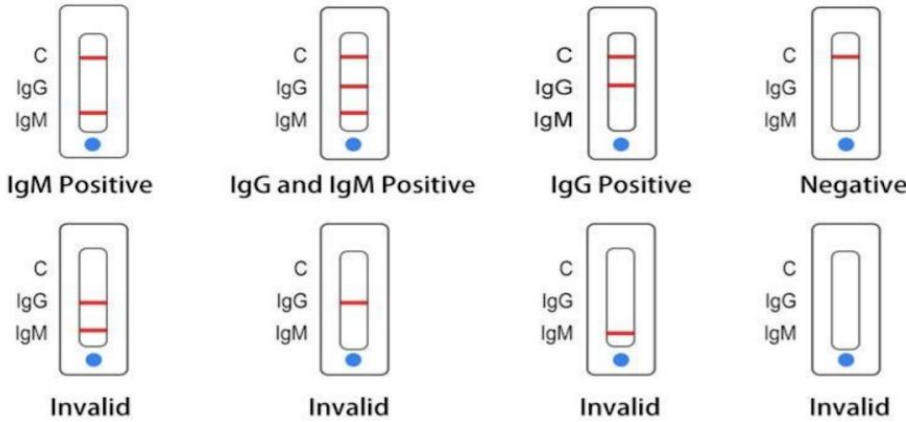

IgM POZİTİF: İki çizgi görünür. Renkli çizgiler, kontrol çizgisi bölgesinde (C) ve IgM test çizgisi bölgesinde olmalıdır. IgG test çizgisi bölgesinde (G) çizgi görünmez.

IgG ve IgM POZİTİF: Üç çizgi görünür. Renkli çizgiler, kontrol çizgisi bölgesinde (C), IgG çizgisi (G) test bölgesinde ve IgM test çizgisi (M) bölgesinde olmalıdır. Çizgilerin renk yoğunluklarının eşleşmesi gerekmez.

IgG POZİTİF: İki çizgi görünür. Renkli çizgiler, kontrol çizgisi bölgesinde (C) ve IgG test çizgisi (G) bölgesinde olmalıdır. IgM test çizgisi bölgesinde çizgi görünmez.

NEGATİF: Bir renkli çizgi kontrol çizgisi bölgesinde (C) olmalıdır. IgG ve IgM test çizgisi bölgelerinde herhangi bir çizgi görünmez.

Invalid/Geçersiz: Kontrol çizgisi görülmediğinde test sonucu geçersizdir. Bu durumda diğerlerinde çizgi görülebilir. Test tekrar yeni bir kasetle tekrar edilmelidir.

Testin Saklama Koşulları Nelerdir?

Test, oda sıcaklığında veya buzdolabında (2-30 °C) saklanabilir. Test kaseti, kapalı poşet üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden önce stabildir. Test kaseti, kullanıma kadar kapalı poşet içinde kalmalıdır.

DONDURMAYIN. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.