




EyeBridTM AirKone

Lentille hybride pour kératocônes

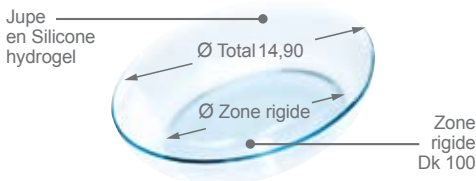

Indications : kératocônes

- Symptomatiques en LRPG
- Unilatéraux
- Port occasionnel pour le sport

Caractéristiques techniques

Matériaux	Dk 100 + filtre UV Silicone hydrogel
Ø Total	14,90 mm (disponible en 15,50 mm)
Ø Zone rigide	Systématisé en fonction du r_0
r_0	De 4,80 à 8,50 mm par pas de 0,05 mm
Edge Lift (EL)	-2,0 à +3,0 par pas de 0,1
Jupes	J 0.0 (standard) De -1.0 à +1.0 par pas de 0.5
Puissances	De -40,00 à +40,00 δ par pas de 0,25 δ Cyl. de -0,50 à -6,00 δ par pas de 0,25 δ Axes 0° à 180° par pas de 1°

Consignes


Renouvellement	Trimestriel à port journalier
Entretien	Cleadew Soft ou Oté Clean (savon) + Multifonctions ou peroxyde
Manipulation	Pose: instiller 2 gouttes de solution hydratante dans la lentille Retrait: avec une ventouse, ou comme une lentille rigide



EyeBridTM AirKone

Lentille hybride pour kératocônes

Adaptation des kératocônes

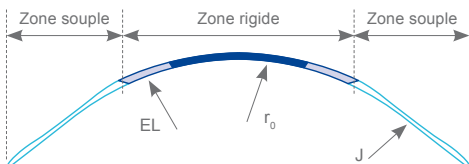

Poser une EyeBrid AirKone

$$r_0 = r_{0 \text{ AIRKONE}}$$

$$EL = EL_{\text{AIRKONE}}$$


$$P = P_{\text{AIRKONE}} + \text{réfraction complémentaire ramenée au sommet cornéen}$$

Évaluer après 15 minutes de port

1. L'acuité visuelle
2. La lentille à la LAF comme une lentille souple

Si satisfaisant, laisser tel quel

Si centrage et/ou mobilité non satisfaisant(s), modifier la jupe

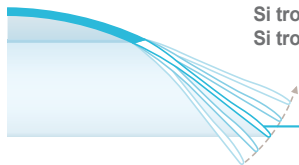

Si trop serrée, aplatir la jupe : J +0.5

Si trop plate, resserrer la jupe : J -0.5

+ 1.0
+ 0.5
0.0
- 0.5
- 1.0

Évaluer la fluo au retrait après plusieurs heures de port


Trop plat

Optimal

Trop serré



Resserrer r_0 de -0,10 mm

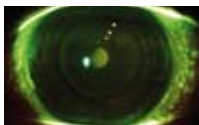

Prescrire



Ouvrir EL de +0,5

Tél. +33 231 86 66 56

Fax. +33 231 86 66 86

info@laboratoire-lcs.com



LCS