


Absoludy COVID-19 IgM/ IgG Rapid

Actualmente disponible bajo aprobación de la FDA EUA y CE-IVD y MFDS

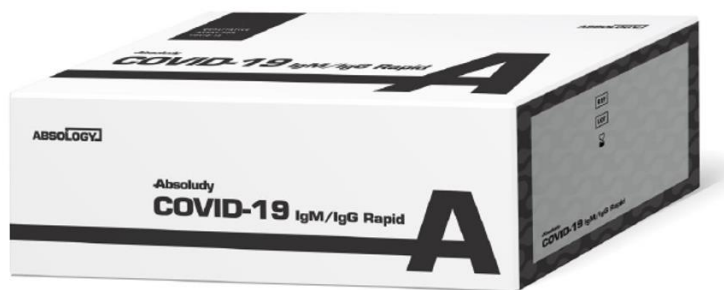

"Absoludy COVID-19 IgM/IgG Rapid" proporciona la toma de decisiones clínicas para pacientes sospechosos de infección por COVID-19 (coronavirus).

"Absoludy COVID-19 IgM / IgG Rapid" es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral que detecta anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.




- Sensibilidad clínica: 90.24% (37/41)
- Especificidad clínica: 100.00% (92/92)
- Tiempo de respuesta de 15 minutos y cantidad de muestra de 10 μ L
- Probado con sangre entera, suero y plasma.
- Fácil de usar y No requiere capacitación especializada de uso.



Procedimiento


① Toma de muestra

Sumerja el tubo capilar de recolección en la muestra (suero, plasma o sangre entera) y tome la muestra con el tubo (10 μl)

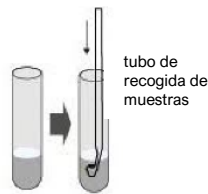

② Carga de la muestra

Agregue 10 μl de muestra (suero, plasma o sangre entera) al orificio de la muestra en el dispositivo usando el tubo de recolección de muestras o una micropipeta

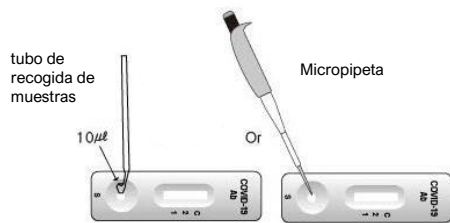

③ Carga del diluyente de muestra

Agregue 3 gotas (100 μl) de diluyente de muestra al orificio de la muestra en el dispositivo



④ Lectura e interpretación de resultados

Lea los resultados después de 15 minutos (Los resultados después de 15 minutos no son válidos)

Negativo




Positivo





Inválido



Contenido

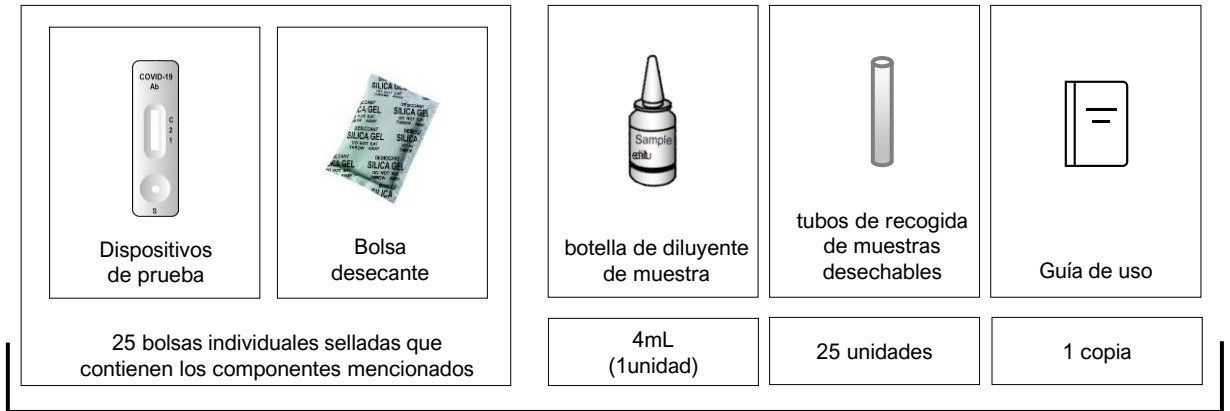

Embalaje estándar

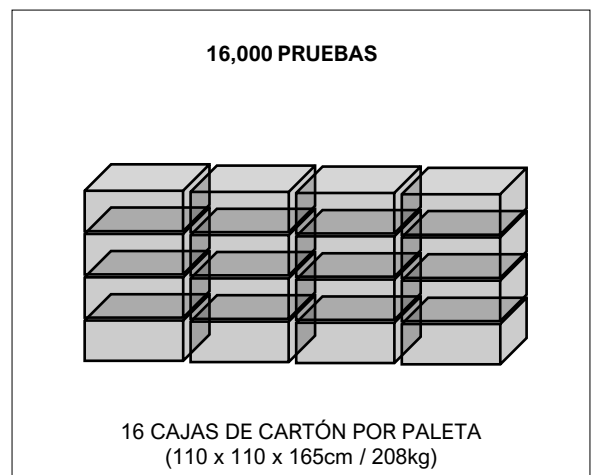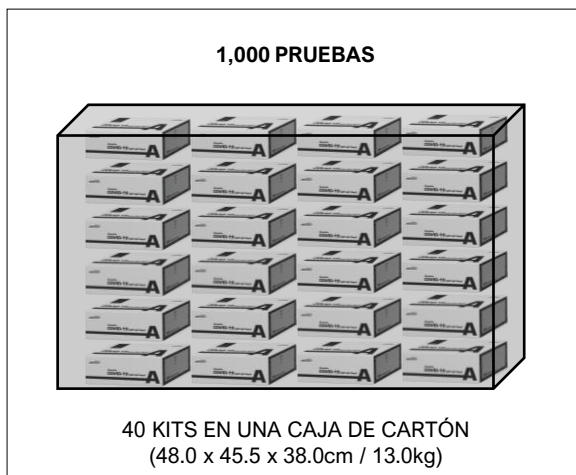



@ 2020 Andes Med Todos los derechos reservados.
El fabricante se reserva el derecho de modificar
El diseño, empaque, especificaciones y características.
Mostrado aquí, sin previo aviso u obligación



ANDES MED CORP.
335 S Biscayne Blvd. Unit 3203, Miami, FL 33131, U.S.A
E-mail: thomas@andesmed.com

ANDES MED S.A.S. (Distribuidor exclusivo en Colombia)
Calle 104C No. 47ª-04 Of. 101, Bogotá, Colombia
Mobile: +57-316-222-2213
E-mail: thomas@andesmed.com