




Placa Antebrazo™


Técnica Quirúrgica | *Sistema Antebrazo y Codo TriMed™*



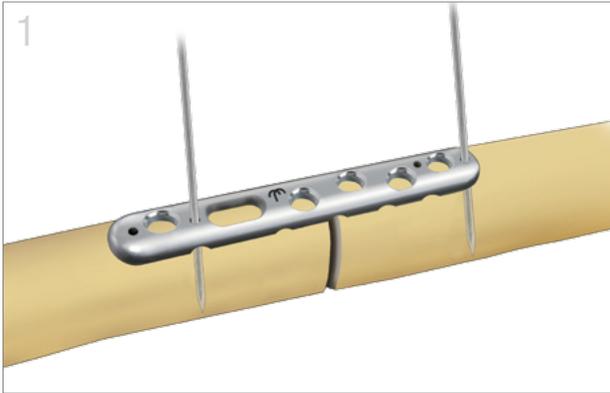


Colocación de la Placa

- Colocar la placa sobre el hueso utilizando agujas de Kirschner provisionales.

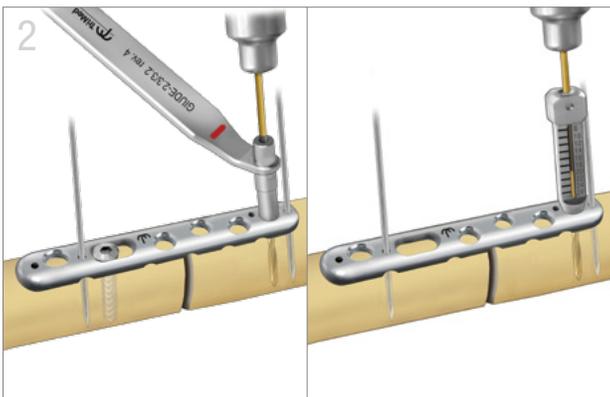

Colocación de los tornillos

- Para utilizar un tornillo cortical sin bloqueo, usar guía GUIDE-2.3/3.2 (rojo) y una broca larga de 2,3 mm (rojo).
- Para utilizar un tornillo cortical de bloqueo, usar guía GUIDELCBS-2.3 y una broca larga de 2,3 mm (rojo).

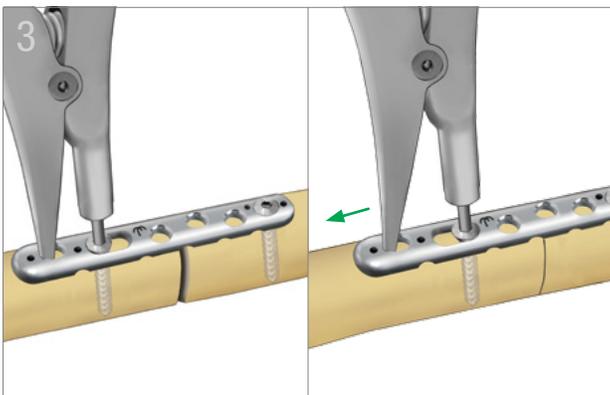

Compresión

- Sujetar la placa con un tornillo al costado de la fractura lejos del orificio ovalado. En el otro lado de la fractura, colocar un tornillo cortical en el orificio ovalado. No apriete completamente este tornillo.
- Enganchar la punta del destornillador de la herramienta de expansión / compresión en el tornillo del orificio ovalado e Insertar el gancho de la herramienta en el orificio del tornillo adyacente lejos de la línea de fractura.
- Apretar suavemente la herramienta de expansión / compresión para obtener la compresión deseada. Apriete el tornillo en el orificio ranurado.



Fijación final

- Completar la fijación con tornillos adicionales.