

A close-up photograph of a dentist performing a procedure on a patient's teeth. The dentist is wearing a grey long-sleeved shirt and is using a red Terafloat handpiece. The patient's teeth are visible, and the dentist's hands are positioned around the handpiece. The background is blurred, showing a dental office setting.

# TERAFLOAT®

# POWER DENTISTRY 2022

 **TERAFLOAT**  
POWERDENTISTRY

EU/CH-DE-A4

**Terafloat ®**  
Design und hergestellt von  
Swissvet Veterinary Products



© TERAFLOAT 2022

Vertrieb und Service EU/CH:

**Terafloat Europa GmbH**  
Industriepark 201  
78244 Gottmadingen  
+49 7731 793 7707

**TERAFLOAT Schweiz GmbH**  
Rebbergstrasse 13  
8444 Henggart  
+41 78 208 6151

[WWW.TERAFLOAT.COM](http://WWW.TERAFLOAT.COM)

01/2022 A4 EU/CH-DE

## LIGHT-WEIGHT PERFECTION !

Das Konzept des Terafloat ist einfach: ein praktisches Instrument mit Li-Ion – Batterien und einer Auswahl von Schäften mit einmaligen und cleveren Eigenschaften. Die Kombination aus modernen Materialien, einem intelligenten Design und Schweizer Qualität macht den Terafloat zum perfekten Instrument für die moderne Pferde Zahnbehandlung des 21. Jahrhunderts. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 genießt der Terafloat einen einzigartigen Erfolg bei Tierärztinnen und wird von Pferdebesitzern und Trainern gleichermaßen geschätzt.



## EIN NAME - DREI LINIEN: ECO, LED UND FLX

Terafloat bietet drei Linien von Qualitätsinstrumenten an: Die ECO-Linie, die LED-Linie und die FLX-Linie. Jede Linie verfügt über eine breite Palette von Instrumenten Sets, von der Basis bis zum Profi, um jedem Budget und jedem Behandlungsansatz gerecht zu werden. Zusammen erfüllen sie die Anforderungen vom allgemeinen Großtierpraktiker bis hin zum Spezialisten für Pferde Zahnheilkunde.

Montage und Service werden an mehreren Standorten auf der ganzen Welt durchgeführt. Der Terafloat wird in über 20 Ländern vertrieben. Schweizer Qualität und eine einjährige Voll-Garantie sind Standard.

## FÜR TIERÄRZTE VON EINEM TIERARZT

Der Terafloat wurde von dem Schweizer Tierarzt Dr. Ruedi Steiger, DACVIM, entwickelt. Er zog in die USA, um eine Facharztausbildung in Pferdemedizin zu absolvieren, fand aber seine wahre Leidenschaft in der Pferde Zahnheilkunde. Dr. Steiger ist Inhaber von Swissvet und praktiziert und lehrt immer noch Pferde Zahnheilkunde.

Dr. Steiger hat über 20 Jahre Erfahrung in der Zahnmedizin mit Schweizer Ingenieurskunst kombiniert, um seine Version eines perfekten Powerfloats für Pferde zu entwickeln. Die hochpräzisen Teile für den Terafloat werden in der Schweiz exklusiv für Swissvet gefertigt.



## WIE MAN EINEN TERAFLOAT AUSWÄHLT

1. Wählen Sie eine Modellreihe: ECO, LED oder FLX
2. Wählen Sie die Turnflex-Schäfte:
3. Berücksichtigen Sie unsere Spezial-Schäfte: Pony und/oder Schneidezahn-Schaft
4. Finden Sie das Set, das Ihrer Auswahl entspricht




## ROBUST UND ERSCHWINGLICH

Die Terafloat ECO-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Variable Geschwindigkeit
- Schalter mit Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltenschutz
- Lithium-Batterien 3Ah
- Batterieladeanzeige
- Austauschbare Schäfte
- Turnflex- und Spezialschäfte

### TERAFLOAT ECO STANDARD-SET MIT TURNFLEX SCHÄFTEN (TELLER UND APPLE CORE)

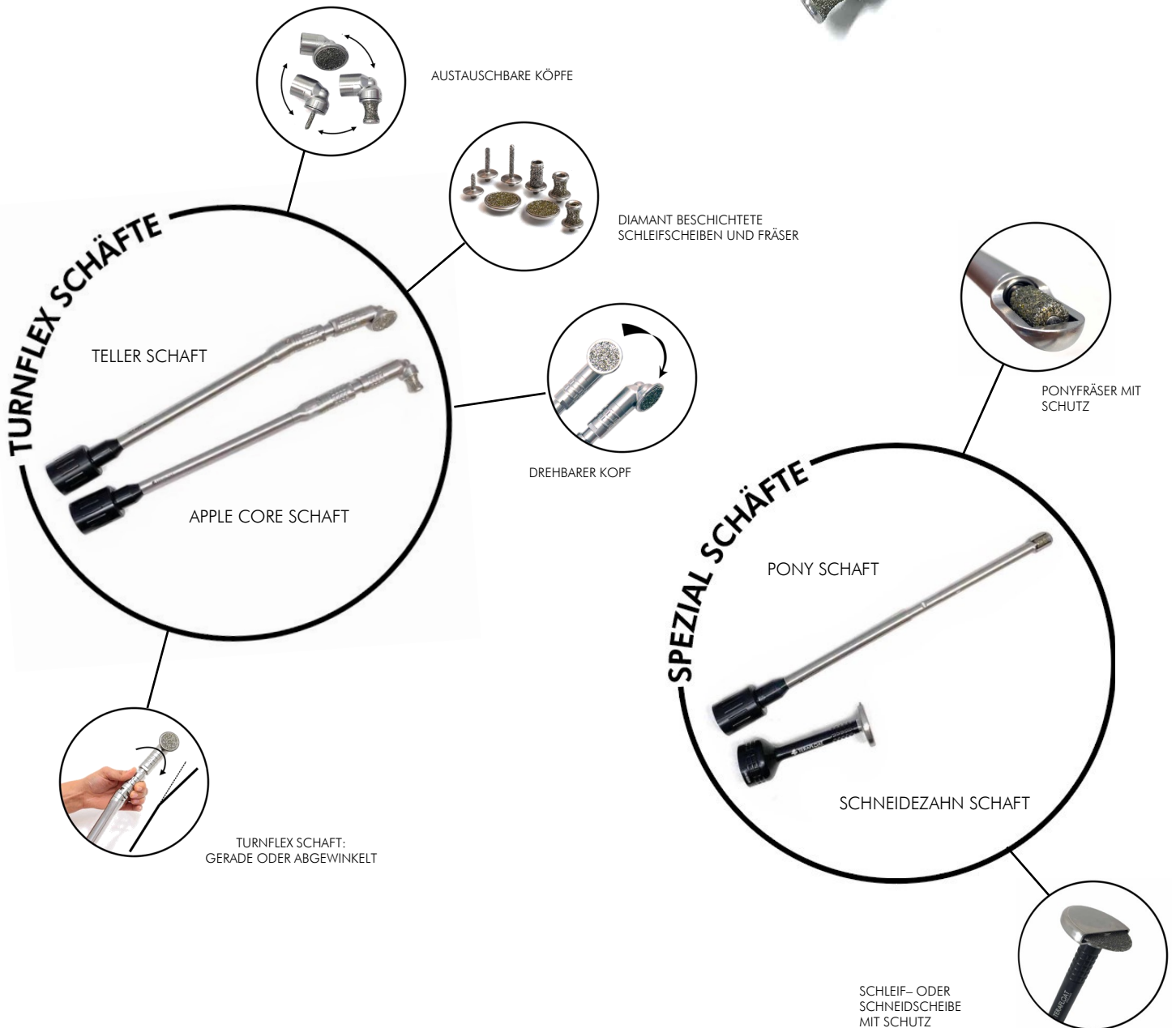

WASSERDICHT



SCHMIERUNGSFREI



SWISS MADE



Die Terafloat ECO-Linie eignet sich hervorragend für die tägliche Zahnmedizin. Sie bietet alle Terafloat-Funktionen, nur ohne LED-Beleuchtung. Es ist eine robuste und vielseitige Lösung zu einem günstigen Preis.

Der Turnflex-Mechanismus ermöglicht den Turnflex Schäften ein schnelles Wechseln von der geraden auf eine abgewinkelte Form. Dies erlaubt eine anatomisch korrekte Positionierung des Schleifkopfes und damit eine effiziente und präzise Zahnbehandlung. Der Apple Core Schaft und der Teller Schaft sind identisch, bis auf den Schleifkopf. Die SWISS-MADE Diamantschleifkörper sind sicher, dauerhaft und effizient und sind einfach auswechselbar.

Die beiden Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft und der Schneidezahn-Schaft, passen auf den selben Motor und können leicht ausgetauscht werden. Der Pony-Schaft mit dem niedrigen und geschützten Fräser erreicht sicher auch engste Stellen während sich die grosse und geschützte Schleifscheibe des Schneidezahn-Schaftes für eine effiziente und präzise Schleif- oder Schneidebehandlung der Inzisiven oder Hengstzähne besonders eignet.

Die ECO-Linie ist geeignet für den Allgemeinpraktiker, der ein modernes Instrument mit intelligenten Funktionen sucht, das detaillierte pferdezahnärztliche Eingriffe zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht.

Es sind mehrere Terafloat Eco-Sets erhältlich. Die Komponenten sind modular und austauschbar, so dass es einfach ist, von einem Set zum nächsten aufzurüsten.

**T-0037EG: TERAFLOAT ECO BASIS SET**

Motor und Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0040EG: TERAFLOAT ECO BASIS PLUS SET**

Motor und Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3 und Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0043EG: TERAFLOAT ECO STANDARD SET**

Zwei Motoren und zwei ECO Schäfte: Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3, Turnflex Schaft ECO mit Apple Core Fräser A2. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0061EG: TERAFLOAT ECO ERWEITERTES SET (SCHNEIDEZAHN)**

Zwei Motoren und drei ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0002EG: TERAFLOAT ECO ERWEITERTES SET (PONY)**

Zwei Motoren und drei ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zuberhörtasche und Transportkoffer.

**T-0028EG: TERAFLOAT ECO PROFI XS SET**

Zwei Motoren und vier ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zuberhörtasche und Transportkoffer.

**T-0064EG: TERAFLOAT ECO PROFI XL SET**

Vier Motoren und vier ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Sechs Batterien, Vier-Station Ladegerät, Zubehörtasche, Schneidezahn Maulöffner und Transportkoffer.



DIE BELIEBSTEN SETS


## LEICHTGEWICHTIGE PERFEKTION

Die Terafloat LED-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Variable Geschwindigkeit
- Schalter mit Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltenschutz
- Lithium-Batterien 3Ah
- Batterieladeanzeige
- Abnehmbare Schäfte
- Verdrahtet für LED-Schaft
- Turnflex- und Spezialschäfte



TERAFLOAT LED STANDARD SET  
MIT TURNFLEX SCHÄFTEN  
(SCHEIBE UND APPLE CORE)

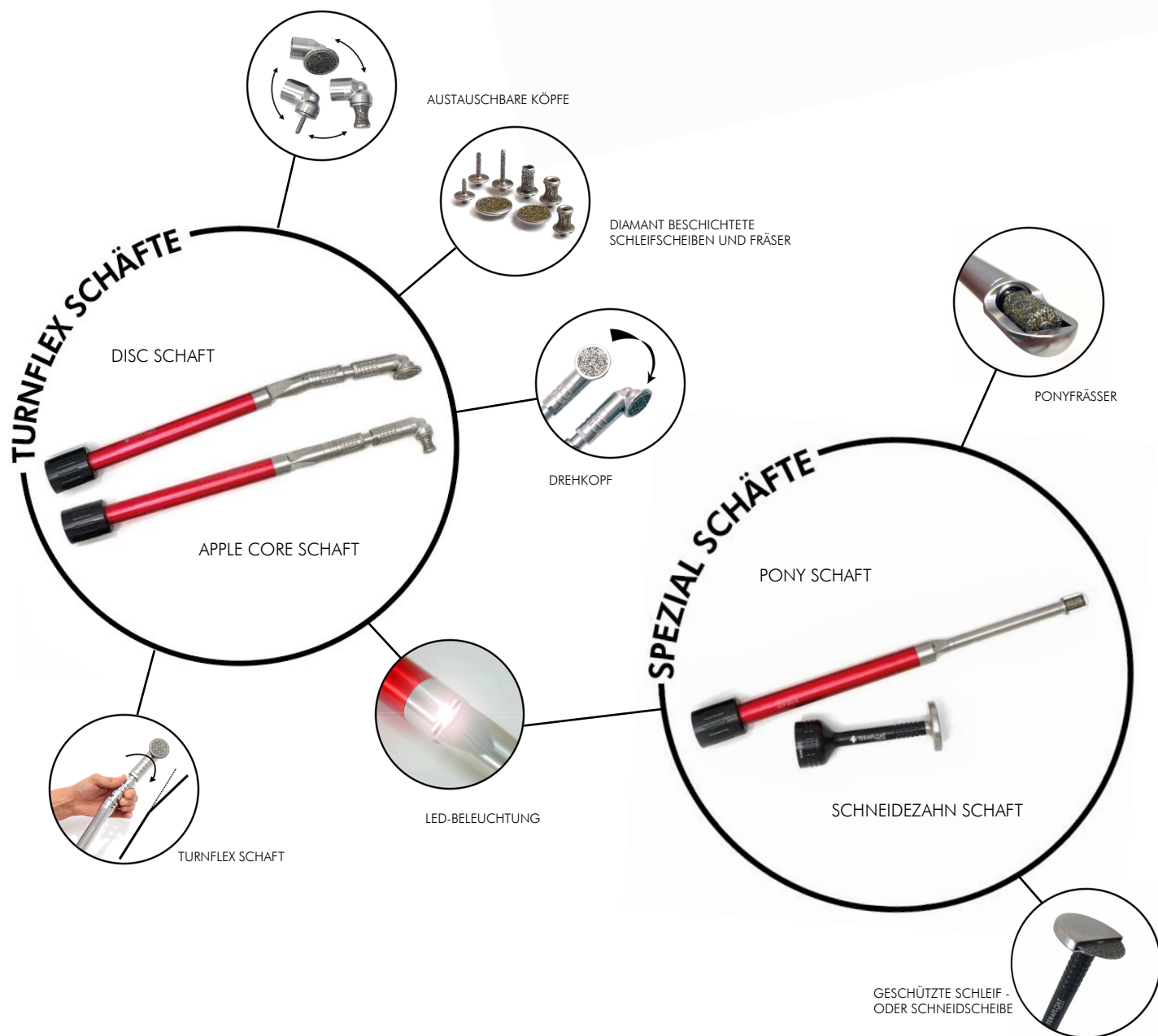

WASSERFEST



WARTUNGSFREI



SWISS MADE

Die Terafloat LED-Linie ist der perfekte Powerfloat für die Pferdezahnpflege. Er ist leicht, batteriebetrieben, wasserdicht, wartungsfrei, langlebig und die integrierten LED-Leuchten beleuchten die Mundhöhle für eine perfekte Untersuchung und Behandlung.

Die beiden Turnflex Schäfte sind mit dem Turnflex-Mechanismus ausgestattet, der ein schnelles Umschalten von einer geraden auf eine gebogene Position ermöglicht und so die perfekte Positionierung des Schleifkopfes erlaubt. Der Apple Core Schaft und der Scheiben-Schaft sind identisch, verwenden aber jeweils einen anderen Schleifkopf. Die diamantbeschichteten Terafloat-Fräser und Schleifscheiben sind aus Schweizer Produktion und austauschbar. Die Turnflex Schäfte sind effizient und ermöglichen eine präzise Zahnbearbeitung.

Die beiden Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft und der Schneidezahn-Schaft, verwenden denselben Motor und können leicht ausgetauscht werden. Der Pony-Schaft hat einen niedrigen, geschützten Fräser, der enge Stellen erreicht, und der Schneidezahn-Schaft hat eine große Schneid- oder Schleifscheibe, die eine effiziente und präzise Schneidezahnbehandlung ermöglicht.

Der Terafloat LED ist ein effizientes und praktisches Instrument mit intelligenten Funktionen für die kompetentesten Pferdezahnbehandlungen des 21. Jahrhunderts.

Es sind mehrere Terafloat LED-Sets erhältlich, um alle zahnmedizinischen Anforderungen zu erfüllen. Die modularen Komponenten sind austauschbar, so dass ein Upgrade von einem Set zum nächsten leicht möglich ist.

**T-0005EG: Terafloat LED BASIS SET**

Motor und Turnflex Schaft LED mit Scheibe T3. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0008EG: Terafloat LED BASIS PLUS SET**

Motor und Turnflex Schaft LED mit Scheibe T3 und Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0015EG: Terafloat LED STANDARD SET**

Zwei Motoren und zwei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3 und Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0051EG: Terafloat LED ERWEITERTES SET (SCHNEIDEZAHN)**

Zwei Motoren und drei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0054EG: Terafloat LED ERWEITERTES SET (PONY)**

Zwei Motoren und drei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0012EG: Terafloat LED PROFI XS SET**

Zwei Motoren und vier LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

**T-0057EG: Terafloat LED PROFI XL SET**

Vier Motoren und vier LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Sechs Batterien, Vier-Station Ladegerät, Zubehörtasche, Schneidezahn Maulöffner und Transportkoffer.



**DIE BELIEBTESTEN SETS**

# TERAFLOAT® FLX


## FLEXIBLE PERFEKTION

Die Terafloat FLX-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Abzug mit variabler Geschwindigkeit und Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltschutz
- Lithium-Batterien 6Ah
- Batterieladeanzeige
- Tragegurt mit schwenkbarem Motorclip
- Holster für Schleif-Schaft
- Verstärkte flexible Antriebswelle
- Wasserdichte magnetische Schnellverbindung
- Turnflex- und Spezialschäfte



TERAFLOAT FLX MIT TURNFLEX DISC SCHAFT

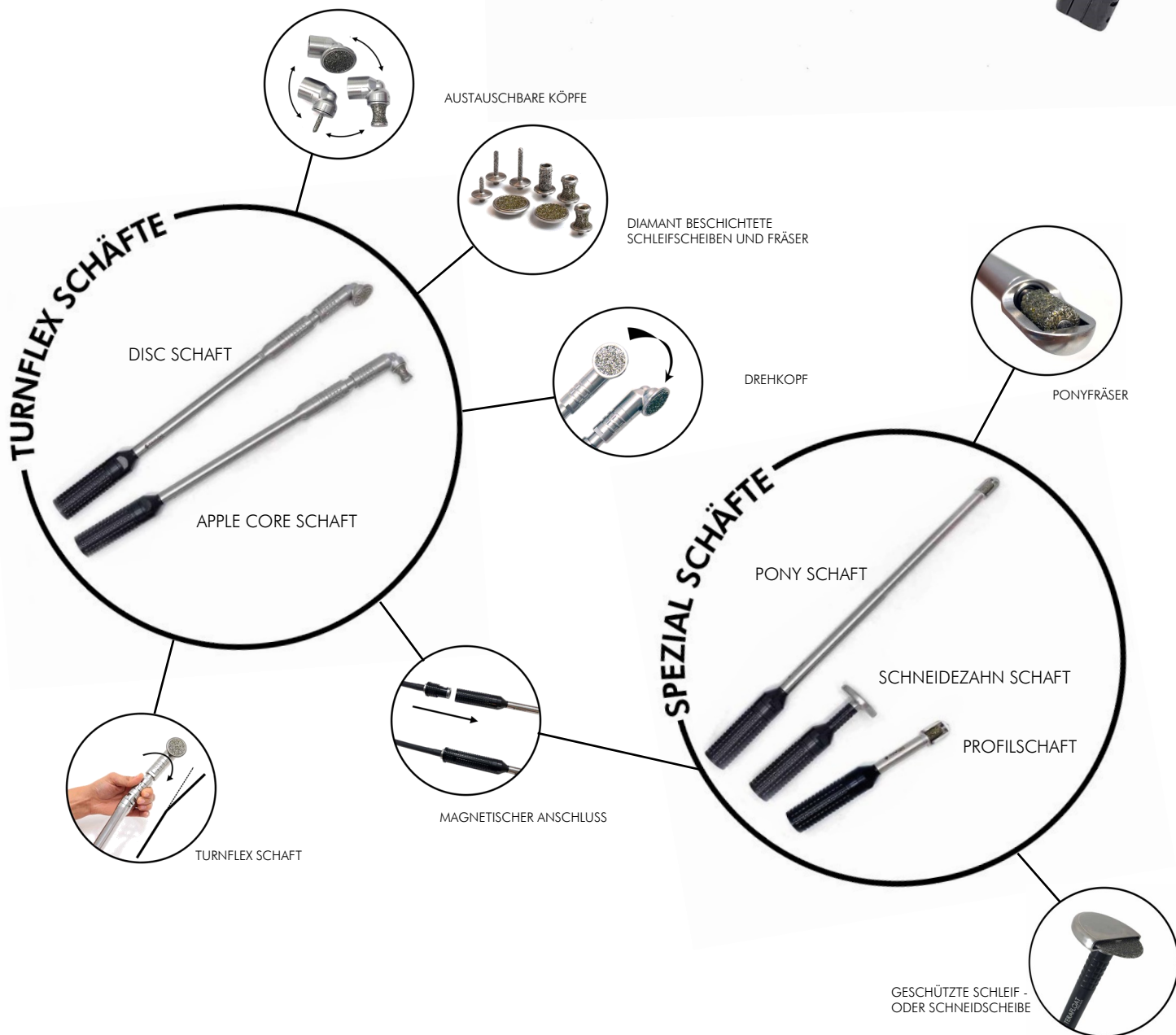

WASSERFEST



WARTUNGSFREI



SWISS MADE




Die Terafloat FLX-Linie ist perfekt für die in Europa oft bevorzugte Einhand-Behandlungstechnik. Der Motor ist schwenkbar an einem Tragegurt mit einem Instrumentenholster angebracht, das bei Bedarf den Schleifschaff hält. Die Verbindung zwischen der verstärkten flexiblen Antriebswelle und den Schleifschäften ist magnetisch und wasserdicht.

Die beiden Turnflex Schäfte sind mit dem Turnflex-Mechanismus ausgestattet, der ein schnelles Umschalten von einer geraden auf eine gebogene Position ermöglicht und so die perfekte Positionierung des Schleifkopfes erlaubt. Der Apple Core Schaft und der Scheiben-Schaft sind identisch, verwenden aber jeweils einen anderen Schleifkopf. Die diamantbeschichteten Terafloat-Schleifstifte und -Scheiben sind aus Schweizer Produktion und austauschbar. Die Turnflex Schäfte sind effizient und ermöglichen eine präzise Zahnbearbeitung.

Die drei Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft, der Schneidezahn-Schaft und der Profil-Schaft. Der Pony-Schaft verfügt über einen niedrigprofiligen, geschützten Fräser, der enge Stellen erreicht, und der Schneidezahn-Schaft hat eine große Schneid- oder Schleifscheibe, die eine effiziente und präzise Schneidezahnbearbeitung ermöglicht. Das Profilhandstück eignet sich für detaillierte Arbeiten im rostralen Bereich der Mundhöhle, einschließlich Schneidezahnbehandlung und O6er-Profilierung.

Es sind verschiedene Terafloat FLX-Sets erhältlich. Die Komponenten sind modular und austauschbar, sodass ein Upgrade von einem Set auf das nächste leicht möglich ist.

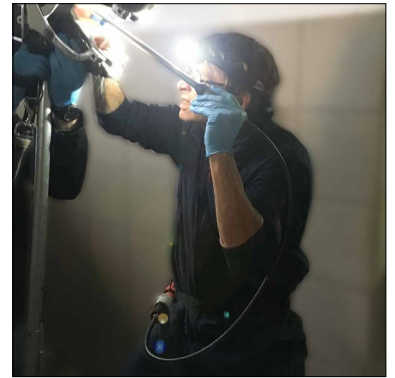

#### **T-0078EG: TERAFLOAT FLX BASIS SET**

Motor mit Traggurt, flexible Welle. und Turnflex Schaft FLX mit Scheibe T3, zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

#### **T-0081EG: TERAFLOAT FLX BASIS PLUS SET**

Motor mit Traggurt, flexible Welle. und Turnflex Schaft FLX mit Scheibe T3. Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

#### **T-0084EG: TERAFLOAT FLX STANDARD SET**

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und zwei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe und Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

#### **T-0090EG: TERAFLOAT FLX ERWEITERTES SET (SCHNEIDEZAHN)**

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und drei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2 und Schneidezahn Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

#### **T-0097EG: TERAFLOAT FLX ERWEITERTES SET (PONY)**

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und drei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2 und Pony Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

#### **T-0092EG: TERAFLOAT FLX PROFI XS SET**

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und vier Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2, Schneidezahn Schaft und Pony Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

#### **T-0110EG: TERAFLOAT FLX PROFI XL SET**

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und fünf Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2, Schneidezahn Schaft, Pony Schaft, Profilschaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.



# TERAFLOAT-KOMPONENTEN

**Klinik Ladegerät (T-0129)** Milwaukee sequenzielles Ladegerät (4 Schacht) für 12V-Batterien mit 220V EU-Stecker, wird in allen Professional XL Sets verwendet



**Batterie klein (T-0122)** Milwaukee Lithium-Batterie 12V klein (3.0Ah)



**Batterie groß (T-0120)** Milwaukee Lithium-Batterie 12V groß (6.0Ah)



**Drehscheibe T3-C10 (T-0206)** Diamantbeschichtete Drehscheibe T3 für geschützten Kopf



**Apple Core Schleifer A2-M8 (T-0212)** Diamantbeschichteter Apple Core Schleifer A2 für ungeschützten Kopf



**Apple Core Schleifer (Eckzahn) A4-M8 (T-0217)** Diamantbeschichteter Apple Core Schleifer für ungeschützten Kopf mit zusätzlicher Innenbeschichtung für die Eckzahnbehandlung



**Zylindrischer Schleifer groß Z1-M8 (T-0221)** Diamantbeschichteter zylindrischer Schleifer groß Z1 für ungeschützten Kopf



**Diastema Schleifer konisch D1-F4 (T-0261)** Diamantbeschichteter Diastema Schleifer mit konischer Spitze; nur für ungeschützten Kopf, vollbeschichtet, kurz



**Diastema Schleifer zylindrisch D2-F4 (T-0262)** Diamantbeschichteter zylindrischer Diastema Schleifer; nur für ungeschützten Kopf, vollbeschichtet, lang, für Unterkieferzähne



**Diastema Schleifer zylindrisch D3-F4 (T-0263)** Diamantbeschichteter zylindrischer Diastema Schleifer; nur für ungeschützten Kopf, unbeschichtete Spitze, extra lang, für Oberkieferzähne



**Schneidezahnrad S1-F4 (T-0285)** Diamantbeschichtete Schleifscheibe für den Schneidezahn Schaft



**Pony Schleifkörper P1-C8 (T-0283)** Diamantbeschichteter Schleifer (P1-C8) für den Pony Schaft ECO, LED oder FLX



**Schleifkörper P2 -C8 groß (T-0284)** Diamantbeschichteter zylindrischer Schleifer (P2-C8) für den Profil-Schaft FLX für ungeschützten Kopf



**Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & kurzer Diastema-Schleifer D1 (T-0190)** Kopf ohne Seitenschutz mit kurzem Diastema-Schleifer D1 für Schäfte ECO, LED oder FLX



**Kopf mit Unterkiefer Diastema Schleifer D2 (T-0191)** Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & mittlerer Diastema-Schleifer D2 für Schäfte ECO, LED oder FLX



**Kopf mit Oberkiefer Diastema Schleifer D3 (T-0192)** Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & langer Diastema-Schleifer D3 für Schäfte ECO, LED oder FLX





## WICHTIG

Verwenden Sie für die Behandlung immer eine ausreichende Sedierung und ein hochwertiges Vollmaulspekulum. Führen Sie die Behandlung nur durch, wenn Sie über eine angemessene Ausbildung und Erfahrung in der Pferde Zahnheilkunde verfügen. Entfernen Sie Zahnmaterial konservativ - vermeiden Sie, dass die Pferde übermäßig behandelt werden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, Swissvet zu kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten. Diese Anleitung gilt für alle drei Produktlinien des Terafloat, ECO, LED und FLX.

**Schneidezähne (1) und Eckzähne (siehe auch 9):** Dieses Verfahren wird am besten zu Beginn der zahnärztlichen Arbeit, wenn die Sedierung am stärksten ist, mit dem Swissvet Schneidezahnspekulum durchgeführt. Verwenden Sie die Schleifscheibe für die Arbeit an den Schneidezähnen (1) und zusätzlich den Apple Core Schleifer zum Glätten der Eckzähne. Fortgeschrittene Anwender können den Terafloat Incisor Float (9) in Betracht ziehen.

**Punkte an der unteren (2) und oberen Arkade (3):** Verwenden Sie den Apple Core Schleifer und setzen Sie ihn in einem 45-Grad-Winkel auf der lingualen (2, untere Arkade) oder vestibulären (3, obere Arkade) Seite der Wangenzähne an, wo Punkte geglättet werden müssen, und bewegen Sie ihn nach kaudal. Das Schließen des Spekulum um einen Klick auf der Behandlungsseite kann den Abstand zwischen Wange und Zähnen vergrößern. Scharfe Spitzen konservativ entfernen.

**Haken an der unteren (4) und oberen Arkade (5):** Haken können mit Schleifscheiben, den Apfelnfräsern oder großen zylindrischen Fräsern reduziert werden, je nach Pathologie sowie dem Raum zwischen oberer und unterer Arkade.

Beim Floating kaudaler Haken können Sie den Schaft zur lingualen Seite hin biegen, um die Zunge wegzuschieben, und den Floater gerade halten, um sich von der lingualen Seite aus auf die Haken vorzuarbeiten (4). Bei rostralen Haken können Sie den Schleifkopf mit der Hand führen (1/206). Wenn Sie den Schaft nach unten biegen, vermeiden Sie die Schneidezahnplatten des Spekulum (5).






**Wellen und Stufen:** Verwenden Sie die Schleifscheibe (siehe 4) oder, wenn der Platz sehr begrenzt ist, den großen zylindrischen Fräser (6), um Wellen oder Stufen zu reduzieren. Öffnen Sie nicht versehentlich eine Pulpahöhle und nehmen Sie nicht mehr als zwei Backenzähne auf jeder Seite aus der Okklusion, um eine übermäßige Belastung der verbleibenden Zähne in Okklusion zu vermeiden.

**Bohrersitz (7):** Verwenden Sie den Apfelnbohrer, um einen Bohrersitz anzubringen, und führen Sie das Instrument mit der zweiten Hand, um den Vorgang besser kontrollieren zu können. Achten Sie darauf, die Pulpa bei diesem Verfahren nicht zu öffnen.

**Diastema (8):** Verwenden Sie den langen Unterkiefer- (D2), den langen Oberkiefer- (D3) oder den kurzen (D1) Diastemafräser, um einen Interdentalraum zu vergrößern - mit Vorsicht. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken dieses Verfahrens kennen und führen Sie es nur durch, wenn andere Behandlungen versagt haben.

**Schneidezahnbearbeitung (9)** mit dem Schneidezahn Schaft: Achtung: Dieses Handstück schleift sehr aggressiv; achten Sie darauf, dass Sie nicht überkorrigieren oder eine Pulpa öffnen. Hitzeentwicklung ist normalerweise kein Problem, aber überprüfen Sie manuell die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Handstück zum Schleifen (9) oder um den Schneidezahn auf die gewünschte Länge oder Form zu schneiden. Am besten ist es, die Abzugssperre zu blockieren und den Motor/die Welle mit einer Hand und den Unter- oder Oberkiefer mit der anderen Hand zu halten. Alternativ kann die Schneidezahnbearbeitung auch mit der Scheibenwelle erfolgen.

**Arbeiten mit kleinen Rassen oder auf engem Raum (10)** mit dem Pony Schaft: Der Pony Schaft bietet die perfekte Lösung, wenn die Anatomie nicht genügend Platz für die üblichen Schäfte lässt. Der Pony Schaft ist für die ECO-, FLX- und die LED-Linie erhältlich. Er verfügt über einen Diamantfräser mit kleinem Profil, um den Zahn in die gewünschte Form zu schleifen oder ihn so weit zu kürzen, dass er mit dem Scheiben- oder Apple Core Schaft bearbeitet werden kann.

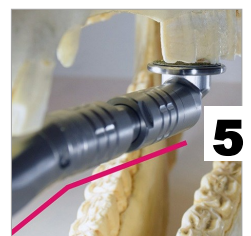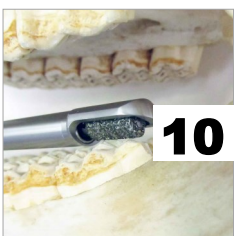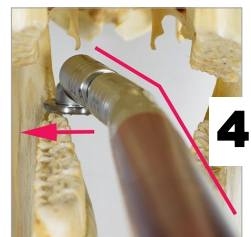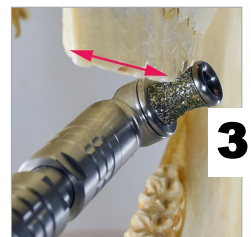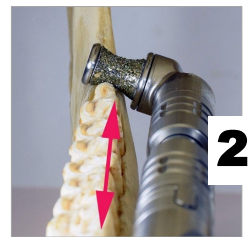

# DENTISTRY ACCESSORIES

**Swissvet Standard Spekulum (S-0012)** McPherson-Spekulum, 5 Verstellstufen, Edelstahl (magnetisch) mit BioThane Riemen, standard und halbkreisförmigen Platten



**Pony Mighty Spekulum (S-0019)** Vollmundspekulum in Ponygröße, Capps-Stil, mit halbkreisförmigen Platten, BioThane-Riemen (made in Pakistan)



**Swissvet Optimum Spekulum (S-0015)** Millennium-Spekulum, 5 Verstellstufen, Edelstahl (magnetisch) mit BioThane Riemen, standard und halbkreisförmigen Platten




**Modifiziertes Gunther Spekulum (S-0022)** Modifiziertes Gunther Vollmundspekulum mit verschiebbaren Aufbissplatten, Edelstahl, mit BioThane-Riemen



**Standardplatten (S-0050)** Standardplatten aus rostfreiem Stahl in Erwachsenengröße für Vollmundspekulum



**Spülspritze 400ml zwei Händig (S-0110)** Spülspritze 400 mL, 2-Hand-Modell

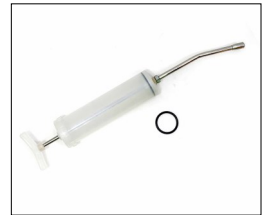

**Halbkreis-Platten (S-0054)** Große Halbkreisplatten aus rostfreiem Stahl in Erwachsenengröße für Vollmundspekulum



**Spülspritze 300ml einhand (S-0111)** Spülspritze 300 mL, Pistolengriff, Einhandmodell



**Beissplatten Paar gerade (S-0058)** Beissplatten Paar für Maulgatter (McPherson/Millennium), gerade, für Schneidezahnarbeiten, Edelstahl



**Swissvet Schneidezahn Spekulum (S-0026)** Swissvet Schneidezahnspekulum mit verstellbarem Riemen



**Endodontische Platten (S-0060)** Platten aus rostfreiem Stahl mit Spalt für die endodontische Behandlung (Paar)



**Kopfstützing Swissvet (S-0034)** Kopfstützing mit drehbarem Fuß und Seil mit Klampe



**TARO Spekulum (S-0016)** Aluminium Vollmundspekulum mit Schnellverschlussknöpfen, verstellbaren Schneidezahnplatten und BioThane Riemen (made in Germany)




**Spreader Bar (S-0030)** Aufhänge- und Spreizbügel für Maulgatter (McPherson, Millennium), Edelstahl



**Vienna Spekulum (S-0018)** Spekulum in Standardgröße aus Edelstahl, mit Handgriff, Lederriemen und Halbkreisplatten (made in Germany)



**Cheek Retractor (S-0031)** Backenretractor, Edelstahl

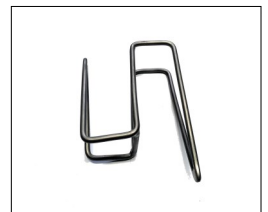




# DENTISTRY ACCESSORIES

**Kopfständer Standard (S-0035)** Hoofjack Kopfständer, Standardmodell mit rotem Boden




**Periodontometer Set (S-0250)** Erbrich Parodontometer-Set mit Edelstahlgriff, Parodontometerspitze lang und Parodontometerspitze kurz (made in Germany)

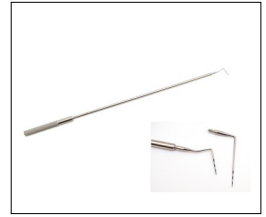

**Kopfständer Articulated (S-0036)** Hoofjack Kopfständer mit gelenkiger Halterung und rotem Boden



**Parodontometer-Spitze lang (S-0252)** Erbrich Parodontometer-Spitze aus Edelstahl lang 90 Grad-Winkel

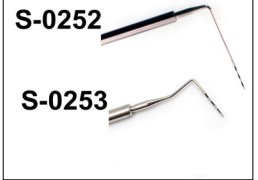

**Parodontometer-Spitze kurz (S-0253)** Erbrich Parodontometer-Spitze aus Edelstahl kurz 60 Grad-Winkel




**Instrumentenablage (S-0037)** Instrumentenablage für Hoofjack Kopfständer



**Wolfszahn Extraktionsset klein (S-0201)** Wolfszahn Extraktionsset mit 3 Wurzelheber 12cm, 3 Extraktionszangen 20cm, Edelstahl, mit Etui



**Dentalspiegel klein 30mm (S-0045)** T-Griff Untersuchungszahnspiegel 30mm, mit 3 Ersatzspiegeln zum Aufschrauben

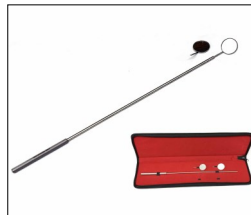

**Wolfszahn Extraktionsset groß (S-0202)** Wolfszahn Extraktionsset mit 5 Wurzelheber 12cm, 5 Extraktionszangen 20cm, 1 Zahnstein Scaler, Edelstahl, mit Aufbewahrungsdose




**Dentalspiegel 50mm (S-0040)** Zahnspiegel 5cm mit T-Griff 50 cm, Edelstahl, mit Etui



**Instrumentenbox (S-0203)** Aufbewahrungs- oder Instrumentenbox 30x12x7cm, Edelstahl



**LED Dentalspiegel 48mm (S-0042)** Dentalspiegel mit LED Licht 48mm, eine AA Batterie und Schutzhülle (made in Germany)

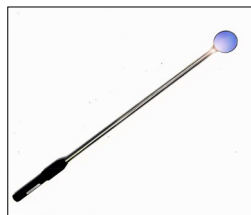

**Wolfszahn Extraktionsset lang (S-0200)** Wolfszahn Extraktionsset mit 3 Wurzelheber 32cm, 4 Extraktionszangen 32cm, Edelstahl, mit Etui



**Untersuchungsset (S-0400)** Untersuchungsset mit 2 Griffen (gerade und T-Form) mit 12 aufschraubbaren Aufsätzen, Edelstahl, mit Etui



**Wolfszahn Elevatoren Paar lang (S-0204)** Wolfszahn Elevatoren aus Edelstahl 30 cm lang



**Zahnsteinschaber (S-0405)** Zahnsteinschaber mit flacher Punktspitze, für die Entfernung von Zahnstein an den Eckzähnen




**Wolfszahn Extraktionszange S-Form kräftig (S-0255)** Wolfszahn Extraktionszange kräftig, S-Form, 28cm, Edelstahl



# DENTISTRY ACCESSORIES

**Handraspel, S-förmig (S-0101)** S-förmige Handraspel mit Hartmetallspänen (made in Germany)

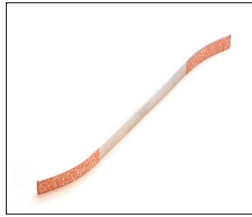


**Elevator flach (S-0308)**

Wurzelheber flach, Edelstahl



**Hippodent Handgriff kurz (S-0240) oder lang (S-0241)** Kurzer Hand-Schwimmgriff oder langer Hand-Schwimmgriff mit Pistolengriff: ohne Klinge (made in Germany)

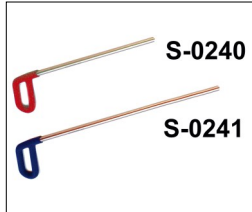


**Elevator fein (S-0306)**

Wurzelheber fein, Edelstahl



**Hippodent Klinge mit Hartmetallspänen (S-0242)** Klinge gerade  
(S-0243) Klinge nach oben gebogen  
(S-0244) Klinge nach unten gebogen

Für Hippodent Hand-Schwimmgriff kurz oder lang

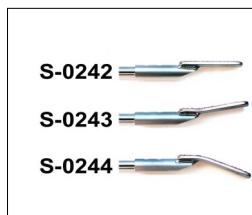

**Incisiv Extraktionszange, kompakt (S-0302)**

Schneidezahn Extraktionszange Schwanenhals, 11cm, Edelstahl



**Swissvet Nasenbremse (S-0115)** L-förmige Nasenbremse aus Edelstahl mit 6mm Seil, Ein-Personen-Modell mit Messingschnapper




**Gingiva Elevatoren-Set (S-0418)** Elevatoren Set

L/R für Gingiva oder Fragmente mit T Handgriff, Edelstahl mit Etui



**Alligator Zange 40cm 2er-Set (S-0409)** Alligator Zange gerade (S-0406) and Alligator Zange 90 Grad-Winkel Spitze (S-0407), Edelstahl

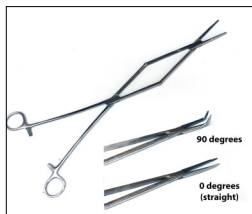

**Molar Elevatoren-Set (S-0419)** Set mit 2 T-

Griffen (60° / 75°) und 2x5 Wurzelheber Aufsätzen (flach und gerundet), Edelstahl, mit Etui



**Schneidezahn-Extraktions-Set (S-0301)** Schneidezahnzange 11", Hammer, feiner Elevator, flacher Elevator und Wurzel-Elevator-Set



**Gouges Set (S-0416)** Erbrich 5er Gouges Set (6, 8, 10, 12, 14mm) (made in Germany)




**Hammer (S-0305)**

Chirurgischer Hammer 750g, Edelstahl



**Füllungsinstrument (S-0417)** Erbrich Füll-

instrument für die Diastema Behandlung mit 30mm Scaler-Spitze und ø 2,8 mm Kugelspitze, made in Germany.

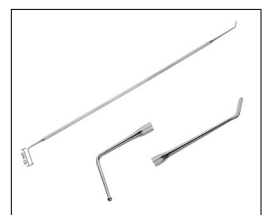

**Knochen Kürette (S-0304)**

Scharfer Löffel 4mm, Edelstahl



**Milchzahn Extraktionszangenset (S-0220)** Milch-

backenzahn Extraktionsset mit 2 Zangen nach Reynolds, Edelstahl



# DENTISTRY ACCESSORIES

**Trepanation Set (S-0410)** Trepanation Set mit 2 Kronen-Fräsern, Ø 19 mm und Ø 22 mm



**Fragment Extraktionszange S-Form (S-0309)**


Backenzahn Fragment Extraktionszange, Schwanenhals, 48cm, Edelstahl



**Molar Extraktionszange, 3 Punkt L (S-0226)** Backenzahn Extraktionszange, 3 Punkt (1 Links), 48cm, Edelstahl



**Mandibular 6er Extraktionszange, reverse Fulcrum (S-0239)** Reverse Backenzahn Extraktionszange für 3/406, 48cm gerade, Edelstahl

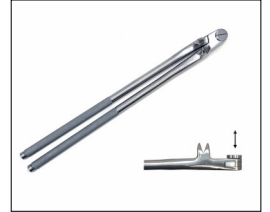

**Molar Extraktionszange, 3 Punkt R (S-0227)** Backenzahn Extraktionszange, 3 Punkt (1 Rechts), 48cm, Edelstahl



**Maxilar 6er Extraktionszange, reverse Fulcrum (S-0245)** Reverse Backenzahn Extraktionszange für 1/206, 48cm gebogen, Edelstahl




**Molar Extraktionszange, 4 Punkt (S-0228)**

Backenzahn Extraktionszange, 4 Punkt, 48cm, Edelstahl



**Fulcrum Set (S-0236)** Hypomochlion mit 2 Edelstahl Griffen und 7 Aluminiumblöcken

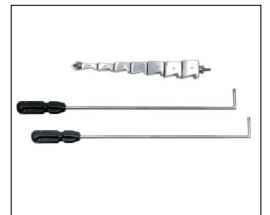

**Molar Extraktionszangenset (S-0225)** Extraktionszangen 4er Set (1) 3 Punkt links (1) 3 Punkt rechts, (1) 4 Punkt, (1) Backenzahnspreizer, Edelstahl, mit Etui



**Molar Fragment Extraktionsset (S-0320)** Molar Fragment Extraktionsset mit 3 Zangen (2, 4 and 6cm),, Edelstahl



**Molar Extraktionszange 4 Punkt Pony (S-0233)** Backenzahn Extraktionszange 4 Punkt, Ponygrösse, 48cm, mit rundem Griff 19", Edelstahl




**Fragment Extraktionszange universal (S-0321)** Backenzahn Fragment Extraktionszange, universale 5.5cm Backe, 48cm, Edelstahl



**Molar Extraktionszange gerade (S-0229)** Backenzahn Extraktionszange, gerade Backen, 48cm, Edelstahl




**Molar Interdentalspreizer 3mm (S-0231)** Backenzahn Interdentalspreizer 3 mm, 48cm, Edelstahl

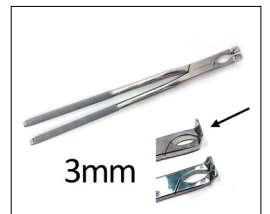

**Molar Extraktionszange, konkav (S-0323)** Backenzahn Extraktionszange, konkave Backen, 48cm, Edelstahl



**Molar Interdentalspreizer 6mm (S-0238)** Backenzahn Interdentalspreizer 6 mm, 48cm, Edelstahl

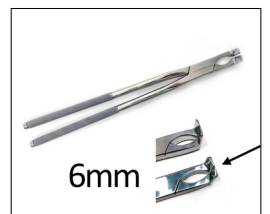

## LIGHT-WEIGHT PERFECTION



© TERA FLOAT 2022

Headquarter und Service Europa

Terafloat Europa GmbH  
Industriepark 201  
78244 Gottmadingen  
+49 7731 793 7707

[WWW.TERAFLOAT.COM](http://WWW.TERAFLOAT.COM)

