

MANUAL DE INSTRUÇÃO

ADAPTADOR DE CILINDRO



PRODUTO DE USO MÉDICO. PRODUTO REUTILIZÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. ESTERILIZAR ANTES DO USO.

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco, limpo, protegido da luz, com temperatura entre 5° e 30°C e com umidade relativa do ar entre 40% e 75%.

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES ANTES DE USAR.

Para informações de lote, data de fabricação e validade consulte a rotulagem do produto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Embalado individualmente em embalagem plástica (embalagem primária), devidamente rotulado e etiquetado, permitindo uma clara visualização do material acondicionado, sendo acomodado, posteriormente, em caixa de papel cartonado (embalagem secundária).

COMPOSIÇÃO

É composto por Aço Inoxidável 303.

INDICAÇÃO DE USO / FINALIDADE

Tem a função de fazer a conexão entre a mangueira de alta pressão e o cilindro de CO2 do equipamento insuflador e suportar pressão de trabalho de até 200 bar.

Possui uma rosca interna e uma rosca externa que se encaixam perfeitamente com as roscas do cilindro de gás e do equipamento em que ele será utilizado. Ao rosquear o adaptador no cilindro de gás, ele cria uma vedação hermética, evitando vazamentos de gás.

Dessa forma, o gás pode ser transferido do cilindro para o equipamento de forma segura e eficiente.

MODO DE USO DO PRODUTO

- Rosqueie o Adaptador De Cilindro (lado da rosca com maior diâmetro) no cilindro de CO2.
- Usando a alça do adaptador faça o aperto final.
- Rosqueie a mangueira de alta pressão na extremidade do adaptador de cilindro.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O manuseio e sua eliminação devem estar de acordo com os procedimentos médicos reconhecidos e de acordo com as normas do hospital ou clínica.

PRECAUÇÕES

- Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza.
- Conserve em local seco, fresco e ventilado.
- Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.
- Verifique sempre as condições do adaptador.
- Caso seja constatada qualquer anormalidade contate imediatamente a HE Engenharia.
- Não tente fazer qualquer reparo no adaptador.
- A manutenção deste produto só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas autorizadas, e com peças originais.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não seja indicada pela HE Engenharia.
- A não observância destas condições será considerada mau uso do produto.

GARANTIA E MAU USO DO PRODUTO:

- O produto possui garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Essa garantia cobre eventuais defeitos de fabricação ou de materiais, desde que constatados durante o uso adequado e seguindo as orientações do fabricante.

Importante:

Não estão cobertos pela garantia os danos causados por mau uso. São considerados exemplos de mau uso as seguintes situações:

-Encaixe inadequado da rosca:

A instalação do adaptador de cilindro deve ser realizada com atenção ao alinhamento correto da rosca. O encaixe errado, seja por falta de cuidado ou aplicação de força excessiva, pode danificar a rosca, resultando em vazamento de gases e comprometendo a segurança do equipamento.

-Deformação do adaptador por queda do cilindro:

Quando o cilindro é derrubado ou sofre impacto brusco, o adaptador pode entortar ou amassar. Essa deformação prejudica o funcionamento adequado do sistema, inviabiliza o acoplamento seguro e exige substituição imediata do componente.

REPARO E MANUTENÇÕES

Caso seu produto necessite de reparo ou manutenção, entre em contato com a HE ENGENHARIA para obter autorização de retorno e endereço.

Os produtos reparados pela HE ENGENHARIA são garantidos por 90 dias.

Caso seja necessário devolver a unidade:

- Devolva-a na embalagem original ou numa embalagem semelhante, que ofereça o mesmo nível de proteção.
- Produtos alterados, reparados ou mantidos por pessoas não autorizadas ou que sofreu acidente, utilização indevida, abuso ou operação contrárias às instruções,

perdem a garantia, e o fabricante não assume nenhuma responsabilidade além daquelas pormenorizadas.

- O N° de Série, lote e selo de garantia não podem ser alterados de maneira alguma.
-

Nome Técnico: Adaptadores

Nome Comercial: Adaptador de Cilindro

Registro Anvisa N°: 82940750003

Validade: Indeterminada

Fabricado e Distribuído Por:

HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

CNPJ: 59.466.409/0001-40

Avenida Nove de Julho, 2244 – sala 11 – Anhangabaú / Jundiaí – São Paulo

Cep: 13208-056

Sac: comercial@heengenharia.com

Site: <https://heengenharia.com/>

Responsável Técnico e Legal

Hugo Fabian Decaro Schettini – CREA-SP: 5061525142