

QUICK START

Wireless Endoscope DS2542HD




Logiciel

Installez le logiciel d'examen :
Tablette ou smartphone (Android ou Apple) : depuis l'App Store
Ordinateur Windows : CamViewer depuis la clé USB
Ordinateur Apple : non pris en charge




Insérer la batterie

Assurez-vous que la batterie est chargée et insérez-la côté + en premier. Ne pas croiser les filets du couvercle, serrez-le simplement fermement.

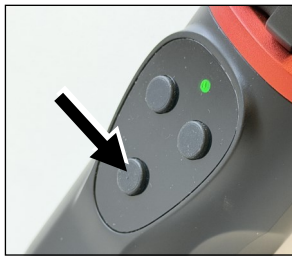

Insérer la batterie

Assurez-vous que la batterie est chargée et insérez-la côté + en premier. Ne pas croiser les filets du couvercle, serrez-le simplement fermement. Retirez la batterie pour le stockage.

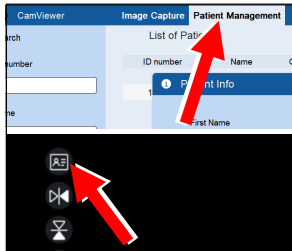


Informations sur le patient

Revenez à l'application et ajoutez les informations du patient. CamViewer (ordinateur Windows), cela se fait dans la gestion des patients. Endocam (smartphones ou tablettes), l'icône en haut à gauche.



Examen

Les images sont enregistrées avec le bouton gauche, les vidéos avec le bouton droit. Avec CamViewer, choisissez le chemin de stockage (par exemple sur un emplacement compatible cloud).

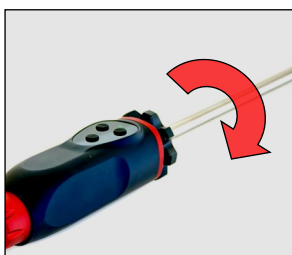

Conseils pour l'examen

Tournez le manche - les boutons d'action restent en haut. Fonction miroir: pour conserver la bonne orientation de l'image. Nettoyez l'endoscope après chaque utilisation. Nettoyer les boutons qu'avec un chiffon.

QUICK START


Wireless Endoscope DS2542HD



Software Installation

Tablet oder Smartphone (Android oder Apple): aus dem App Store
Windows-Computer: CamViewer vom USB-Stick

Apple-Computer ist nicht unterstützt

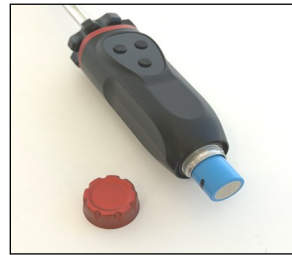


Batterie einlegen

Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist. legen Sie sie mit der + Seite ein. Schraube den Deckel sorgfältig an und ziehe gut fest. Entferne die Batterie zur Aufbewahrung.



Einschalten & verbinden

Halte die mittlere Taste gedrückt, bis die grüne Anzeige blinkt. Öffne die App (oder gehe direkt in die WLAN-Einstellungen) und verbinde mit dem WLAN-Signal des Endoskops (z. B. „endocam“).

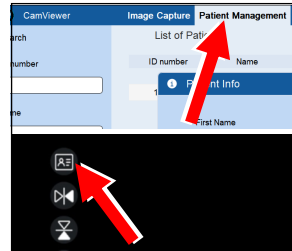


Patienteninformationen

Gehe zurück zur App und füge die Patienteninformationen hinzu. Bei CamViewer auf Windows-Computern ist dies unter Patient Management. Bei Endocam auf Smartphones / Tablets: das Symbol oben links.



Untersuchung

Bilder werden mit der linken Taste, Videos mit der rechten Taste aufgenommen. Bei CamViewer kann selbst der Speicherort gewählt werden (z. B. an einem cloud-unterstützten Speicherort).

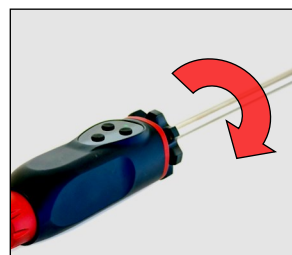

Tipps

Drehe den Schaft, sodass die Bedientasten oben bleiben. Die Spiegelfunktion ermöglicht, die Bildausrichtung korrekt zu halten. Reinige das Endoskop nach jeder Verwendung. Verwende ein Tuch um die Tasten zu reinigen.