

HYALO⁴

Silverspray

Hiyalüronik asit sodyum tuzu
Metalik gümüş
E vitamini

Endikasyonlar:

Enfekte olmayan deri lezyonlarının (Örneğin çizikler, sıyrıklar, deri çatlakları, kesikler, küçük cerrahi yaralar, lokalize 1. ve 2. derece yanıklar) diyabetik ayak, atlet ayağı ve bası yaralarının tedavisinde.

Nasıl Etki Eder?

Hyalo4 Silver Sprey hiyalüronik asit (HA), metalik gümüş ve E vitamini içeren topikal kullanıma uygun bir süspansiyon spreydir. Hiyalüronik asit ve gümüş emici özelliklerde bir matriks (kaolin ve nişasta) içinde birleştirilmiştir. Eksudanın emilimi doğal doku rejenera edici süreci kolaylaştıran bir ortam sağlarken hiyalüronik asit ve gümüş ile birlikte mikrobiyal penetrasyona karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. E Vitamini'nin tabaka oluşturuıcı etkisi reepitelizasyon sürecine yardım ederken optimal deri nemlendirici koşulların geri kazanılmasına katkı sağlar.

Doz ve Kullanım Yöntemi:

- 1) Spreyi uygulamadan önce yarası yıkayarak temizleyiniz.
- 2) Kullanmadan önce sprej kutusunu birkaç saniye içice çalkalayınız.
- 3) Sprej kutusunu dik olarak tutarak yaradan 15 cm uzaklıktan yara yüzeyini kaplayacak miktarda tozu püskürtünüz.
- 4) Tozun püskürtüldüğü alanın steril bir gazlı bezle kapatılması önerilir.
- 5) Klinik duruma göre günde 1 ya da 2 kez uygulayınız.
- 6) Serum fizyolojik ile yıkandığında ürün kolaylıkla temizlenir.

Uyarılar:

Harici kullanım: Yutmayınız veya solumayınız.
Gözlerle temasından kaçınınız, temas olması halinde bol su ile yıkayınız.
Uygulanan alanı güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Sprej ucunun yarayla doğrudan temasından kaçınınız.
İstenmeyen bir olayla karşılaştığınızda, ürün kullanımını durdurunuz ve bir hekime danışınız.
Uzun süreli kullanımda bir hekime danışınız.
Kullanım sonrası ürünün kapağını kapatınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya ambalajı hasarlı olan ürünü kullanmayınız.

Bileşim:

Ana Bileşen: %0,25 hiyalüronik asit sodyum tuzu
Diğer Bileşenler: Metalik gümüş, kaolin, mısır nişastası, E Vitamini, pirinç kepeği yağı, terpineol, disiloksan ve itici gaz.

KONTRENDİKASYONLAR:

Bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık. Doz aşımı belirtilerine dair bir bilgi yoktur. İlaçlarla veya tıbbi ürünlerle bilinen bir etkileşimi yoktur. Gebeler kullanmadan önce bir hekime danışmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

+5 ve +30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız.

TEHLİKE: Aşırı yanıcı gaz içerir. Basıncı kutu: Isıtılırsa patlayabilir. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık ateşten ve diğer yakıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmemelidir. Açık ateş veya diğer yakıcı kaynaklar üzerine püskürtmeyiniz. Kullandıktan sonra bile delmeyiniz ve yakmayınız. Güneş ışığından koruyunuz. 50 °C / 122 °F yi aşan sıcaklıklarda tutmayınız. Çocukların erişmeyeceği yerde saklayınız.



Parti numarası ve son kullanma tarihi sprej kutusunun tabanında belirtilmiştir. Son kullanma tarihi hasar görmemiş ve doğru koşullarda saklanmış ürünler için geçerlidir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermemektedir. Ürün bittikten sonra ulusal düzenlemelere uygun biçimde atılmalıdır.

Üretici:

Nirial Pharma srl
via Rovani, 7 20123 Milano
(İtalya)
www.nirialpharma.com



Dağıtım:

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) İtalya

İthalatçı:

PharmaVital İlaç Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok Grand Tower
No:2 Kat:4 D:52 Ataşehir – İstanbul
Tel: 0 216 504 07 55

Kullanım talimatının son revizyon tarihi: Eylül 2021



Son kullanma tarihi



Parti numarası



Katalog sayısı



Sıcaklık sınırlaması



Güneş ışınlarından koruyunuz.



Kuru yerde saklayınız.



Kullandıktan sonra dikkatlice atınız.



Üretici



Tehlike, Aşırı Yanıcı Gaz İçerir.