



## Instrucciones de uso del MMS7000 - Codo

1. Coloque los electrodos en un entrecruzamiento (X) del patrón en la piel (ver diagrama).
2. Asegúrese que los alambres están conectados correctamente a cada lado de la MMS7000 y electrodos. (rojo con rojo, negro con negro).
3. Encienda el MMS7000 presionando el botón naranja.
4. Utilice el modo (ortopédico) de "Ort" (esta es la configuración inicial cuando se enciende el MMS7000).
5. Presione el + y - para seleccionar la amplitud deseada. Una vez alcanzada la posición deseada el tratamiento se iniciará automáticamente.

El tiempo de tratamiento es de 20 minutos. El MMS7000 se apagará automáticamente cuando se termine el tratamiento.

Recargue la batería cuando la pantalla indica "un bar". NO carga el MMS7000 hasta que llega a "un bar".



Carga: Conecte el adaptador de pared de CA a un enchufe y conectar a la maquina.

El MMS7000 puede utilizarse para durante se carga tratamientos durante la recarga.

Para preguntas o cuando haya terminado con el MMS7000 por favor llamada o texto:


**Jeff Anderson**  
801-663-6015

**Cherie Cooper**  
801-663-9823



## Instrucciones de uso del MMS7000 – Codo

### Electrode Emplazamiento

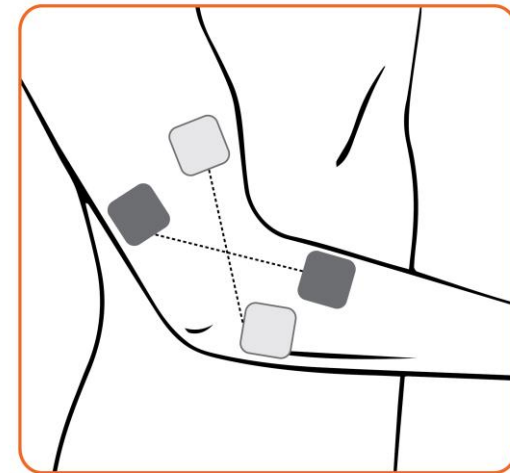

**Your Initial Setting**

**Ajustar la amplitud  
(+ o -) como tolerado.**

**No debe haber ningún movimiento  
de la piel o espasmos musculares.**

**Utilizar 3 + veces al día.**

**Espere 3-4 horas entre  
tratamientos.**