





Liocan Precargada - Uso




1 Si hay un seguro, retírelo

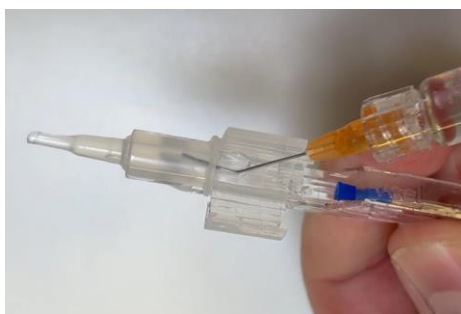

2 Añada viscoelástico a la punta del inyector

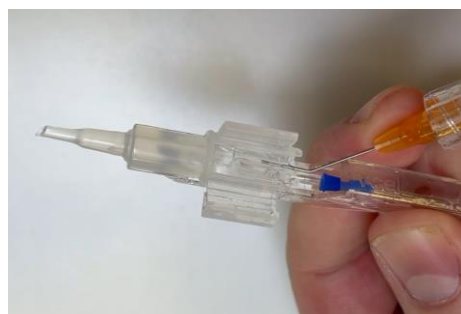

3 Humedezca el cartucho por debajo de la lente intraocular

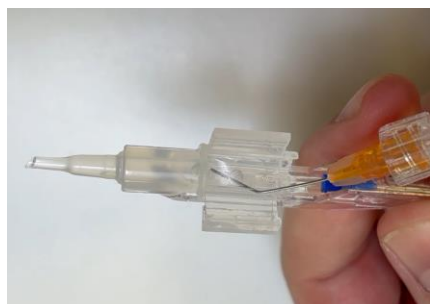

4 Presione cuidadosamente sobre la LIO desde la háptica primera/entrante, por debajo de la cubierta de plástico, para mantener la LIO plana entre los raíles



5 Cierre el cartucho y, si había un seguro (1), añada un poco de visco en la parte posterior del cartucho



6 Inyecte suavemente, sin parar, con las alas del cartucho hacia arriba

*This is an addendum to the Instructions For Use supplied with Liocan Intraocular Lens.
Carefully read the instructions prior to use the device. Failure to do so may result in patient complications*