




Como cargar la Lente Intraocular Liocan en el sistema de inyección suministrado

1. Llene con viscoelástico la punta del inyector y humedezca el fondo de la cámara de carga.

2. Con unas pinzas, agarre la LIO por la parte circular del portador en la que está sujeta, tal y como se indica en la imagen de la derecha.



3. Coloque la LIO en la cámara de carga, sin girarla, tal y como se indica debajo. Tiene unas muescas (marcadas en rojo) como guía.

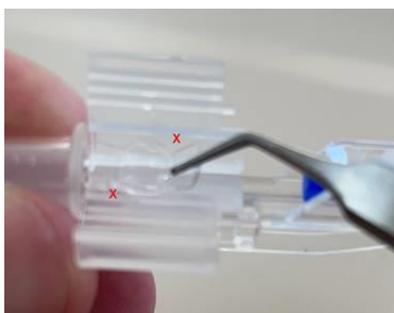

4. Con unas pinzas de puntas alargadas cerradas, presione suavemente sobre la LIO colocándola plana entre los raíles del cartucho, tal y como se indica en la imagen de debajo. Acto seguido, puede retirar las pinzas.



5. Cierre el cartucho y añada un poco más de viscoelástico en la parte posterior del mismo.

6. Asegúrese de que la LIO no este enganchada acercando el émbolo al cartucho/LIO y empujando ligeramente; debe moverse con mucha suavidad, no debe sentirse ningún tope; de lo contrario, abra el cartucho y centre la LIO nuevamente.

7. Inyecte suavemente, sin parar, manteniendo las alas del cartucho cerrado hacia arriba. No gire el inyector durante la inyección.

Esto es un anexo a las Instrucciones de Uso proporcionadas con la Lente Intraocular Liocan. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto. En su defecto, puede resultar en complicaciones con el paciente.