

ANILLO CAPSULAR PRECARGADO

MODELOS

Ref: ACV001302PL

Diámetro abierto: 13mm

Diámetro cerrado: 11 mm

Ref: ACV001602PL

Diámetro abierto: 16mm

Diámetro cerrado: 14 mm



DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Los anillos de tensión capsular AJLVET, fabricados de polimetilmetacrilato (PMMA), están diseñados para estabilizar el saco capsular durante y tras la cirugía de cataratas, en pacientes en los que exista, entre otros:

- Debilidad zonular primaria o secundaria
- Zonulolisis parcial
- Traumatismo
- Síndrome pseudoexfoliativo
- Riesgo de retracción capsular (e.g. uveitis)

Uso exclusivo veterinario

DIRECCIONES DE USO

1. Abra el envase y retire el inyector. (Figura 1)
2. Gire la ruleta hacia delante hasta introducir el anillo completamente en el inyector (Figura 2)
3. Desbloquee el inyector girando la pestaña hacia el centro hasta hacer un "click". (Figura 3)
4. Introduzca la punta del inyector en el saco capsular (Figura 4) y gire la ruleta hacia atrás para liberar el anillo de forma suave y controlada..
5. El anillo se soltará del gancho cuando se haya liberado en su totalidad del inyector.
6. Gire la ruleta hacia delante hasta retraer el gancho y extraiga el inyector del ojo.

