

# FICHA TÉCNICA

## Producto

**KN95 MASCARA FACIAL PROTECTORA (RESPIRATOR)**

*Casoft.*

**FABRICADO POR:**

**FUJIAN PUTIAN KAIDA HYGIENIC PRODUCTS CO,LTD.**

## DESCRIPCIÓN

<b>Nombre Producto</b>	KN95 Mascarilla Facial Protectora		
<b>Standard</b>	GB2626-2006 KN95		
<b>Rango de filtración</b>	$\geq 95\%$ PM 2.5		
<b>Material:</b>	<b>Cinco capas</b>		
	<b>Primera capa</b>	50 GSM Nonwoven	Previene salpicaduras
	<b>Segunda capa</b>	25 GSM Meltblown	Filtra partículas
	<b>Tercera capa</b>	50 GSM Spunlace	Antihumedad
	<b>Cuarta capa</b>	25 GSM Meltblown	Filtra partículas
	<b>Quinta capa</b>	25 GSM Soft Nonwoven	Suave con la piel
<b>Características</b>	Elimina el 95% de las partículas en el aire y contaminación.		
	Previene salpicaduras, partículas y aerosoles no basados en aceite.		
<b>Color:</b>	Blanco		
<b>Envase:</b>	10 piezas por bolsa		
<b>Peso:</b>	5.8 gramos		
<b>Tipo:</b>	Lazo detrás de la oreja		
<b>Resistencia inhalación</b>	< 80 Pa (Flujo: 85L/min)		
<b>Resistencia exhalación</b>	< 70 Pa (Flujo: 85L/min)		
<b>Usos:</b>	COVID – 19, prevención de gérmenes, virus influenza, antipolución, antiempañamiento, anti PM – 2.5.		
<b>Certificaciones:</b>			
<b>ISO</b>	ISO 9001		
<b>FDA</b>	<a href="https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=669420&amp;lpcd=MSH">https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=669420&amp;lpcd=MSH</a>		

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máscara plana, con fijación tras orejas.
- ✓ Cómoda de usar.
- ✓ Arco nasal ajustable.

**Casoft.**



## COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA KN95



1. Saque la mascarilla de su envase y ajústela a su nariz y mentón.
2. Tome las tiras con ambas manos y simultáneamente fíjela detrás de sus orejas.
3. Ajuste el puente nasal presionándolo suavemente hasta que quede fijo.
4. Con sus manos termine ajustando la mascarilla de manera que se adhiera a su cara.

Para retirar la mascarilla tómela desde los lazos tras las orejas, con ambas manos, y la mueve hacia delante de su cara. Nunca toque la parte frontal de la máscara con sus manos ya que puede contaminarse. Deposítela en un recipiente solo para desechar este material. Lave sus manos con jabón 40 segundos o alcohol en gel antes y después del procedimiento.

## **USO**

- ✓ Este producto es para uso individual
- ✓ Durante su uso evite tocar la mascarilla con sus manos.

El uso de la mascarilla KN95 no implica que se dejen las otras medidas de seguridad como la distancia social, idealmente de dos metros y el lavado de manos.

Reglamentos en aplicación en Perú regula el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

## **REUTILIZACIÓN**

- ✓ Se entiende que su uso continuo es entre algunas horas y un día.
- ✓ La mascarilla no debe lavarse ya que separan sus capas.
- ✓ No debe limpiarse con alcohol 70% ya que pierde sus características de filtración.