

GUÍA RÁPIDA PARA DESCARGAR MEDICIONES A TRAVÉS DE Alco-Sensor Vxlerator

Método 1: BLUETOOTH

Asegúrese de tener activado el Bluetooth en su notebook/PC.

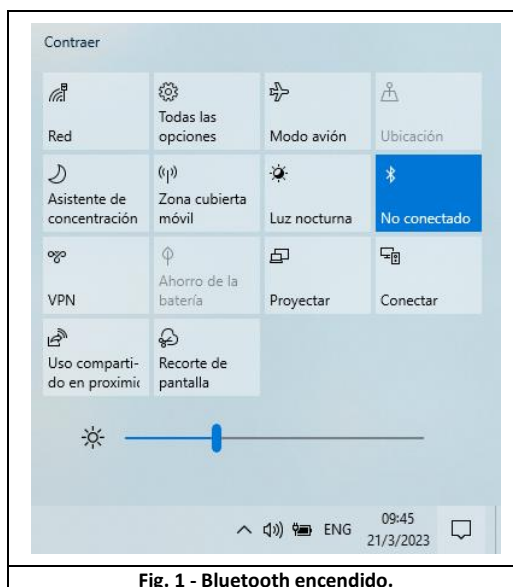


Fig. 1 - Bluetooth encendido.

- 1- Inicie el programa 'Alco-Sensor Vxlerator' en su computadora.

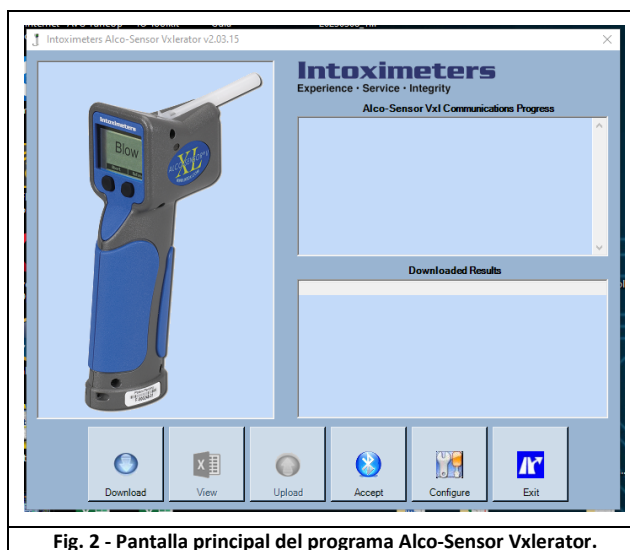


Fig. 2 - Pantalla principal del programa Alco-Sensor Vxlerator.

En su espirómetro:

- 2- Acceder a menú principal, para esto, manteniendo presionado el botón frontal derecho, presione el botón amarillo ubicado en la parte opuesta a la pantalla durante unos segundos.
- 3- Seleccione 'Realizar llamada'.

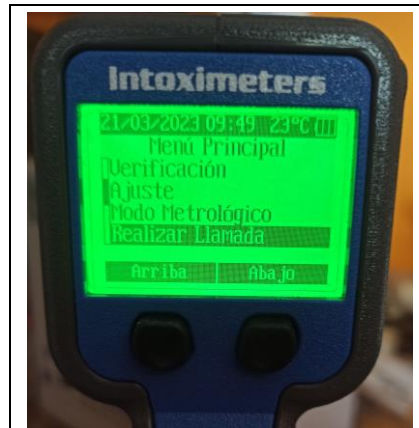


Fig. 3 - Realizar llamada.

4- Ingrese contraseña: PASS2

Para confirmar contraseña presione varias veces el botón amarillo.

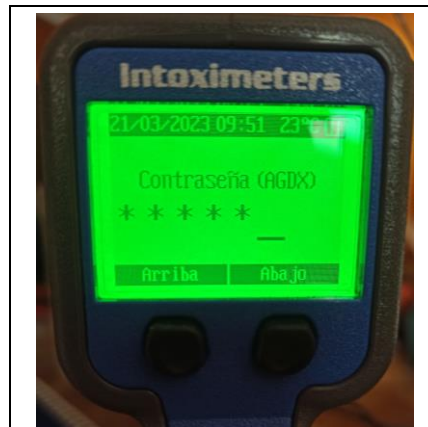


Fig. 4 - Contraseña.

5- Confirme emparejamiento con botón amarillo.

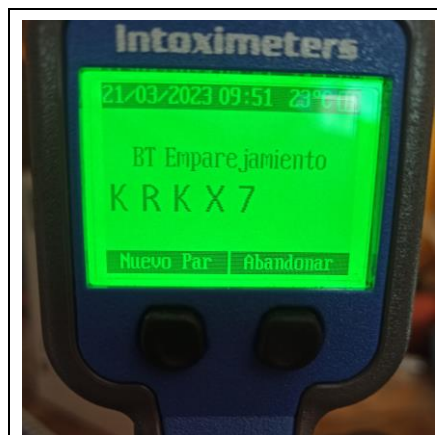


Fig. 5 - Confirmación emparejamiento.

6- Confirme el llamado con el botón frontal ubicado debajo del 'Si' en la pantalla.

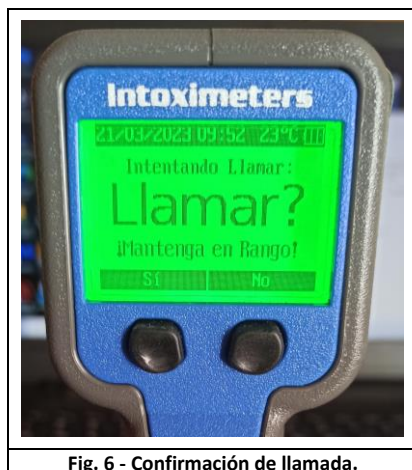


Fig. 6 - Confirmación de llamada.

- 7- Mientras el espirómetro intenta llamar, en la pantalla del programa, seleccione el botón 'Aceptar' (símbolo Bluetooth), para aceptar la llamada. De esta manera se establecerá la comunicación entre el espirómetro y la computadora.



Fig. 7 - Aceptar llamada.

Aguarde unos minutos mientras se descargan los datos.

El espirómetro se apaga automáticamente.

(Si en este paso, el equipo muestra algún mensaje de error y consulta por reintentar, dar 'SI' y aguarde unos minutos hasta que se descarguen los datos)



- 8- En pantalla principal del programa seleccione 'View' para ver las mediciones realizadas en una planilla Excel.



Al salir de Excel, se le consultará si desea guardar los datos antes de salir. Si desea guardarlos, presione **guardar** y seleccione el destino de la planilla.

Método 2: Cableado

Para poder seguir estos pasos será necesario contar con los siguientes accesorios:

- Base
- Cable serial (hembra-hembra)
- Adaptador (serial-USB)



Fig. 10 - Accesorios para el modo cableado.

- 1- Conectar un extremo del cable serial al puerto 1 de la Base, y el otro extremo al adaptador serial-USB.
- 2- Conectar el adaptador a algún puerto USB disponible en la computadora.
- 3- Colocar espirómetro apagado en la base.
- 4- Iniciar programa 'Intoximeters Alco-Sensor Vxlerator'.
- 5- Presionar botón 'Configurar' para acceder a configuración.



Fig. 11 - Configurar.

- 6- Asegúrese tener asignado algún puerto de Comm. Para ello, presione botón y seleccione alguno de los puertos disponibles.

Para confirmar, presione 'OK'.

***Nota:** Si figura puerto asignado, presione botón de todos modos y seleccione el número de puerto que figuraba asignado.

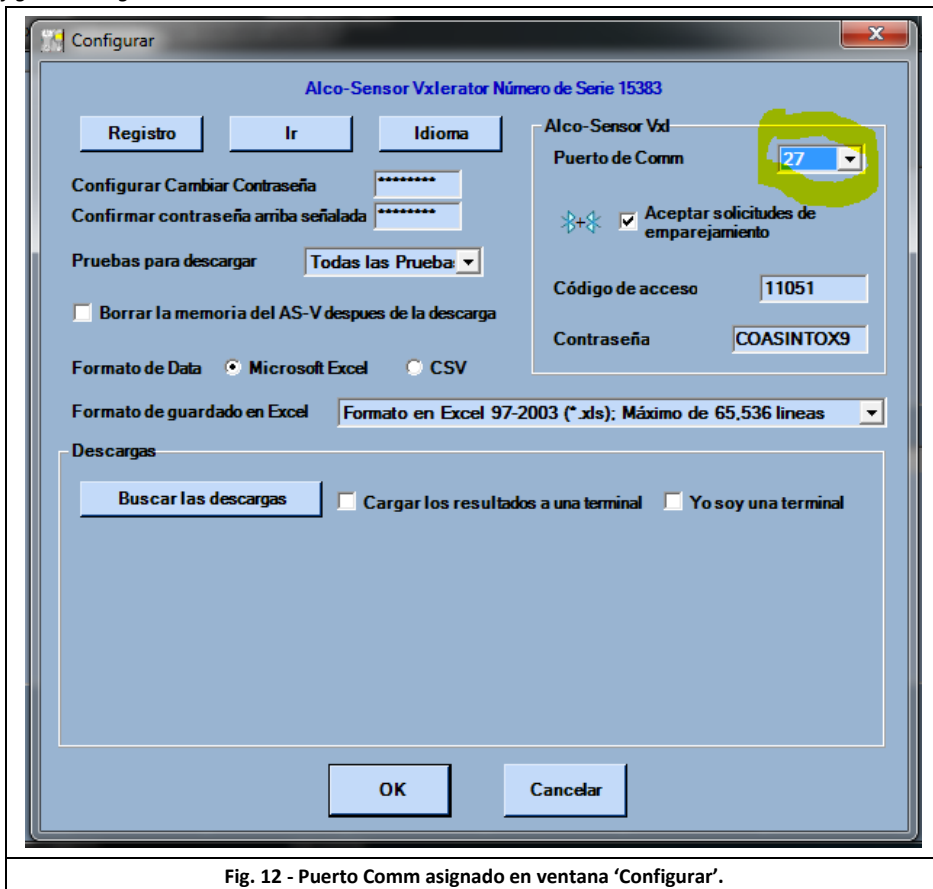


Fig. 12 - Puerto Comm asignado en ventana 'Configurar'.

- 7- Una vez configurado el puerto Comm, presione el botón 'Descargar' en ventana principal.



Fig. 13 - Descargar datos.

- 8- Espere a que las medidas almacenadas en el equipo se descarguen. Cuando finalice, presione el botón 'Ver' para abrir archivo Excel con las medidas descargadas.



Fig. 14 - Ver datos descargados.

- 9- Al salir del Excel, se le consultará si desea guardar los datos antes de salir. Si desea guardarlos, presione guardar y seleccione el destino de la planilla.