



Gastrointestinal



CE
0483

FOB (DIŞKIDA GİZLİ KAN)

Dişkıda Gizli Kan (FOB), dişkıda çıplak gözle açıkça görülemeyen kanın bulunmasıdır. Gizli kan ülser, polip, kolit, divertikülit, rhagades, hemoroid veya kanser gibi gastro-intestinal bozuklukların bir sonucu olabilir. Bu lezyonların belirtileri genellikle ilk aşamalarda sessizdir, bu nedenle dişkıda gizli kan aramak, gastro-intestinal sistemdeki patolojilerin varlığını erken bir aşamada tespit etmeyi sağlayan önemli bir tarama testidir.

HEDEFLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

Herkes.

NEDEN - FAYDALARI


Bazen dişkıda düşük miktarda kan varlığı kolayca fark edilemez. Bu durumlarda BAĞIRSAK FOB TESTİ, daha ciddi hastalıkları önlemek için normal görünseler bile dişkıda kan varlığını tespit etmek için yararlıdır.

TEST PRENSİBİ

BAĞIRSAK FOB TESTİ, son derece spesifik monoklonal antikorlar kullanarak dışkı örneklerindeki en küçük kan miktarlarını tespit eden immünokromatografik bir testtir. Bu özellikler, BAĞIRSAK FOB TESTİNİN uygulanmadan önce özel diyet kısıtlamaları gerektirmediği anlamına gelir.

berkeleyhealth BAĞIRSAK FOB

Dişkıda gizli kanın tespiti için hızlı test

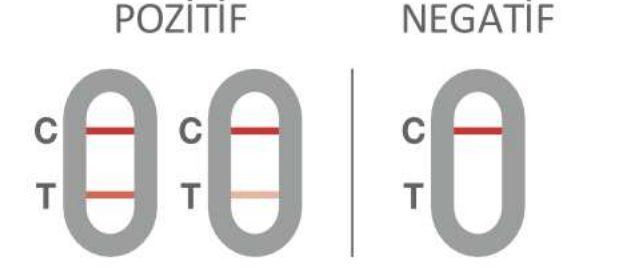

TEKNİK ÖZELLİKLER

EŞİK DEĞER	HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
40 ng/mL	78.7%	99%	92.6%


Performans verileri 148 katılımcının yer aldığı klinik çalışma ile elde edilmiştir. Referans yöntem olarak Hb Fecale - Mascia Brunelli kiti kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER:

- 1 adet test kaseti
- 1 adet sölüsyon içeren numune çubuğu ve damlatıcılı flakon
- 1 adet numunenin toplanması için yapışkanlı tabaka
- 1 adet kullanım kılavuzu

NASIL KULLANILIR


1) Dışkı toplama tabakasının iki yapışkan yüzeyini klozet yüzeyine yapıştırın.

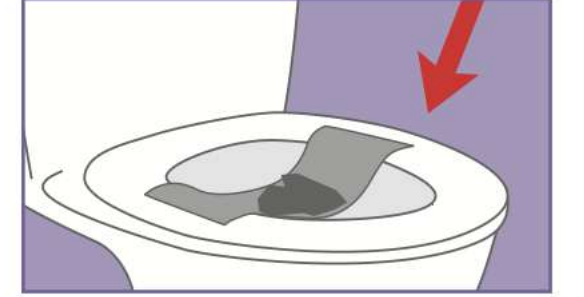

2) Çubuğu numunenin üç farklı noktasından dışkıya batırın.



3) Numune çubuğunu flakona yerleştirerek kapağı sıkıca kapatın ve şişeyi sallayın.

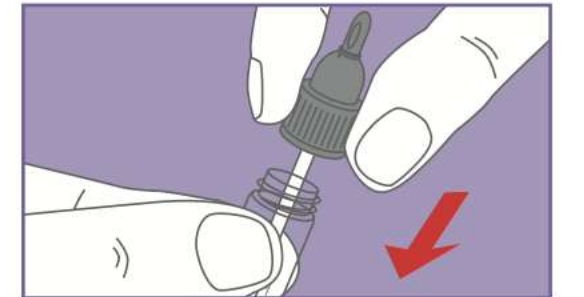

4) Kapağın ucunu kırarak damlalık kısmını serbest bırakın. Kaset üzerinde gösterilen hazneye(S) 3 damla numune örneği damlatın ve 5 dakika sonra sonucunuzu öğrenin.

