



STD



CE
0483

berkeleyhealth HIV

Tam kanda insan immün yetmezlik virüsü 1 ve 2 (HIV1/HIV2) antikorlarının kalitatif tespiti için hızlı test



HIV VIRÜSÜ

İnsan immün yetmezlik virüsü veya HIV, özellikle beyaz kan hücrelerini etkileyerek bağışıklık sistemine saldıran ve onu baskılayan bir patojendir. Özel bir tedavi uygulanmadığı takdirde virüs, kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu veya AIDS'in gelişmesine neden olur. Bu, HIV'li kişilerde enfeksiyondan birkaç yıl sonra bile ortaya çıkabilen, bağışıklık sisteminin etkinliğinin dramatik bir şekilde düştüğü ve vücudun en yaygın enfeksiyonlarla bile savaşma yeteneğini kaybettiği bir sendromdur.

HEDEFLLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

HIV 1/2 TESTİ, virüse maruz kalan veya maruz kaldığından şüphelenen, HIV semptomları olan veya olası bir enfeksiyondan haberdar olmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Antikor testlerinin maruziyetten sonra HIV enfeksiyonunu tespit etmesi 23 ila 90 gün (kuluçka dönemi) sürebilir.

NEDEN - FAYDALARI

AIDS gibi daha ciddi hastalıkların önlenmesi için HIV'e karşı yürütülen önleme kampanyasının, nüfusun test edilmesi ve izlenmesi yoluyla desteklenmesi çok önemlidir.

TEST PRENSİBİ

HIV 1/2 TESTİ, tam kan örneğinde insan immün yetmezlik virüsü 1 ve 2'ye (HIV1/ HIV2) karşı antikorların varlığını spesifik olarak tespit edebilen hızlı bir immünokromatografik testtir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
99.3%	99.7%	99.6%

İÇİNDEKİLER:


- 1 adet test kaseti
- 1 adet Kan almak için pipet
- 1 adet seyreltici içeren damlalıklı şişe
- 2 adet kan almak için lanset (iğne)
- 1 adet alkollü medil
- 1 adet kullanım kılavuzu.

NASIL KULLANILIR

1) Parmağınızı deldikten sonra bir kan örneği alın.

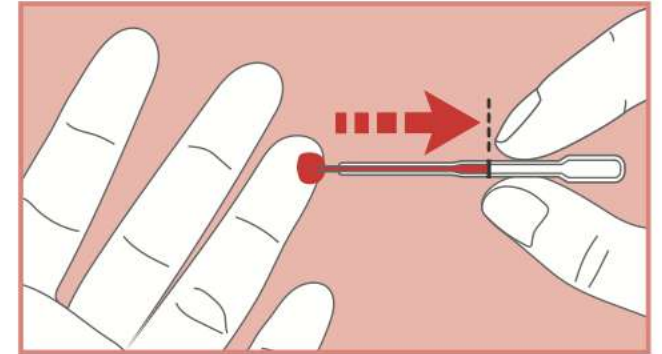

2) Pipetle toplanan kanı açılan damlalık şişesine koyun.

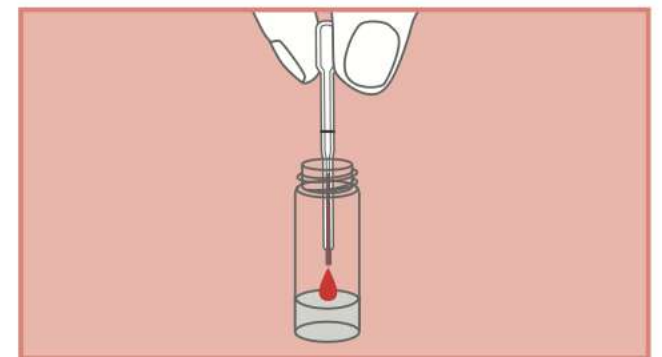

3) Hazneye (S) 3 damla sölüsyon damlatın ve 10 dakika bekledikten sonra sonucunuzu öğrenin.

