




STD



CE
0483

berkeleyhealth KLAMİDYA

Servikal sürüntüden cinsel yolla bulaşan Klamidya trachomatis enfeksiyonunun kalitatif tespiti için hızlı test.

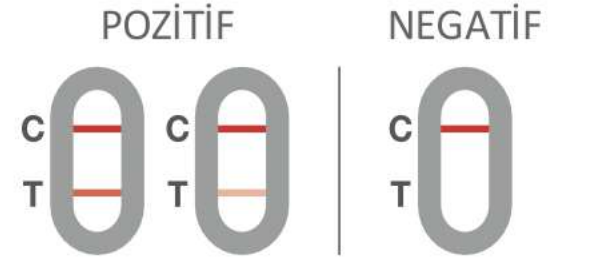

KLAMİDYA

Klamidya trachomatis, klamidya olarak bilinen yaygın bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyona (CYBE) neden olan bir bakteridir. Öncelikle genital sistemi etkiler ancak rektum ve gözleri de enfekte edebilir. Tedavi edilmezse, pelvik inflamatuvar hastalık, kısırlık ve hamilelik sırasında komplikasyonlar dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Klamidya trachomatis korunmasız vajinal, anal veya oral seks yoluyla bulaşabilir.

HEDEFLenen KULLANICILAR KİMLERDİR?

Cinsel sağlıklarını izlemek için uygun ve özel bir yol arayan cinsel olarak aktif kadınlar, özellikle de birden fazla cinsel partneri olan bireyler gibi enfeksiyon riski daha yüksek olanlar bu testi ideal bulacaktır. NHS İngiltere, cinsel olarak aktif olan 25 yaş altı kadınların her yıl ve yeni veya sıradan bir partnerle her ilişkiye girdiklerinde klamidya testi yaptırmalarını özellikle tavsiye etmektedir.

NEDEN - FAYDALARI

2020 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl küresel olarak yetişkinler (15-49 yaş) arasında yaklaşık 130 milyon yeni klamidya vakası olacağını tahmin etmektedir. Tedavi edilmeyen klamidya kısırlık, pelvik inflamatuvar hastalık (PID) ve HIV'e yatkınlığın artması gibi komplikasyonlara yol açabileceğinden, erken teşhis ve tedavi ciddi sağlık sonuçlarını önlemek için çok önemlidir. Klamidya enfeksiyonu genellikle asemptomatiktir, ancak yaygın semptomlar arasında olağandışı üretral ve vajinal akıntı yer alabilir.

TEST PRENSİBİ

KLAMİDYA TEST, servikal sürüntüden Chlamydia trachomatis'in (antijen) saptanması için immünolojik, kalitatif bir lateral akış hızlı testidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
85.7%	98.3%	100%

İÇİNDEKİLER:

- 1 adet test kaseti
- 1 adet sürüntü çubuğu
- 1 adet numune şişesi
- 1 adet kullanım kılavuzu


NASIL KULLANILIR

1) Çubuğu üst ucuna ulaşana kadar dikkatlice vajinanıza yerleştirin. Çubuğu yaklaşık 30 saniye boyunca eşit şekilde döndürün.

2) Örnek içeren çubuğu şişeye batırın. Örneği tampon çözeltisiyle iyice karıştırmak için çubuğu döndürün.

3) Numune şişesini kapatın ve hafifçe çalkalayın. Şişeyi dik tutun ve kapağın ucunu koparın.

4) Test kasetindeki "S" numune alanına 2 damla çözelti damlatın ve sonuç alanına sıvı değmediğinden emin olun.

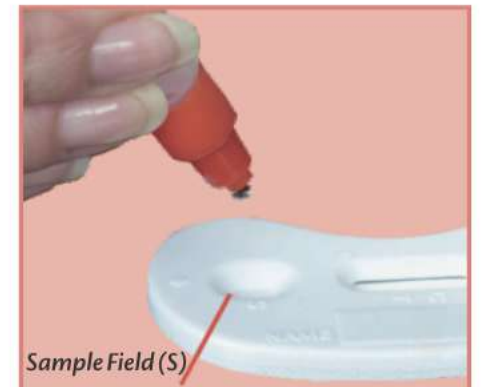

Sample Field (S)