



Check-Up



CE  
0483

# berkeleyhealth KOLESTEROL

*Tam kanda toplam kolesterolün yarı kantitatif tespiti için hızlı test*



## KOLESTEROL

Toplam kolesterol, kan dolaşımındaki toplam kolesterol miktarını ifade eder. Kolesterol doğal olarak karaciğer tarafından üretilen mumsu bir maddedir ve gıdalardan da alınabilir. Vücut, kolesterolü hücre zarlarını oluşturmak, sindirim için safra üretmek ve cildi korumak gibi temel işlevler için kullanır.

## HEDEFLenen KULLANICILAR KİMLERDİR?

Kalp hastalığı riski taşıyan bireyler, ailesinde yüksek kolesterol öyküsü olanlar veya genel kalp sağlığını izlemek ve korumak isteyen herkes.

## NEDEN - FAYDALARI

Yüksek kolesterol seviyeleri koroner kalp hastalığı, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunları için önemli bir risk faktörü olabilir. Kolesterol seviyelerini yönetmek, kalp sağlığını iyileştirmek için yaşam tarzı değişikliklerine ve tedavi seçeneklerine rehberlik etmeye yardımcı olabilir.

## TEST PRENSİBİ

Kolesterol testi, tam kandan kapiler total kolesterol analizi için son nokta kolorimetrik bir testtir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÖLÇÜM ARALIĞI | HASSASİYET | ÖZGÜLLÜK | GENEL DOĞRULUK |
|---------------|------------|----------|----------------|
| 150-300 mg/dL | 92.4%      | 81.3%    | 87.7%          |

## İÇİNDEKİLER:

- 1 adet test kartı
- 1 adet kan örneği almak için steril lanset (iğne)
- 1 adet flaster
- 1 adet kullanma kılavuzu

## NASIL KULLANILIR




1) Lanset (iğne) orta parmağınıza doğru bastırın ve bir klik sesi duyana kadar kolu bastırın



2) Parmağınızın temas etmemesini sağlayarak test alanına büyük bir damla kan düşmesine izin verin.



3) Gösterilen siyah çubuktan başlayarak kapağı karttan yavaşça çekin. Kapak tamamen çıkarıldığında odak noktası görüntülenecektir.

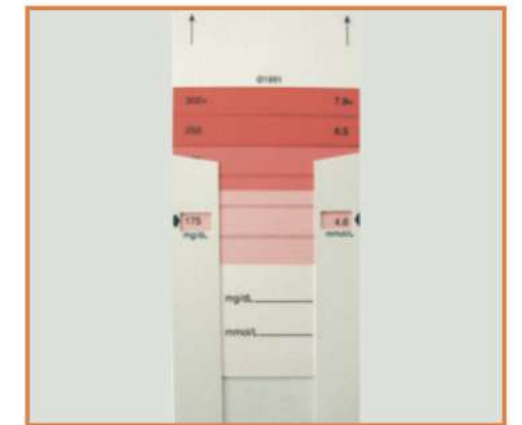

4) 30 saniye içinde, renk tablosunu odak noktasına en uygun renk veya yoğunlukla hizalanana kadar ayarlayın.