



Fertility



CE
0483

berkeleyhealth MENOPOZ FSH

İdrarda Folikül Uyarıcı Hormon - FSH tespiti için hızlı test



POZİTİF



NEGATİF



MENOPOZ VE FSH

Menopoz, birbirini takip eden 12 ay boyunca adet görülmediği ve başka bir biyolojik veya fizyolojik neden tespit edilemediği zaman olarak tanımlanır. Menopoz, kadın vücudundaki hormonal dengenin değişmesinden kaynaklanır. Bu değişiklik genellikle 45 yaşına yaklaşıldığında ortaya çıkar. Ancak gerçek belirtiler 55 yaş civarında görülür. Adetlerin düzensiz sürmesi menopozun başladığının erken bir göstergesidir (peri-menopoz). Menopoz, yumurtalık folikül yaşam döngüsünün sona ermesi sonucu Folikül Uyarıcı Hormonun (FSH) dolaşımdaki seviyesinin artmasına neden olur. FSH konsantrasyonu menopoz sırasında 20 mIU/mL'nin altındaki değerlerden yaklaşık 80 mIU/mL'ye kadar artar.

HEDEFLLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

45 yaş üstü kadınlar.

NEDEN - FAYDALARI

Yüksek FSH seviyelerinin varlığını kontrol etmek, devam eden potansiyel bir menopoz durumunu doğrulamak için yararlı bir araçtır.

TEST PRENSİBİ

MENOPOZ FSH TESTİ, reaktif stripte bulunan özel altın konjuge monoklonal antikolar aracılığıyla FSH'yi tespit eden immünokromatografik bir testtir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

EŞİK DEĞER	HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
25 mIU/mL	100%	86.9%	94.0%


Performans verileri 100 katılımcının yer aldığı klinik çalışma ile elde edilmiştir. Referans yöntem olarak Roche Cobas 8000 kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER:

- 2 adet ayrı ayrı paketlenmiş test kaseti
- 1 adet kullanım kılavuzu.

NASIL KULLANILIR

1) Koruyucu kapağı çıkarın ve emici ucu en az 10 saniye boyunca idrar akışının hemen altına yerleştirin.

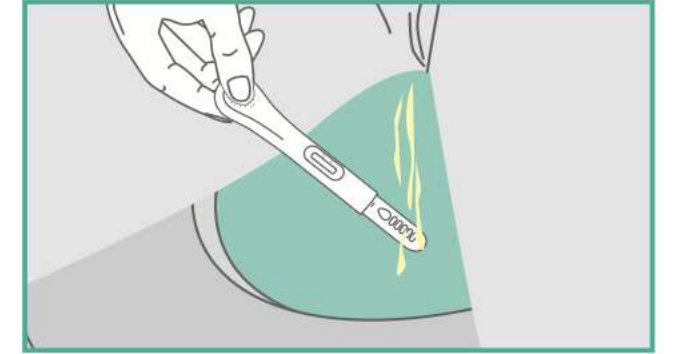

2) Daha kolaysa, idrarı temiz, kuru, kalıntısız bir kaptaki toplayın ve emici ucu 10 saniye boyunca idrara batırın.



3) Koruyucu kapağı emici ucun üzerine geri yerleştirin. 5 dakika bekledikten sonra sonucunuzu öğrenin.

