



Infections



CE
0483

TETANOZ

Tetanoz, istemli kasların tonik spazmı ile karakterize ve genellikle bir yara yoluyla bulaşan Clostridium tetani tarafından üretilen bir ekzotoksinin neden olduğu akut bulaşıcı bir bakteriyel hastalıktır. Aşılama, insanları tetanoza karşı korumanın en iyi yoludur. Tetanoz aşısının güncel olması hastalığı önlemenin en iyi yoludur.

HEDEFLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

Tetanoz aşısı, her 10 yılda bir takviye dozları ile her yaştan insan için önerilir.

NEDEN - FAYDALARI


Tetanoz toksinine karşı IgG seviyesini kontrol etmek, vücudu bu seri hastalıktan korumanın tek yoludur. TETANOZ TEST ile bu antikorların hala vücutta dolaşıp dolaşmadığını keşfetmek mümkündür..

TEST PRENSİBİ

TETANOZ TESTİ, test şeridinin içine yerleştirilmiş özel monoklonal altın konjugat antikorlar sayesinde tetanik toksine karşı spesifik antikorların IgG varlığını tespit eden immünokromatografik bir testtir.

berkeleyhealth TETANOZ

Tam kan örneklerinde tetanoza karşı antikor (G sınıfı İmmünoglobulinler - IgG) seviyesinin belirlenmesi için hızlı test

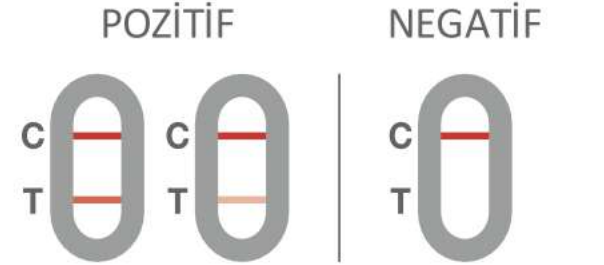

TEKNİK ÖZELLİKLER

EŞİK DEĞER	HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
0.1 IU/mL	93.1%	100%	> 90%


Performans verileri 100 katılımcının yer aldığı klinik çalışma ile elde edilmiştir. Referans yöntem olarak EIA yöntemi (NOVATEC) kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER:


- 1 adet test kaseti
- 1 adet kan almak için pipet
- 1 adet solüsyon içeren damlalıklı şişe
- 2 adet kan örneği almak için steril lanset (iğne)
- 1 adet alkollü mendil
- 1 adet kullanma kılavuzu

NASIL KULLANILIR

1) Parmağınızı deldikten sonra bir kan örneği alın.

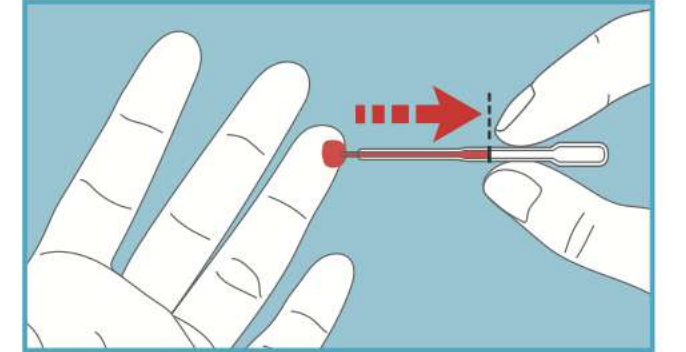

2) Numuneyi kasetin numune haznesine (S) yerleştirin.

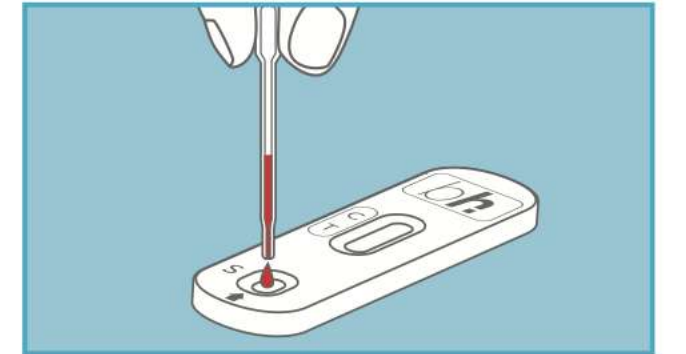

3) Hazneye (S) 2 damla solüsyon damlatın ve 5 dakika bekledikten sonra sonucunuzu öğrenin.

