



Drug-Use



CE
0483

berkeleyhealth UYUŞTURUCU


İdrarda 6 farklı uyuşturucunun tespiti için hızlı test: Morfin, Amfetamin, Kokain, Marijuana, Metamfetamin ve Metadon



POZİTİF



NEGATİF

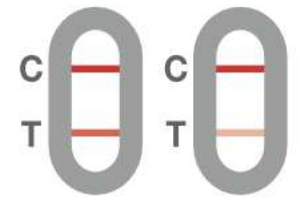


TESPİT EDİLEN MADDELER

TEST	Eşik (ng/mL)	Maruziyet sonrası idrarda kalma süresi
Amfetamin (AMP1000)	1000	4 ila 24 saat
Kokain (COC 300)	300	24 ila 48 saat
Marijuana	50	3 ila 10 gün
Metadon (MTD 300)	300	3 ila 5 gün
Metamfetamin (MET 500)	500	9 ila 24 saat
Morfin (MOP 300)	300	3 ila 5 gün

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EŞİK DEĞER	HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
AMP	1000 ng/mL	>99.9%	>99.9%	>99.9%
MET	500 ng/mL	>99.9%	>99.9%	>99.9%
COC	300 ng/mL	99.3%	>99.9%	99.6%
MOP	300 ng/mL	>99.9%	99.4%	99.7%
MTD	300 ng/mL	99.3%	>99.9%	99.6%
THC	50 ng/mL	>99.9%	99.4%	99.7%

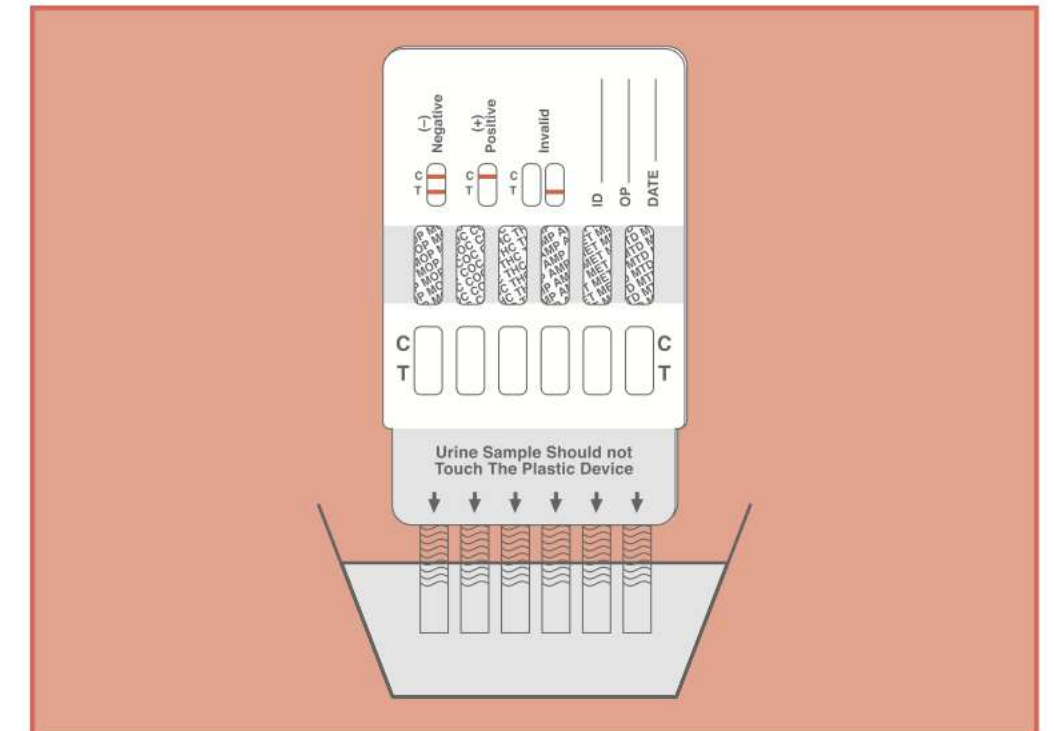

HEDEFLLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

UYUŞTURUCU TESTİ, idrarda yukarıda belirtilen maddelerin varlığını kontrol etmek isteyen herkes tarafından kullanılabilir.

TEST PRENSİBİ

UYUŞTURUCU TESTİ bir alet kullanılmadan gerçekleştirilebilen immünokromatografik bir testtir. Test, idrardaki spesifik ilaç seviyelerini seçici olarak tespit etmek için monoklonal antikorlar kullanır.

İÇİNDEKİLER:

- 1 adet test paneli
- 1 adet kullanım kılavuzu

NASIL KULLANILIR

- 1) Kapağı açın, ok işareti idrar örneğini gösterecek şekilde test panelini en az 10 ila 15 saniye boyunca idrar örneğine dikey olarak daldırın.
- 2) Kapağı yerine takın ve test panelini emici olmayan düz bir yüzeye bırakın.
- 3) 5 dakika bekledikten sonra sonucunuzu öğrenin.