



Infections



CE
0483

VAJİNAL ENFEKSİYONLAR VE pH

Vajinal enfeksiyonlar oldukça yaygındır ve tüm yaş gruplarındaki kadınlar arasında sıklıkla tekrarlayan bir sorundur. Vajinal akıntının anormal asidite göstermesi, vajinal semptomların bir sağlık uzmanının takibini gerektirebilecek bir enfeksiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Asidik vajinal pH değerinin 3.8 ila 4.5 arasında olması, vajinayı koruyan vücut sisteminin en iyi şekilde çalışması için temel bir gerekliliktir. Bu sistem, patojenik mikropların kolonizasyonunu ve vajinal enfeksiyonların oluşumunu etkili bir şekilde önleyebilir.

VAJİNAL pH TESTİ NEDİR?

VAJİNAL pH TESTİ, bakteriyel vajinozis teşhisine yardımcı olmak üzere kadın vajinal sürüntü örneklerinde pH'ın yarı kantitatif tespiti için hızlı bir kuru kimyasal yöntemdir.

HEDEFLENEN KULLANICILAR KİMLERDİR?

Vajinal rahatsızlık hisseden kadınlar.

NEDEN - FAYDALARI



Vajinit, her yıl milyonlarca kadını etkileyen çok yaygın bir kadın hastalığıdır. Vajinit, tüm jinekolojik ofis ziyaretlerinin %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Uygun bir tedavinin anahtarı, Bakteriyel Vajinozis komplikasyonlarını önlemek için erken ve doğru bir tanıdır.

TEST PRENSİBİ

Bir pH kağıdı, vajinal sürüntü yoluyla elde edilen numunedeki pH seviyelerini belirlemek için kullanılır. Vajinadan alınan numuneyi içeren çubuk, test panelinde bulunan pH kağıdıyla temas eder etmez bir renk değişimi meydana gelir. Farklı pH seviyeleri farklı renk dereceleri ve tonları ile sonuçlanabilir ve her renk derecesi/tonu renk skalasında belirli bir pH seviyesini belirtir.

berkeleyhealth VAGİNAL PH

Vajinal sürüntü örneklerinde pH'ın yarı kantitatif tespiti için hızlı hızlı test

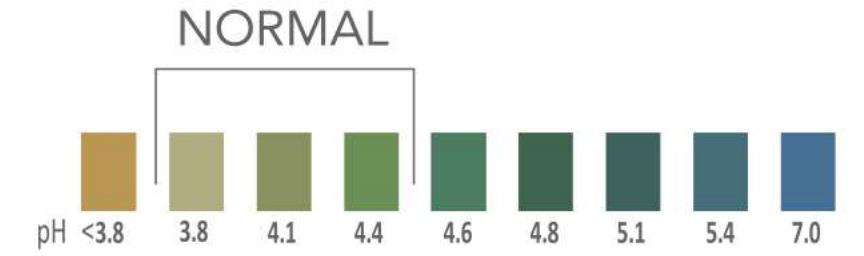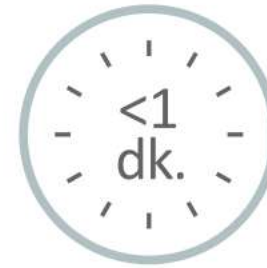


TEKNİK ÖZELLİKLER

EŞİK DEĞER	HASSASİYET	ÖZGÜLLÜK	GENEL DOĞRULUK
pH 3.8 - 7.0	95%	99%	98.6%

Performans verileri 220 katılımcının yer aldığı klinik çalışma ile elde edilmiştir. Referans yöntem olarak PH Vajinal Hızlı Test (pH) kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER:

- 5 adet ayrı ayrı paketlenmiş test kaseti
- 5 adet steril vajinal sürüntü çubuğu
- 1 adet kullanım kılavuzu.

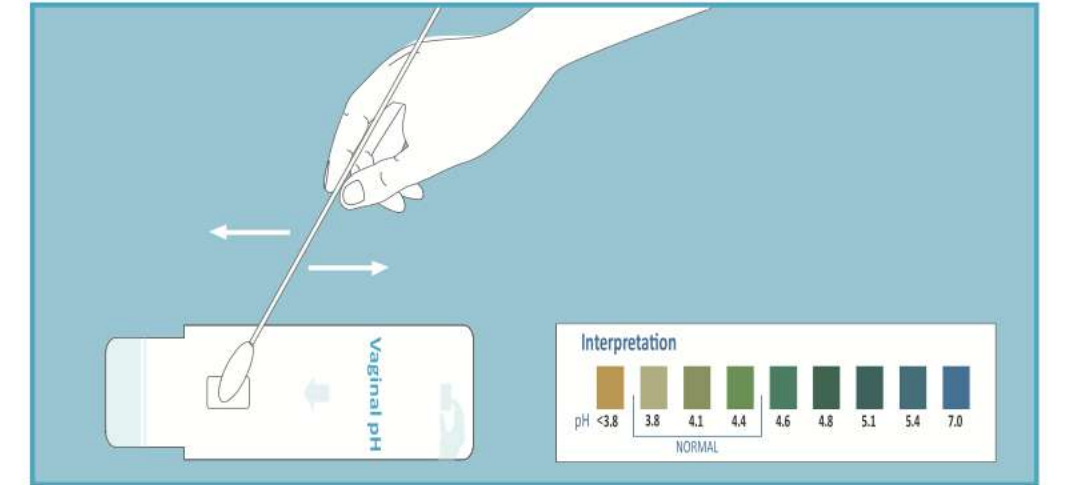

NASIL KULLANILIR

Sürüntü çubuğunun baş kısmını vajinaya yerleştirin ve yaklaşık 10 saniye boyunca bir noktaya kadar hafifçe bastırın.

Test için çubuğu vajinadan geri çekin.

Sürüntü çubuğunun baş kısmını Test panelinin pH alanına en az 5 kez uygulayın.

Ölçüm bölgesi hala ıslakken sonucu hemen okuyun. pH ölçüm bölgesindeki rengi folyo poşet üzerindeki renk skalası ile karşılaştırın.