



Calle 18 # 28-84
oficina 502

www.orthoandina.com
PBX:602 738 5196

MANUAL COMO ABRIR TOMOGRAFIAS

ORTHOANDINA TE SUGIERE LOS SIGUIENTES PASOS PARA ABRIR TUS TOMOGRAFIAS; PERO ANTES VISITA NUESTRA PAGINA WEB: WWW.ORTHOANDINA.COM PROCEDE ABRIR LA VENTANA“ COMO ABRIR TOMOGRAFIAS“ Y MIRA LOS ESPECTACULARES VIDEOS PARA QUE APRENDAS A VISUALIZAR LAS TOMOGRAFIAS.

TIPS

SOFTWARE PARA VISUALIZAR

EXISTEN DOS SOFTWARE DE
VISUALIZACION

1. GALILEOS
2. SIDEXIS 4

CUAL ES EL MEJOR

EL MEJOR ES SIDEXIS 4 POR
QUE TE PERMITE UTILIZARLO
COMO BASE DE DATOS
PARA TODAS LAS IMÁGENES
DE TUS CLIENTES

GALILEOS

ESTE ES EL MAS SIMPLE Y
SOLO TE PERMITE VER
RAPIDAMENTE LA
TOMOGRAFIA

ABRIR DESDE DVD

- INSERTA DVD
- BUSCA UNIDAD D
- BUSCA Y SELECCIONA EL ARCHIVO TOMOGRAFIA O EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DEL PACIENTE
- ABRE LA CARPETA AMARILLA QUE DICE “SEPTUP”
- INSTALA” GALAXI GALILEOS VIEWER”
- VUELVE A LOS ARCHIVOS
- ABRE LA CARPETA “SEPTUP” QUE ESTA MAS ABAJO CON EL SIMBOLO DE GALAXI GALILEOS Y YA ESTA SE ABRE EL SOFTWARE DE VISUALIZACION DE TOMOGRAFIAS

ABRIR DESDE WE TRANSFER

- ABRE EL CORREO
- DECARGA LOS ARCHIVO QUE DICE WE TRANSFER
- DAR CLIC EN TOMOGRAFIA O EL NOMBRE DEL PACIENTE
- DESCOMPRESOR CON ZIP DANDOLE ACEPTAR
- VUELVE AL NOMBRE DEL PACIENTE
- ABRE LA CARPETA AMARILLA QUE DICE “SEPTUP”
- INSTALA” GALAXI GALILEOS VIEWER”
- VUELVE A LOS ARCHIVOS
- ABRE LA CARPETA “SEPTUP” QUE ESTA MAS ABAJO CON EL SIMBOLO DE GALAXI GALILEOS Y YA ESTA SE ABRE EL SOFTWARE DE VISUALIZACION DE TOMOGRAFIAS

ABRIR DESDE SIDEXIS 4

- ES MAS FACIL, INSERTA DVD O ABRE AL ARCHIVO WE TRANSFER
- ABRE SIDEXIS Y BUSCA EL PACIENTE Y VE A IMPORTAR
- SIGUE LOS PASOS Y EL DESCARGA LOS ARCHIVOS DEL DVD HACIENDO DOBLE CLIC..