

BIAcheck

Software Modelo BC23-1-2



Conectar su Analizador BIAcheck por cable USB para:

- * ACTIVAR EL ANÁLISIS
- * GESTIONAR FICHAS
- * IMPRIMIR INFORMES CON GRÁFICOS
- * CREAR INFORMES EN FORMATO PDF PARA ENVIAR POR EMAIL



1. Datos Personales

BIAcheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | Dat. Físicos | Bio-Impedanc. | Peso/Ingesta | Otros Parám. | Fitness | Informes


Estado: Alta Actualizar Datos Personales

Datos Personales | Historial

Nombre EJEMPLO: NORMOPESO
Apellidos
Dirección
Ciudad
Provincia **Cod. Postal**
Tel. Casa **Tel. Móvil**
Tel. Trabajo **Tel. Fax**
eMail
Info. Adic. 1
Info. Adic. 2
Comentarios Aunque este cliente tiene su nivel de grasa dentro del rango normal, ha decidido reducirlo aun más. Sólo tiene que perder 2 kg de peso, pero tiene que bajar su nivel de grasa 4 kg y aumentar su masa magra aproximadamente 2 kg.

Nº Ficha 1

DNI-Ident.

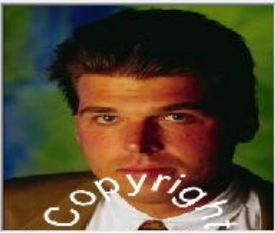

Indicar Foto Quitar Foto

2. Datos Físicos

BIAcheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | **Dat. Físicos** | Bio-Impedanc. | Peso/Ingesta | Otros Parám. | Fitness | Informes

Generales

F. Nacim. 16/10/2007 **Edad** 19 años
Sexo Hombre **Peso** 66,200 kg
Población Adulto **Talla** 170 cm

☐ Población Norteamericana y Británica
☒ Población Latina y otras

Perímetros (cm)

Cintura	80
Cadera	90
Bíceps	35
Muñeca	18

Pliegues Cutáneos


Subescapular	
Suprailíaco	
Bíceps	
Tríceps	

Complexión Fuerte ☐ Masa Magra: ADUL-EQ2

3. Medición Por Impedancia



3A. Ver la medición en Tiempo Real

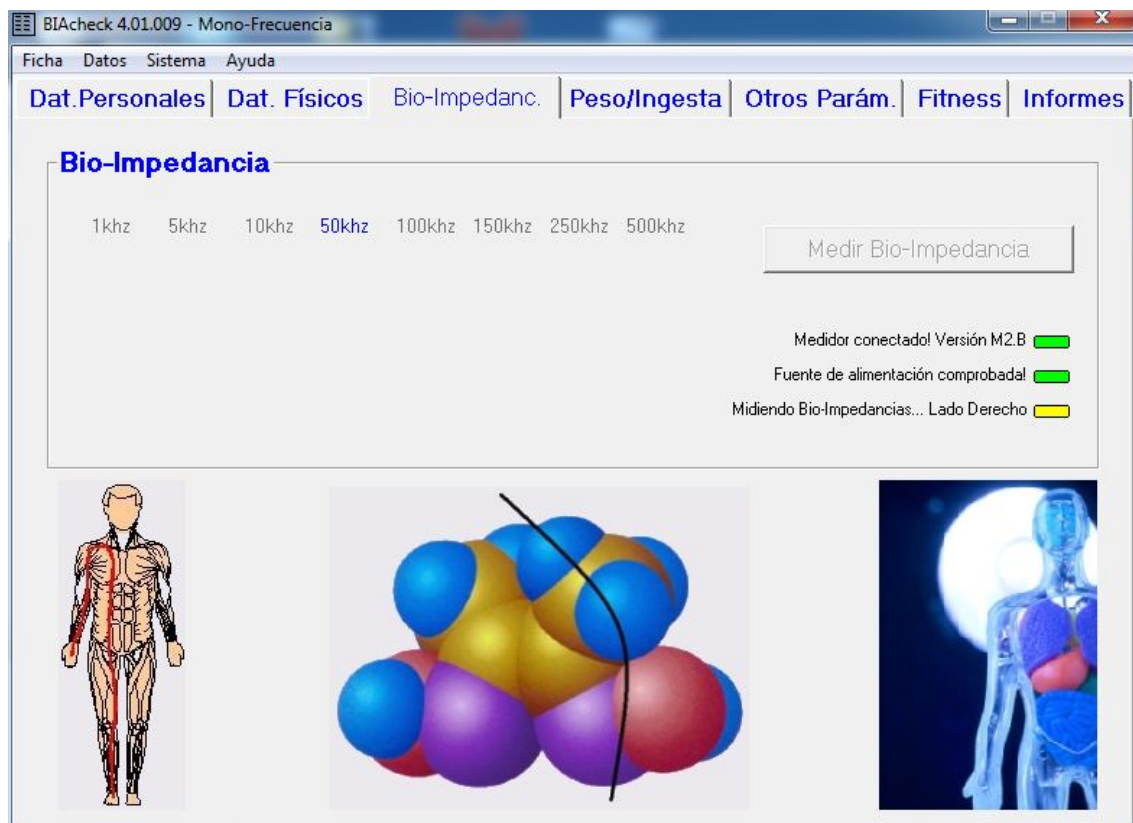

4. Peso/Ingesta

Se calculará la pérdida de peso y mostrar una gráfica en el informe.

BIAcheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | Dat. Físicos | Bio-Impedanc. | **Peso/Ingesta** | Otros Parám. | Fitness | Informes

Peso e Ingesta (kg)

Peso Actual

Peso Deseado

Pérdida de Peso: 2.2

Peso de Referencia: 72.0

Calcular Peso Ref.

%Grasa Corporal Deseada

☐ % Ideal = 10 %

☐ % Referencia = 12,95 %

☒ % Personalizado:

Pérdida Semanal

☒ Pérdida Semanal = 0,5 kg

☐ Pérdida Semanal = 1 kg

5. Otros Parámetros

BIAcheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | Dat. Físicos | Bio-Impedanc. | Peso/Ingesta | **Otros Parám.** | Fitness | Informes

Función Cardíaca

Tensión Sistólica (mmhg)

Tensión Diastólica (mmhg)

Pulso (lat/min)

Bioquímico

Colesterol Total mg%

Colesterol HDL mg%

Colesterol LDL mg%

Triglicéridos mg%

Hierro mcg%

Glucosa mg%

Urea

GOT - AST ui

GOT - ALT ui

GAMMA - GT ui

Hematocrito %

Hematíes millón/ul

Leucocitos millón/ul

Hemoglobina g/dl

Ácido Úrico mg%

Creatinina mg%

Datos de origen externo

6. Fitness

BIACheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | **Dat. Físicos** | **Bio-Impedanc.** | **Peso/Ingesta** | **Otros Parám.** | **Fitness** | **Informes**

Metabolismo
☐ Harris-Benedict
☒ OMS

Nivel de Actividad Física
☐ 1.Sedentario ☒ 2.Ligero ☐ 3.Activo
☐ 4.Moderado ☐ 5.Vigoroso ☐ 6.Alto

Fuerza de Resistencia
Fondos al suelo: 23 repeticiones
Abdominales: 25 repeticiones
Fuerza de Mano: 42 kg/cm cuad.

Flexibilidad/Potencia Muscular (cm)
Sit and Reach: 7
Sapo: 9
Test de Salto: 34

Func. Cardíaca: Pulso (lat/min)
En reposo: 60
Después del esfuerzo: 130
1 minuto después: 75

Podómetro (Pasos)
Incremento Semanal: ☐ porcentaje
Objetivo Final:

Planificador de Fitness

(Minutos)	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Bádminton						
Baloncesto						
Piragüismo						
Ciclismo 8,8 km/h						
Ciclismo 15,1 km/h						
Baile (salón)						
Hockey (hierba)						
Golf						
Gimnasia						
Equitación						
Jogging 9 min/1600 m						
Judo, Karate						
Carrera 6 min/1600 m						
Correr						
Esquí-fondo						
Esquí-de descenso						

Ocupación: Administrativo

7. Informes

BIACheck 4.01.009 - Mono-Frecuencia

Ficha Datos Sistema Ayuda

Dat. Personales | **Dat. Físicos** | **Bio-Impedanc.** | **Peso/Ingesta** | **Otros Parám.** | **Fitness** | **Informes**

Tipo de Informe
☒ Tipo 1
☐ Tipo 2
☐ Tipo 3

Comidas Sugeridas

Calcular y Guardar Ficha

Presentar Resultados

Generar Informe

Presentación Preliminar

Imprimir

Configurar Informes

1. Guarde los datos modificados de la Ficha, para que se recalculen los parámetros del paciente.
2. Use "Presentar Resultados" si desea visualizar resultados antes de generar informe.
3. Genere el informe.
4. Puede pre-visualizar el informe recién creado antes de imprimirlo.
5. Imprima cualquiera de los informes ya generados por la aplicación.
6. Puede generar hasta 3 tipos distintos de informes personalizados, y guardar las configuraciones para volver a utilizarlas en el futuro.

7A. Crear informes con su propio portada y logo.

Configurar Informes

LOGO

☒ BIAcheck
☐ Sin logo
☐ Elegir Logo

SECCIONES

Informe: **Tipo 1**

Título:

Centro:

Dirección:

☒ Datos personales
☒ Historial

☒ Composición Corporal

Otros Parámetros
☒ Perímetros
☒ Función Cardíaca
☒ Bioquímico

Historiales
☒ Presentar

Impedancias
☒ Presentar

Cambio de Peso e Ingesta
☒ Presentar


Podómetro
☐ Presentar

Texto Explicativo Adicional


☐ Peso/grasa corp, coef.cintura cadera, masa magra
☐ Agua corporal, masa celular y extracelular, metabolismo basal, tensión arterial
☐ Colesterol
☐ Función cardíaca
☐ Fuerza resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad
☐ Ángulo de fase
☐ Dieta sana
☐ Fuerza de mano y podómetro

☒ Fitness
☒ Pruebas
☒ Planificador

7B. Ver e imprimir el informe

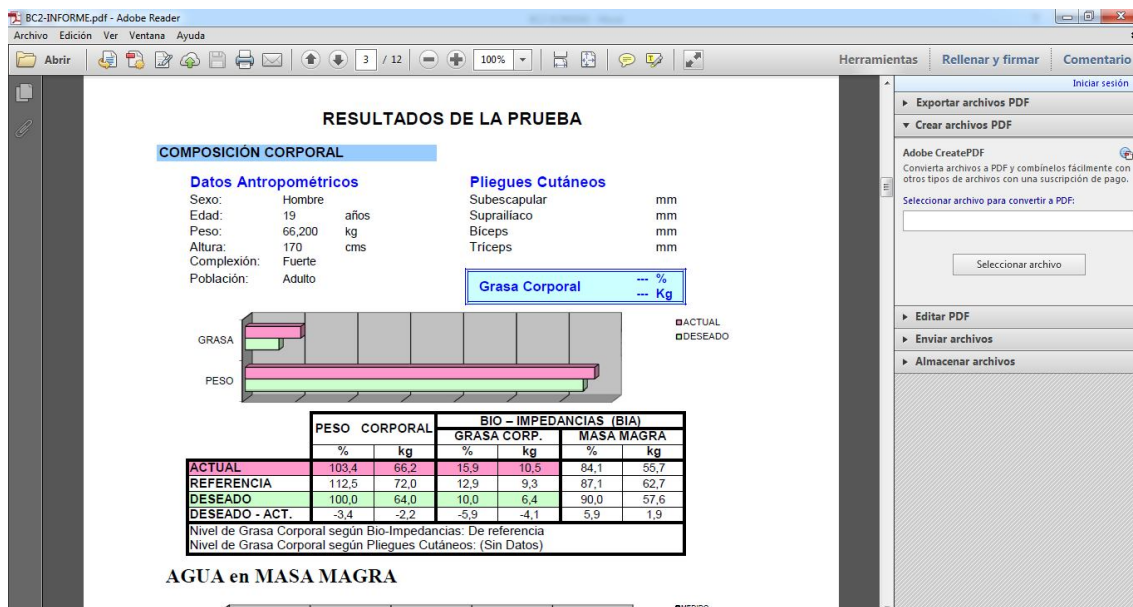

7C. Crear un informe en formato PDF para enviar por email

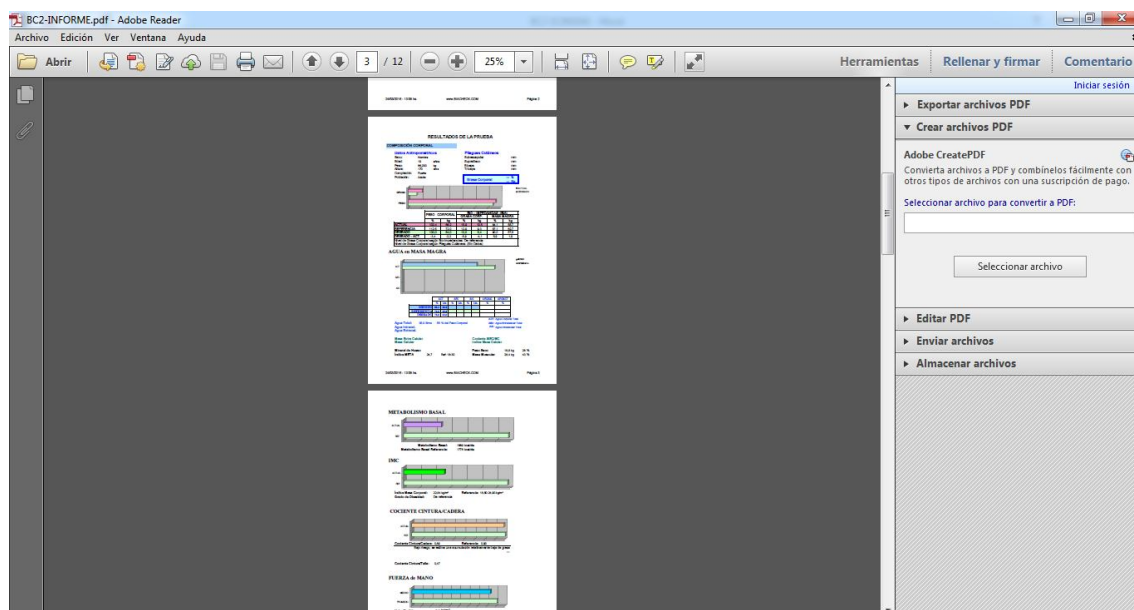

Comparativa Versión BC23-1-2 y BC23-3-4

Prestaciones	BC23-1-2	BC23-3-4
Datos Personales	Sí	Sí
Datos Físicos	Sí	Sí
Impedancias	50kHz	1-500kHz
Peso/Ingesta	No	Sí
Fitness	Solo metabolismo OMS sin planificador fitness, sin podómetros	Sí
Otros Parámetros	Sí	Sí
Configurar Informes	Sí	Sí
Informes	Según disponibilidad indicado previamente	Sí

La disponibilidad de parámetros es según modelo también. La versión BC23-3-4 es más completa. Es muy parecido y funciona de la misma manera.

Requisitos del ordenador

- Sistema Operativo Microsoft Windows: 8 y 10 (consultar versiones anteriores)
- Instalado Microsoft Office
- Disponible 2 puertos USB

Incluye:

Licencia y software (en cd rom o se puede descargar) para 1 PC, cable USB, llave USB.

Solicite versión DEMO para probar en su ordenador

WWW.PURSUETEC.COM