


Düren, 298 | Barão - RS - Brasil.
CEP 95730-000
(51)4042-9600
ortobras@ortobras.com.br
ORTOBRAS.COM.BR

MANUAL DE INSTRUÇÕES POOL LIFT

- ◀ Instruções de uso.
- ◀ Identificação do produto.
- ◀ Termo de garantia.
- ◀ Peças de reposição.

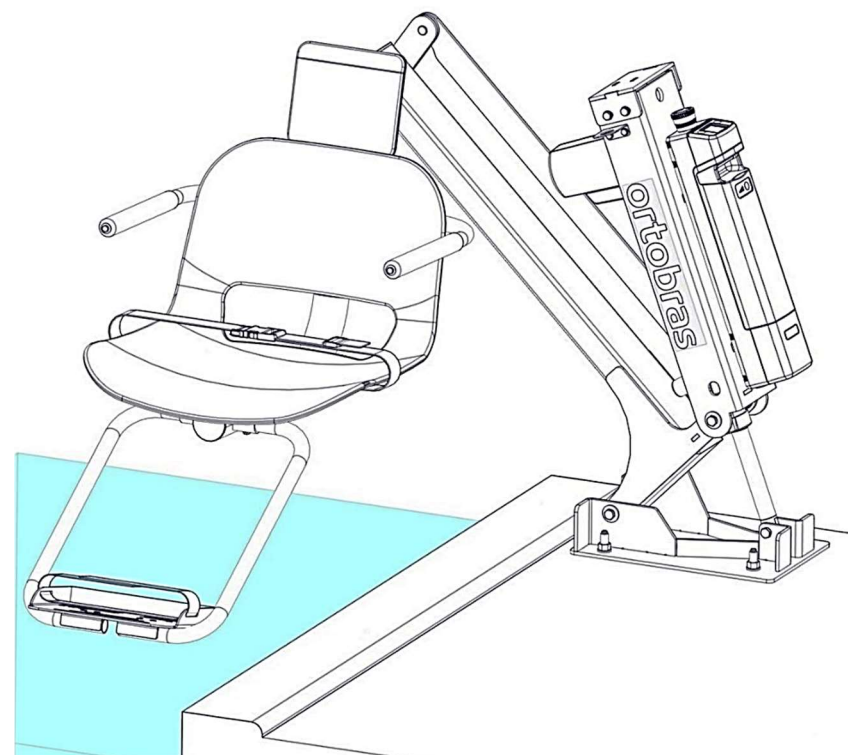

INTRODUÇÃO

Caro Cliente:

Estamos satisfeitos por você ter decidido comprar um produto de alta qualidade da Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda.

Este Manual do usuário contém várias sugestões para o correto uso do seu elevador de piscina. Manter os laços de fidelidade com os nossos clientes é de grande importância para o grupo Ortobras. Assim, gostaríamos de mantê-lo atualizado quanto ao desenvolvimento de nossos produtos. A nossa estreita relação com os clientes também envolve um serviço mais rápido quando for necessário substituir peças e acessórios ou para responder às suas perguntas sobre o seu produto com a maior rapidez possível.

Queremos sua satisfação com nossos produtos e serviços!

O grupo Ortobras trabalha no desenvolvimento contínuo dos seus produtos, por esta razão, poderão ocorrer alterações nas nossas linhas de fabricação no que diz respeito à forma, tecnologia e acessórios. O sistema de gestão da Ortobras está certificado segundo a norma **ISO 9001**.

Contate o seu fornecedor local e autorizado Ortobras se tiver dúvidas sobre utilização, manutenção ou segurança do seu equipamento.

No caso de não existir fornecedor autorizado na sua área ou se tiver quaisquer questões, contate a Ortobras por escrito ou por telefone (os contatos estão indicados no final deste manual de instruções).


O produto apresentado e descrito neste manual pode não ser exatamente igual ao seu modelo em todos os detalhes, no entanto, todas as instruções que se indicam, são perfeitamente aplicáveis, independentemente dessas pequenas diferenças.











IMPORTANTE:
NÃO USE ESTE PRODUTO ANTES DE TER LIDO E
COMPREENDIDO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

ÍNDICE

1. UTILIZAÇÃO RECOMENDADA:.....	5
2. CONTRAINDICAÇÕES:.....	5
3. CONSELHOS DE SEGURANÇA:.....	5
4. COMPONENTES:.....	6
5. INSTALAÇÃO:.....	7
6. REQUERIMENTOS OBRIGATORIOS:.....	9
7. GABARITO:.....	9
8. AVISO:.....	12
9. UTILIZAÇÃO:.....	12
9.1. CONECTORES:.....	13
9.2. CONTROLE:.....	14
9.3. DECIDA:.....	15
9.4. SUBIDA:.....	16
9.5. BOTÃO DE EMERGÊNCIA:.....	17
9.6. REMOÇÃO DA CAIXA DE COMANDO E BATERIA:.....	18
9.7. INDICADOR DE CARGA DA BATERIA:.....	19
9.8. REMOÇÃO DA BATERIA:.....	19
10. MANUTENÇÃO:.....	21
10.1. LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:.....	21
10.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:.....	22
10.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA:.....	22
11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:.....	24
12. GARANTIA:.....	26
12.1. PRAZO DE GARANTIA:.....	26
12.2. ABRANGENCIA E INFORMATIVO:.....	26
13. CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA:.....	27
14. A GARANTIA NÃO ASSEGURA:.....	28
15. EXTINÇÃO DA GARANTIA:.....	29
16. DESCARTE DO PRODUTO:.....	30
17. PEÇAS DE REPOIÇÃO:.....	31

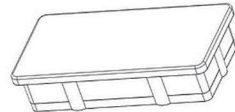	PONTEIRA INT 100 X 50 20025922
PARAFUSO CAB CHATA PHILLIPS M6X1,00X16 304 RT INOX 20006020	ARRUELA LISA M6 INOX 20007021
PORCA AUTOTRAVANTE M6 X 1 INOX 20008028	PARAFUSO SEXT M8X1,25X60 304 RT INOX 20001000
PORCA AUTOTRAVANTE M8 X 1,25 INOX 20008026	ARRUELA LISA M8 INOX 20007026
PARAFUSO SEXT M10X1,50X90 304 RP INOX 20002185	PORCA AUTOTRAVANTE M10 X 1,5 INOX 20008027
ARRUELA LISA M10 INOX 20007037	PARAFUSO AUTO CAB PANELA PHILLIPS 6,3X19 RT 304 INOX 20005011
PARAFUSO SEXT M6X1,00X25 304 RT INOX 20006042	PORCA AUTOTRAVANTE M16 X 2 INOX 20008034
ARRUELA INOX D30 X 1/8" X F16,5 70627603041	ARRUELA INOX D30 X 1/8" X F10,5 70627603042
PARAFUSO SEXT M8X1,25X30 304 RT INOX 20006018	PARAFUSO SEXT M10X1,50X20 304 RT INOX 20006064
PARAFUSO SEXT M6X1,00X20 304 RT INOX 20001070	ARRUELA LISA M6 INOX 20007021

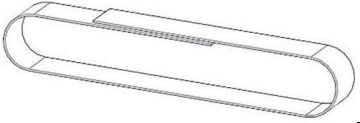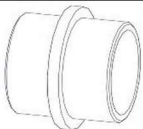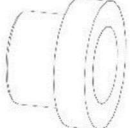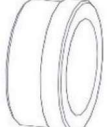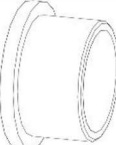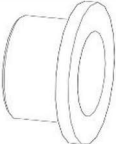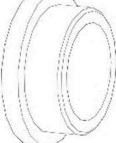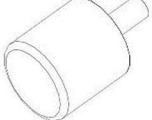	FAIXA DE FIXAÇÃO DOS PÉS 70027020005
	PUNHO 1P X 260MM PRET 20010096
	BUCHA DE BRONZE ENCAIXE DUPLO 70627604010
	BUCHA DE BRONZE ATUADOR 70627604013
	BUCHAINFERIOR EIXO BRACO 70627604001
	BUCHA DE BRONZE SUPERIOR TORRE 70627604015
	BUCHA DE BRONZE MAIOR 70627604009
	BUCHA DE BRONZE BRACO PARALELO 70627604008
	BATENTE DE BORRACHA 20010334



1. UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Os dispositivos de acesso aquático foram concebidos para mover o usuário até a piscina. Deve ser sempre manejado por alguém que esteja familiarizado com a sua operação e segurança do equipamento.



2. CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas com sérios problemas de visão.

Pessoas limitadas em questões cognitivas.

NÃO é indicada a Operação / Manuseio do Elevador De Piscina por crianças.

Uma pessoa treinada pode ser definida, como um membro da família ou profissional especialmente treinado para auxiliar o usuário em várias atividades diárias. Consulte seu médico se você estiver fazendo uso de algum medicamento que possa afetar sua habilidade para operar seu elevador de piscina de forma segura.



3. CONSELHOS DE SEGURANÇA

- É preciso familiarizar-se com os comandos e dispositivos de segurança do elevador de piscina antes de iniciar a utilização do equipamento
- Não utilize outras poltronas, somente as recomendadas para a utilização com o elevador de piscina.
- Realize sempre as operações segundo as instruções detalhadas neste manual.
- Verifique sempre se a carga útil de segurança do elevador de piscina está ajustada ao peso do paciente.
- Quando levantar ou baixar o usuário, o assistente e o operador do aparelho devem manter as mãos afastadas do atuador, das peças de ligação e rotativas entre o braço e partes moveis.

- NÃO use ou instale componentes de terceiros no elevador de piscina que não estejam homologados pela Ortobras.
- NÃO SÃO PERMITIDAS modificações que possam alterar o projeto original do equipamento.
- NUNCA use este equipamento quando o peso total exceder 150 kg. Se você exceder o limite, acelerará o desgaste do equipamento, podendo acarretar queda, tombo ou perda de controle, podendo causar dano severo ao usuário ou outras pessoas.
- Modificações sem autorização e uso de acessórios não autorizados pelo fabricante anulam a garantia e podem causar danos em relação à sua segurança.
- Nunca opere este elevador sob carga sem água (PISCINA SECA).

4. COMPONENTES

- 1- CONTROLE;
- 2- CAIXA DE COMANDO;
- 3- ATUADOR LINEAR;
- 4- BRAÇO PARALELO
- BANQUETA;
- 5- TUBO GIRO;
- 6- CJ APOIO BRAÇO;
- 7- BANCO;
- 8- CJ APOIO PÉ;
- 9- BASE;
- 10- CINTO;
- 11-FAIXA DE FIXAÇÃO DOS PÉS;




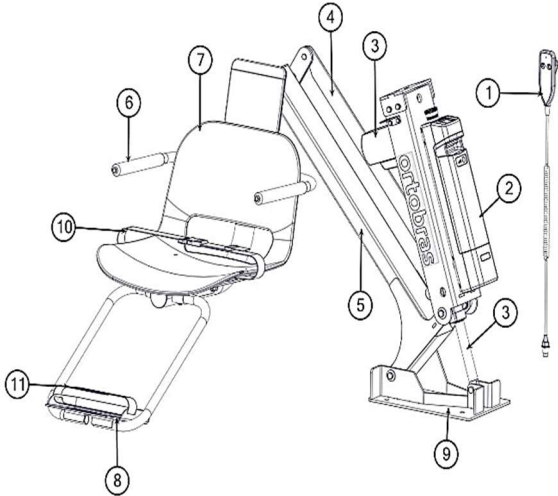


figura 01 – Componentes.

17. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

	CONTROLE DE MAO PARA CAIXA DE COMANDO LCB01-V02. 20025923
	ATUADOR LINEAR 10000N 20015862
	BANCO PISCINA PARA POOL LIFT 20025919
	CINTO POOL LIFT 70627605000
	CAIXA DE COMANDO 20025992

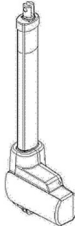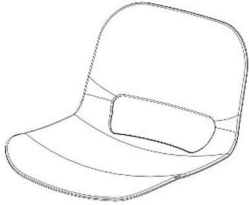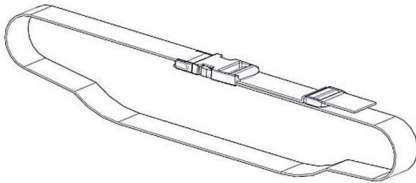

16. DESCARTE DO PRODUTO

Este equipamento assim como seus acessórios contém diversos materiais, como plástico, metais, borrachas etc. e existe riscos de contaminação ao meio ambiente associados à eliminação deste equipamento e seus acessórios ao final de suas vidas úteis. A Ortobras orienta que o descarte definitivo do equipamento ao final de sua vida útil, bem como de partes ou peças substituídas ao longo de sua utilização, não seja feito em lixo comum, pois alguns materiais demoram a se decompor e podem causar prejuízos ao meio ambiente. Descarte-o em local apropriado ou encaminhe para rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou à Fábrica.

Observação: Fica por conta do cliente qualquer despesa referente ao envio e/ou transporte até a Rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou à Fábrica.



5. INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: A instalação deve ser feita por profissional habilitado para a função ou algum sugerido pelo fabricante.

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:

VISTA SUPERIOR

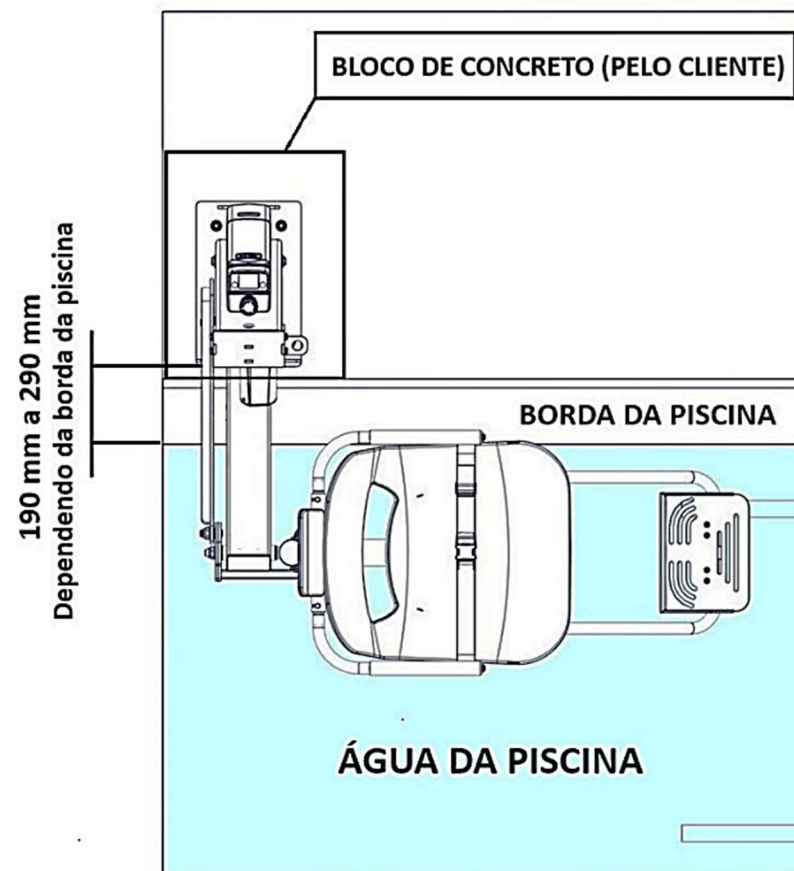


Figura 02 – vista superior.

Posição do gabarito



Figura 03 – posição do gabarito.

Para a correta instalação, posicionar o gabarito de furação 90° em relação a borda da piscina, (utilizar um esquadro para o posicionamento correto do gabarito).

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

- I - Pelo término do prazo de sua vigência;
- II - Alterações, modificações, introdução de acessórios impróprios, adaptações e adaptações posturais feitas no produto por terceiros, sem a devida autorização do fabricante, anula automaticamente a garantia do produto;
- III - Assistência prestada por pessoas não autorizadas e não habilitadas para as funções de instalação e manutenção.
- IV - Inobservância das prescrições constantes do “Manual de Instruções e Funcionamento”;
- V - Uso inadequado, acidentes, negligência ou qualquer outro sinistro que porventura ocorram;
- VI - Quando da análise do elevador, sejam constatados o uso de peças não originais;
- VII - A inobservância de qualquer das recomendações contidas no Manual do usuário acarretará a perda total a garantia do produto.

14. A GARANTIA NÃO ASSEGURA

I - Despesas de manutenções periódicas previstas no manual tais como limpeza, regulagem, reaperto, alinhamentos e verificações*;

II - Itens de desgaste natural em função do uso*;

Consideram-se itens de desgaste natural:

Controle remoto/ buchas/ eixos / Assento, cintos/ Manoplas.

III – **Troca da bateria. ****

IV - Quaisquer componentes que sofram atrito com outras partes ou fadiga de material ocasionado pelo uso do produto.

V - Reparos ou substituições de peças que não sejam originais;

VI - Defeitos provocados pela transformação, modificação, adaptações não autorizadas ou em decorrência do uso fora das especificações contidas neste manual;

VII - Defeitos decorrentes de acidentes ou exposição do produto a condições impróprias, transporte, bem como por armazenamento inadequado.

VIII - Defeitos decorrentes da influência de intempéries climáticas, descargas elétricas provenientes de raios e trovões, furacões, ventanias, inundações, desabamentos e outros desastres naturais, bem como de contato com substâncias químicas, corrosivas ou abrasivas, causados por atritos durante o uso como riscos e amassados e de acidentes;

IX - Quebra de qualquer peça ou acessório decorrente por abuso de utilização.

X - A garantia restringe-se única e exclusivamente ao produto, não cobrindo qualquer outra despesa decorrente de avaria, como transporte, hospedagem, alimentação etc.

* Os itens de desgaste natural em função do uso e as despesas com as substituições periódicas (manutenção periódica) ocorrerão por conta do proprietário.

**** Fica ressalvado a previsão legal de garantia de três meses contados da data da compra**

Obs. Altura máxima da borda da piscina: 75 mm

TABELA DE INSTALAÇÃO

ALTURA DA BORDA DA PISCINA	DISTÂNCIA X DE INSTALAÇÃO
00 cm	29,0 cm
2,5 cm	26,0 cm
5,0 cm	23,0 cm
7,5 cm	19,0 cm

6.REQUERIMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Resistencia a compressão FCK: 25 MPa (megapascal);

FCK = é a resistência característica à compressão do concreto;

O bloco de concreto deverá ser amarrado/ancorado (solo compactado). Diferente desta característica, deverá ser previsto estaqueamento junto ao solo pela contratante;

O acabamento junto ao bloco em torno da base do equipamento ficará a cargo do cliente após instalação da base metálica;

7.GABARITO

Para facilitar a instalação, junto com o equipamento acompanhara um gabarito para a furação, para a correta furação a seta do gabarito fica apontada para a piscina.

Obs. Utilizar um esquadro para o posicionamento correto do gabarito

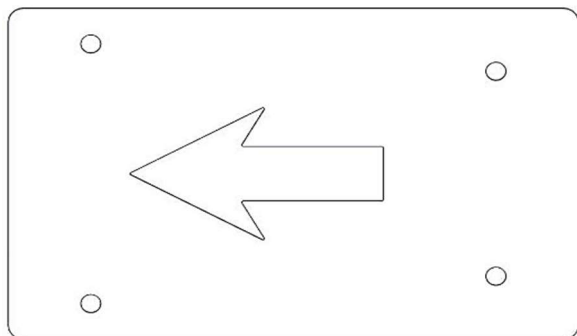



Figura 04 – Gabarito.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

Ao instalar o equipamento é necessário garantir que não exista algum tipo de tubulação abaixo, que o concreto seja firme para que o chumbador cumpra sua função e que siga as instruções de dimensionamento de instalação.

04 chumbadores para fixação da base CHUMBADOR INOX PBA ½ x 5.1/2"	
Reação por cada chumbador: 4.900 kgf de tração	
Broca para furação (mm):	
Profundidade do Furo (mm):	
Chave:	
	12 ou 13 Dependendo do Concreto
	95mm
	3/4" - 19 mm

DIMENÇÕES DO BLOCO DE CONCRETO	
LARGURA "A"	500mm
COMPRIMENTO "B"	600mm
PROFUNDIDADE "P"	300mm

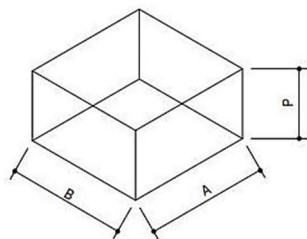

IV - Os equipamentos são fabricados para o uso nas condições normais de ambiente (salvo especificado de forma diferente) e para serem movimentados pela forma prevista para o seu uso;

V - O equipamento deve ser utilizado de acordo com as suas características e orientações normalizadas;

VI - Esta garantia será aplicada sempre que a ORTOBRAS, ou terceiros por ela indicados, revelem satisfatoriamente através de evidências, a existência do defeito reclamado.

13. CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

I - A montagem do produto deverá ter sido corretamente executada, seguindo as instruções do Manual do **Usuário**;

II - Apresentação de **Nota Fiscal de Compra** sem rasuras;

ATENÇÃO: *Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do equipamento, este documento é indispensável para utilização da garantia.*

III - As orientações quanto ao uso, manutenção e cuidados deverão ser devidamente respeitadas, de acordo com as previsões contidas neste Manual;

IV - Peças substituídas e reparos feitos no período de garantia não acarretam sua prorrogação, sendo que esta terá validade sempre a partir da data de aquisição do produto devidamente identificado pela Nota Fiscal de Compra;

12. GARANTIA

12.1 PRAZOS DE GARANTIA

I - Conforme previsto no código de defesa do Consumidor a Ortobras garante a responsabilidade por vícios e defeitos em seus equipamentos por 90 (noventa) dias (garantia Legal).

II - A Ortobras, além da garantia legal, concede 9 (nove) meses de garantia contratual, aos seus consumidores. Totalizando o prazo de 12 (doze) meses de garantia, contados a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

ATENÇÃO: *Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do equipamento, este documento é indispensável para utilização da garantia.*

12.2 ABRANGÊNCIA E INFORMATIVO

I - A garantia abrange todos os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas, que serão substituídas por novas pelo revendedor do produto autorizado ou pela empresa Ortobras.

II – Elevadores de Transferência são dispositivos que exigem manutenção constante e adequada, ainda que não estejam em uso;

III - A manutenção do equipamento demanda a utilização de lubrificantes e peças de reposição com características originais e o emprego de mão de obra

adequadamente treinada e de habilitação comprovada, conforme disposto no manual;

Após fazer a furação e colocar os chumbadores, fixar o equipamento pela base na furação detalhada na imagem.

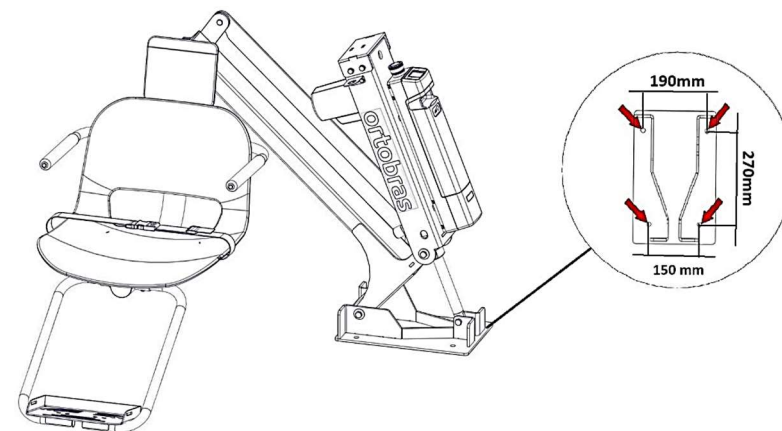


Figura 05 – Instalação.

A fixação do equipamento devera ser feita no **MAXIMO 290mm** da borda da piscina. Caso essa medida não seja respeitada podera aver colisão do equipamento com a borda da picina.

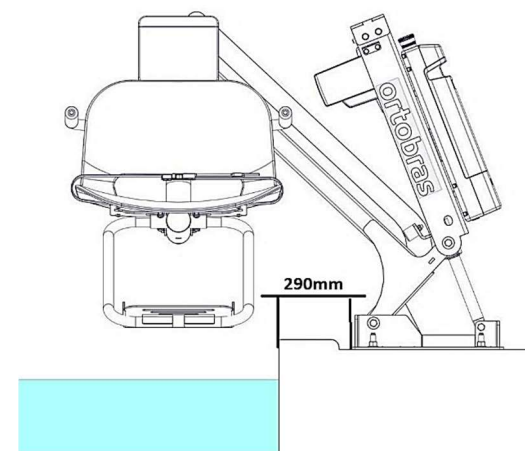


Figura 06 – Distância máxima de instalação.

OBS: Verificar a tabela de instalação (pagina 9), antes de fazer a instalação do equipamento.



8. AVISO

Certifique-se de que a área ao redor do elevador esteja livre antes de operar.

Nunca opere o elevador com qualquer pessoa dentro da faixa de operação do elevador, inclusive na água.

Nunca mova o elevador para baixo enquanto estiver sobre o convés. se o elevador entrar em contato com o convés ou uma parede, solte o botão imediatamente.

Não permita que crianças operem o elevador sem supervisão.

Verifique todas as porcas e parafusos quanto à estanqueidade e quanto às peças desgastadas antes de cada uso.

Nunca utilize o equipamento sem fazer o uso do cinto de segurança.



9. UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o elevador de piscina, execute um teste do elevador vazio. Uma vez que isso é concluído e o elevador está de volta à posição original, certifique-se de que os levantamentos de braço estão na posição de cima e o cinto de segurança está desapertado, uma vez reconhecido que você está pronto!

Quando estiver no assento, aperte o cinto de segurança (certifique-se de que está confortável) e abaixe os braços. Antes de tentar operar o elevador, certifique-se de que o caminho está livre de quaisquer obstáculos.

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Carga útil de segurança	150 kg
Comprimento	1276
Largura	712
Altura	998
Peso total	55kg

Não é recomendado à exposição de seu equipamento a condições ambientais que não sejam as especificadas no quadro abaixo, pois podem afetar a segurança básica e o desempenho essencial de seu equipamento.

Operação		Transporte e armazenamento	
Umidade relativa	15% a 93% sem condensação	Umidade relativa	-20% a 93% sem condensação
Temperatura	0°C a 35°C	Temperatura	-25°C a 70°C
Pressão atmosférica	700hPa a 1060hPa	Pressão atmosférica	700hPa a 1060hPa
Altitude	< 2000m	Altitude	< 2000m

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS ELEVADOR FECHADO

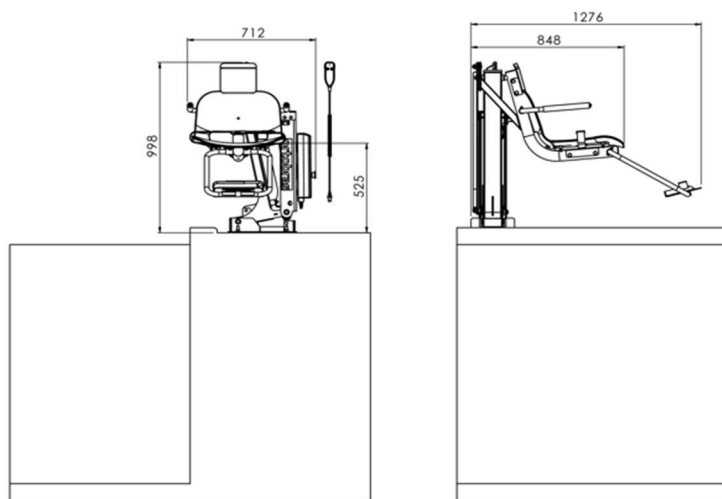

MEDIDAS ELEVADOR ABERTO

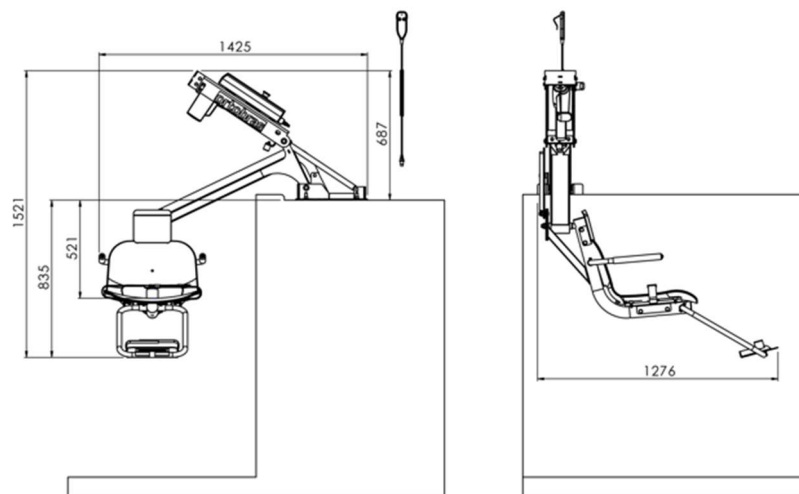


Figura 17 – Medidas.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

9.1 CONECTORES

A imagem abaixo mostra os conectores da caixa de comando.

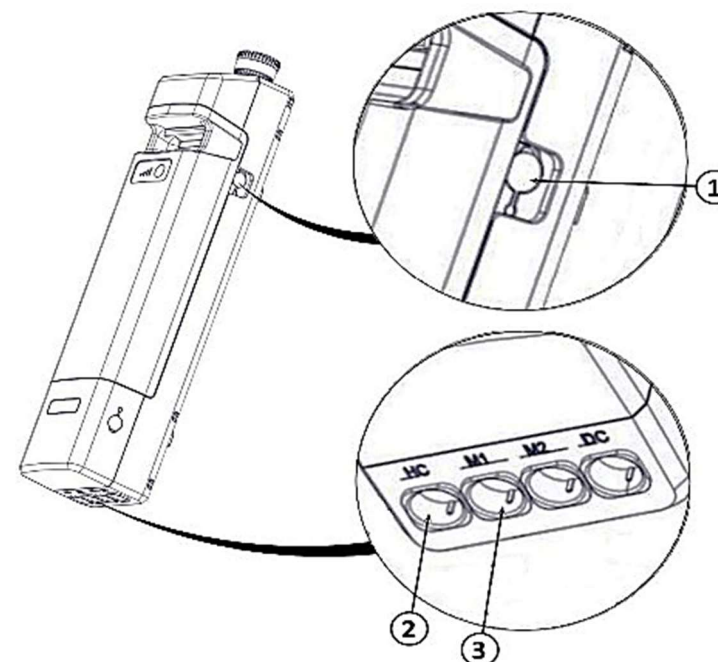


Figura 07 – conectores

- 1- Conector de carregamento da bateria
- 2- Conector do controle remoto
- 3- Conector do atuador.

9.2. CONTROLE

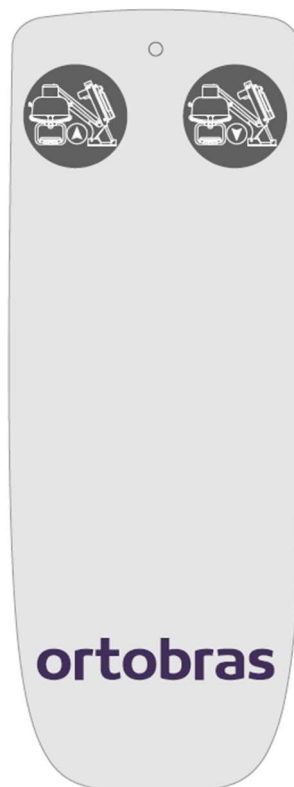


Figura 08 – Controle.

O elevador está equipado com um controle simples com dois botões subida e descida.

Depois de ter os controles fáceis de 2 botões em sua mão, pressione a seta que especifica para baixo, tenha em mente que você não precisa ir para o fundo do ciclo, você pode parar o elevador sempre que julgar confortável para sair do elevador. No entanto, ao sair da piscina enquanto estiver no elevador, você deve completar o ciclo de volta ao topo para ter uma saída completamente segura da piscina.

A Imagem abaixo mostra o pontos que deverão ser lubrificados

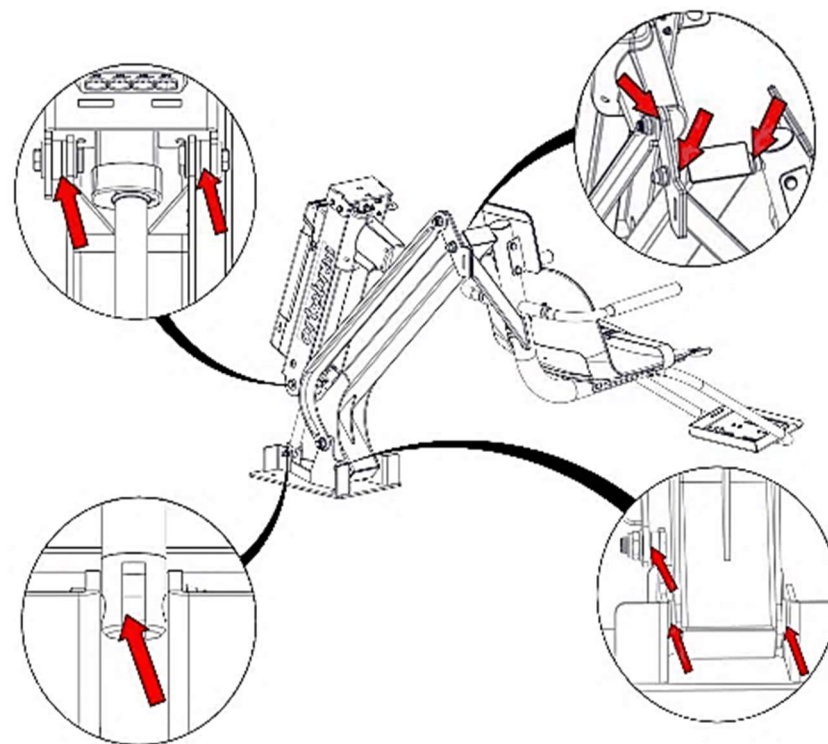


Figura 16 – Lubrificação.

OBS: Recomenda-se que a lubrificação das parte moveis seja feita com **Graxa náutica** (de sua preferencia)

Recomenda-se que a lubrificação das partes móveis seja feita com **Graxa náutica** (de sua preferência), para uma melhor aplicação e penetração do produto é recomendado que seja utilizado **Graxa náutica spray**.

10.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Atenção: Nenhuma das partes do elevador que passará por manutenção preventiva, poderá ser efetuada com usuário em operação.

10.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA



Atenção: Nenhuma das partes do elevador que passará por manutenção corretiva, poderá ser efetuada com usuário em operação.

A manutenção **CORRETIVA**, parte mecânica do elevador é um procedimento de serviço a ser executado **SOMENTE** pela assistência técnica e **NÃO** deve ser feita pelo usuário.

A manutenção realizada por qualquer outra pessoa que não seja de equipe de assistência técnica invalidará qualquer garantia existente para o equipamento, além de poder ocasionar mau funcionamento dele.

Os elevadores são dispositivos que exigem manutenção constante e adequada, ainda que não estejam em uso;

A manutenção do equipamento demanda a utilização de lubrificantes, peças de reposição com características originais e o emprego de mão de obra adequadamente treinada e de habilitação comprovada;

Quando for constatado problema, o cliente deverá imediatamente entrar em contato com a assistência técnica mais próxima para solicitação da garantia.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

9.3. DECIDA

Para iniciar a decida deve sentar-se na poltrona de forma confortável afivelar o cinto de segurança e afivelar os pés no conjunto apoio pés (certifique-se que está confortável).

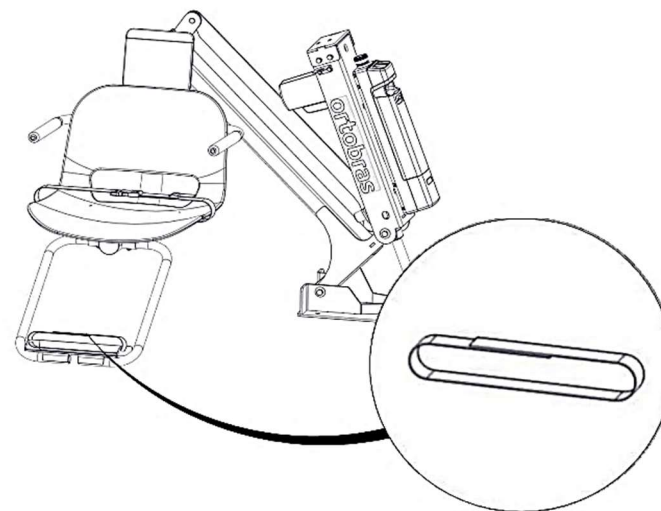


Figura 09 -Faixa de fixação dos pés

OBS: Sempre afivelar os pés dos usuários, principalmente quando o usuário não possuir nenhum movimento nos membros inferior.

Em seguida pegue o controle e aperte o botão de decida detalhado na imagem, até a profundidade desejada ou até o fim de curso do elevador.

Uma vez submerso na piscina, solte o cinto de segurança e a faixa de fixação dos pés, levante o apoio de braço e deslize para fora do assento.

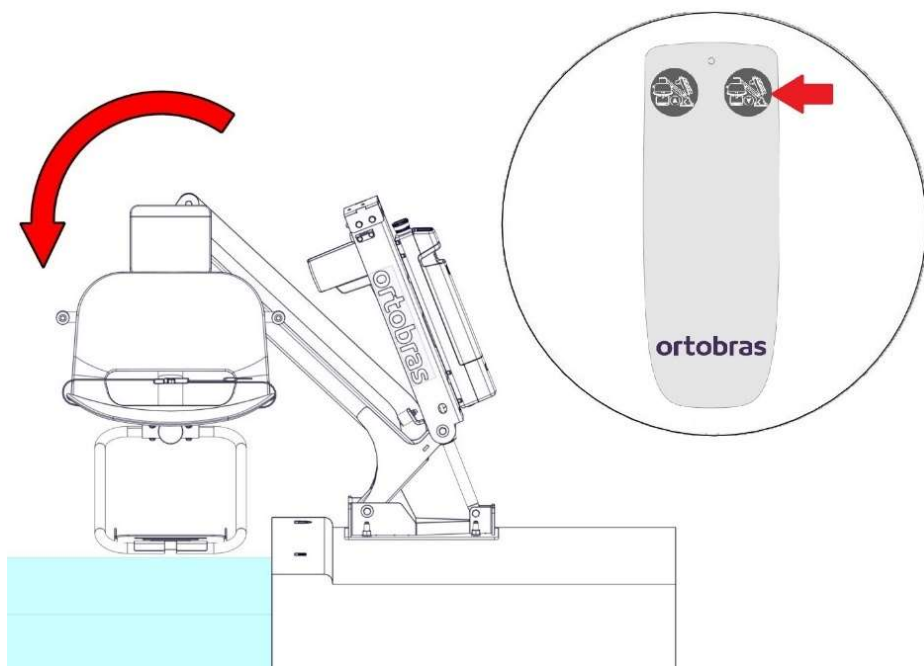


Figura 10 -Decida.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

9.4. SUBIDA

Depois de terminar sua atividade na piscina, certifique-se de que o assento esteja abaixado o suficiente para permitir que você deslize facilmente de volta para a cadeira. Quando estiver sentado, afivela o cinto de segurança e a faixa de fixação dos pés, certifique-se de que está confortável e abaixe o apoio de braço.

Para iniciar a subida (certifique-se que está confortável). Em seguida aperte o botão de subida detalhado na imagem até o fim do curso para sair do elevador.

10. MANUTENÇÃO

Todos os produtos da ORTOBRAS são concebidos para terem a menor manutenção possível. No entanto alguns controles e revisões de segurança são necessários.

Recomendamos realizar diariamente e antes de utilizar o elevador, as seguintes verificações:

- Verifique se os parafusos de fixação da base estão bem fixados.
- Acione os comandos para assegurar-se de que o elevador sobe e desce corretamente.
- Assegure-se de utilizar corretamente os comandos.
- Verifique as partes moveis a fixação da poltrona para saber se têm desgaste excessivo. Em caso de dúvida, não utilize o elevador.
- Examine o elevador criteriosamente assegurar-se de que não a partes gastas nem deterioradas.

10.1 LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Para a higienização do equipamento deve-se realizar a limpeza, podendo ser feita com sabão neutro, ou higienizar com álcool 70%.

Recomendamos que um serviço técnico autorizado realize as seguintes verificações e inspeções nas diferentes partes do elevador.

TABELA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	
VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO MENSAL	
BRAÇO	Verificar o acoplamento do braço na base. Assegurar-se se a rotação do braço se faz livremente. Verificar aperto dos parafusos de fixação do atuador e de fixação na torre.
ATUADOR	Verificar se funciona corretamente Verificar aperto dos parafusos superiores e inferiores de fixação do atuador
LIMPEZA	Limpar com água e sabão e/ou qualquer desinfetante para superfícies duras. Não utilizar detergentes agressivos nem abrasivos, já que poderiam deteriorar o acabamento da superfície.
VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO SEMANAL	
LUBRIFICAÇÃO	Fazer a lubrificação das partes moveis que sofram atritos

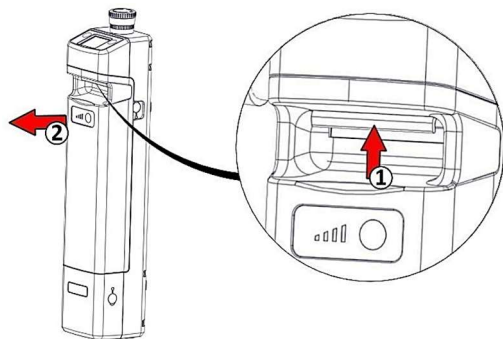


Figura 15 – Remoção da bateria



OBS. PARA CARREGAR A BATERIA, ELA DEVERA SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO.



CARGA E CUIDADOS COM A BATERIA:

O indicador de bateria permite saber quanta carga resta na bateria.

Quando o sistema de controle é ligado o indicador de baterias mostra uma estimativa de carga restante.

A quantidade de carga da bateria depende de uma série de fatores, incluindo a forma como o POOL LIFT for utilizado, a temperatura da bateria e seu tempo de uso. Estes fatores irão alterar a autonomia da bateria. É indicado recarregar a bateria do POOL LIFT sempre que estiver com carga baixa, mesmo que a carga não tenha se esgotado. **Cada vez que é totalmente esgotada, é gerada uma lesão permanente na bateria.** A ocorrência de descargas profundas, quando feitas frequentemente, acabam diminuindo prematuramente a capacidade da bateria, reduzindo a autonomia de ciclos do POOL LIFT.

Caso o POOL LIFT fique por muito tempo parado, deve-se fazer a recarga de baterias, no mínimo, uma vez por semana. Se esse procedimento não for feito, a bateria perderá sua capacidade, podendo até mesmo estragar de forma permanente.

A vida útil da bateria também se reduz com a quantidade de cargas e descargas. Para maior durabilidade da bateria não use o POOL LIFT com carga mínima.

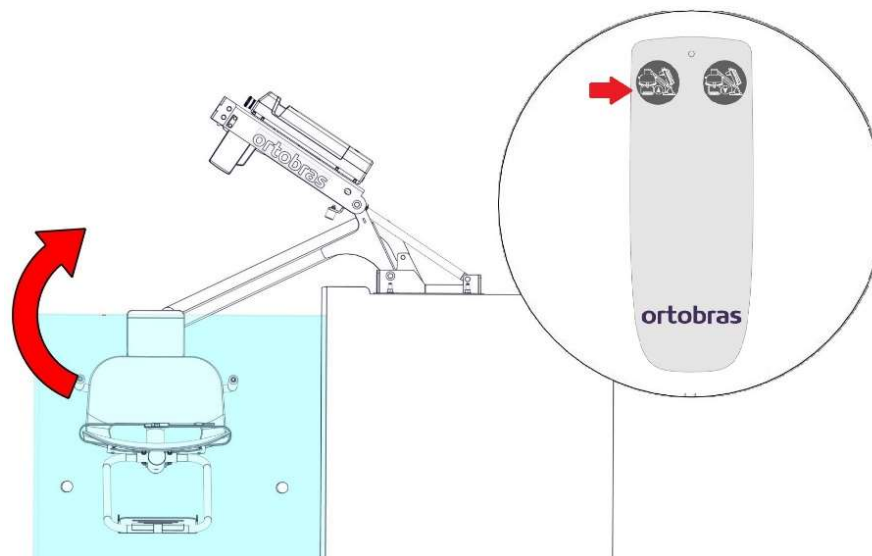


Figura 11 – Subida.

9.5. BOTÃO DE EMERGENCIA

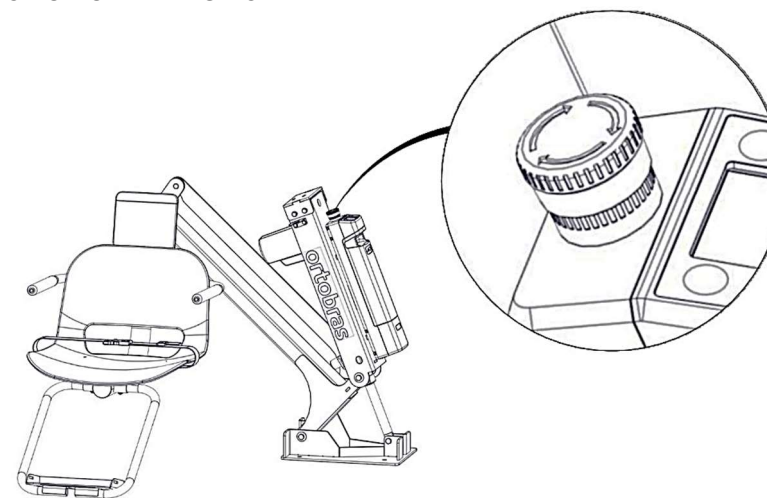


Figura 12 – Botão de emergência.

No caso improvável de uma possível falha do elevador, peça a um atendente que pressione o botão de emergência em cima da caixa de controle, o acionamento deste botão possibilitará o usuário desativar instantaneamente qualquer ação que estiver sendo executada.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

9.6 REMOÇÃO DA CAIXA DE COMANDO E BATERIA

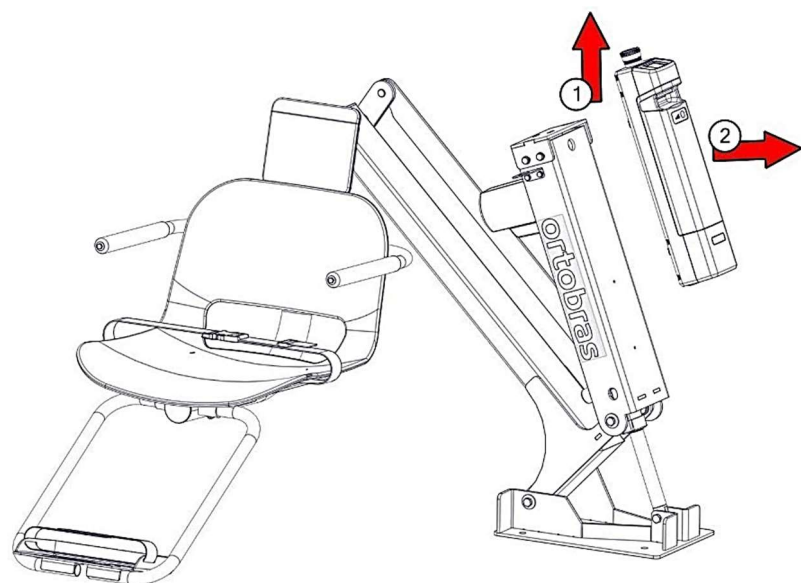


Figura 13 – Remoção da caixa de comando.

A caixa de comando poderá ser removida facilmente, para remover basta forçar a caixa para cima até sair do encaixe conforme seta 1, após puxe a caixa para frente conforme seta 2, assim a caixa de comando sairá junto com a bateria e poderá ser carregada, guardada ou ser feita uma possível manutenção.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

9.7 INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

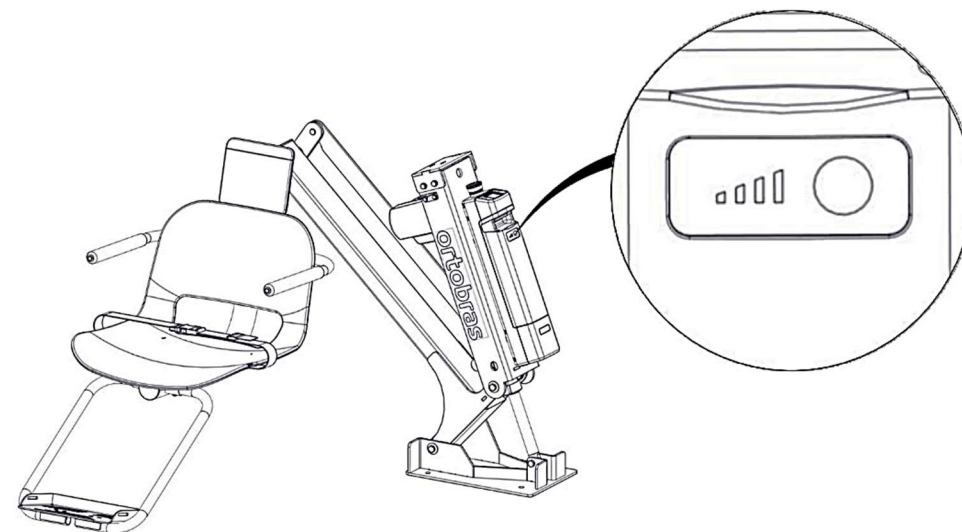


Figura 14 – Indicador de carga.

A bateria tem um indicador de carga, que está localizada na parte frontal da caixa de comando conforme imagem.



OBS. PARA CARREGAR A BATERIA, ELA DEVERA SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO.

9.8 REMOÇÃO DA BATERIA.

Para remover a bateria, basta apertar a trava indicada pela seta 1 detalhado na imagem, após puxe-a para frente conforme a seta 2 detalhada na imagem.

Após ter removido a bateria, a mesma poderá ser carregada.