

EDGE™

Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri

GEAR UP CAPTURE REMOVE



Edge™ Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri, akut semptomatik derin ven trombozunun, dönen bir tel ile mekanik olarak pıhtılaşmasını gidermek ve periferik vaskülatürde doktorun belirlediği sıvıların kontrollü ve seçici infüzyonu için tasarlanmıştır.

Kateter, el tipi bataryayla çalışan bir sürücü birimine bağlı önceden şekillendirilmiş bir teli içeren bir lümen tüpüdür ve sürücü ünitesi periferik vaskülatürdeki akut semptomatik derin ven trombozunda pıhtıyı mekanik olarak çözmek, çapaklarını gidermek ve parçalamak için teli 10.000 rpm / max'da çevresel olarak dönmesini tetikler. Atravmatik dönen tel mekanik olarak maserasyon yapmaz ve damar duvarına zarar vermeden pıhtıyı küçük parçacıklar halinde parçalar.

Bağlayıcı Luer Göbek

Kateterin proksimal ucu, Luer konikli bir konnektöre sahip kalıplanmış, kanatlı bir göbeğe sahiptir. Göbek ergonomik olarak şekillendirilmiştir, böylece doktor kateteri herhangi bir tüp ve manifolddan manuel olarak takabilir veya çıkarabilir.

Gerilim Giderici

Göbek tertibatının gerilim azaltma kısmı, göbek bileşeninin üst üste binen bir parçasıdır. Maver logo, French boyutu, kateter uzunluğu ve kılavuz tel boyutu açıkça yazdırılır.

Kateter Şaftı

Kateterin şaftı, sertlik ve torkta önemli değişiklikler olmaksızın prosedürün tüm uzunluğu boyunca kalabilen bükülmeye dirençli, radyoopak bir malzemeden yapılmıştır. Şaftlar şu anda tel örgülü ve telsiz örgülü konfigürasyonlarda sunulmaktadır.

Hemostatik Valf

Edge™ Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri, Y şeklinde hemostatik valf ile birlikte paketlenmiştir. Yan tüp ile birbirine bağlanan üç yollu bir üst musluk ile donatılmıştır.

Basket


Distal Uca Kadar Delik

Ayarlanabilir Hız
0-10k rpm
+ On/OFF

Dönüş Yönü - Sağ ve Sol


İleri Geri Hareket

9V Batarya

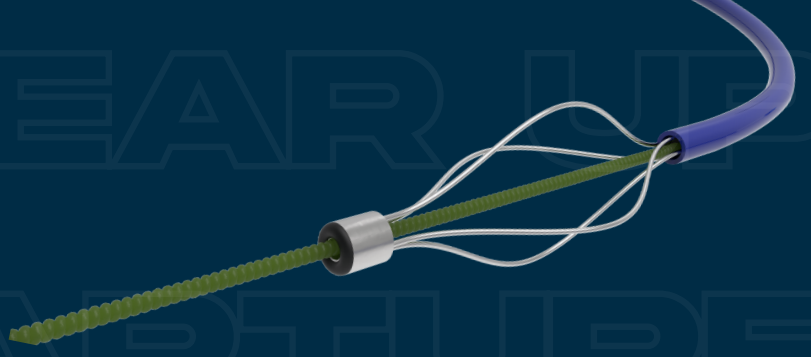

Endikasyonlar

Akut semptomatik derin ven trombozunda pıhtıyı mekanik olarak parçalara ayırmak ve periferik vaskülatürde doktor tarafından belirlenen sıvıların kontrollü ve seçici infüzyonu için endikedir.

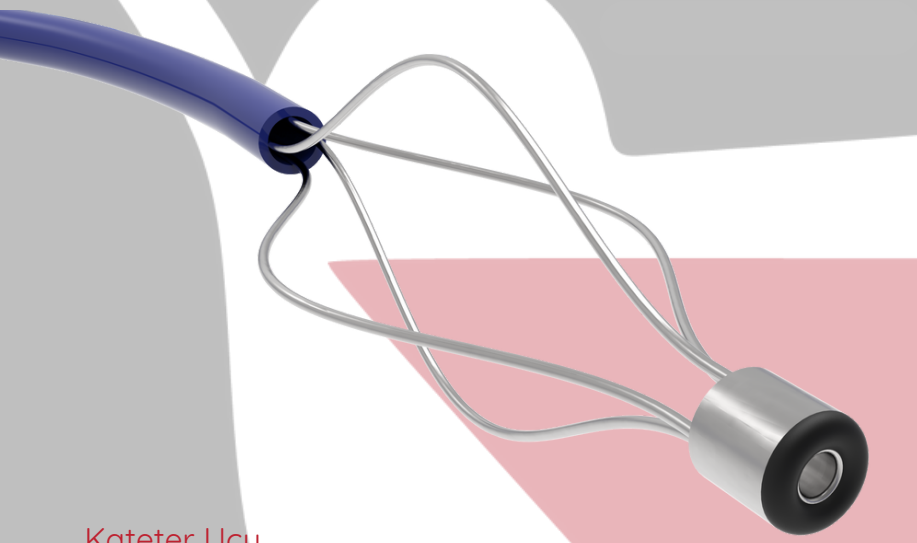


Kateter Ucu

Kateterin ucu, vasküler anatomilere uyum sağlamak için düz ve kavışli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve prosedürün tüm aşamalarında damar duvarını sınırlandırmak için yuvarlatılmıştır.

Mevcut ölçüler


5/6/7/8/9 Fr x 65/90/110/135/165 cm

6-16mm damar

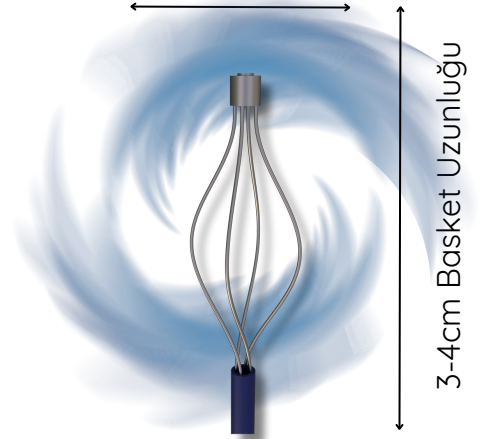

3-4cm Basket Uzunluğu

95cm/120cm/140cm/165cm/195cm

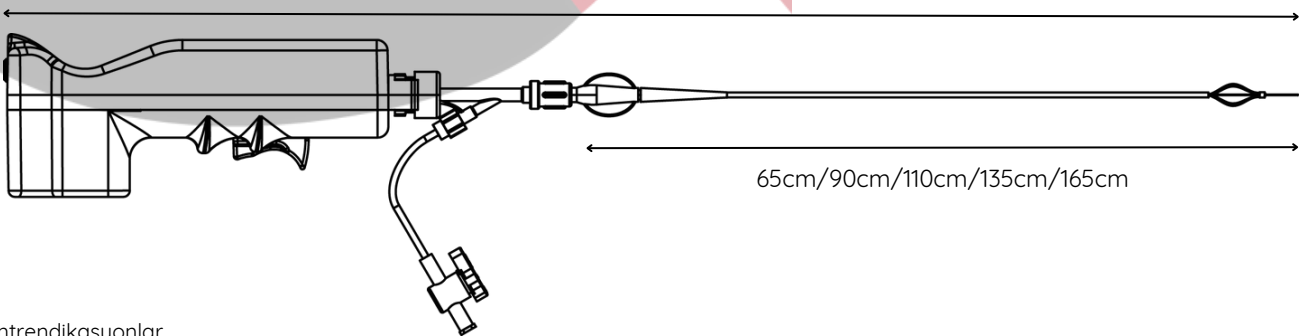

65cm/90cm/110cm/135cm/165cm


Kontrendikasyonlar

- Hekimin tıbbi kanaatine göre böyle bir prosedür hastanın durumunu tehlikeye atabileceği zaman bu sistem kontrendikedir.
- Hastanın herhangi bir fiziksel bozukluğunun bu cihazın kullanımını kontrendike edip etmeyeceğini belirlemek hekimin sorumluluğundadır.
- Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır.
- Inferior vena kava filtresi gibi vasküler filtresi olmayan hastalarda kontrendikedir.
- Bu sistem kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.
- Çapı 6 mm'den küçük damarlar.
- Kılavuz tel ile lezyona erişilemeyenlerde kontrendikedir.
- Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve önlemler için tercih edilen terapötik çözümün ürün ekine bakın.
- Kesme / puanlama balonları, pediatri, neonatal ve nörovasküler hastalarda kullanım için kontrendikedir.

MAVERA®

m e d i c a l d e v i c e s

BEYOND FROM WITHIN™

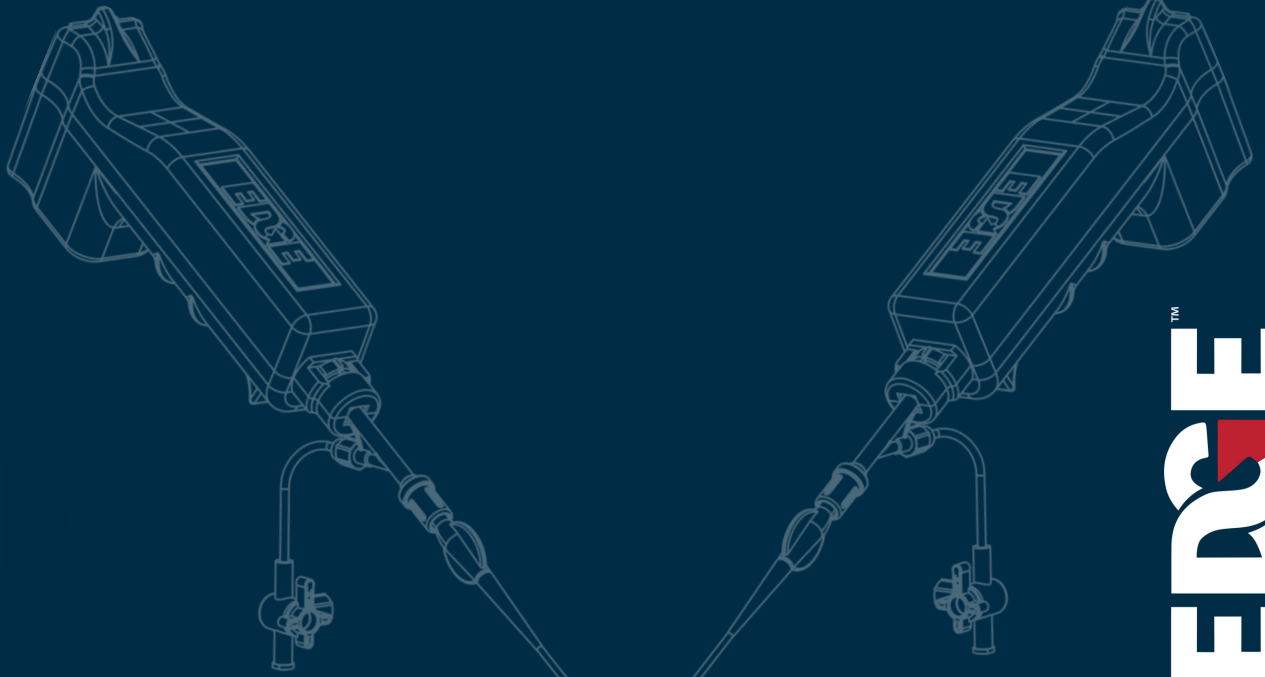

EDSE™
Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri

Bir cerrah, belirli bir hastayı tedavi ederken, belirli bir ürünü kullanıp kullanmayacağına karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik muhakemesine güvenmelidir. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. tıbbi tavsiye vermez ve cerrahlara herhangi bir ürünün ameliyatta kullanmadan önce kullanımı konusunda eğitim almalarını tavsiye eder. Bir cerrah herhangi bir Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. ürününü kullanmadan önce her zaman prospektüs, ürün etiketi ve/veya kullanım talimatlarına bakmalıdır. Yerel mevzuat ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle ürünler her zaman benzer kapasitede tüm pazarlarda bulunmayabilir. Maveria ürünleri ile ilgili sorularınız varsa bir Maveria temsilcisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Axiom™ Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.'nin Tescilli Ticari Markasıdır. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş., ürünlerin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, en uygun son teknoloji prosesleri kullanılarak ve güvenliği tasarımına ve üretimine entegre etme ilkesini uygulayarak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, uygun koşul altında ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını ve tamamen ortadan kaldırılamasa da cihazla ilişkili riskleri mümkün olduğu kadar en aza indirmeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde atıfta bulunulanlar da dahil olmak üzere, tasarlanmış olduğu tedavinin kaçınılmaz riskleri ve olası yan etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak yalnızca uzman tıbbi personelin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.

ABD ve yabancı patentler beklemede Yayın
Tarihi Aralık 2020 Telif Hakkı© 2020. Maveria
Tıbbi Cihazlar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

EDG1220-TR-Rev01 Türkiye'de basılmıştır

CE
2803

🏠 Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.

📍 Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi 107/C
Mamak/Ankara-Türkiye

☎ +90 312 341 50 27

📠 +90 312 341 50 26

🌐 www.maveramedical.com.tr