




# EFFACER™

Filtreli Periferik Vasküler Tromboliz Kateteri


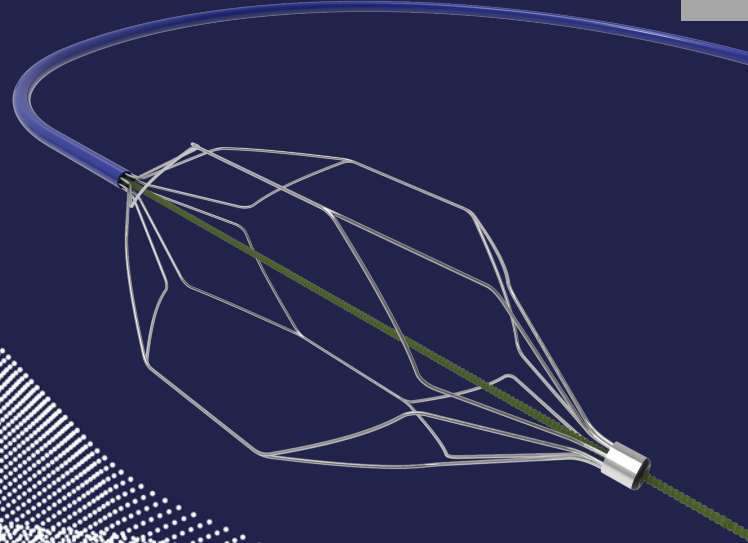


 **AVERA®**  
ENDOVASCULAR



**EFFACER™**  
Filtreli Periferik Vasküler Tromboliz Kateteri


Effacer™ Filtreli Periferik Vasküler Tromboliz Kateteri, bir hastanın periferik damar sistemine çeşitli terapötik solüsyonların infüzyonlarını uygulamak ve yüksek pulmoner emboli veya tekrarlayan pulmoner emboli riski taşıyan kritik hastalarda klinik olarak anlamlı pulmoner embolinin önlenmesi amacıyla kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Effacer™ 18 yaş ve üstü her iki cinsiyetten yetişkine hitap eder. Bu rapor kapsamında çocuk hastalar ve hamile kadınlar için herhangi bir klinik çalışma sunulmamış ve danışılmamıştır. Bu ürünlerin doğrudan pediatrik hastalarda, hamile kadınlarda ve engelli kişilerde kullanılması amaçlanmamıştır.

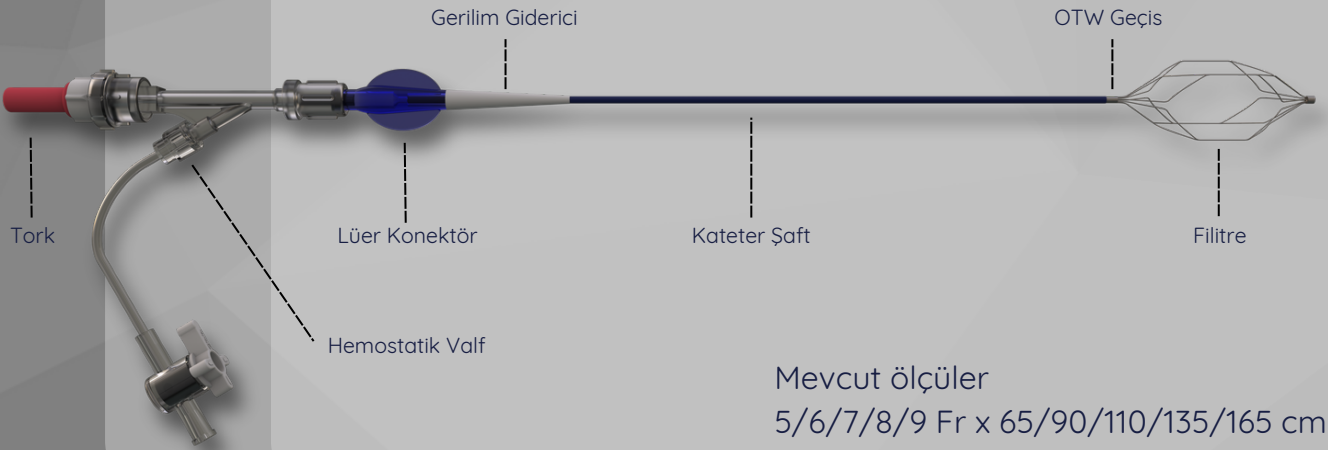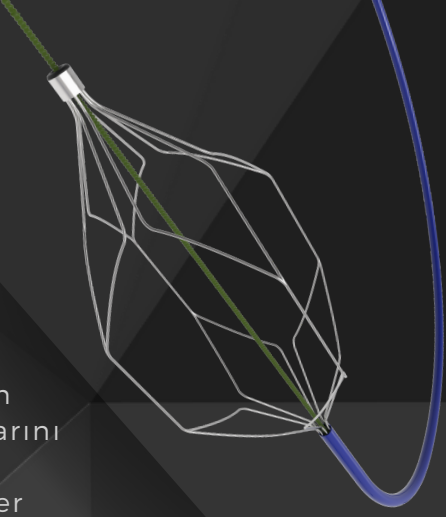

Kateterin distal kısmında küçük delikler vardır. Hastane kaynaklı enjektörün pozitif basıncı ile maddenin homojen dağılımını sağlar. Damar sisteminin proksimalden distaline doğru kan akışının filtrelenmesine yardımcı olan kendi kendine genişleyen bir filtre yapısına sahiptir.

#### Gerilim Giderici

Göbek tertibatının gerilim azaltma kısmı, göbek bileşeninin üst üste binen bir parçasıdır. Maver logo, French boyutu, kateter uzunluğu ve kılavuz tel boyutu açıkça yazdırılır.

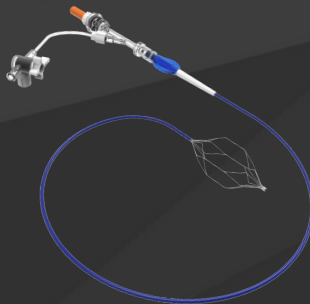


#### Bağlayıcı Luer Göbek

Kateterin proksimal ucu, Luer konikli bir konnektöre sahip kalıplanmış, kanatlı bir göbeğe sahiptir. Göbek ergonomik olarak şekillendirilmiştir, böylece doktor kateteri herhangi bir tüp ve manifolddan manuel olarak takabilir veya çıkarabilir.



**EFFACER™**  
Filtreli Periferik Vasküler Tromboliz Kateteri

**Kateter Ucu:** Kateterin ucu, vasküler anatomilere uyum sağlamak için düz ve kavisli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve prosedürün tüm aşamalarında damar duvarını sınırlandırmak için yuvarlatılmıştır.

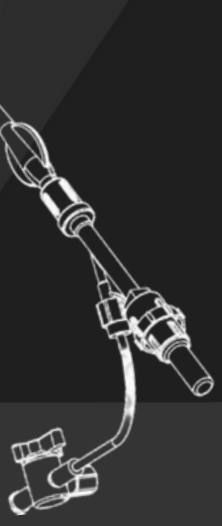


#### Nasıl tedarik edildir

Ürün doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır. Tek kullanımlık, tek hastada kullanılabilir bir üründür. Effacer™ Filtreli Periferik Vasküler Tromboliz Kateteri, bir etilen oksit (EO) işlemi kullanılarak STERİL tedarik edilir.

#### Endikasyonlar

Çeşitli terapötik solüsyonların infüzyonlarını bir hastanın periferik vaskülatürüne uygulamak ve pulmoner emboli veya tekrarlayan pulmoner emboli açısından yüksek risk taşıyan kritik hastalarda klinik olarak anlamlı pulmoner embolinin önlenmesi için kısa süreli kullanımı endikedir.

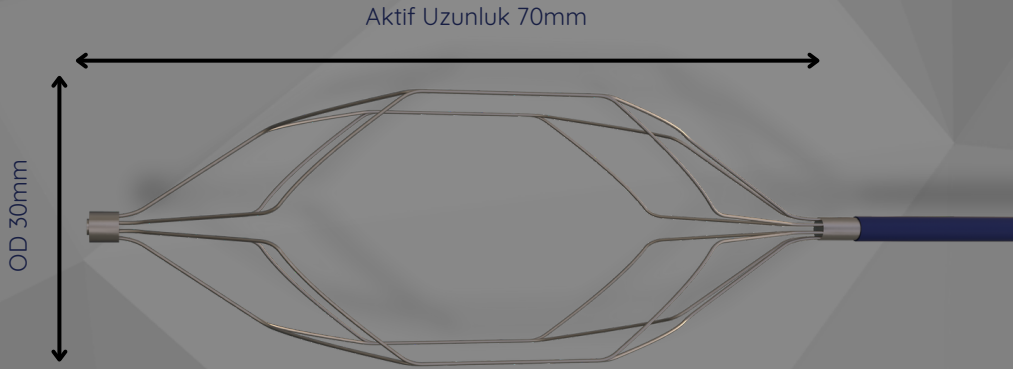

#### Kontrendikasyonlar

Hekimin tıbbi kanaatine göre böyle bir prosedür hastanın durumunu tehlikeye atabileceği zaman bu sistem kontrendikedir.

Hastanın herhangi bir fiziksel bozukluğunun bu cihazın kullanımını kontrendike edip etmeyeceğini belirlemek hekimin sorumluluğundadır.

Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır. Bu sistem kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.

Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve önlemler için tercih edilen terapötik solüsyonun ürün ekine bakın.


Inferior vena kava filtresi gibi vasküler filtresi olmayan hastalarda kontrendikedir.

Kılavuz tel ile lezyona erişilemeyenlerde kontrendikedir.  
Kesme / puanlama balonları, pediatri, neonatal

# MAVERA®

m e d i c a l d e v i c e s

BEYOND FROM WITHIN™

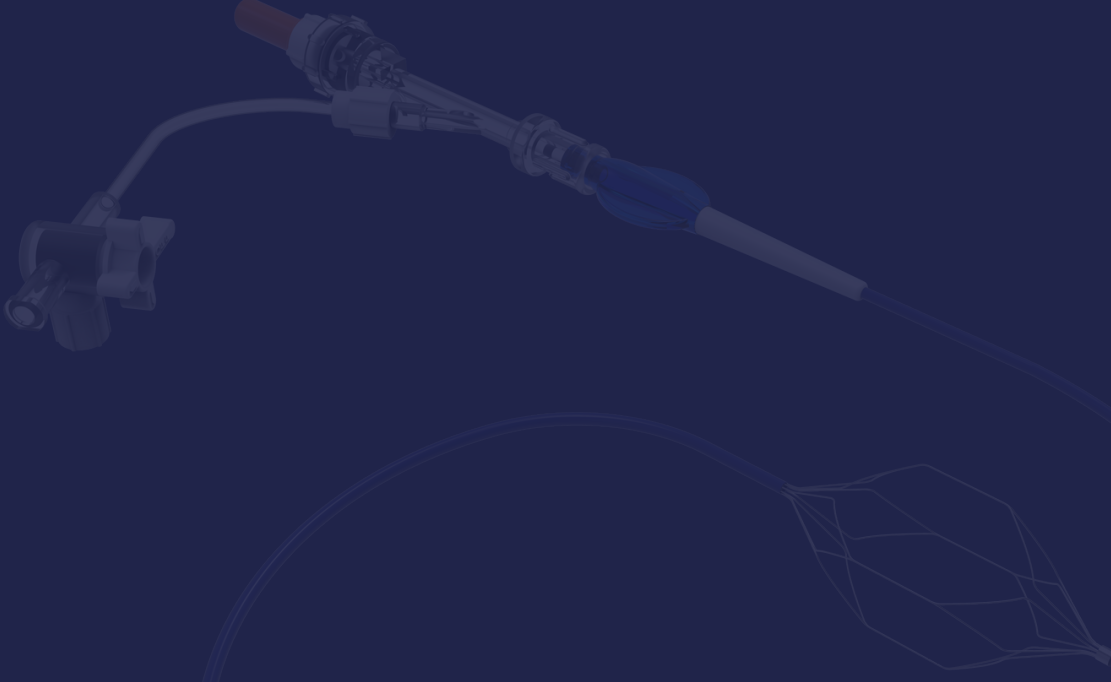

Bir cerrah, belirli bir hastayı tedavi ederken, belirli bir ürünü kullanıp kullanmayacağına karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik muhakemesine güvenmelidir. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. tıbbi tavsiye vermez ve cerrahlara herhangi bir ürünün ameliyatta kullanmadan önce kullanımı konusunda eğitim almalarını tavsiye eder. Bir cerrah herhangi bir Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. ürününü kullanmadan önce her zaman prospektüs, ürün etiketi ve/veya kullanım talimatlarına bakmalıdır. Yerel mevzuat ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle ürünler her zaman benzer kapasitede tüm pazarlarda bulunmayabilir. Maveria ürünleri ile ilgili sorularınız varsa bir Maveria temsilcisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Axiom™ Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.'nin Tescilli Ticari Markasıdır. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş., ürünlerin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, en uygun son teknoloji prosesleri kullanılarak ve güvenliği tasarımına ve üretimine entegre etme ilkesini uygulayarak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, uygun koşul altında ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını ve tamamen ortadan kaldırılamasa da cihazla ilişkili riskleri mümkün olduğu kadar en aza indirmeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde atıfta bulunulanlar da dahil olmak üzere, tasarlanmış olduğu tedavinin kaçınılmaz riskleri ve olası yan etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak yalnızca uzman tıbbi personelin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.

ABD ve yabancı patentler beklemede Yayın  
Tarihi Aralık 2020 Telif Hakkı© 2020. Maveria  
Tıbbi Cihazlar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

EFC1220-TR-Rev01 Türkiye'de basılmıştır

CE  
2803

🏠 Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.

📍 Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi 107/C  
Mamak/Ankara-Türkiye

☎ +90 312 341 50 27

📠 +90 312 341 50 26

📧 [www.maveramedical.com.tr](http://www.maveramedical.com.tr)