

VASPIRATE™


Düz Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri



VASPIRATE™

Düz Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri

Vaspirate™ Düz Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri, periferik vaskülatürlerdeki mekanik aspirasyon ile taze, yumuşak emboli ve trombüsün çıkarılması için tasarlanmıştır. Kateter sistemi, bölgede 20-250 mmhg veya serbest kullanıcı tanımlı basınç seviyelerinde çalışan ve periferik damar sisteminden bol lümen yoluyla trombozun aspire edilmesine yardımcı olan bir aspirasyon ünitesi içeren tek lümenli bir tüptür.

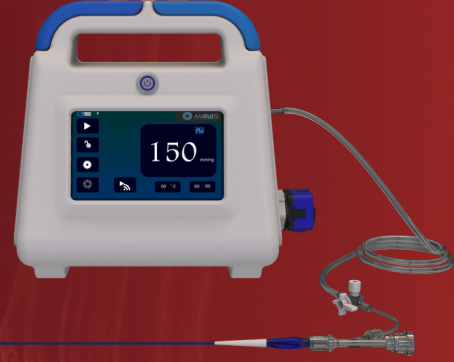

Bağlayıcı Luer Göbek

Kateterin proksimal ucu, Luer konikli bir konnektöre sahip kalıplanmış, kanatlı bir göbeğe sahiptir. Göbek ergonomik olarak şekillendirilmiştir, böylece doktor kateteri herhangi bir tüp ve manifolddan manuel olarak takabilir veya çıkarabilir.

Gerilim Giderici

Göbek tertibatının gerilim azaltma kısmı, göbek bileşeninin üst üste binen bir parçasıdır. Maver logo, French boyutu, kateter uzunluğu ve kılavuz tel boyutu açıkça yazdırılır.



Hemostatik Valf

Vaspirate™ Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri, Y şeklinde hemostatik valf ile birlikte gelir. Bir yan boru ile bağlanan üç yollu bir üst musluk ile donatılmıştır.

Kateter Ucu

Kateterin ucu, vasküler anatomilere uyum sağlamak için düz ve kavisli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve prosedürün tüm aşamalarında damar duvarını sınırlandırmak için yuvarlatılmıştır.

Kateter Şaftı

Kateterin shaftı, sertlik ve torkta önemli değişiklikler olmaksızın prosedürün tüm uzunluğu boyunca kalabilen bükülmeye dirençli, radyoopak bir malzemeden yapılmıştır. Shaftlar şu anda tel örgülü ve telsiz örgülü konfigürasyonlarda sunulmaktadır.

VASPIRATE™

Düz Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri

Pompa ünitesinin özellikleri

Güç girişi	9 VDC
Güç çıkışı	45W(max.)
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi	TYPE BF
Giriş koruması	IP20
Kontrol	On/off düğmesinin şebeke gücü Basınç kontrol Mod
Ölçüler	82x114x38mm
Aspirasyon Gucu	20-250mmhg
Aspirasyon Hacmi	600ml

Endikasyonlar

Arteriyel sistemdeki damarlardan taze, yumuşak emboli ve trombi uzaklaştırmak için kullanıldığı endikedir.

Kontrendikasyonlar


- Hekimin tıbbi kanaatine göre böyle bir prosedür hastanın durumunu tehlikeye atabileceği zaman bu sistem kontrendikedir.
- Hastanın herhangi bir fiziksel bozukluğunun bu cihazın kullanımını kontrendike edip etmeyeceğini belirlemek hekimin sorumluluğundadır.
- Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır.
- Bu sistem kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.
- İnferior vena kava filtresi gibi vasküler filtresi olmayan hastalarda kontrendikedir.
- Kılavuz tel ile lezyona erişilemeyenlerde kontrendikedir.

Kesme / puanlama balonları, pediatri, neonatal ve nörovasküler hastalarda kullanım için kontrendikedir.

MAVERA®

m e d i c a l d e v i c e s

BEYOND FROM WITHIN™

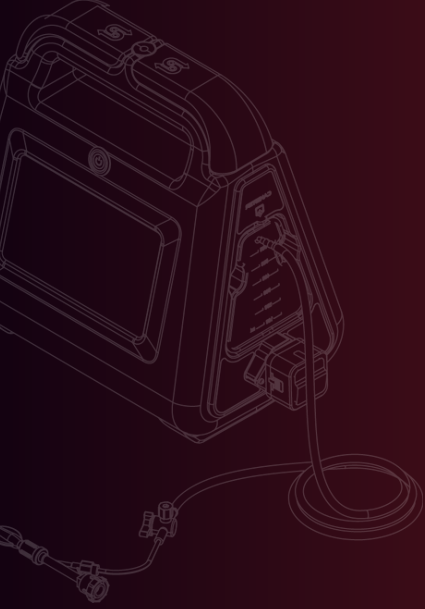

VASPIRATE™
Düz Periferik Vasküler Aspirasyon Kateteri

Bir cerrah, belirli bir hastayı tedavi ederken, belirli bir ürünü kullanıp kullanmayacağına karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik muhakemesine güvenmelidir. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. tıbbi tavsiye vermez ve cerrahlara herhangi bir ürünün ameliyatta kullanmadan önce kullanımı konusunda eğitim almalarını tavsiye eder. Bir cerrah herhangi bir Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. ürününü kullanmadan önce her zaman prospektüs, ürün etiketi ve/veya kullanım talimatlarına bakmalıdır. Yerel mevzuat ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle ürünler her zaman benzer kapasitede tüm pazarlarda bulunmayabilir. Maveria ürünleri ile ilgili sorularınız varsa bir Maveria temsilcisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Axiom™ Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.'nin Tescilli Ticari Markasıdır. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş., ürünlerin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, en uygun son teknoloji prosesleri kullanılarak ve güvenliği tasarımına ve üretimine entegre etme ilkesini uygulayarak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, uygun koşul altında ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını ve tamamen ortadan kaldırılamasa da cihazla ilişkili riskleri mümkün olduğu kadar en aza indirmeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde atıfta bulunulanlar da dahil olmak üzere, tasarlanmış olduğu tedavinin kaçınılmaz riskleri ve olası yan etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak yalnızca uzman tıbbi personelin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.

ABD ve yabancı patentler beklemede Yayın
Tarihi Aralık 2020 Telif Hakkı© 2020. Maveria
Tıbbi Cihazlar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

VSP1220-TR-Rev01 Türkiye'de basılmıştır

CE
2803

 Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.

 Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi 107/C
Mamak/Ankara-Türkiye

 +90 312 341 50 27

 +90 312 341 50 26

 www.maveramedical.com.tr