



ROOTT

ROOTT **S**

## PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DELL'IMPIANTO ROOTT S: dall'apertura della confezione all'inserimento dell'impianto

1 Prendi la confezione



2 Apri la scatola: spingi e tira per aprire



3 Estrai il blister



4 Apri il blister con attenzione



5 Estrai l'impianto, tenendo solo la parte verde




6 Tenendo il supporto verde, inserisci l' impianto all' interno del foro preparato in senso orario



Il supporto verde, progettato in due parti, non è concepito per essere utilizzato come driver per impianto

7 Rimuovere il supporto verde, muovendolo lentamente da un lato e dall' altro e, sollevare

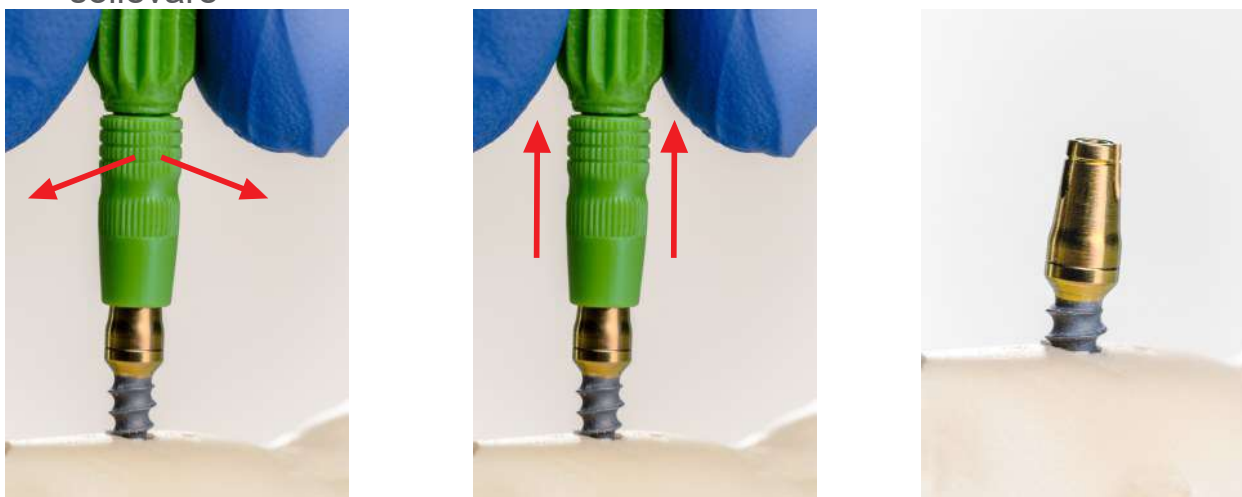

- 8 Inserisci gli impianti con driver implantari : ITES/ITE/ITEL/ITEXL per cricchetto, TW50 con torque fino a 50 Ncm



Oppure driver da impianto ITEH/ITEHL per manipolo, utilizzando il contrangolo



Oppure driver per impianto ITEAO per connessione AO, utilizzando il manico ETAO



L' inserimento dell'impianto tramite il supporto CREM : non superare mai i 93 Ncm

- 9 Rimuovi il supporto CREM.  
Svitare la vite SCREM con un cacciavite U ed estrarre il CREM.  
Utilizzare SD/SDL/SDXL per cricchetto TW50



Oppure cacciavite SDH/  
SDHL/SDHXL per manipolo,  
utilizzando il contrangolo



Oppure cacciavite SDAO  
per connessione AO,  
utilizzando il manico ETAO



Rimuovi la vite e il supporto dell'impianto



- 10 Inserisci l'impianto tramite carico immediato con driver per impianto **S**  
Utilizza il driver per impianto ITMS/ITMSL/ITMSXL per cricchetto TW50  
con torque fino a 50 Ncm.



L'inserimento dell'impianto  
tramite carico immediato non  
deve mai superare i 133 Ncm

- 11 Inserimento dell' impianto in posizione crestale

