


If you see a **WHITE screen** with the code like the picture at the bottom, it means that there is **not enough breath force when testing**.

Si ve una **pantalla BLANCA** con un código como el de la imagen de abajo, significa que **no hay suficiente fuerza de respiración al realizar la prueba**.

Please close the application completely and retry the same session. Blow with a medium steady breath for about 6-7 seconds until you feel the click inside the **breathalyzer**.

Cierre la aplicación por completo y vuelva a intentar la misma sesión. Sople con una respiración moderada y constante durante unos 6-7 segundos hasta que sienta el clic dentro del alcoholímetro.

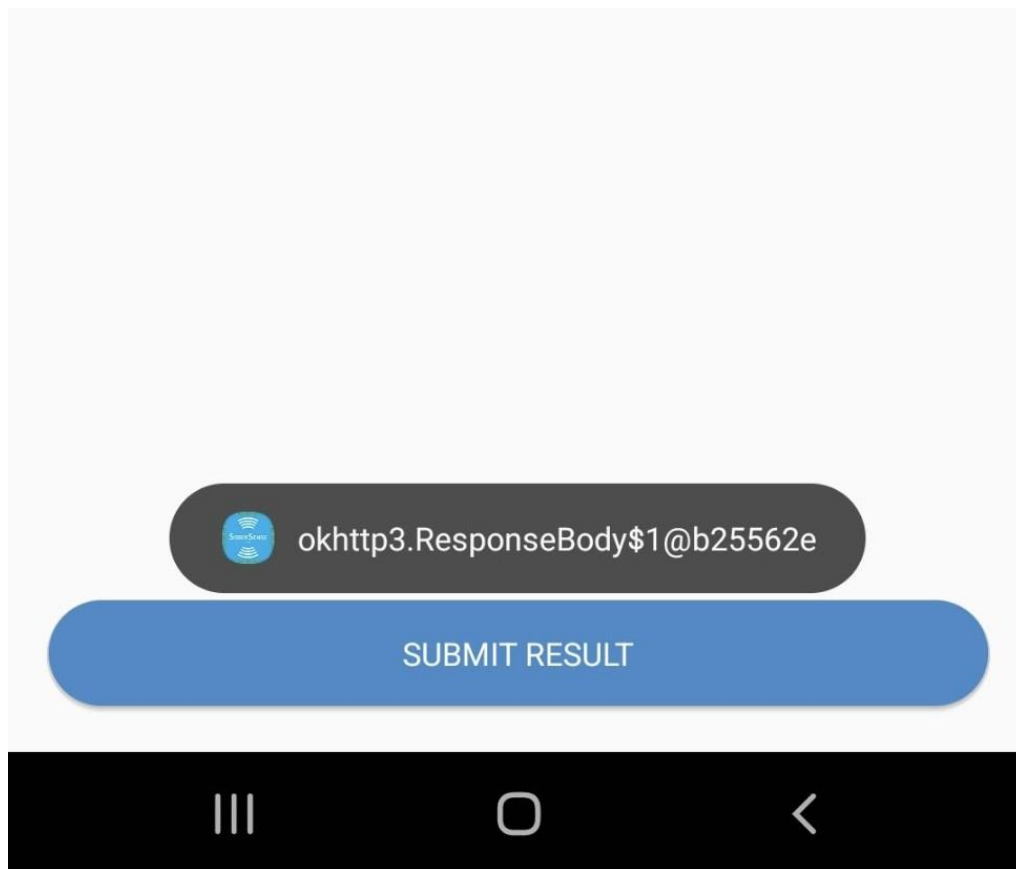

If you see a BLUE screen that is staying on Analyzing..., this means that we are blowing too hard.


Si ves una pantalla AZUL que permanece en Analizando..., significa que estamos soplando demasiado fuerte.

Please close the application and blow with lighter force than the previous test.

Cierre la aplicación y sople con menos fuerza que en la prueba anterior.

You will need to blow with a medium steady breath for about 6-7 seconds until you feel the click inside the breathalyzer.

Necesitarás soplar con una respiración moderada y constante durante aproximadamente 6-7 segundos hasta que sientas el clic dentro del alcoholímetro.

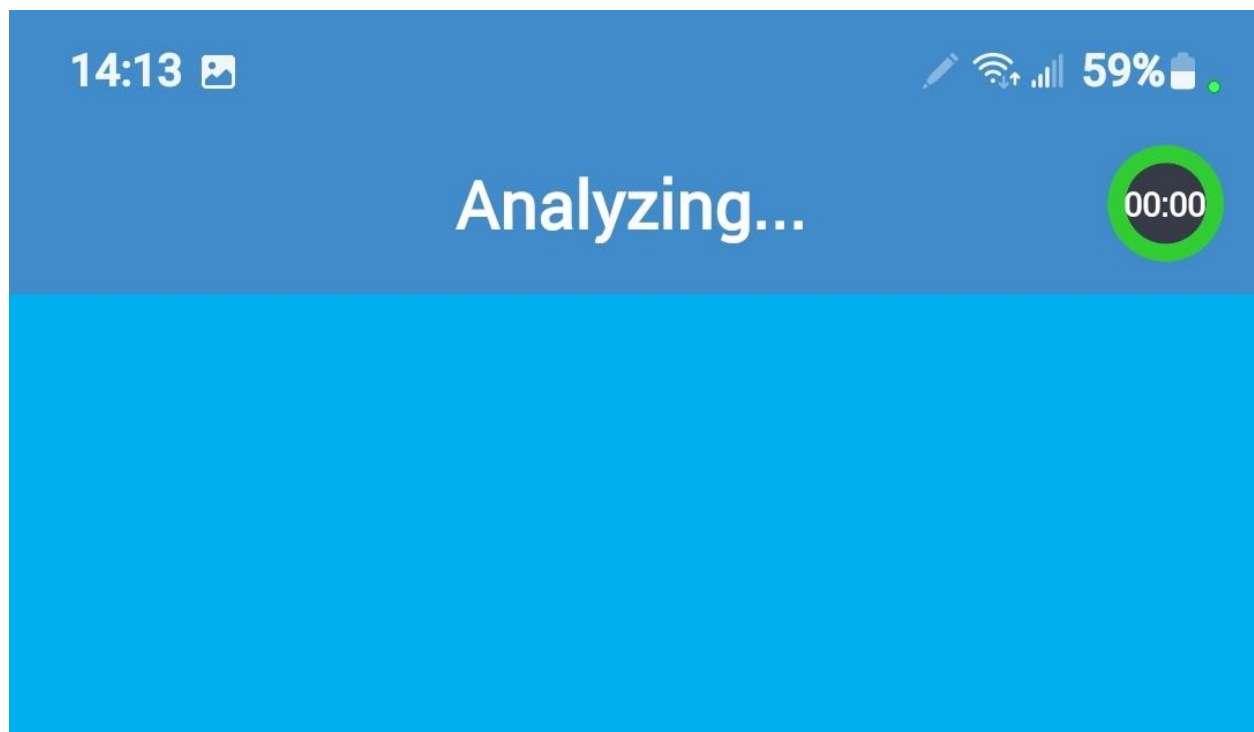

If you see that the screen is staying on “Preparing Device”, this means that the device does not have enough charge to take a test.

Si ves que la pantalla permanece en “Preparando dispositivo”, esto significa que el dispositivo no tiene suficiente carga para realizar una prueba.

You will need to charge the device overnight every 3-4 days.

Necesitará cargar el dispositivo durante la noche cada 3 o 4 días.

You can test while the device is on the charger, just please make sure that the device is on before plugging it in to the charger.

Puede probar mientras el dispositivo esté en el cargador, solo asegúrese de que el dispositivo esté encendido antes de enchufarlo al cargador.

