



# Cómo probar paso a paso con Android

## 1. Abra la aplicación SoberSense

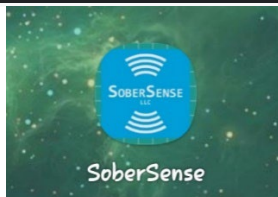

## 2. Ingrese las credenciales de inicio de sesión

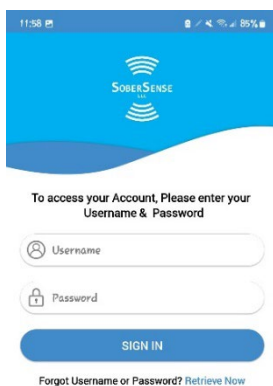


Nombre de usuario: nombreapellido

Contraseña: sober


*Todo en minúsculas sin espacios*

3. Encienda el dispositivo manteniendo presionado el botón gris durante unos 3 segundos. No necesitará volver a tocar el botón hasta que se haya enviado su sesión. Mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para apagarlo.


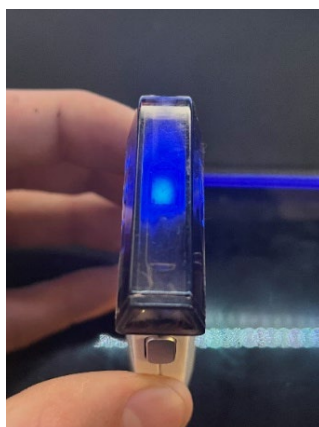


# Cómo probar paso a paso con Android

**4. Ahora puede seleccionar su sesión. Para ello, toque la sesión verde.**

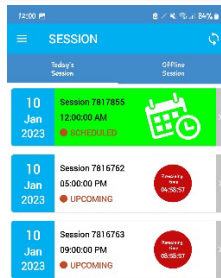

**5. En este punto, el alcoholímetro comenzará a conectarse automáticamente. NUNCA tendrás que poner un pin para conectarte al dispositivo. Haga clic en "TOMAR PRUEBA" en la parte superior derecha de la pantalla para continuar.**

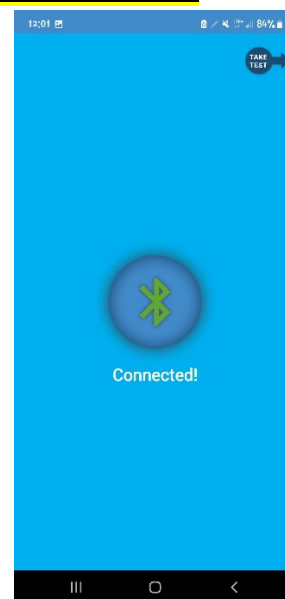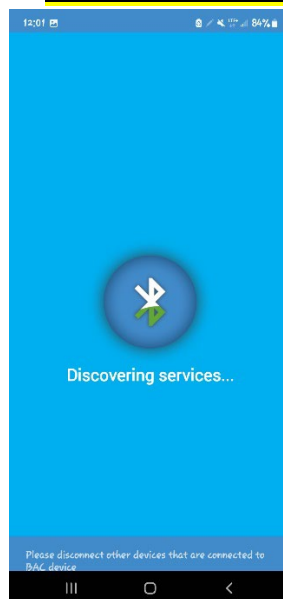

**6. "Preparación del dispositivo", "Respira profundo", "Soplar ahora"**

# Cómo probar paso a paso con Android

7. Sopla constantemente durante unos 6 segundos hasta que sienta un clic dentro del alcoholímetro.

8. Una vez completado, verá un botón de envío de resultados. Toca eso para enviarlo.



9. Toque las flechas de actualización de la parte superior derecha para confirmar que la sesión ha desaparecido.

